



Den tillid, som dine
patienter har brug for.

3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindinger
Den superabsorberende forbindelse, du kan regne med.

3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindinger forbedrer både plejen og patienternes oplevelse.



Kroniske, stærkt væskende sår er vanskelige for både kliniker og patient. Overskydende væske kan gøre det vanskeligt at opnå en optimal fugtbalance og kan føre til maceration.

Stærkt væskende sår har også en negativ indvirkning på patientens livskvalitet. Patienter med kroniske, stærkt væskende sår, f.eks. bensår, oplever ofte negative følelser såsom skam, forlegenhed og ensomhed.¹

Kerramax Care forbindelse: Pålidelig hjælp til klinikere med at håndtere de tre vigtigste udfordringer i forbindelse med stærkt væskende sår.

Udfordring 1

Forbedret pleje gennem effektiv håndtering af ekssudat.

Udfordring 2

Reducerede uplanlagte forbindelsesskift.

Udfordring 3

Forbedret patientoplevelse.



3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindinger

3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindinger med Exu-Safe™-teknologi kan gøre det lettere for både klinikere og patienter at overvinde udfordringer, der er forbundet med stærkt væskende sår.²⁻⁴

1. Blødt, ikke-vævet materiale

Findes på begge sider af forbindingen, så begge sider kan placeres på såret, mens det er behageligt for patienten, hvilket bidrager til at understøtte komplians.^{2,3}

2. Vandret opslugningslag


Opsuger serøst og viskøst ekssudat, fordeler det ligeligt, både vandret og lodret, over hele forbindingen, så hele den absorberende kapacitet udnyttes, og der undgås ophobning.²⁻⁴

4. Varmeforseglet kant,

til at forebygge lækage fra forbindingen og bevare forbindingen stærk og intakt.⁴

3. Superabsorberende kerne med Exu-Safe™-teknologi

Absorberer og fastholder et højt niveau af ekssudat og derved reducerer risikoen for hudmaceration.²⁻⁴

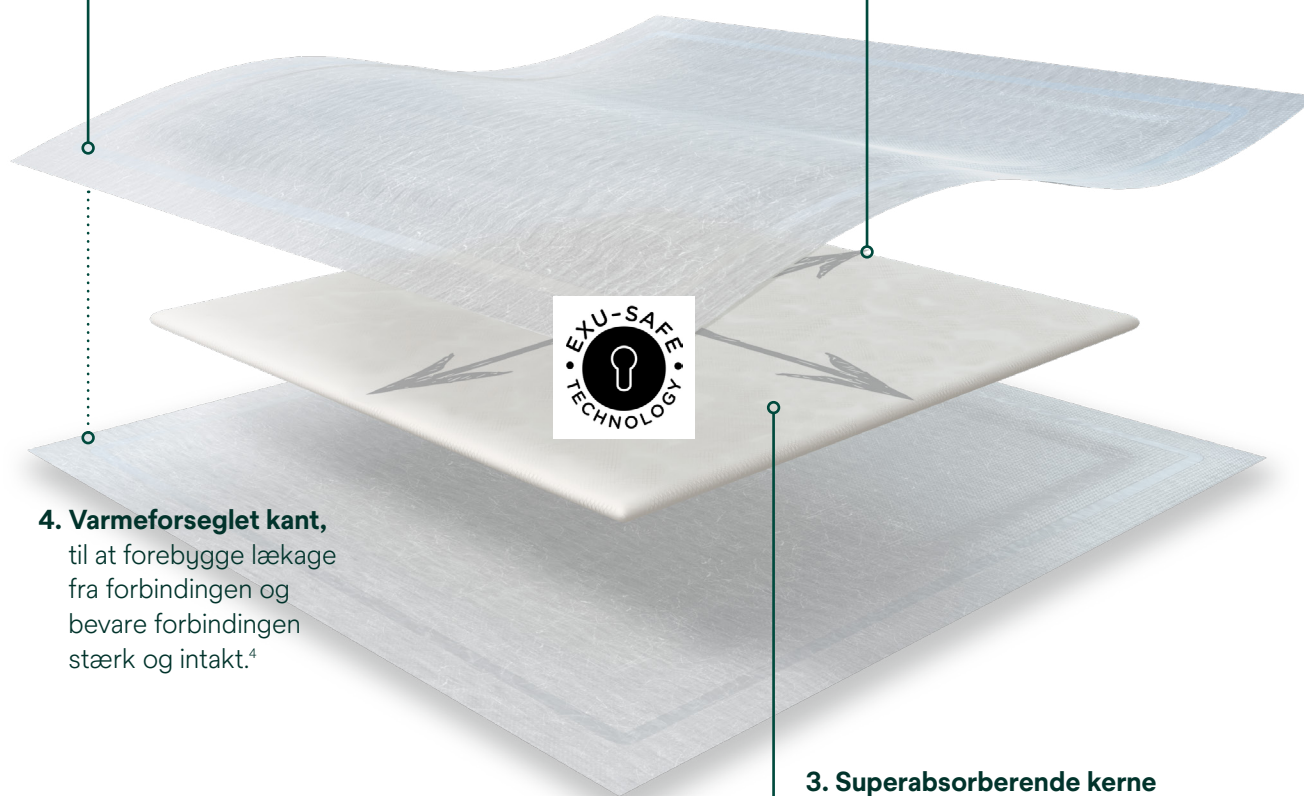


Udfordring

1

Forbedret pleje gennem effektiv håndtering af ekssudat

3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindelse absorberer og holder høje niveauer af serøs og viskøs væske væk fra huden i sårområdet og sårbunden, hvilket bidrager til, at reducere hudmaceration, selv under kompression.²⁻⁴

Hvordan virker det?

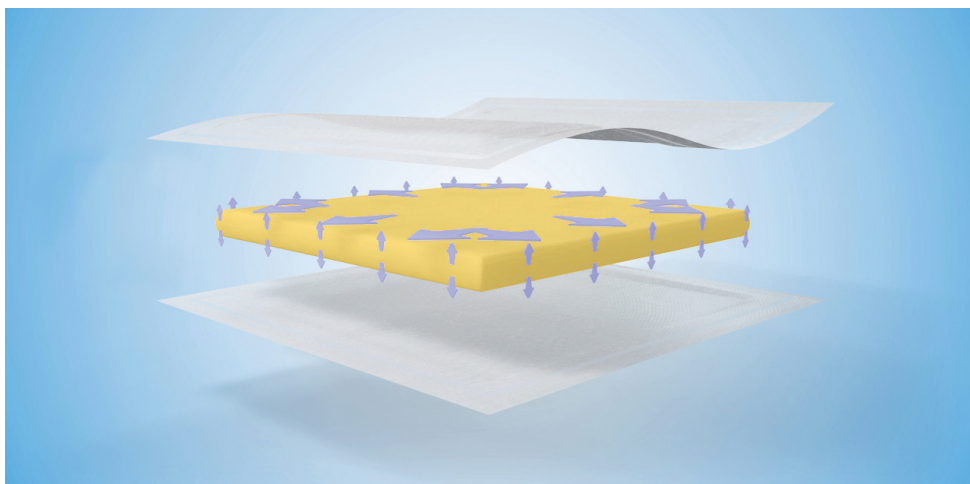

Det vandrette opslugningslag sikrer, at ekssudatet absorberes jævnt i hele forbindingen, hvilket reducerer risikoen for gelblokering,^{3,4} hvilket kan føre til lækager.

Høj væskeabsorption kan medføre færre bandageskift og minimere sårbundsforstyrrelser.^{2,3}

Bevist effektiv ekssudathåndtering.

En klinisk evalueringsundersøgelse med 101 patienter med stærkt væskende sår af forskellig ætiologi viste, at for:²



71%

af patienterne vurderede sygeplejersker **ekssudatbehandlingen** med Kerramax Care forbindelse til mellem 8 og 10 på en 10-punkts skala sammenlignet med deres tidligere forbindingsvalg.



78%


af patienterne forbedredes den **omgivende huds tilstand** under behandlingen, og der **blev observeret mindre maceration**.

Kun til illustrative formål; ikke beregnet til at formidle undersøgt patientpopulation.



Vidste du, at ...

fordi Kerramax Care forbindingen fastholder ekssudat, selv under kompression, hjælper det til at beskytte sart sår væv, sårkanter og huden omkring.²⁻⁴ Takket være Exu-Safe™-teknologien i forbindingens kerne, hjælper forbindingen også effektivt med at tilbageholde bakterier og matrixmetalloproteinaser (MMP'er), der er til stede i sår væsken, og binder disse potentielle trusler til bandagens kerne.^{5*}

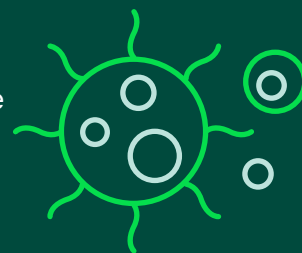


*Som demonstreret *in vitro*. Den kliniske relevans er ikke blevet undersøgt.

Udfordring

2

Reducerede uplanlagte forbindelsesskift


Mens et optimalt forbindingsvalg er vigtigt for at opnå god helingsprogression, er det også vigtigt at minimere hyppigheden af forbindelsesskift for at muliggøre uforstyrret heling.

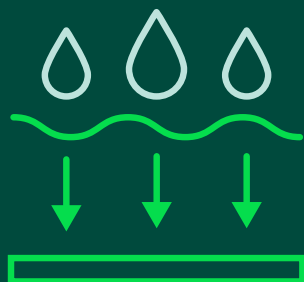

Den høje absorption og fastholdelse i 3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindinger kan muliggøre færre forbindelsesskift og minimere forstyrrelse af sårbunden.^{2,3}


Sundhedspersonalets erfaring med Kerramax Care forbindinger.

Baseret på en evaluering af 101 patienter, med kraftigt væskende sår af varierende ætiologier, blev egnetheden af Kerramax Care forbindingen undersøgt.²

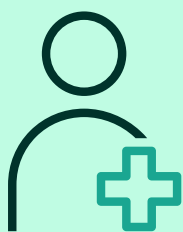

63% Forventninger mødt

31% Forventninger oversteget

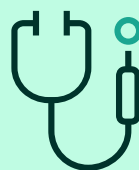

90%

Glade for at fortsætte med at bruge Kerramax forbindinger som deres første valg²

Hvor meget væske kan Kerramax Care forbindinger absorbere?*



*Arkiv data: Lodhi, N & Warde, D. Free-swell absorbency testing, CHC R839, 2019

Forbedret patientoplevelse

En positiv patientoplevelse kan føre til reduceret stress og ængstelse ved håndtering af kroniske sår, hvilket kan reducere smerte og forbedre patientens overholdelse af behandlingen.¹ 3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindinger er designet til patientkomfort.

Forbedret patientoplevelse fører til højere compliance

I en aktuel patientundersøgelse, der omhandlede håndtering af stærkt væskende sår i hjemmeplejen, blev patientens oplevelse af komforten med Kerramax Care forbindinger evalueret. I alt blev 101 patientevalueringer gennemført med udgangspunkt i en bred vifte af sårætiologier.²

70% 
af patienterne

bedømte forbindingen til mellem 8-10 og **fremhævede højt komfortniveau og positiv patientoplevelse.**²



Kerramax Care Superabsorberende forbindelse er et fremragende valg til brug ved kompressionsterapi.


Den lave profil på Kerramax Care forbindelse og dens evne til at absorbere og fastholde ekssudat selv under kompression^{4,6}, gør den til et godt valg til at hjælpe klinikere og patienter med at behandle venøse bensår.²⁻⁴

Wounds International har for nylig offentliggjort 8 casestudier, der evaluerer den kliniske ydeevne af Kerramax Care forbindelse og 3M™ Coban™ 2 To-lags kompressionssystem. Resultater viser, at patienter med venøse bensår, der blev behandlet i forskellige behandlingssammenhænge, var tilfredse med den kombinerede behandling. Det blev rapporteret, at Kerramax Care forbindelse forblev på plads under anvendelsestiden under kompression, fastholdt ekssudat, og der blev ikke observeret gennemsivning eller lækage.⁴


3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindelse - foldeteknik

Kerramax Care forbindinger er meget formbare og kan foldes, så de passer til en række forskellige sår.

Ind imellem fingre og tæer

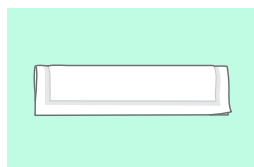


1 Fold 10 cm x 22 cm forbindelse halvt på langs.

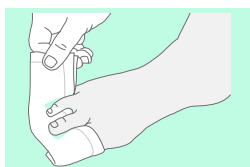


2 Væv forbindingen mellem tæer eller fingre.


Hæl og albue

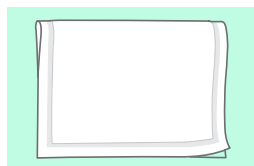


1 Fold 10 cm x 22 cm forbindelse i halv.

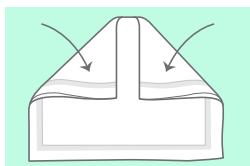

2 Fold hvert hjørne indad.

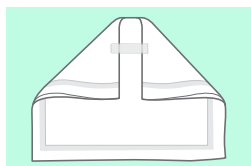

3 Placer tape for at holde de foldede hjørner på plads.

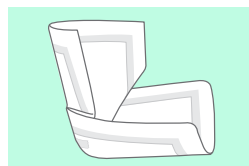


4 Åbn den foldede forbindelse.



5 Placer på hæl eller albue.

Ben og arm

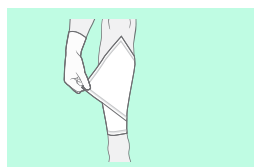

1 Placer 20 cm x 50 cm forbindelse på ben eller arm.



2 Vikl forbindingen rundt om benet eller armen.



3 Overlap forbindingen for at sikre, at der ikke er mellemrum.




4 Fastgør forbindingen med tape eller kompressionsbandage.



Vidste du, at ...

Kerramax Care forbindelse også fås med klæbende kant? Hvis du har brug for en klæbende superabsorberende forbindelse, bør du overveje 3M™ Kerramax Care™ med border (kant med akrylklæber).

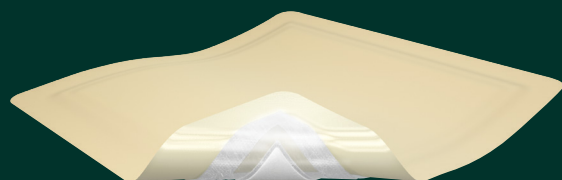

Oversigt over 3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindinger.



Absorberer og fastholder store mængder ekssudat.^{2,3}



Tynd profil, blød, meget formbar og kan foldes.⁶



Hjælper med at binde bakterier og MMP'er til forbindingens kerne.^{5*}



Begge sider af forbindingen kan påføres såret.



Kan bruges med alle former for kompression.⁴



Kan blive siddende i syv dage.

*Som demonstreret *in vitro*. Den kliniske relevans er ikke blevet undersøgt.

Bestillingsoplysninger

3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindelse

Varenummer	Størrelse	Forbindinger pr. æske
PRD500-025	5 cm x 5 cm	10
PRD500-050	10 cm x 10 cm	10
PRD500-100	13,5 cm x 15,5 cm	10
PRD500-120	10 cm x 22 cm	10
PRD500-240	20 cm x 22 cm	10
PRD500-380-B10	20 cm x 30 cm	10
PRD500-600-B10	20 cm x 50 cm	10

3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindelse med kant (kant med akrylklæber)

Varenummer	Størrelse	Forbindinger pr. æske
CWL1000	16 cm x 16 cm	5
CWL1001	16 cm x 26 cm	5
CWL1002	26 cm x 26 cm	5

Kontakt din lokale Solventum repræsentant for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Der kan forekomme specifikke indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og sikkerhedsoplysninger for disse produkter og behandlinger. Konsulter med en kliniker, og gennemgå produktets brugsanvisning inden anvendelse.

Referencer:

1. Platsidaki E, Kouris A, Christodoulou C. Psychosocial Aspects in Patients With Chronic Leg Ulcers. October 2017. ISSN 1044-7946. Index Wounds 2017;29(10):306–310.
2. Hughes M A, Jones J. A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community. Wounds UK. 2017; 13 (3): 78 – 85.
3. Jones J, Barraud J. An evaluation of Kerramax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds. Br J Community Nurs. 2014 Mar; Suppl: S8, S50-53.
4. Hughes, M A, et al. 3M™ Kerramax Care™ Super Absorbent Dressing and 3M™ Coban™ 2 Two-Layer Compression System case series supplement. Wounds International (2022), London, UK.
5. Singh G, Byrne C, Thomason H, McBain A. Investigating the microbial and metalloprotease sequestration properties of superabsorbent wound dressings. Sci Rep. 2022; 12 (1): 4747.
6. Jackson S, Lovett J, Stephenson C. An assessment of the conformability of superabsorbent dressings. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference 2016, UK.