



Tips & tricks til 3M™ Coban™ 2 kompressionssystemer

| | | |
|--|--|---|
| <p>Muligt at anvende 3M™ Cavilon™ Langtidsvirkende barrierecreme under komfortlaget. Skift handsker efter påførelse af creme, da cremen kan reducere bandagens klæbeevne</p>  | <p>Anlæg komfortlag med minimal overlap og uden stræk. Start ved lilletåens grundled</p>  | <p>Klip og/eller fold komfortlaget ved behov</p>  |
| <p>Lad hælmrådet, man træder ned på, være fri for komfortlag</p>  | <p>Klip en lap af komfortlaget og placér på område, der har brug for ekstra beskyttelse</p>  | <p>Fuld stræk over hele kompressionsrullens bredde</p>  |
| <p>Hold kompressionsrullen tæt på benet, "mal" kompressionen på!</p>  | <p>Form bandagen med tryk og varme – to lag bliver til ÆT</p>  | <p>Klip og forstærk evt. sålen med et ekstra stykke kompressionslag</p>  |
| <p>Afslut med sprit for at nedsætte friktion, eller evt. tubegaze, nylonstrømpe</p>  | <p>Brug evt. creme ved fjernelse af bandage og anvend gerne en gipse/listsaks. Ved fjernelse - klip i zig zag</p>  | <p>Appliceringsvejledninger på 3M hjemmeside: https://go.solventum.com/Coban2DK</p>  |