

Drei Schritte für das Anlegen



Schritt 1

Haut reinigen

Die Applikationsstellen müssen sauber, trocken und frei von Körperlotion sein. Elektrodenstellen sind mit Wasser und Seife zu reinigen. Die Reinigung mit Isopropylalkohol ist zu vermeiden oder auf Situationen zu beschränken, in denen die Elektrodenhaftung problematisch ist (übermäßig fettige oder mit Lotion bedeckte Haut). Falls Alkohol verwendet wird, lassen Sie ihn vor dem Hautabrieb trocknen.

Schritt 2

Vorbereitung der Haut

Übermäßige Haare an der Applikationsstelle durch Schneiden entfernen. Die Haut anrauen, indem mit dem Abrasionspad ein „X“ auf die Haut gerieben wird. Das Abrasionspad an der Rückseite der Elektrode (blauer Streifen oder Scheibe) oder 3M™ Red Dot™ Trace Prep™ verwenden.



Schritt 3

Die Elektrode anlegen

Nicht auf den Stift drücken, wenn eine Elektrode am Patienten angelegt ist. Um dies zu umgehen, die Druckknopf-Ableitung an der Elektrode anbringen, bevor die Elektrode am Patienten angelegt wird. Mit dem Finger fest entlang des vorderen Etiketts reiben, um den druckempfindlichen Klebstoff zu aktivieren und die Haftung der Elektrode zu verbessern.





Ein Schritt zum Entfernen



Schritt 1

Entfernen

Zum Entfernen eine Seite der Elektrode lösen. Die Elektrode in voller Breite ergreifen und langsam und vorsichtig über sich selbst zurückziehen.

Die Elektroden sollten nach Möglichkeit in Haarwuchsrichtung entfernt werden. Die Elektrode nahe an der Hautoberfläche lassen, während sie zurückgezogen wird, und die Haut unmittelbar neben dem entfernten Klebeband mit einem Finger unterstützen.

Wichtiger Hinweis

Die vollständigen Anweisungen, einschließlich Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und anderen wichtigen Informationen zur Verwendung von 3M Red Dot Elektroden sind der Gebrauchsanweisung für das Produkt zu entnehmen. Diese Anleitung zum Anlegen und Entfernen von Elektroden ist nur als Kurzreferenz gedacht.

Um mehr über 3M Red Dot Elektroden zu erfahren, rufen Sie die 3M Helpline unter **+49 (0) 32221099001** und **+49 (0) 32221099000** an, oder besuchen Sie **3M.co.uk/RedDot**