


Applikation am stark konturierten Unterschenkel – individuelle Schnitttechnik

Materialien und Positionierung


- Viele Patienten haben ausgeprägte Beinkonturen. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften der Coban 2 Zweilagiges Kompressionssysteme kann die Applikationstechnik leicht angepasst werden, um eine anschmiegsame, effektive und anhaltende Kompression zu gewährleisten
- Wählen Sie die 10 cm breite Komfort- und Kompressionslage für Patienten mit einem ABPI $\geq 0,8$. Für Patienten, die eine Kompression weniger gut vertragen oder eine gemischte Ätiologie mit einem ABPI $\geq 0,5$ haben, wird das Coban 2 Lite Zweilagiges Kompressionssystem empfohlen

Applikation der Komfortlage


- Applizieren Sie diese Lage mit der Schaumstoffseite auf die Haut und dehnen Sie diese leicht, um sie der Form des Beins mit **minimaler Überlappung** anzupassen
- Bedecken Sie die Haut mit einer möglichst dünnen, lückenlosen Schicht
- Wenn Hautfalten vorhanden sind, verwenden Sie kleine Stücke der Komfortlage, die so gefaltet sind, dass die Schaumstoffseite nach außen zeigt, um die Hautfalten voneinander zu trennen

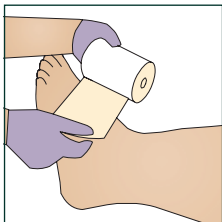


Schritt 1: Die Applikation erfolgt in einer 90° Dorsalflexion des Fußes. Beginnen Sie mit einer zirkulären Tour am Köpfchen des fünften Mittelfußknochens. Dies sorgt für eine neutrale, bequeme Fußausrichtung.

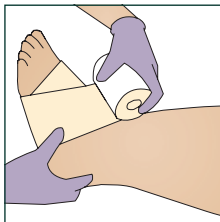


Schritt 2: Führen Sie die zweite Tour über den Fußrücken zur Ferse, so dass die Hälfte der Binde das Fußgelenk bedeckt.

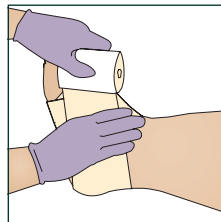


Schritt 3: Legen Sie die Komfortlage um die Rückseite der Ferse und führen Sie diese zum Fußrücken, so dass die Komfortlage überlappt.

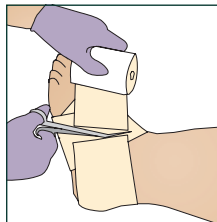

Schritt 4: Schneiden Sie die Komfortlage ab und drücken Sie sie vorsichtig an. Die hintere Plantarfläche des Fußes ist nicht vollständig bedeckt.

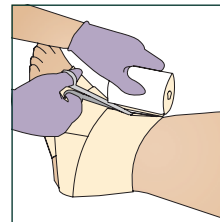


Schritt 5: Führen Sie die nächste Bindetour mit **minimaler Überlappung** so, dass sie glatt an den Konturen anliegt und schneiden Sie sie ab, wenn sie die Komfortlage überlappt.

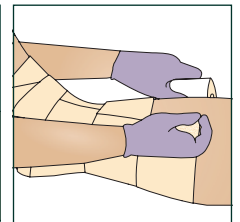


Schritt 6: Wiederholen Sie diese Technik entlang des Beines. Beenden Sie die Applikation knapp unterhalb des Fibulaköpfchens bzw. der Kniekehle. Schneiden Sie überschüssiges Material ab. Drücken Sie die Komfortlage am Abschluss an, damit die Komfortlage beim Anlegen der Kompressionslage nicht verrutscht.

Applikation der Kompressionslage


- Applizieren Sie Kompressionslage mit **100 % Dehnung** und **50 % Überlappung**
- Für eine kontrollierte, gleichmäßige Kompression wird empfohlen, die Rolle während der gesamten Applikation nahe an Fuß und Gliedmaße zu halten
- Wenn nach der Applikation „Ausstülpungen“ festgestellt werden, tragen Sie eine zusätzliche Kompressionsschicht auf, bis die Gliedmaße glatt erscheint

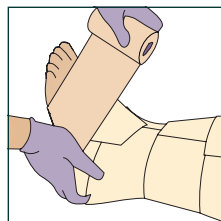


Schritt 1: Die Applikation erfolgt in einer 90° Dorsalflexion des Fußes. Beginnen Sie mit einer zirkulären Tour am Köpfchen des fünften Mittelfußknochens.

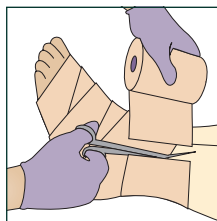

Schritt 2: Führen Sie die Kompressionslage mit 2-3 Achtertouren über den oberen und unteren Anteil des Fußes, sodass der Knöchel und die gesamte Ferse mit mindestens zwei Lagen bedeckt ist. Schneiden Sie die Kompressionslage ab und drücken Sie sie vorsichtig fest. Behalten Sie während des gesamten Vorgangs eine 100%ige Dehnung bei.

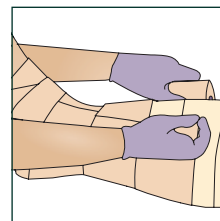


Schritt 3: Um eine gute Passform und eine gleichmäßige Abdeckung sowie Kompression zu gewährleisten, schneiden Sie einzelne Kompressionslagen ab und legen diese mit **50%iger Überlappung** entlang des Beines. Achten Sie darauf, dass Sie jede Lage überlappend andrücken und anpassen.

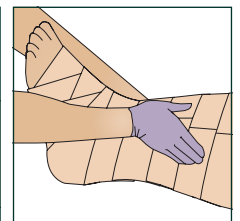

Schritt 4: Beenden Sie die Applikation knapp unterhalb des Fibulaköpfchens bzw. der Kniekehle und bündig mit der Oberkante der Komfortlage. Schneiden Sie überschüssiges Material ab. Drücken Sie die Kompressionslage gut an. Dadurch wird eine feste und sichere Verbindung des gesamten Verbandes gewährleistet.

Entfernung des Verbandes

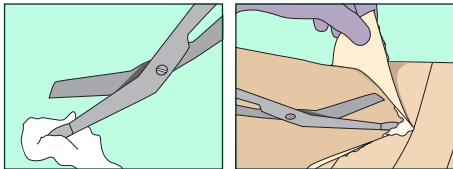

Benetzen Sie die Verbandschere mit einer Feuchtigkeitscreme, damit die Schere beim Entfernen unter dem Verband gleitet und ein einfaches, bequemes Entfernen ermöglicht. Schneiden Sie den Verband am Bein in Haarwuchsrichtung ab.

Hinweis

Vollständige Informationen zur Verwendung der 3M™ Coban™ 2 Zweilagigen Kompressionssysteme finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

3M™ Coban™ 2 Zweilagigen Kompressionssystem

Für venöse Ulcera ABPI $\geq 0,8$

Art.-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN	PZN	Pharmacode	MiGeL
2094	1 Kit mit: 1 Rolle Komfortlage 10 cm x 2,7 m, 1 Rolle Kompressionslage 10 cm x 3,5 m	1	01529955	4406911	3481388	17.30.01.03.1

Alternative

20014	10 cm x 3,5 m (Komfortlage)	18	07418470	*	4999319	17.30.01.31.1
20024	10 cm x 4,5 m (Kompressionslage)	32	07515807	*	4999153	17.30.01.32.1

3M™ Coban™ 2 Lite Zweilagigen Kompressionssystem

Reduzierte Kompression bei Ulcus cruris gemischter Ätiologie, ABPI $\geq 0,5$

Art.-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN	PZN	Pharmacode	MiGeL
2794E	1 Kit mit: 1 Rolle Komfortlage 10 cm x 2,7 m, 1 Rolle Kompressionslage 10 cm x 3,2 m	1	05749777	4406905	4524295	17.30.01.03.1

Alternative

20714	10 cm x 2,7 m (Lite Komfortlage)	18	07418292	*	4999288	17.30.01.31.1
20724	10 cm x 3,5 m (Lite Kompressionslage)	32	07515718	*	4999259	17.30.01.32.1

*Produkt im jeweiligen Land erhältlich, keine PZN verfügbar

Hinweis: Für die hier genannten Produkte und Therapien liegen spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vor. Bitte kontaktieren Sie vor der Applikation medizinisches Fachpersonal und lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Die vorliegenden Materialien richten sich an medizinisches Fachpersonal.

Solventum Germany GmbH

GE: MedSurg-GE@solventum.com
AT: MedSurg-AT@solventum.com
CH: MedSurg-CH@solventum.com

©Solventum 2025. Solventum, das S-Logo, Coban sind Warenzeichen von Solventum oder Tochtergesellschaften. 3M ist eine Marke der 3M Company. Andere Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. OMG1445798, 453951



Sehen Sie sich hier alle Anwendungsvideos und Anleitungen zum Coban 2 Kompressionssystem an.

solventum