


# Applikation am stark konturierten Unterschenkel

## Materialien und Positionierung


- Viele Patienten haben ausgeprägte Beinkonturen. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften der Coban 2 Zweilagiges Kompressionssysteme kann die Applikationstechnik leicht angepasst werden, um eine anschlussfähige, effektive und anhaltende Kompression zu gewährleisten
- Wählen Sie die 10 cm breite Komfortlage und Kompressionslage für Patienten mit einem ABPI  $\geq 0,8$ .
- Für Patienten, die eine Kompression weniger gut vertragen oder eine gemischte Ätiologie mit einem ABPI  $\geq 0,5$  haben, wird das Coban 2 Lite Zweilagiges Kompressionssystem empfohlen

## Applikation der Komfortlage


- Applizieren Sie diese Lage mit der Schaumstoffseite auf die Haut und dehnen Sie diese leicht, um sie der Form des Beins mit **minimaler Überlappung** anzupassen
- Bedecken Sie die Haut mit einer möglichst dünnen, lückenlosen Schicht
- Wenn Hautfalten vorhanden sind, verwenden Sie kleine Stücke der Komfortlage, die so gefaltet sind, dass die Schaumstoffseite nach außen zeigt, um die Hautfalten voneinander zu trennen

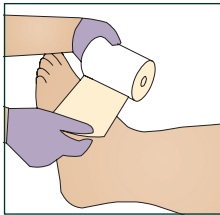


**Schritt 1:** Die Applikation erfolgt in einer 90° Dorsalflexion des Fußes. Beginnen Sie mit einer zirkulären Tour am Köpfchen des fünften Mittelfußknochens. Dies sorgt für eine neutrale, bequeme Fußausrichtung.

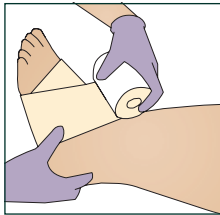


**Schritt 2:** Führen Sie die zweite Tour über den Fußrücken zur Ferse, so dass die Hälfte der Binde das Fußgelenk bedeckt.

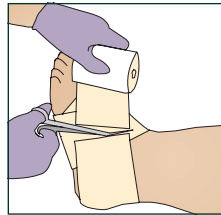


**Schritt 3:** Legen Sie die Komfortlage um die Rückseite der Ferse und führen Sie diese zum Fußrücken, so dass die Komfortlage überlappt. Schneiden Sie die Komfortlage ab und drücken Sie sie vorsichtig an. Die hintere Plantarfläche des Fußes ist nicht vollständig bedeckt.

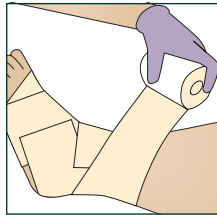

**Schritt 4:** Wickeln Sie die Lage mit **minimaler Überlappung** und leichter Dehnung um den Knöchel und führen Sie die Komfortlage am Bein entlang.

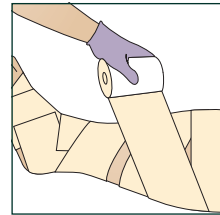


**Schritt 5:** Die Oberkante der Lage sollte knapp unterhalb des Fibulaköpfchens bzw. der Kniekehle enden. Führen Sie Komfortlage wieder am Bein hinunter, um alle Hautbereiche abzudecken.

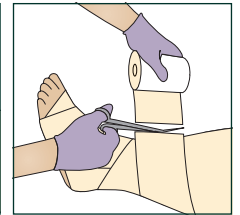


**Schritt 6:** Drücken Sie die Komfortlage leicht an und schneiden Sie das überschüssige Material ab. Drücken Sie die Komfortlage des gesamten Verbandes sanft an.

## Applikation der Kompressionslage


- Applizieren Sie das Material mit **100 % Dehnung** und **50 % Überlappung**
- Halten Sie die Rolle während der gesamten Applikation nah am Bein, um eine kontrollierte, gleichmäßige Kompression zu erzielen
- Wenn „Ausstülpungen“ festgestellt werden, tragen Sie eine zusätzliche Kompressionsschicht auf, bis die Gliedmaße glatt erscheint

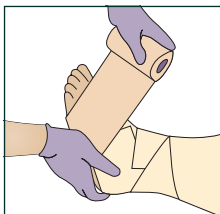


**Schritt 1:** Die Applikation erfolgt in einer 90° Dorsalflexion des Fußes. Beginnen Sie mit einer zirkulären Tour am Köpfchen des fünften Mittelfußknochens. Dies sorgt für eine neutrale, bequeme Fußausrichtung.

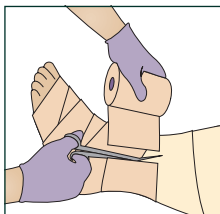


**Schritt 2:** Führen Sie die Kompressionslage mit 2-3 Achtertouren über den oberen und unteren Anteil des Fußes, sodass der Knöchel und die gesamte Ferse mit mindestens zwei Lagen bedeckt ist. Schneiden Sie die Kompressionslage ab und drücken Sie sie vorsichtig fest.

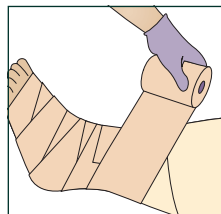


**Schritt 3:** Setzen Sie die Kompressionslage mit **50%iger Überlappung** über der vorherigen Lage an und beginnen Sie mit einer zirkulären Tour um den Knöchel. Führen Sie die Kompressionslage am Unterschenkel entlang so, wie die anatomische Form des Beines die Rolle führt bis unterhalb des Fibulaköpfchens bzw. der Kniekehle.

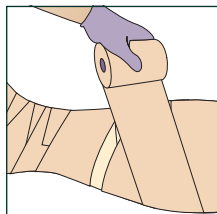

**Schritt 4:** Führen Sie die Kompressionslage über das Bein bis die Komfortlage mit mindestens zwei Lagen der Kompressionslage bedeckt ist. Wenn Sie die Applikationsrichtung ändern möchten, können Sie die Kompressionslage abschneiden und neu ansetzen. Behalten Sie während des gesamten Vorgangs eine 100%ige Dehnung bei.

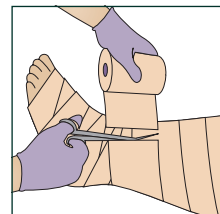


**Schritt 5:** Drücken Sie die Kompressionslage an und schneiden Sie überschüssiges Material ab.

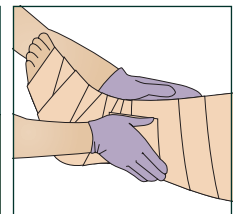

**Schritt 6:** Abschließend drücken Sie die Kompressionslage erneut gut an. Dadurch wird eine feste und sichere Verbindung des gesamten Verbandes gewährleistet.

## Entfernung des Verbandes

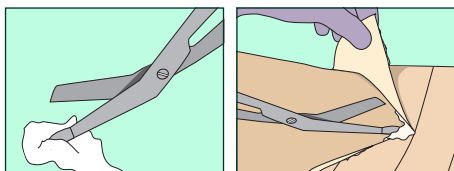

Benetzen Sie die Verbandschere mit einer Feuchtigkeitscreme, damit die Schere beim Entfernen unter dem Verband gleitet und ein einfaches, bequemes Entfernen ermöglicht. Schneiden Sie den Verband am Bein in Haarwuchsrichtung ab.

## Hinweis

Vollständige Informationen zur Verwendung der 3M™ Coban™ 2 Zweilagigen Kompressionssysteme finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

## 3M™ Coban™ 2 Zweilagigen Kompressionssystem

Für venöse Ulcera ABPI  $\geq 0,8$

| Art.-Nr. | Abmessung  | Stück/Packung | PZN      | PZN     | Pharmacode | MiGeL         |
|----------|--|---------------|----------|---------|------------|---------------|
| 2094     | <b>1 Kit mit:</b> 1 Rolle Komfortlage 10 cm x 2,7 m,<br>1 Rolle Kompressionslage 10 cm x 3,5 m | 1             | 01529955 | 4406911 | 3481388    | 17.30.01.03.1 |

### Alternative

|       |                                  |    |          |   |         |               |
|-------|----------------------------------|----|----------|---|---------|---------------|
| 20014 | 10 cm x 3,5 m (Komfortlage)      | 18 | 07418470 | * | 4999319 | 17.30.01.31.1 |
| 20024 | 10 cm x 4,5 m (Kompressionslage) | 32 | 07515807 | * | 4999153 | 17.30.01.32.1 |

## 3M™ Coban™ 2 Lite Zweilagigen Kompressionssystem

Reduzierte Kompression bei Ulcus cruris gemischter Ätiologie, ABPI  $\geq 0,5$

| Art.-Nr. | Abmessung  | Stück/Packung | PZN      | PZN     | Pharmacode | MiGeL         |
|----------|--|---------------|----------|---------|------------|---------------|
| 2794E    | <b>1 Kit mit:</b> 1 Rolle Komfortlage 10 cm x 2,7 m,<br>1 Rolle Kompressionslage 10 cm x 3,2 m | 1             | 05749777 | 4406905 | 4524295    | 17.30.01.03.1 |

### Alternative

|       |                                       |    |          |   |         |               |
|-------|---------------------------------------|----|----------|---|---------|---------------|
| 20714 | 10 cm x 2,7 m (Lite Komfortlage)      | 18 | 07418292 | * | 4999288 | 17.30.01.31.1 |
| 20724 | 10 cm x 3,5 m (Lite Kompressionslage) | 32 | 07515718 | * | 4999259 | 17.30.01.32.1 |

\*Produkt im jeweiligen Land erhältlich, keine PZN verfügbar

Hinweis: Für die hier genannten Produkte und Therapien liegen spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vor. Bitte kontaktieren Sie vor der Applikation medizinisches Fachpersonal und lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Die vorliegenden Materialien richten sich an medizinisches Fachpersonal.

Solventum Germany GmbH  
GE: MedSurg-GE@solventum.com  
AT: MedSurg-AT@solventum.com  
CH: MedSurg-CH@solventum.com

©Solventum 2025. Solventum, das S-Logo, Coban sind Warenzeichen von Solventum oder Tochtergesellschaften. 3M ist eine Marke der 3M Company. Andere Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. OMG1445798, 454101



Sehen Sie sich hier alle Anwendungsvideos und Anleitungen zum Coban 2 Kompressionssystem an.

solventum