


3M™ Fixierung für Katheter und Drainagen

Anleitung für Applikation und Entfernung

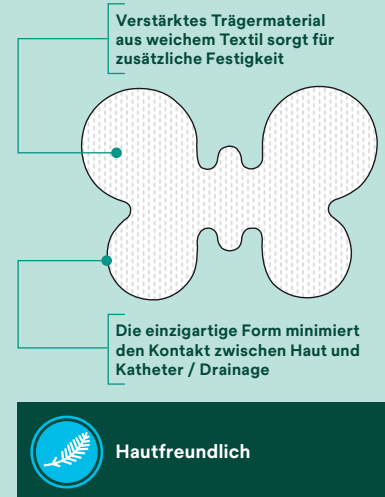


3M™ Fixierung für Katheter und Drainagen – Applikation



Beginn der Applikation


- Öffnen Sie die Verpackung.
- Entfernen Sie die Fixierung vollständig von dem Trägermaterial.

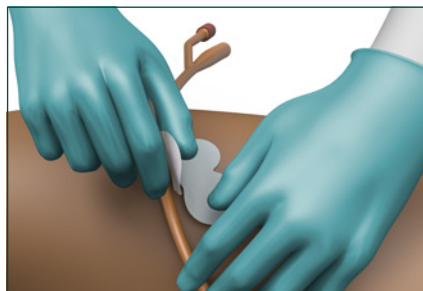

Applikation des ersten Flügels


- Applizieren Sie einen Flügel (d. h. die Hälfte) der Fixierung auf der Haut des Patienten, wobei Sie den Katheter / die Drainage möglichst wenig bewegen.

Hinweis: Dehnen Sie die Fixierung während der Applikation nicht, da die Spannung zu Hautverletzungen führen kann.

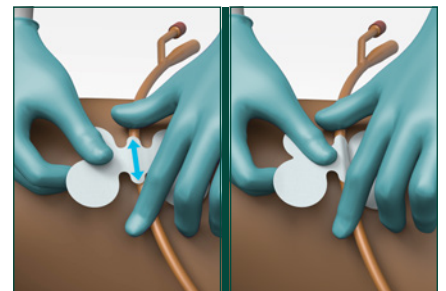


Sichern des Katheters / der Drainage

- Richten Sie den Katheter / die Drainage an der Mitte der Fixierung aus.
- Umkleben Sie den Katheter / die Drainage vollständig, sodass sich unterhalb ein Steg bildet.

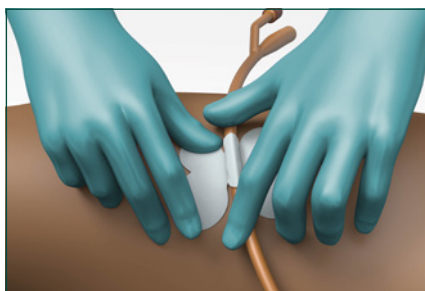


Applikation des zweiten Flügels

- Applizieren Sie den anderen Flügel (d. h. die andere Hälfte) der Fixierung auf der Haut.
- Drücken Sie sanft auf die Fixierung und die Ränder, um die Haftung an der Haut und dem Katheter / der Drainage zu verbessern.

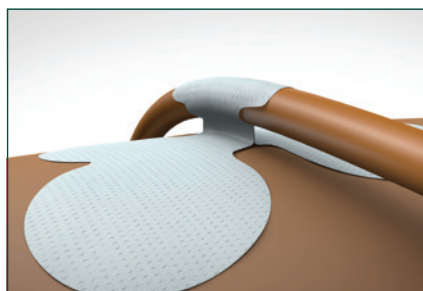


Überprüfung der Endposition

- Stellen Sie sicher, dass der Katheter / die Drainage leicht von der Haut abgehoben wird, um das Risiko einer Druckverletzung zu verringern.

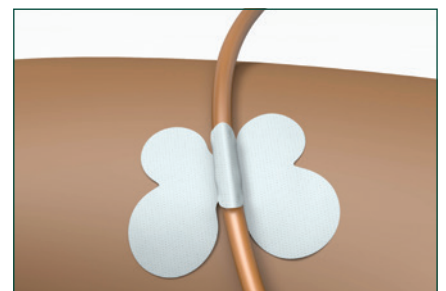


Applizierte Fixierung

3M™ Fixierung für Katheter und Drainagen – Entfernung oder Erneuerung

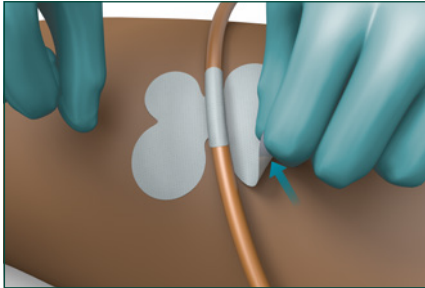

Beginn der Entfernung


- Bewegen Sie den Katheter / die Drainage während der Entfernung möglichst wenig.
- Ziehen Sie eine Stelle der Fixierung langsam zurück.

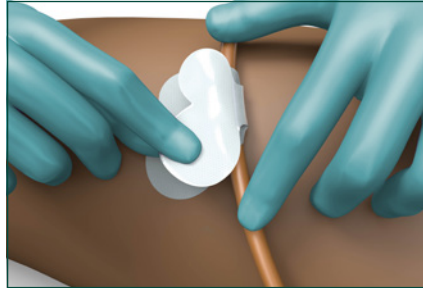

Entfernung des ersten Flügels

- Stabilisieren Sie den Katheter / die Drainage am Patienten.
- Halten Sie die Fixierung parallel zur Haut.
- Entfernen Sie einen Flügel vollständig.

Hinweis: Langsam und flach abziehen.

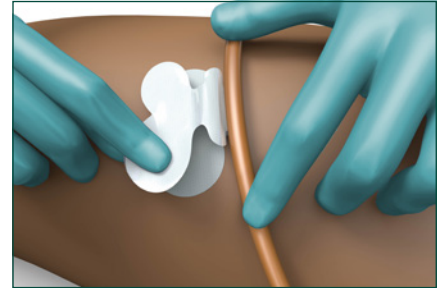

Stabilisierung und Entfernung

- Ziehen Sie die Fixierung vorsichtig von dem Katheter / der Drainage ab.
- Entfernen Sie den anderen Flügel der Fixierung von der Haut.

Hinweis: Langsam und flach abziehen.

Scannen Sie den QR Code,
und besuchen Sie uns im
Internet:



Weitere wichtige
Informationen finden Sie in
der Gebrauchsanleitung.

www.solventum.com

Solventum Medical Surgical

AT MedSurg-AT@solventum.com
CH MedSurg-CH@solventum.com
GE MedSurg-GE@solventum.com

©Solventum 2024. Solventum und das S Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Solventum oder seinen Tochtergesellschaften. 3M und das 3M Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von 3M. Alle Rechte vorbehalten. 103100

