



Moderne Wundbehandlung, Hautschutz und Versorgung geschädigter Haut

Produktkatalog



Das Gesundheitswesen besser, intelligenter und sicherer machen, um so Leben zu verbessern.

3M Health Care ist jetzt Solventum

Wir sind ein neues Unternehmen, das mit Hilfe bewährter 3M Technologien, sowie unserer über 70-jährigen Innovationsgeschichte, die Herausforderungen unserer Kunden durch optimierte Lösungen bewältigt.

Im Gesundheitswesen kommen unsere Lösungen weltweit täglich zum Einsatz und tragen zu einer verbesserten Patientenversorgung, effizienteren Prozessen und Arbeitsabläufen sowie zu höheren Sicherheits- und Präzisionsstandards bei.

Gestützt werden unsere Fähigkeiten durch über 7.300 weltweit erteilte Patente und das Fachwissen von über 2.100 Mitarbeitenden in unserem globalen Research & Development-Team.

Wir bedienen Kunden in über 90 Ländern und verfügen weltweit über 22.000 Mitarbeitende an mehr als 300 Standorten.

Als Wegbereiter für bahnbrechende Innovationen an der Schnittstelle von Gesundheit, Material- und Datenwissenschaft treiben wir Lösungen voran, die das Leben von Patienten verbessern und es Fachkräften im Gesundheitswesen ermöglichen, effektiver zu arbeiten. Denn die Menschen und ihr Wohlergehen liegen uns am Herzen und lassen uns nach wissenschaftlichen Neuerungen streben.

Der Geschäftsbereich Medical Surgical machte 2023 56 % des Gesamtumsatzes von Solventum aus. Dazu gehören Lösungen wie moderne Wundversorgung, I.V. Management, Sterilisationsüberwachung, Temperaturmanagement, chirurgische Lösungen, Stethoskope und medizinische Elektroden. Diese Lösungen sollen die Heilung beschleunigen, Komplikationen verhindern und die Kosten im Gesundheitswesen insgesamt senken.

Unsere modernen Lösungen zur Wundversorgung begleiten Patienten vom Krankenhaus bis in ihr Zuhause und unterstützen sie während des gesamten Heilungsprozesses. Einem BCC Forschungsbericht (BCC Publishing, Markets for Advanced Wound Management Technologies, Juli 2023) zufolge sind wir Marktführer im Bereich der modernen Wundversorgung und unsere Produkte werden jährlich zur Versorgung von über 1,6 Millionen schwer heilbarer Wunden verwendet. Zudem trägt unsere umfassende Auswahl an chirurgischen Lösungen dazu bei, das Infektions- oder Komplikationsrisiko für Patienten zu senken.

Ihr Solventum MedSurg Team

70+

Jahre Innovationsgeschichte

7.300+

erteilte Patente

20.000+

Mitarbeitende

Markt-
führende

Positionen

Zuver-
lässige

und anerkannte Marken



Bessere Behandlungsergebnisse durch patientenorientierte Wissenschaft.

Bessere Pflege für alle Patienten und zu jeder Zeit – für alle Hauttypen und für jede Wunde. Das ist das oberste Ziel Ihrer täglichen Arbeit. Und unser Anliegen ist es, Sie dabei so gut wie möglich zu unterstützen.

Wir möchten Ihnen mit unserer Wissenschaft bei Ihrem unermüdlichen Einsatz für Ihre Patienten helfen. Zusammen können wir dafür Sorge tragen, dass die kritische Rolle, welche die Haut beim Wohlbefinden jedes Menschen spielt, ausreichend Beachtung findet. Mit maßgeschneiderten Behandlungsmethoden können wir die Heilung von Wunden unterstützen, damit die Patienten schnell in ihr normales Leben zurückfinden.

Inhaltsverzeichnis

Moderne Wundbehandlung, Hautschutz und Versorgung geschädigter Haut 6

Aufführung aller Produkte entsprechend der Art der fortschrittlichen Wundversorgung und der Anwendung, zu der sie erforderlich sind.

Hautschutz, Hautpflege und Versorgung geschädigter Haut 8

Produkte zum Schutz der Haut und zur Behandlung feuchtigkeitsbedingter Hautschäden, einschließlich Inkontinenz-assoziiierter Dermatitis.

Wundreinigung 14

Effektive Wundreinigung auf Wasser- und Salzbasis für alle Anforderungen.

Versorgung von Infektionen und Entzündungen, Geruchsreduktion 16

Produkte, um den Wundgrund optimal auf die Heilung vorzubereiten, indem eine Kontamination durch Bakterien verhindert oder beseitigt wird, sodass Infektionen während der Wundheilung wirksam vorgebeugt wird – gleichzeitig wird auch die Bildung unangenehmer Gerüche verhindert.

Haftung minimieren 24

Produkte, die sich optimal dem Wundgrund anpassen und dabei atraumatisch entfernt werden können.

Exsudatmanagement 28

Produkte, die ein angenehmes und heilungsförderndes feuchtes Wundmilieu bei bestimmten Wundarten gewährleisten und/oder die Wunde vor Kontamination schützen.

Kompression 40


Produkte zur Kompressionstherapie.

Weitere Wundversorgungsprodukte 42

Fixierung, Verbände, Kompressen und Wundverschluss.

Hautschutz, -pflege und -abdeckung	Wundreinigung	Infektionsmanagement	Versorgung von stagnierenden Wunden	Haftung minimieren
 3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant - Seite 9 -  3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz - Seite 10 -  3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme - Seite 11 -  3M™ Cavilon™ Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege - Seite 12 -  3M™ Cavilon™ Wasch- und Reinigungstücher - Seite 13 -	 3M™ Kerrasol™ Wundspray - Seite 15 -  3M™ Kerrasol™ Wundspüllösung - Seite 15 -	 3M™ Silvercel™ Silberhaltiger, antimikrobieller Hydroalginatverband - Seite 17 -  3M™ Silvercel™ Non-Adherent Antimikrobieller Hydroalginatverband mit Silber und Easylift™ Präzisionsfilmentechnologie - Seite 18 -  3M™ Inadine™ (PVP-I) Nicht haftende Wundauflage - Seite 19 - Geruchsreduktion  3M™ Actisorb™ Silver 220 Aktivkohlewundauflage mit Silber - Seite 20 -  3M™ Actisorb™ Silberfrei Aktivkohlewundauflage - Seite 21 -	 3M™ Promogran™ Protease modulierende Matrix - Seite 22 -  3M™ Promogran Prisma™ Wundausgleichende Matrix - Seite 23 -	 3M™ Adaptic™ Nicht haftender Wundverband - Seite 25 -  3M™ Adaptic™ Touch Nicht haftender Silikon-Wundverband - Seite 26 -  3M™ Adaptic™ Digit Nicht haftender Silikon-Wundverband - Seite 27 -
Hautschutz und Therapie	Wundspüllösungen	Antimikrobielle Produkte	Kollagen/ORC	Wunddistanzgitter


Weitere Wundversorgungsprodukte				
 3M™ Coban™ - Seite 43 -	 3M™ Medipore™ H - Seite 44 -	 3M™ Medipore™ auf Liner - Seite 44 -	 3M™ Micropore™ S - Seite 45 -	 3M™ Tegaderm™ - Seite 46 -
Fixierung				

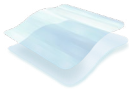Exsudatmanagement				Kompression
Trocken 💧💧💧	Schwach 💧💧💧	Mäßig 💧💧💧	Stark 💧💧💧	
 3M™ Tegaderm™ Film Transparentverband - Seite 29 - Feuchtigkeits-spendend	 3M™ Tegaderm™ Absorbent Transparenter Hydroaktivverband - Seite 34 -	 3M™ Tegaderm™ Foam Hochleistungsfähiger, nicht klebender Schaumverband - Seite 35 -  3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Hochleistungsfähiger, klebender Schaumverband - Seite 36 -  3M™ Tegaderm™ Alginate Alginatverband - Seite 37 -  3M™ Kerracel™ Gelbildende Wundauflage - Seite 38 -	 3M™ Kerramax Care™ Superabsorbierende Wundauflage - Seite 39 -	 3M™ Coban™ 2 Zweilagige Kompressionssystem - Seite 41 -  3M™ Coban™ 2 Lite Zweilagige Kompressionssystem - Seite 41 -
 3M™ Kerralite Cool™ Feuchtigkeits-regulierende Hydrogelwundauflage - Seite 30 -  3M™ Nu-Gel™ Hydrogel mit Alginat - Seite 31 -  3M™ Kerrasol™ Wundgel - Seite 32 -  3M™ Kerrasol™ Wundsprühgel - Seite 33 -				
Folie und Hydrogel	Acrylat-Polymer	Schaumstoff, Alginat und Hydrofaser	Superabsorber	Zweilagige Kompression

Weitere Wundversorgungsprodukte				
 3M™ Tegaderm™ Roll - Seite 46 -	 3M™ Medipore™ +Pad - Seite 47 -	 3M™ Tegaderm™ +Pad - Seite 48 -	 3M™ Topper™ - Seite 49 -	 3M™ Steri-Strip™ - Seite 50 -
Verbände			Kompressen	Wundverschluss

Hautschutz, -pflege und -abdeckung

Genau wie für Sie ist es auch unser oberstes Anliegen, die sichersten und effektivsten Lösungen für die Versorgung der Haut zur Verfügung zu stellen, um die Behandlungsergebnisse bei Ihren Patienten oder den Bewohnern Ihrer Einrichtung zu verbessern. Bei der Erhaltung eines intakten Hautzustands können Sie sich auf Hautschutzprodukte verlassen, bei deren Entwicklung das Patientenwohl an oberster Stelle steht. Die 3M™ Cavilon™ Produkte umfassen alles, um die Gesundheit der Haut Ihrer Patienten zu schützen und geschädigte Haut zu bedecken: hochwertiger Hautschutz, neuartige Hautschutzbarrieren und ein Sortiment an Begleitprodukten zur Bewahrung der Hautgesundheit.

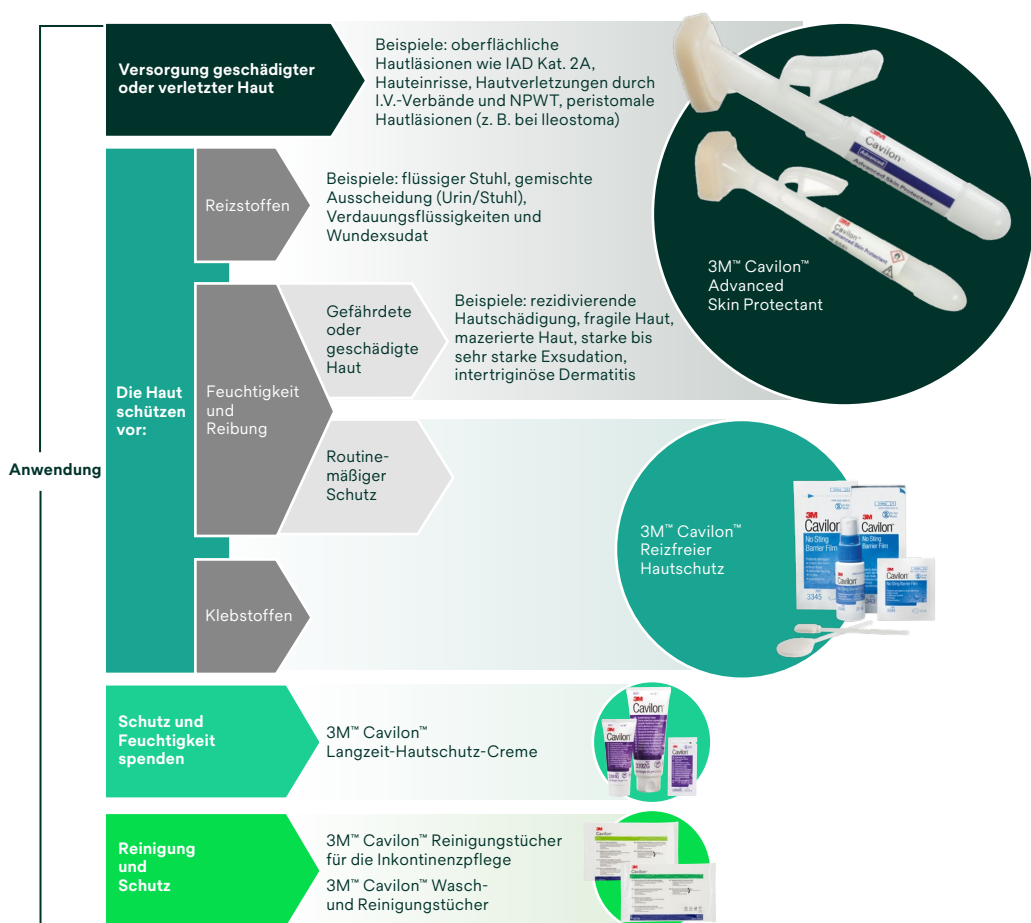

3M™ Cavilon™

Advanced Skin Protectant

Worum handelt es sich?

Cavilon Advanced erzeugt mit seiner revolutionären Polymer-Cyanacrylat-Technologie eine ultradünne und äußerst haltbare Barriere, die geschädigte oder intakte Haut vor hautreizenden, aggressiven Körperflüssigkeiten wie flüssigem Stuhl oder Verdauungsflüssigkeiten schützt.

Wie funktioniert es?

Das einzigartige elastomere Polymer bedeckt die Haut mit einer dehnbaren und anpassungsfähigen Barriere, sodass sie nicht reißt wie andere Barrierefilme und reine Cyanacrylate.

Im Gegensatz zu Barriereprodukten, die nicht zuverlässig auf der darunterliegenden Haut haften, gewährleistet die Polymer-Cyanacrylat-Verbindung eine sichere Haftung auf feuchter, nässender oder geschädigter Haut bis zu 7 Tage. Je nach Indikation 1–3 mal pro Woche anwenden.¹

Durch den Einweg-Applikator wird das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert – zudem muss Cavilon Advanced nicht entfernt werden.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Cavilon Advanced schützt und behandelt Ihre Patienten bei folgenden oberflächlichen Hautschädigungen:

- Durch medizinische Klebstoffe:
 - Stripping, Hauteinrisse
 - bei I.V.-Fixierverbänden und NPWT
- Durch Feuchtigkeit:
 - Inkontinenz-assoziiierter Dermatitis (IAD)
 - Hautschäden um Stomata und Fisteln
 - Intertrigo und Wundrandmazeration



**Erstattungsfähig
als Verbandmittel**

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
5050G	2,7 ml Applikator	20*	12407238
5050G4P	2,7 ml Applikator	4	15635359
5051G	0,7 ml Applikator	20*	16397703
5051G4P	0,7 ml Applikator	4	16822684

* Die PZN bezieht sich auf den einzelnen Applikator, Mindestbestellmenge = 20 Stück

Quellenangaben

1. Brennan MR, Milne CT, Agrell-Kann M, Ekholm, BP. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing*. 2017; 44(2):172–180.

3M™ Cavilon™

Reizfreier Hautschutz

Worum handelt es sich?

Cavilon Reizfreier Hautschutz ist ein schnelltrocknender, alkoholfreier Barrierefilm. Er bietet einen hauchdünnen, wasserdampfdurchlässigen, transparenten und effektiven Hautschutz. Er wird durch mehr als 80 Studien und Publikationen belegt.

Wie funktioniert es?

Die einzigartige Terpolymer-Zusammensetzung gewährleistet eine langanhaltende, flexible Barriere, um die Haut um Wunden und Stomata vor Feuchtigkeit und Körperflüssigkeiten bis zu 72 Stunden zu schützen.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

- Schutz vor feuchtigkeitsbedingten Hautschäden
- Schutz um Tuben, Drainagen und Stomata
- Schutz von Wundrand/Wundumgebung
- Schutz vor Hautverletzungen durch medizinische Klebstoffe (MARSI)
 - Fixierverbände
 - Rollenpflaster
 - Unterdruck-Wundtherapie
- Schutz vor Feuchtigkeit und Reibung



* Artikel 3344 ist im Set des 3M™ Veraflo™ Dressing enthalten aber nicht separat erhältlich.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN	Hilfsmittel-Nr.
3343P	1 ml Schaumstoffapplikator	5	15258678	29.26.10.2013
3343E	1 ml Schaumstoffapplikator	25	15258661	29.26.10.2013
3345E	3 ml Schaumstoffapplikator	25	15258684	29.26.10.2013
3346P	28 ml Sprayflasche	1	15258655	29.26.10.2014
3346E	28 ml Sprayflasche	12	15258626	29.26.10.2014

3M™ Cavilon™

Langzeit-Hautschutz-Creme

Worum handelt es sich?

Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme ist eine hochergiebige, parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Barrierecreme, die dem Waschen widersteht und die Haftung von Pflastern und klebenden Verbänden ermöglicht. Sie eignet sich ideal für die Pflege intakter, gefährdeter und/oder trockener Haut und bildet eine Barriere, um diese vor Hautschädigungen zu schützen.

Wie funktioniert es?

Diese hochergiebige Barrierecreme bietet einen einzigartigen, lang anhaltenden Schutz vor Körperflüssigkeiten, wie z.B. Urin und Stuhl, sowie Reizstoffen bis zu 24 Stunden und spendet der Haut gleichzeitig Feuchtigkeit. Dies wird den Bedürfnissen von Pflegekräften und Patienten gerecht, da sie auf einer Zusammensetzung auf Polymerbasis beruht, die:

- Gefährdete und trockene Haut pflegt und schützt
- Dem Waschen widersteht, wodurch ein häufiges Wiederauftragen nicht erforderlich ist
- Die Haftung von Pflastern und klebenden Verbänden ermöglicht
- Die Aufnahmefähigkeit von Inkontinenzmitteln erhält

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme lässt sich zur Pflege trockener Haut sowie zum Schutz gefährdeter Haut vor Schäden durch Inkontinenz und damit verbundenen Symptomen wie Juckreiz im Analbereich verwenden. Es ist ein Medizinprodukt und kann sowohl auf intakter als auch auf geschädigter Haut verwendet werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
3392GS	2 g Sachet	20	15581646
3391G	28 g Tube	1	10286428
3392G	92 g Tube	1	10286434



3M™ Cavilon™

Wasch- und Reinigungstücher

Worum handelt es sich?

Die Cavilon Wasch- und Reinigungstücher sind eine ideale Lösung für die tägliche, hygienische Patientenreinigung. Die sanften, medizinischen Reinigungstücher bieten die Vorteile einer kombinierten hautschonenden Reinigung und Feuchtigkeitsspendenden Pflege. Zugleich reduzieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination.

Wie funktioniert es?

Die Cavilon Wasch- und Reinigungstücher sorgen auf optimale Weise dafür, dass sich Ihre Patienten wohl, sauber und geschützt fühlen.

- Reinigt und pflegt die Haut in einem Arbeitsgang
- pH-hautneutral
- Reinigt sanft ohne Reizung
- Frei von Parabenen und Duftstoffen
- Schnelltrocknend; kein Abtrocknen erforderlich

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Verwenden Sie Cavilon Wasch- und Reinigungstücher zur Teil- oder Ganzkörperreinigung der Patienten sowie zum Säubern der Haut nach jeder Stuhl- oder Urinausscheidung.

Bestellinformationen



Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
9272	20 x 30 cm	8	10341587

3M™ Cavilon™

Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege

Worum handelt es sich?

Die Cavilon Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege sorgen auf optimale Weise dafür, dass sich Ihre Patienten wohl, sauber und geschützt fühlen. Mit diesen sanften medizinischen Reinigungstüchern können Sie in einem Arbeitsgang schonend waschen, pflegen und schützen. Zugleich reduzieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination.

Wie funktioniert es?

Cavilon Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege enthalten als wirksamen Schutz vor Feuchtigkeit und Körperflüssigkeiten 3 % Dimethicon.

- Reinigt, pflegt und schützt die Haut in einem Arbeitsgang
- Die transparente Barriere erleichtert die regelmäßige Beurteilung der Haut
- pH-hautneutral, frei von Duftstoffen und Parabenen
- Reinigt sanft ohne Reizung
- Schnelltrocknend; kein Abtrocknen erforderlich

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege können zur Reinigung, Pflege sowie zum Schutz gefährdeter Haut vor Schäden durch Inkontinenz verwendet werden.

Bestellinformationen



Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
9274	20 x 30 cm	8	10341593

Wundreinigung

Effektive Wundreinigung auf Wasser- und Salzbasis für alle Anforderungen. Zur Reinigung, Befeuchtung und Infektionsprophylaxe in der Wunde sowie zum Ablösen von verkrusteten Wundauflagen, Verbänden und Belägen.

Wundreinigung



3M™ Kerrasol™
Wundspray



3M™ Kerrasol™
Wundspüllösung

Wundspüllösungen

3M™ Kerrasol™ Wundspüllösung

3M™ Kerrasol™ Wundspray

Worum handelt es sich?

Das Kerrasol Wundspray und die Kerrasol Wundspüllösung dienen dem Reinigen und Befeuchten der Wunde und zur Vorbeugung einer Infektion.

Beide Produkte können bei Patienten mit chronischen Wunden, akuten Verletzungen oder bereits vorhandenen Hautproblemen für die mechanische Wundreinigung sowie zum Ablösen verkrusteter Verbände und Fixierbinden von der Wunde verwendet werden.

Die Kerrasol Wundspüllösung und das Kerrasol Wundspray sind wirksam konserviert gegen Bakterien und Pilze.^{1,3} Es bestehen keine bekannten Resistenzen.² Die Anwendung ist nahezu schmerzfrei^{1,2} und es bestehen hinsichtlich der Anwendungsdauer keinerlei Einschränkungen.

Die Produkte wirken direkt in der Wunde und reduzieren unangenehme Wundgerüche.

Die Wundspüllösung und das Wundspray sind gebrauchsfertig und können nach Anbruch 3 Monate verwendet werden.

Wirksam dank der ECA-Technologie

Alle Kerrasol Produkte beruhen auf der Verwendung der ECA (elektrochemische Aktivierung)-Technologie. Dadurch werden Lösungen mit speziellen physikochemischen und katalytischen Eigenschaften erzeugt, die nicht nur wirksam, sondern auch stabil und sehr gut verträglich sind, da sie auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
3M™ Kerrasol™ Wundspray			
CWL1150	75 ml Sprühflasche	1	11341106
3M™ Kerrasol™ Wundspüllösung			
CWL1152	250 ml Flasche	1	11341129
CWL1277	1 l Flasche	6	16576794

Quellenangaben

1. Kapur V, Mawaha AK. *Indian J Surg.* 2011; 73(1): 48–53.
2. Kramer A, Dissemond J, Kim S *et al. Skin Pharmacol Physiol.* 2018; 31(1): 28–58.
3. Brill FH. Gutachten zur antimikrobiellen Wirksamkeit und Verträglichkeit von ProntoSol. Institute für Hygiene und Mikrobiologie. 2013.



Infektionsbekämpfung und Geruchsreduktion

Bei Wunden mit Entzündungs- oder Infektionszeichen kann die Wundheilung verzögert sein. Dies bedeutet für Patienten und medizinisches Fachpersonal eine große Herausforderung. Wir bieten Ihnen hierzu eine Auswahl an verschiedenen Lösungen mit antimikrobieller Wirkung sowie Produkte zur Geruchsreduktion an. Diese unterstützen die Wundheilung und erhöhen die Lebensqualität Ihrer Patienten.

Infektionsmanagement	Versorgung von stagnierenden Wunden
3M™ Silvercel™ Silberhaltiger antimikrobieller Hydroalginatverband 3M™ Silvercel™ Non-Adherent Antimikrobieller Hydroalginatverband mit Silber und EasyLift™ Präzisionsfilntechnologie 3M™ Inadine™ (PVP-I) Nicht haftende Wundauflage Geruchsreduktion 3M™ Actisorb™ Silver 220 Aktivkohlewundauflage mit Silber 3M™ Actisorb™ Silberfrei Aktivkohlewundauflage	3M™ Promogran™ Protease modulierende Matrix 3M™ Promogran Prisma™ Wundausgleichende Matrix
Antimikrobielle Produkte	Kollagen/ORC

3M™ Silvercel™

Silberhaltiger antimikrobieller Hydroalginatverband

Worum handelt es sich?

Silvercel ist eine Wundauflage, die aus Alginat, Carboxymethylcellulose (CMC) und silberbeschichteten Nylonfasern besteht.

Wie funktioniert es?

Wirkt bis zu 7 Tage antimikrobiell gegen ein breites Spektrum pathogener Keime einschließlich MRSA, MRSE und VRE.^{1,2,3}

- Reißfest und läßt sich in einem Stück entfernen
- Ermöglicht eine wirksame Kontrolle von Exsudat³
- Unterstützt die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, das die Wundheilung fördert³



zuschneidbar

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Die Silvercel Wundauflage eignet sich für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, wie:

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetische Fußulcera
- Spalthautentnahmestellen
- Traumatische Wunden
- Verbrennungen bis Grad IIa

Da das Produkt Alginat enthält, kann es zur Blutstillung bei kleineren, oberflächlichen Wunden eingesetzt werden. Es eignet sich unter ärztlicher Aufsicht auch zur Versorgung infizierter Wunden oder von Wunden, bei denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
CAD230	2,5 x 30,5 cm (Tamponade)	5	00033123
CAD050	5 x 5 cm	10	00032098
CAD011	11 x 11 cm	10	00032164
CAD020	10 x 20 cm	5	00032313

in-vitro

Quellenangaben

1. Clark R *et al.* Simulated in use tests to evaluate a Non-Adherent Antimicrobial silver alginate dressing. Poster presented at: CAWC; October 29-November 1, 2009; Quebec City, Canada.
2. Clark R and Bradbury S. Silvercel NON ADHERENT Made Easy. *Wounds International*. 2010; Vol. 1(5).
3. Gray D. Silvercel Non-Adherent dressing: taking the pain out of antimicrobial use. *Wounds UK*. 2009; Vol 5(4).

3M™ Silvercel™ Non-Adherent

Antimikrobieller Hydroalginatverband mit Silber und Easylift™ Präzisionsfilmtechnologie

Worum handelt es sich?

Silvercel Non-Adherent ist eine Wundauflage, die aus Alginat, Carboxymethylcellulose (CMC) und silberbeschichteten Nylonfasern besteht. Die Silvercel Non-Adherent Wundauflage verfügt zusätzlich über ein nicht haftendes Wunddistanzgitter.

Wie funktioniert es?

Nicht haftend

Die Easylift™ Präzisionsfilmtechnologie ermöglicht ein problemloses Ablösen in einem Stück¹ bei Minimierung der Faserablösung^{1,2} und gleichzeitigem wirksamen Schutz des neu gebildeten Gewebes.³

Antimikrobielle Wirkung und Exsudatmanagement

- Gewährleistet eine anhaltende Abgabe von Silberionen für bis zu 7 Tage⁴
- Ist in vitro wirksam gegen ein breites Spektrum von pathogenen Keimen, einschließlich MRSA, MRSE und VRE^{1,3}
- Ermöglicht eine wirksame Kontrolle von Exsudat⁵
- Unterstützt die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, das die Wundheilung fördert⁵

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Die Silvercel Wundauflage eignet sich für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, wie:

- Dekubitus
- Diabetische Fußulcera
- Traumatische Wunden
- Ulcus cruris
- Spalthautentnahmestelle
- Verbrennungen bis Grad IIa

Der Silvercel Non-Adherent Wundverband lässt sich mit einem nicht-okklusiven Sekundärverband abdecken.

Da das Produkt Alginat enthält, kann es zur Blutstillung bei kleineren, oberflächlichen Wunden eingesetzt werden. Es eignet sich unter ärztlicher Aufsicht auch zur Versorgung infizierter Wunden oder von Wunden, bei denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
CAD7230	2,5 x 30,5 cm (Tamponade)	5	05378401
CAD7050	5 x 5 cm	10	05378370
CAD7011	11 x 11 cm	10	05378387
CAD7020	10 x 20 cm	5	05378393

Quellenangaben

1. Clark R *et al.* Simulated in use tests to evaluate a Non-Adherent Antimicrobial silver alginate dressing. Poster presented at: CAWC; October 29–November 1, 2009; Quebec City, Canada.
2. Snyder R *et al.* Non-Adherent Properties of a New Antimicrobial Dressing Demonstrated by Clinical Evaluations. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 15–17, 2010; Harrogate, UK.
3. Clark R and Bradbury S. Silvercel NON ADHERENT Made Easy. *Wounds International*. 2010; Vol. 1(5).
4. Clark R, Stephens SA, Del Bono M, Abioye O, Bayliff S. The evaluation of absorbent silver containing dressings *in vitro*. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 10–12, 2009; Harrogate, UK.
5. Gray D. Silvercel Non-Adherent dressing: taking the pain out of antimicrobial use. *Wounds UK*. 2009; Vol 5(4).

3M™ Inadine™

(PVP-I) Nicht haftende Wundauflage

Worum handelt es sich?

Bei der Inadine Wundauflage handelt es sich um ein wenig haftendes, gewobenes Viskosegewebe, das mit Polyethylenglykol (PEG) imprägniert ist und 10 % Povidon-Iod enthält – was 1,0 % an verfügbarem Iod entspricht.

Wie funktioniert es?

Die Inadine Wundauflage wurde entwickelt, um das Wundbett zu schützen und die Anhaftung zu minimieren. Somit wird das Risiko einer Schädigung des Granulationsgewebes bei der Verbandabnahme reduziert.⁴ In der klinischen Praxis wird dadurch nachweislich der Schmerz der Patienten reduziert.^{5,6} Sie hat ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum,⁷ einschließlich Wirksamkeit gegen Methicillin resistentem *Staphylococcus aureus* (MRSA)^{2,3,8} und kann auch in Kombination mit Antibiotika angewendet werden.

Mit abnehmendem PVP-I-Gehalt, ändert der Verband seine Farbe von Orange zu Weiß. Dieser Farbwechsel zeigt an, wie häufig das Produkt gewechselt werden sollte.



zuschneidbar

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Die Inadine Wundauflage ist für die Behandlung akuter und chronischer Wunden indiziert und kann auch zur Infektionsprävention eingesetzt werden bei:

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetische Fußulcera
- Kleinere traumatische Wunden
- Verbrennungen bis Grad IIa

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
P01481	5 x 5 cm	25	07584205
P01512	9,5 x 9,5 cm	25	07584228
P01491	9,5 x 9,5 cm	10	07584211

Quellenangaben

1. Sibbald RG, Leaper DJ, Queen D. Iodine Made Easy. *Wounds International*. 2011;2(2).
2. Vowden P and Cooper RA. An integrated approach to managing wound infection. Position Document: Management of wound infection. European Wound Management Association (EWMA). 2006; London, UK.
3. Gordon J. Clinical significance of methicillin-sensitive and methicillin resistant *Staphylococcus aureus* in UK hospitals and the relevance of povidone iodine in their control. *Postgraduate Medical Journal*. 1993; 69(3):106–116.
4. Langley SRN. Inadine wound dressings speed healing, reduce patient discomfort and cuts costs by almost 40%. *Burns*. 1989; Vol.15.
5. Han KH *et al.* Management of partial skin thickness burn wounds with Inadine® dressings. *Burns*. 1989; 15(6):399–402.
6. Campbell N, Campbell D *et al.* Evaluation of a non-adherent, povidone- iodine dressing in a case series of chronic wounds. *Journal of Wound Care*. 2013; 22(8):401-2,404-6.

3M™ Actisorb™ Silver 220

Aktivkohlewundauflage mit Silber


Worum handelt es sich?

Actisorb Silver 220 ist ein Aktivkohleverband mit Silber, der in eine nicht haftende Nylonhülle eingeschlossen ist.

Wie funktioniert es?

Der Actisorb Silver 220 Verband zeichnet sich durch eine dreifache Wirkung aus, die Gerüche nicht nur unterbindet, sondern auch ihre Ursache bekämpft.

- Die Aktivkohle bindet Gerüche im Verband¹
- Die Aktivkohle bindet Bakterien und Toxine, die den Heilungsprozess beeinträchtigen¹
- Silber bekämpft die Bakterien im Verband²

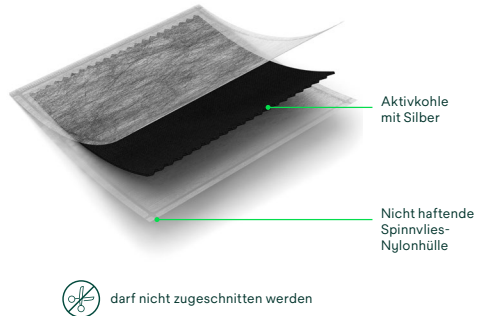

Antimikrobielle Wirkung

In-vitro-Tests belegen die antimikrobielle Wirksamkeit von Actisorb Silver gegen ein breites Spektrum bakterieller Mikroorganismen bei klinischen Infektionen ohne die Fibroblastenproliferation zu verhindern.^{3,4} Die Silberimprägnierung bekämpft Wundmikroorganismen innerhalb des Verbandes.

Beseitigung von Gerüchen und Exsudat

Actisorb Silver 220 unterbindet unangenehme Gerüche und verbessert so die Lebensqualität des Patienten.⁵⁻⁷ Da Geruchsbelästigungen mit Wundexsudat einhergehen können, reguliert Actisorb Silver 220 auch das Exsudat und sorgt dafür, dass ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten bleibt.⁶

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Actisorb Silver 220 bildet eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Bakterien, bindet und absorbiert unangenehme Gerüche im Verband – sowohl im feuchten als auch im trockenen Zustand. Actisorb Silver 220 kann dazu beitragen, Infektionen bei oberflächlichen und tiefen Wunden zu reduzieren, einschließlich:

- PEG-Stellen
- Exulcerierenden Karzinomen
- Ulcerierten, traumatischen und chirurgischen Wunden, bei denen eine bakterielle Kontamination, Infektion oder Gerüche auftreten

Actisorb Silver 220 kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben. Der Verband kann mit einer nicht haftenden primären Wundauflage wie Adaptic Touch oder auch unter Kompressionstherapie verwendet werden. Abhängig vom Exsudataufkommen kann Actisorb Silver 220 mit einem geeigneten Sekundärverband kombiniert werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
MAS065	6,5 x 9,5 cm	10	01098768
MAS105	10,5 x 10,5 cm	10	01098774
MAS190	10,5 x 19 cm	10	01098780

Quellenangaben

- Nisbet L *et al.* The beneficial effects of activated charcoal cloth with silver on odour control and bacterial endotoxin binding. Poster presented at: Wounds UK; 2011; Harrogate, UK.
- Addison D *et al.* A comparison of the antimicrobial properties of silver dressings for chronic wound care. Poster presented at: EWMA; May 23-25, 2002; Granada, Spain.
- Cullen B *et al.* The effects of silver-based wound dressings on protease activity and cell proliferation. Poster presented at: the 16th Annual Symposium on Advanced Wound Care; April 28–May 1, 2003; Las Vegas, NV.
- Nisbet L *et al.* The beneficial effects of a non-releasing silver containing wound dressings on fibroblast proliferation. Poster presented at: Wounds UK; 2011; Harrogate, UK.
- Jackson L. Use of a charcoal dressing with silver on an MRSA-infected wound. *B J Comm Nursing*. 2001; Vol. 2:19–26.
- Hampton S. Actisorb Silver 220: a unique antibacterial dressing. *J Comm Nursing Nursing*. 2002; 17–19.
- Leak K. PEG site infections: a novel use for Actisorb Silver 220. *B J Comm Nursing*. 2002; Vol. 7(6):321–325.

3M™ Actisorb™ Silberfrei

Aktivkohlewundauflage

Worum handelt es sich?

Actisorb Silberfrei besteht aus reiner Aktivkohle, die von einer Nylonhülle umgeben ist.

Wie funktioniert es?


Das Aktivkohlegewebe bindet Bakterien^{1,#} und neutralisiert unangenehme Gerüche.^{2,#}

Durch die Beseitigung unangenehmer Gerüche steigert der Actisorb Silberfrei Aktivkohleverband die Lebensqualität von Patienten.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Der Actisorb Silberfrei Verband eignet sich für die Behandlung aller chronischen Wunden einschließlich:

- exulcerierenden Karzinomen
- diabetischen Ulcera
- Dekubitalulcera
- venösen und arterielle Ulcera
- Ulcera von gemischter Ätiologie
- traumatischen und chirurgischen Wunden, bei denen Gerüche auftreten

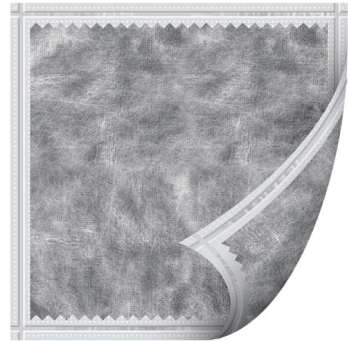

darf nicht zugeschnitten werden

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
ASF0609	6,5 x 9,5 cm	10	10020340
ASF1010	10,5 x 10,5 cm	10	10020363
ASF1019	10,5 x 19 cm	10	10020469

in-vitro

Quellenangaben

1. In-vitro Testbericht: Bakterielle Bindung (3M data on file, 2015)
2. In-vitro Testbericht: Geruchsadsorption (3M data on file, 2012)

3M™ Promogran™

Protease modulierende Matrix

Worum handelt es sich?

Promogran ist eine Proteasen modulierende Matrix und besteht zu 45 % aus oxidiert regenerierter Cellulose (ORC) und zu 55 % aus Kollagen in einer sterilen, gefriergetrockneten Zusammensetzung.

Wie funktioniert es?

Promogran reguliert das Wundmilieu, wodurch die Bildung von Granulationsgewebe und die Epithelisierung unterstützt sowie eine schnelle Wundheilung ermöglicht wird.

Die Wirksamkeit von Promogran wird durch eine Vielzahl von klinischen Studien, darunter auch randomisierte, kontrollierte Studien unterstützt, die in Metaanalysen systematisch überprüft wurden.^{1,2}

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Promogran Matrix ist für die Behandlung bei sekundär heilenden, oberflächlichen und tiefen Wunden indiziert, bei denen der Wundgrund frei von nekrotischem Gewebe ist, einschließlich:

- Diabetische Ulcera
- Venöse Ulcera
- Dekubitus
- Ulcera, die durch gemischte vaskuläre Ätiologien verursacht werden
- Traumatische und chirurgische Wunden

Promogran wird im Wundbett natürlich abgebaut und resorbiert, daher wird empfohlen, Promogran nach 72 Stunden zu erneuern. Promogran kann, abhängig vom Exsudataufkommen, mit einem geeigneten Sekundärverband kombiniert und in Kombination mit der Kompressionstherapie angewendet werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
M770285	28 cm ²	5	02063950
M772028	28 cm ²	10	01532354
M771235	123 cm ²	5	02063944
M772123	123 cm ²	10	01532360



Quellenangaben

1. Chowdhry S.A., et al. Use of oxidised regenerated cellulose/collagen dressings versus standard of care over multiple wound types: a systematic review and meta-analysis. *Int. Wound J.* 2021.
2. Chen, Y.; Du, P.; Lv, G. A meta-analysis examined the effect of oxidised regenerated cellulose/

3M™ Promogran Prisma™

Wundausgleichende Matrix

Worum handelt es sich?

Promogran Prisma besteht zu 44 % aus oxidiertem regenerierter Cellulose (ORC), zu 55 % aus Kollagen und zu 1 % aus Silber-ORC in einer sterilen, gefriergetrockneten Zusammensetzung.

Wie funktioniert es?

In-vitro-Studien haben gezeigt, dass Promogran Prisma gegen Mikroorganismen wirksam ist und das Wundmilieu reguliert, welches die Bildung von Granulationsgewebe und die Epithelisierung unterstützt sowie eine schnelle Wundheilung ermöglicht.

Die Wirksamkeit von Promogran Prisma wird durch eine Vielzahl von klinischen Studien, darunter auch randomisierte, kontrollierte Studien unterstützt, die in Metaanalysen systematisch überprüft wurden.^{1,2}

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Promogran Prisma ist für die Behandlung bei sekundär heilenden Wunden indiziert, bei denen der Wundgrund frei von nekrotischem Gewebe ist, einschließlich:

- Diabetische Ulcera
- Venöse Ulcera
- Dekubitus
- Ulcera, die durch gemischte vaskuläre Ätiologien verursacht werden
- Traumatische und chirurgische Wunden
- Spalthautentnahmestellen


Promogran Prisma wird im Wundbett natürlich abgebaut und resorbiert. Es wird empfohlen, Promogran Prisma nach 72 Stunden, bei stark exsudierenden oder infizierten Wunden alle 24 Stunden zu erneuern. Promogran kann, abhängig vom Exsudataufkommen, mit einem geeigneten Sekundärverband kombiniert und in Kombination mit der Kompressionstherapie angewendet werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
PS2028	28 cm ²	10	03136668
PS2123	123 cm ²	10	03136674

Quellenangaben

1. Chowdhry S.A., et al. Use of oxidised regenerated cellulose/collagen dressings versus standard of care over multiple wound types: a systematic review and meta-analysis. *Int. Wound J.* 2021.
2. Chen, Y.; Du, P.; Lv, G. A meta-analysis examined the effect of oxidised regenerated cellulose/

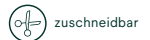

Haftung minimieren

Bei Wundverbänden ist es entscheidend, dass die nicht haftende Wundkontaktschicht das Exsudat effizient und ungehindert vom Wundgrund zum Sekundärverband durchlässt, ohne dabei den Heilungsprozess zu stören.¹ Deswegen bieten wir verschiedene Lösungen an, bei denen die Haftung sowie das Risiko einer Ansammlung von Exsudat und einer Mazeration minimiert wird.^{2,3} Diese sind insbesondere darauf ausgelegt, die Schmerzen der Patienten sowie Traumata bei Verbandwechseln zu minimieren.

Haftung minimieren



3M™ Adaptic™
Nicht haftender
Wundverband



3M™ Adaptic™ Touch
Nicht haftender
Silikon-Wundverband



3M™ Adaptic™ Digit
Nicht haftender
Silikon-Wundverband

Wunddistanzgitter

Quellenangaben

1. Brosnan P, Addison D, Stephens S, Mistry P, Mantle B. The Design Principles of Non-adherent Materials. 22nd Conference of the European Wound Management Association. 2012.
2. Bianchi J and Gray D. Adaptic Touch non-adherent dressing. *Wounds UK*. 2011; Vol. 7(1).
3. Bianchi J. Consensus guidance for the use of Adaptic Touch non-adherent dressing. *Wounds UK*. 2011; Vol. 7(3).

3M™ Adaptic™

Nicht haftender Wundverband

Worum handelt es sich?


Adaptic ist ein Primärverband aus einem Celluloseacetat-Netz, das mit einer speziellen Petrolatum-Emulsion imprägniert ist.

Wie funktioniert es?

Das einzigartige Celluloseacetat-Maschennetz des Adaptic Verbandes schützt das sich neu bildende Gewebe, indem es Traumata beim Verbandwechsel minimiert.¹

Die Porengröße des Adaptic Verbandes ermöglicht es dem Exsudat ungehindert zum Sekundärverband durchzudringen, sodass das Risiko einer Exsudatansammlung und einer Mazeration an der Wunde minimiert wird.¹

Adaptic reduziert auch das Risiko, dass Gewebe entweder am Adaptic Verband oder am Sekundärverband anhaftet.¹ Darüberhinaus schützt Adaptic die Wunde und minimiert die Schmerzen.¹

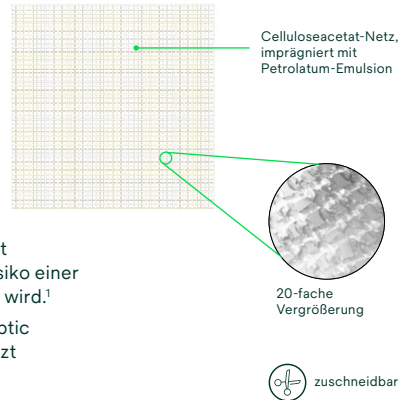

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Adaptic ist indiziert für trockene bis stark exsudierende Wunden, bei denen ein Verkleben (von Verband mit dem Exsudat) verhindert werden soll: Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Platzwunden und Abschürfungen, Transplantationen, venöse Ulcera, Dekubitus, Nagelextraktionen, Ekzeme sowie chirurgischen Inzisionen und rekonstruktiven Prozeduren.

Adaptic kann unter ärztlicher Aufsicht im Rahmen einer Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) eingesetzt werden, um empfindlicher Wundstrukturen zu schützen. Ebenso kann Adaptic in Kombination mit der Kompressionstherapie angewendet werden.²

Je nach Art der Wunde, Menge des Exsudats und klinischer Situation kann Adaptic mehrere Tage lang auf der Wunde belassen werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
2012	7,6 × 7,6 cm	50	18059614
2012Z	7,6 × 7,6 cm	10	01228159
2013	7,6 × 20,3 cm	108	03135309
2015	7,6 × 20,3 cm	24	18059620
2015Z	7,6 × 20,3 cm	10	01228165
2014	7,6 × 40,6 cm	36	01231339
2019	12,7 × 22,9 cm	12	06641036

Quellenangaben

1. Terrill P und Varughese G. A comparison of three primary non-adherent dressings applied to hand surgery wounds. *J. Wound Care.* 2000; 9:359–363.
2. Vin F *et al.* The healing properties of Promogran in venous leg ulcers. *J. Wound Care.* 2002; 11(9):335–41.

3M™ Adaptic™ Touch

Nicht haftender Silikon-Wundverband

Worum handelt es sich?

Adaptic Touch ist ein eine flexible, offenmaschige Wundkontaktschicht mit optimierter Porengröße durch die Flüssigkeit ungehindert¹ zum saugfähigen Sekundärverband vordringen kann.²

Wie funktioniert es?

Die optimierte Porengröße ermöglicht die Sicht auf die darunterliegende Wunde, ohne dass der Verband abgenommen und der Wundheilungsprozess gestört werden muss.¹

Der Adaptic Touch Verband schützt die Wunde und minimiert Traumata und Schmerzen beim Verbandwechsel³ sowie das Risiko des Einwachsens von Granulationsgewebe.^{4,5} Das sanft haftende Silikon verhindert das Anhaften des Sekundärverbandes an der Wunde.^{3,6}

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Adaptic Touch ist ausgelegt als primäre Wundkontaktschicht für die Behandlung trockener bis stark exsudierender Wunden sowie tiefer und oberflächlicher chronischer Wunden, einschließlich:

- Venöse Ulcera
- Dekubitus
- Diabetische Ulcera
- Traumatische und chirurgische Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Verbrennungen ersten und zweiten Grades


Adaptic Touch kann unter ärztlicher Aufsicht zur Anwendung im Rahmen einer Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) eingesetzt werden, um empfindliche Wundstrukturen zu schützen. Ebenso kann Adaptic Touch in Kombination mit der Kompressionstherapie angewendet werden. Je nach Menge des Exsudats kann Adaptic Touch mehrere Tage lang auf der Wunde belassen werden. Adaptic Touch ist anpassungsfähig und kann nach Bedarf zugeschnitten werden, ohne dass die physikalische Integrität des Verbandes beim Schneiden verloren geht.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
TCH501	7,6 x 5 cm	10	06579892
TCH502	7,6 x 11 cm	10	06579900
TCH503	12,7 x 15 cm	10	06579917
TCH504	20 x 32 cm	5	06579923
TCH501D	7,6 x 5 cm (Spenderbox)	75	09442432
TCH502D	7,6 x 11 cm (Spenderbox)	75	09442455
TCH502D120	7,6 x 11 cm (Spenderbox)	120	10944587
TCH503D	12,7 x 15 cm (Spenderbox)	50	09442461

Quellenangaben

1. Stephens S et al. Evaluation of a new non-adhering silicone wound contact dressing with optimised design for the management of dry to highly exuding wounds. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 15–17, 2010; Harrogate, UK.
2. Ivins N, Harding K. A series of case studies using a non-adhering silicone dressing. Poster presented at: EWMA; May 25–27, 2011; Brussels, BE.
3. International case series: Using Adaptic Touch Non-Adhering Silicone Dressing: Case Studies. London: Wounds International. 2013.
4. Bianchi J. Consensus guidance for the use of Adaptic Touch Non-Adherent Dressing. *Wounds UK*. 2011.
5. Brosnan P et al. The design principles of non-adherent materials. Poster presented at: EWMA; May 23–25, 2012; Vienna, Austria.
6. Bianchi J, Gray D. Adaptic Touch Non-Adherent Dressing. *Wounds UK*. 2011; 7(1).

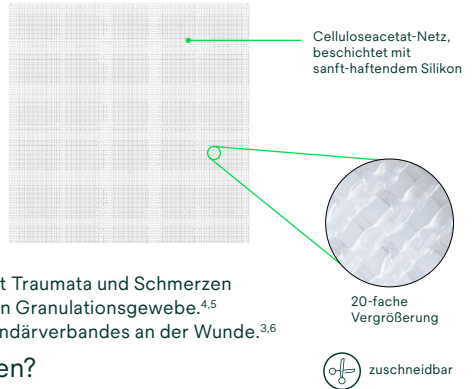

3M™ Adaptic™ Digit

Nicht haftender Silikon-Wundverband

Worum handelt es sich?

Adaptic Digit besteht aus einem einzigartigen, nicht haftendem, silikonbeschichteten Gewebe, das mit einem Schlauchverband bedeckt ist. Er ist speziell als Verband für Finger und Zehen konzipiert.

Wie funktioniert es?

Adaptic Digit schützt das Wundbett und verhindert ein Anhaften des Verbandes, indem er hilft, das damit verbundene Trauma zu minimieren. Er ist anpassungsfähig und ermöglicht so eine maximale Flexibilität der Finger/Zehen.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Der Adaptic Digit Verband ist indiziert zur Behandlung leichter bis schwerer Verletzungen an Fingern und Zehen wie:

- Platzwunden und Abschürfungen
- Traumatischen Verletzungen
- Chirurgische Inzisionen und rekonstruktive Prozeduren
- Nagelextraktionen
- Nähte

Der Adaptic Digit Verband kann als Primär- oder Sekundärverband eingesetzt werden.

Zum Anlegen und Entfernen sind weder Applikator noch Schere erforderlich, was dem Patienten ermöglicht, den Verbandwechsel zu Hause selbst vorzunehmen.




Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
3M™ Adaptic™ Digit Nicht haftender Fingerverband			
MAD003	S 2 cm	10	08410654
MAD013	M 2,4 cm	10	08410660
MAD013D	M 2,4 cm (Spenderbox)	85	10843461
MAD023	L 2,8 cm	10	08410677
MAD023D	L 2,8 cm (Spenderbox)	85	10843478
MAD042	XL 3 cm	10	08410683
3M™ Adaptic™ Digit Nicht haftender Zehenverband			
MAD062	L 2,8 cm	10	08410708
MAD062D	L 2,8 cm (Spenderbox)	85	10843484

Exsudatmanagement

Eine optimale Wundheilung hängt von der richtigen Feuchtigkeit des Wundmilieus ab. Dies erfordert ein Exsudatmanagement. Sie benötigen einen Verband, der den richtigen Grad an Feuchtigkeit in jeder Phase der Wundheilung sicherstellt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich in Abhängigkeit von der bakteriellen Belastung das Aufkommen von Exsudat erhöhen kann. Die Aufrechterhaltung eines feuchten Milieus zur Wundheilung bei gleichzeitigem Schutz der Wundumgebung vor Feuchtigkeit oder einem Austrocknen ist möglich – und sie spielt nachweislich eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Heilung von exsudierenden Wunden.¹

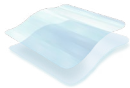Exsudatmanagement			
Trocken ●●●●	Schwach ●●●●	Mäßig ●●●●	Stark ●●●●
 3M™ Tegaderm™ Film Transparentverband Feuchtigkeitsspendend  3M™ Kerralite Cool™ Feuchtigkeitsregulierende Hydrogelwundauflage  3M™ Nu-Gel™ Hydrogel mit Alginat  3M™ Kerrasol™ Wundgel  3M™ Kerrasol™ Wundsprüher	 3M™ Tegaderm™ Absorbent Transparenter Hydroaktivverband	 3M™ Tegaderm™ Foam Hochleistungsfähiger, nicht klebender Schaumverband  3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Hochleistungsfähiger, klebender Schaumverband  3M™ Tegaderm™ Alginate Alginatverband  3M™ Kerracel™ Gelbildende Wundauflage	 3M™ Kerramax Care™ Superabsorbierende Wundauflage
Transparentverband und Hydrogel	Acrylat-Polymer	Schaumstoff, Alginat und Hydrofaser	Superabsorber

Quellenangaben

1. NPIAP. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. 2019; 235.

3M™ Tegaderm™ Film

Transparentverband

Worum handelt es sich?

Tegaderm Film wird zum Abdecken und Schützen von Kathetereinstichstellen, oberflächlichen Wunden, zur Aufrechterhaltung eines idealfeuchten Wundmilieus, als Sekundärverbände, als schützende Abdeckung gefährdeter Haut, zum Fixieren von Medizinprodukten auf der Haut sowie als Augenschutz verwendet.

Tegaderm Film lässt sich auch zur Aufrechterhaltung eines idealfeuchten Wundmilieus einsetzen, um die autolytische Wundreinigung zu unterstützen.



Wie funktioniert es?

Tegaderm Film besteht aus einem dünnen Polyurethanfilm mit einem hautfreundlichen, latexfreien Klebstoff, der schonend aber sicher an der Haut haftet. Die Verbände sind atmungsaktiv, steril, transparent und wasserfest. Zudem bieten sie Schutz vor externen Verunreinigungen und sind undurchlässig für Bakterien und Viren.[#]

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Empfohlene Anwendungen:

- Kathetereinstichstellen
- Akute und chronische Wunden
- Hautschutz
- Ernährungssonden

Der Tegaderm Film Verband ist strahlendurchlässig; es ist nicht erforderlich, ihn vor dem Röntgen abzunehmen.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
1622NP	4,4 x 4,4 cm	5	07194881
1622W	4,4 x 4,4 cm	100	02094790
1624NP	6 x 7 cm	5	07194898
1624W	6 x 7 cm	100	02097989
1630NP	10 x 11,5 cm	5	07194906
1630W	10 x 11,5 cm	50	02102880
1626NP	10 x 12 cm	5	07194929
1627	10 x 25 cm	20	02100361
1628	15 x 20 cm	10	02100378
1629	20 x 30 cm	10	02105542

[#] *In-vitro*-Tests belegen, dass der transparente Film eine Barriere für Bakterien und Viren mit einem Durchmesser von 27nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist.

3M™ Kerralite Cool™

Feuchtigkeitsregulierende Hydrogelwundauflage

Worum handelt es sich?

Kerralite Cool ist eine sterile, feuchtigkeitsregulierende Hydrogelwundauflage, die aus einem Polyurethan-Film und einer Hydrogelschicht mit einem Polypropylenetz als Trägerstruktur besteht.

Wie funktioniert es?

Kerralite Cool Verbände reagieren auf die Wundbedingungen, indem sie je nach Bedarf Flüssigkeit abgeben oder absorbieren. Diese Interaktion mit dem Wundbett reguliert den Feuchtigkeitsgehalt, fördert das autolytische Debridement und die Granulation und bildet so die optimalen Bedingungen für die Wundheilung bei gleichzeitiger Minimierung des Wundschmerzes.

Der äußere Polyurethan-Film ist flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv und schützt die Wunde vor Bakterien sowie vor äußeren Einflüssen. Dabei ist er zugleich wasserdampfdurchlässig.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?


Kerralite Cool kann zur Behandlung chronischer und schmerzhafter Wunden sowie bei Hautschädigungen verwendet werden wie:

- Venöse Ulcera
- Schädigungen durch Strahlentherapie
- Verbrennungen und Verbrühungen

Das Produkt kann bei schwach oder nicht-exsudierenden Wunden verwendet werden, um die autolytische Wundreinigung durch Hydrierung von nekrotischem und fibrinösem Gewebe zu fördern und um Exsudat zu absorbieren.

Bestellinformationen


Artikel-Nr.	Abmessung	Abmessung Wundauflage	Stück/Packung	PZN
3M™ Kerralite Cool™ Feuchtigkeitsregulierende Hydrogelwundauflage				
CWL1004	6 × 6 cm	–	5	11140454
CWL1005	12 × 8,5 cm	–	5	11140460
CWL1006	18 × 12,5 cm	–	5	11140477
3M™ Kerralite Cool™ Border Feuchtigkeitsregulierende Hydrogelwundauflage mit Haftrand				
CWL1007	8 × 8 cm	5 × 5 cm	5	11140572
CWL1008	11 × 11 cm	7,2 × 7,2 cm	5	11140589
CLW1009	15 × 15 cm	11,5 × 11,5 cm	5	11140595

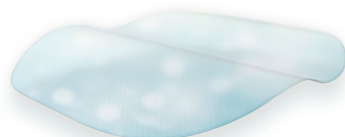

3M™ Kerralite Cool™
Feuchtigkeitsregulierende
Hydrogelwundauflage
(wasserabweisend)



zuschneidbar

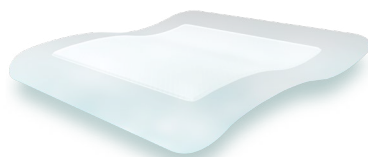

3M™ Kerralite Cool™ Border
Feuchtigkeitsregulierende
Hydrogelwundauflage
mit Haftrand (wasserdicht)

3M™ Nu-Gel™

Hydrogel mit Alginat

Worum handelt es sich?

Nu-Gel Hydrogel mit Alginat ist ein transparentes, hydroaktives, amorphes Gel, dass durch die Rehydrierung der Wunde nekrotisches Gewebe und fibrinösen Schorf sanft und effektiv debridiert.

Wie funktioniert es?

Die Hydrogelkomponente sorgt für ein feuchtes Wundmilieu, welches das natürliche autolytische Debridement unterstützt, indem es Feuchtigkeit an das Wundbett abgibt, während die Alginatkomponente die Absorptionsfähigkeit erhöht.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Nu-Gel kann bei allen Phasen des Wundheilungsprozesses zur Behandlung chronischer Wunden verwendet werden. Nu-Gel sollte ca. 5 mm dick aufgetragen werden und kann bis zu 3 Tage auf der Wunde verbleiben.



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
MNG415N	15 g	3	00165468
MNG415	15 g	10	18059637
MNG425	25 g	6	07222560

Quellenangaben

1. Young T *et al.* A study of two hydrogels used in the management of pressure sores. Study presented at: European Wound Management Association, 1996; Amsterdam, NL.

3M™ Kerrasol™

Wundgel

Worum handelt es sich?

Das Wundgel dient dem Reinigen und Befeuchten der Wunde und zur Vorbeugung einer Infektion.

Das Kerrasol Wundgel hält die Wunde feucht und fördert so den Wundheilungsprozess.

Es ist wirksam konserviert gegen Bakterien und Pilze.^{1,3} Es bestehen keine bekannten Resistenzen.² Die Anwendung ist nahezu schmerzfrei^{1,2} und es bestehen hinsichtlich der Anwendungsdauer keinerlei Einschränkungen.

Die Produkte wirken direkt in der Wunde und reduzieren unangenehme Wundgerüche.

Wirksam dank der ECA-Technologie

Alle Kerrasol Produkte beruhen auf der Verwendung der ECA (elektrochemische Aktivierung)-Technologie. Dadurch werden Lösungen mit speziellen physikochemischen und katalytischen Eigenschaften erzeugt, die nicht nur wirksam, sondern auch stabil und sehr gut verträglich sind, da sie auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren.



Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
CWL1154	20 g Tube	1	11341112

Quellenangaben

1. Kapur V, Mawaha AK. *Indian J Surg.* 2011; 73(1): 48–53.
2. Kramer A, Dissemmond J, Kim S et al. *Skin Pharmacol Physiol.* 2018; 31(1): 28–58.
3. Brill FH. Gutachten zur antimikrobiellen Wirksamkeit und Verträglichkeit von ProntoSol. Institute für Hygiene und Mikrobiologie. 2013.

3M™ Kerrasol™

Wundsprühgel

Worum handelt es sich?

Das Kerrasol Wundsprühgel dient dem Reinigen und Befeuchten der Wunde und zur Vorbeugung einer Infektion.

Das Kerrasol Wundsprühgel ist wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze.^{1,3} Das konservierende Natriumhypochlorit in den Kerrasol Produkten wirkt außerdem gegen gram-negative Bakterien wie beispielsweise *Pseudomonas* oder pathogene Hefen. Es bestehen keine bekannten Resistenzen.² Die Anwendung ist nahezu schmerzfrei^{1,2} und es bestehen hinsichtlich der Anwendungsdauer keinerlei Einschränkungen.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und wirkt direkt in der Wunde. Unangenehme Wundgerüche werden reduziert.



Wirksam dank der ECA-Technologie

Alle Kerrasol Produkte beruhen auf der Verwendung der ECA (elektrochemische Aktivierung)-Technologie. Dadurch werden Lösungen mit speziellen physikochemischen und katalytischen Eigenschaften erzeugt, die nicht nur wirksam, sondern auch stabil und sehr gut verträglich sind, da sie auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stück/Packung	PZN
CWL1153	75 ml Sprühflasche	1	11341135

Quellenangaben

1. Kapur V, Mawaha AK. *Indian J Surg.* 2011; 73(1): 48–53.
2. Kramer A, Dissemmond J, Kim S et al. *Skin Pharmacol Physiol.* 2018; 31(1): 28–58.
3. Brill FH. Gutachten zur antimikrobiellen Wirksamkeit und Verträglichkeit von ProntoSol. Institute für Hygiene und Mikrobiologie. 2013.

3M™ Tegaderm™ Absorbent

Transparenter Hydroaktivverband

Worum handelt es sich?

Tegaderm Absorbent ist ein einzigartiger transparenter Hydroaktivverband mit absorbierenden Eigenschaften, der freie Sicht auf die Wunde oder chirurgische Inzisionen ermöglicht. Er stellt einen wasserabweisenden, transparenten Schutz dar, der eine kontrollierte Wundbeobachtung ohne Verbandwechsel ermöglicht, ohne dass die Wunde oder Inzision beeinträchtigt wird bzw. der Verband gewechselt werden muss.

Wie funktioniert es?

Seine neuartige Acrylat-Polymer-Auflage ist atmungsaktiv und darauf ausgelegt, geringe bis moderate Mengen an Exsudat zu absorbieren, um ein optimales Wundmilieu zu fördern. Die längere Tragedauer von mindestens 7 Tagen bis zu 28 Tagen sorgt dafür, dass Patienten über ihren Krankenhausaufenthalt hinaus auch zu Hause länger geschützt bleiben. Zudem verhindert der sehr dünne, glatte Kleberand ein vorzeitiges Aufrollen des Randes und dient als Schutz vor externen Verunreinigungen, Körperflüssigkeiten, Bakterien und Viren.[#]



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Empfohlene Anwendungen:

- Oberflächliche und tiefe Ulcera
- Einrisse fragiler Haut
- Dekubitus
- Oberflächliche Wunden und Abschürfungen
- Verbrennungen bis Grad IIa
- Spalthautentnahmestellen
- Saubere, geschlossene, adaptierte chirurgische Inzisionen oder laparoskopische Inzisionen

Tegaderm Absorbent lässt sich auch als Schutzverband bei gefährdeter ungeschädigter Haut oder bei Haut, bei der erste Anzeichen einer Schädigung durch Reibung oder Scherkräfte sichtbar sind, verwenden.

[#] *In-vitro*-Tests belegen, dass der transparente Film eine Barriere für Bakterien und Viren mit einem Durchmesser von 27nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Abmessung Wundauflage	Stück/Packung	PZN
90800	7,6 x 9,5 cm (oval)	3,8 x 5,7 cm	10	17983225
90801	11,1 x 12,7 cm (oval)	6 x 7,6 cm	10	17983231
90803	14,2 x 15,8 cm (oval)	8,5 x 10,7 cm	10	17983254
90802	14,9 x 15,2 cm (quadratisch)	9,8 x 10,1 cm	10	17983248
90805	20 x 20,3 cm (quadratisch)	14,9 x 15,2 cm	10	17983260
90815	9 x 25 cm (rechteckig)	4,5 x 20 cm	30	17606847
90817	9 x 35 cm (rechteckig)	4,5 x 30 cm	30	17606853

3M™ Tegaderm™ Foam

Hochleistungsfähiger, nicht klebender Schaumverband

Worum handelt es sich?

Tegaderm Foam ist ein feinporiger und hochabsorbierender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeitsregulierender Schicht.

Wie funktioniert es?

Der hochabsorbierende Schaum gewährleistet durch seinen einzigartigen 4-Lagen-Aufbau ein besonders effizientes Exsudatmanagement. Die starke Saugfähigkeit und Atmungsaktivität reduziert das Risiko von Mazerationen. Die transparente Folie verhindert ein Durchnässen und wirkt als Barriere gegen Kontamination von außen, einschließlich Viren.[#]

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Tegaderm Foam kann als Primär- oder Sekundärverband bei schwach bis stark exsudierenden, chronischen und akuten sowie oberflächlichen bis tiefen Wunden verwendet werden.

- Dekubitus
- Venöse Ulcera
- Arterielle Ulcera
- Neuropathische Ulcera
- Einrisse fragiler Haut
- Chirurgische Wunden
- Abschürfungen
- Austrittsstellen von Drainagen

Tegaderm Foam kann individuell zugeschnitten und bis zu 7 Tage getragen werden. Auch in Kombination mit der Kompressionstherapie geeignet.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
90600	5 x 5 cm (quadratisch)	10	16394656
90601	10 x 10 cm (quadratisch)	10	16394662
90602	10 x 20 cm (rechteckig)	5	16394679
90603	20 x 20 cm (quadratisch)	5	16394685
90604	8,8 x 8,8 cm (quadratisch, gesschlitzt)	10	16394691



zuschneidbar

[#] *In-vitro*-Tests belegen, dass der transparente Film eine Barriere für Bakterien und Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist.

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Hochleistungsfähiger, klebender Schaumverband

Worum handelt es sich?

Tegaderm Foam Adhesive ist ein feinporiger und hochabsorbierender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeitsregulierender Schicht. Er zeichnet sich durch seinen dünnen Kleberand und das patentierte Speichenapplikationssystem aus.

Wie funktioniert es?

Der hochabsorbierende Schaum gewährleistet durch seinen einzigartigen Aufbau ein besonders effizientes Exsudatmanagement. Seine starke Saugfähigkeit und Atmungsaktivität reduziert das Risiko von Mazerationen. Der dünne Kleberand sorgt für einen perfekten Sitz und sicheren Halt auch an prominenten Körperstellen und verhindert ein vorzeitiges Aufrollen bei Reibung. Zudem verhindert er ein Durchnässen und schützt vor externen Bakterien und Viren.[#]

Das patentierte Speichenapplikationssystem ermöglicht die Applikation mit nur einer Hand. Die spezielle Kleeblattform ermöglicht ein einfaches Anlegen an schwierigen Körperkonturen wie Finger und Zehen.^{##}



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Tegaderm Foam Adhesive lässt sich einfach und ohne Zuschneiden an schwierigen Körperkonturen applizieren, einschließlich den Fersen und Ellenbogen. Der Verband ist als Primär- oder Sekundärverband für schwach bis stark exsudierende, tiefe und oberflächliche Wunden geeignet.

Empfohlene Anwendungen:

- Dekubitus
- Venöse Ulcera
- OP- und Schürfwunden
- Arterielle Ulcera
- Einrisse fragiler Haut
- Neuropathische Ulcera
- Diabetische Fußulcera

Tegaderm Foam Adhesive kann zur Behandlung von venösen Ulcera in Kombination mit der Kompressionstherapie angewandt werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Abmessung Wundauflage	Stück/Packung	PZN
90610	8,8 x 8,8 cm (quadratisch)	5 x 5 cm	10	16394722
90611	10 x 11 cm (oval)	6 x 7,6 cm	10	16394739
90612	14,3 x 14,3 cm (quadratisch)	10 x 10 cm	10	16394745
90613	14,3 x 15,6 cm (oval)	10 x 11 cm	5	16394751
90614	6,9 x 7,6 cm (mini, oval)	3,1 x 3,8 cm	10	16394768
90615	6,9 x 6,9 cm (Kleeblatt-Form)	2,5 x 2,5 cm	10	16394774
90616	19 x 22,2 cm (oval)	14 x 17,1 cm	5	16394805
90619	13,9 x 13,9 cm (Fersen/Ellenbogen)	7,6 x 7,6 cm	5	16394811

[#] *In-vitro*-Tests belegen, dass die transparente Folie eine Barriere für Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist.

^{##} Der Verband besteht aus einer anpassungsfähigen, saugfähigen Polyurethanschaumlage mit einer hoch atmungsaktiven, nicht wasserdichten Folienlage, die mit einem weichen Vliesmaterial verstärkt ist

3M™ Tegaderm™ Alginate

Alginatverband

Worum handelt es sich?

Tegaderm Alginate ist eine hoch absorbierende Komresse/Tamponade aus sterilen Calciumalginatfasern.

Wie funktioniert es?

Das Alginat hat eine hohe Absorptionsfähigkeit bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes und bildet zusammen mit dem Wundexsudat eine anpassungsfähige gallertartige Schicht und schließt Keime und Zelltrümmer ein. Tegaderm Alginat hilft kleinere Blutungen zu kontrollieren und fördert die autolytische Wundreinigung. Der Verband verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich gut in einem Stück entfernen.



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Tegaderm Alginate wird für mäßig bis stark exsudierende, tiefe Wunden empfohlen:

- Dekubitalulcera
- Oberflächliche Wunden
- Spalthautentnahmestellen und Transplantationsstellen
- Postoperative Wunden
- Traumatische Wunden
- Venöse und arterielle Beinulcera
- Diabetische Ulcera
- Verbrennungen bis Grad IIa

Tegaderm Alginate kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben, je nach Zustand des Patienten und der Exsudatmenge. Kann auch unter Kompression verwendet werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
90110	5 x 5 cm	10	04971367
90112	10 x 10 cm	10	04971373
90114	20 x 10 cm	5	04971396
90120	30,4 x 2 cm (Tamponade)	5	04971404

3M™ Kerracel™


Gelbildende Wundauflage

Worum handelt es sich?

Kerracel ist ein vielseitiger Hydrofaserverband, der aus 100% Carboxymethylcellulose (CMC)-Fasern hergestellt wird und hohe Mengen Exsudat absorbiert und bindet.

Wie funktioniert es?

Kerracel absorbiert Wundexsudat in hohem Maße vertikal und hält es fest.^{1,#} Dabei bildet er ein Gel,^{1,#} das sich an den Wundgrund anpasst und ein feuchtes Wundmilieu fördert. Selbst im gesättigten Zustand hat Kerracel eine hohe Zufestigkeit, wodurch eine vollständige Entfernung ermöglicht wird. Das nahtlose Design sorgt so für eine noch bessere Mikrokonturierung an den Wundgrund,^{2,#} sodass der Totraum, in dem sich Bakterien ausbreiten könnten, minimiert wird.^{2,#}

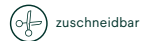

zuschneidbar

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Kerracel ist für die Versorgung mäßig bis stark exsudierender akuter und chronischer, sowie tiefer und oberflächlicher Wunden indiziert:

- Venöse Ulcera
- Dekubitus
- Diabetische Fußulcera
- Traumatische und chirurgische Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Wundhöhlen
- Verbrennungen bis Grad IIa
- Onkologische Wunden
- Stillung leichter Blutungen an oberflächlichen Wunden

Hohes Absorptions- und Rückhaltevermögen von Kerracel auch unter Kompression. Kerracel kann zugeschnitten werden und bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
CWL1032	5 x 5 cm	10	11869646
CWL1166	10 x 10 cm	10	11869652
CWL1034	15 x 15 cm	5	11869669
CWL1035	45 x 2,5 cm (Tamponade)	5	11869675

Wie in vitro gezeigt wurde.

Quellenangaben

1. Erbogasto D. Physical testing of Kerracel™ Dressing and market competitors. R&D Trial Report CHC R1004. Knutsford, UK. Crawford Healthcare. 2020.
2. Lovett J, Stephenson C. An assessment of the intimate wound contact properties of Kerracel™ Dressings. CHL-032. University of Manchester, UK. 2014.

3M™ Kerramax Care™

Superabsorbierende Wundauflage

Worum handelt es sich?

Kerramax Care ist ein Primär- oder Sekundärverband mit fortschrittlicher Exu-Safe™ Technologie zur Verbesserung des Exsudatmanagements.

Wie funktioniert es?

Kerramax Care absorbiert und bindet große Mengen an Exsudat, wodurch das Risiko von Hautmazerationen reduziert wird, selbst unter Kompression.¹⁻³ Auch sind durch die hohe Absorption und Retention weniger Verbandwechsel notwendig, was Störungen am Wundbett minimiert.^{1,2} Der superabsorbierende Kern mit Exu-Safe™ Technologie hilft dabei, die im Wundexsudat vorhandenen Bakterien und Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) im Verbandskern zu binden.^{4#}

Kerramax Care ist äußerst anpassungsfähig, beidseitig anwendbar und kann gefaltet werden, wodurch eine Vielzahl unterschiedlicher Wunden versorgt werden kann.⁵ Der hitzeversiegelte Rand verhindert das Austreten von Wundexsudat und hält den Verband stabil und intakt.^{3#}

Wann sollte das Produkt angewendet werden?


Kerramax Care Verbände eignen sich für akute und chronische Wunden, die mäßig bis sehr stark exsudieren, einschließlich Ulcus cruris, Dekubitus und Diabetische Fußulcera. Der Verband ist mit und ohne Hafttrand erhältlich und kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Abmessung Wundauflage	Stück/Packung	PZN
3M™ Kerramax Care™ Superabsorbierende Wundauflage				
PRD500-025	5 x 5 cm		10	11158419
PRD500-050	10 x 10 cm		10	11140365
PRD500-050-B50	10 x 10 cm		50	12548737
PRD500-120	10 x 22 cm		10	11140371
PRD500-120-B50	10 x 22 cm		50	12548766
PRD500-240	20 x 22 cm		10	11140388
PRD500-240-B30	20 x 22 cm		30	12548772
PRD500-380-B10	20 x 30 cm		10	14056346
PRD500-380-B30	20 x 30 cm		30	12548789
PRD500-600-B10	20 x 50 cm		10	14056323
3M™ Kerramax Care™ Superabsorbierende Wundauflage mit Hafttrand				
CWL1000	16 x 16 cm (quadratisch)	6,5 x 8,5 cm	5	11140425
CWL1001	16 x 26 cm (rechteckig)	8 x 18 cm	5	11140431
CWL1002	26 x 26 cm (quadratisch)	18 x 17 cm	5	11140448



3M™ Kerramax Care™
Superabsorbierende Wundauflage

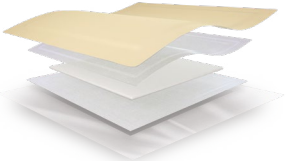

3M™ Kerramax Care™
Superabsorbierende Wundauflage
mit Hafttrand



darf nicht zugeschnitten werden

1. Hughes M A, Jones J. A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community. *Wounds UK*. 2017; 13 (3): 78–85.
2. Jones J, Barraud J. An evaluation of Kerramax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds.
3. Hughes, M A, et al. 3M™ Kerramax Care™ Super Absorbent Dressing and 3M™ Coban™ 2 Two-Layer Compression System case series supplement. *Wounds International* (2022), London, UK.
4. Singh G, Byrne C, Thomason H, McBain A. Investigating the microbial and metalloprotease sequestration properties of superabsorbent wound dressings. *Sci Rep*. 2022; 12 (1): 4747.
5. Jackson S, Lovett J, Stephenson C. An assessment of the conformability of superabsorbent dressings. Poster presentato presso: Wounds UK Annual Conference 2016, UK.

Kompression

Die Kompressionstherapie ist der Goldstandard zur Versorgung von Ulcus cruris venosum (UCV) und verbessert nachweislich die Heilungsraten im Vergleich zu Behandlungen ohne Kompression.¹ Studien weisen darauf hin, dass Bandagen oder Mehrlagen-Kompressionssysteme, die einen unelastischen Verband bilden, die nötige Stabilität bieten, um den venösen Pumpmechanismus wirksam zu unterstützen.^{2,3}

Kompressionssysteme, die eine hohe Stabilität bieten, erzeugen nachweislich größere Druckunterschiede in den unteren Gliedmaßen während einer Aktivität⁴ als Systeme, die eine niedrigere Stabilität aufweisen, was sich in besseren Behandlungsergebnissen niederschlägt.⁵

Kompression



3M™ Coban™ 2
Zweilagen Kompressionssystem



3M™ Coban™ 2 Lite
Zweilagen Kompressionssystem

Zweilagen Kompression

Quellenangaben

1. O'Meara S, Cullum N, Nelson EA, Dumville JC. Compression for venous leg ulcers. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012.
2. Mosti G, Partsch H. Measuring venous pumping function by strain-gauge plethysmography. *International Angiology*. 2010; 29(5):421-425.
3. Partsch H. Understanding the pathophysiological effects of compression. In: EWMA Position Document: Understanding compression therapy. London: 2003.
4. Partsch H, Clark M, Mosti G *et al*. Classification of compression bandages: practical aspects. *Dermatol Surg*. 2008; 34:600-9.
5. Mosti G, Crespi A, Mattaliano V. Comparison Between a new, Two-component Compression System with Zinc Paste Bandages for Leg Ulcers Healing: A Prospective, Multicenter, Randomised, Controlled Trial Monitoring Sub-bandage Pressures. *Wounds*. 2011; 23(5):126-134.

3M™ Coban™ 2 und 3M™ Coban™ 2 Lite Zweilagige Kompressionssysteme

Worum handelt es sich?

Die Coban 2 Zweilagige Kompressionssysteme bestehen aus einer Komfort- und Kompressionslage. Die weiche Komfortlage aus offenporigem Polyurethanschaumstoff ist atmungsaktiv, polstern und rutscht nicht auf der Haut. Die kohäsive Kompressionslage wird über der Komfortlage angelegt und sorgt für eine wirksame, konstante und komfortable Kompression.

Wie funktioniert es?

Coban 2 Zweilagige Kompressionssysteme sind mit einer intelligenten Kompressionsdynamik konzipiert. Sie bieten eine hohe Stabilität, d. h. der erzeugte Druck ist bei der Mobilisierung wirksam und wird in Ruhe gut vertragen, was die Heilung fördert und die Wundgröße sowie Schmerzen nachweislich bei Ulcus cruris venosum verringert. Dies verbessert die Lebensqualität und Aktivität der Patienten.^{1,2}

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Das Coban 2 Zweilagige Kompressionssystem ist zur Behandlung von Ulcus cruris venosum, Ulcus cruris mixtum sowie von Lymphödemem indiziert und kann bis zu 7 Tage belassen werden. Einfach anzuwenden und individuell zuschneidbar für alle anatomischen Formen. Das Tragen normaler Schuhe und verbesserte Mobilität trägt zur Lebensqualität bei.

- Coban 2 kann bei Patienten mit einem ABPI von 0,8 oder höher verwendet werden
- Coban 2 Lite kann bei Patienten mit einem ABPI von 0,5 oder höher verwendet werden

Bestellinformationen



zuschneidbar

Quellenangaben

1. Moffatt C *et al.* A randomised controlled 8-week crossover clinical evaluation of the 3M™ Coban™ 2 Layer Compression System versus Profore™ to evaluate the product performance in patients with venous leg ulcers. *International Wound Journal*. 2008; 5(2), 267–279.
2. Mosti G, Crespi A, Mattaliano V. Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multicenter, Randomised, Controlled Trial Monitoring Sub-bandage Pressures. *Wounds UK*. 2011; 23(5):126–134.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
3M™ Coban™ 2 Zweilagige Kompressionssystem			
2094	1 Kit mit: 1 Rolle Komfortlage 10 cm x 2,7 m, 1 Rolle Kompressionslage 10 cm x 3,5 m	1	01529955
20014	10 cm x 3,5 m (Komfortlage)	18	07418470
20024	10 cm x 4,5 m (Kompressionslage)	32	07515807
20016	15 cm x 3,5 m (Komfortlage)	10	07418487
20026	15 cm x 4,5 m (Kompressionslage)	15	07515836
3M™ Coban™ 2 Lite Zweilagige Kompressionssystem			
2794E	1 Kit mit: 1 Rolle Komfortlage 10 cm x 2,7 m, 1 Rolle Kompressionslage 10 cm x 3,2 m	1	05749777
20721	2,5 cm x 3,5 m (Lite Kompressionslage)	36	07515670
20713	7,5 cm x 2,7 m (Lite Komfortlage)	18	07418263
20723	7,5 cm x 3,5 m (Lite Kompressionslage)	32	07515693
20714	10 cm x 2,7 m (Lite Komfortlage)	18	07418292
20724	10 cm x 3,5 m (Lite Kompressionslage)	32	07515718

Weitere Wundversorgungsmaterialien

Fixierung	Verbände	Kompressen	Wundverschluss
 3M™ Coban™ Selbsthaftender Stütz- und Fixierverband	 3M™ Medipore™ +Pad Wundverband mit nicht klebender	 3M™ Topper™ Sterile und unsterile Vliesstoffkompressen	 3M™ Steri-Strip™ Wundver- schlussstreifen
 3M™ Medipore™ H / 3M™ Medipore™ auf Liner Fixationsvlies	 3M™ Tegaderm™ +Pad Steriler Transparentverband mit nicht klebender Wundauflage		
 3M™ Micropore™ S Silikonrollenfaster			
 3M™ Tegaderm™ Roll Transparentverband, gerollt, unsteril			

3M™ Coban™ und 3M™ Coban™ NL

Selbsthaftender Stütz- und Fixierverband

Worum handelt es sich?

Coban ist ein selbsthaftender, offenporiger und elastischer Stütz- und Fixierverband aus hautfreundlichen, ungewebten Polyesterfasern mit integrierten Polyester-Urethanfilamenten.

Wie funktioniert es?

- Haftet nur auf sich selbst, nicht auf Haut, Haaren oder Kleidung
- Lockert und verrutscht nicht
- Angenehmes, hautfreundliches, atmungsaktives Material
- Leicht zu applizieren und zu entfernen
- Auch in steriler Ausführung erhältlich: ideal für die Anwendung im OP



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Für den vielseitigen Einsatz, wie z. B. zur Fixierung von Primärverbänden und Schienen, zur Ruhigstellung bei Verletzungen oder zur Stabilisierung von Gelenken bei Verstauchungen, Zerrungen und Überdehnungen.

Coban und Coban NL kann bis zu 7 Tagen am Körper verbleiben.



zuschneidbar
(Coban NL ist auch reißbar)

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Stück/Packung	PZN
3M™ Coban™ NL (latexfrei), hautfarben				
2081T	2,5 cm x 4,5 m gedehnt	beige	18	18065980
2082	5 cm x 4,5 m gedehnt	beige	36	15292899
2083	7,5 cm x 4,5 m gedehnt	beige	24	15292907
2084	10 cm x 4,5 m gedehnt	beige	18	15292913
2084-1X*	10 cm x 1,5 m gedehnt	beige	18	16166381
2086	15 cm x 4,5 m gedehnt	beige	18	17931642
2082P	15cm x 4,5 m gedehnt	pink	36	18055885
2082O	5 cm x 4,5 m gedehnt	orange	36	18065891
2082B	5 cm x 4,5 m gedehnt	blau	36	18065922
2082G	5 cm x 4,5 m gedehnt	grün	36	18065939
2082N	5 cm x 4,5 m gedehnt	schwarz	36	18065945
2083P	7,5 cm x 4,5 m gedehnt	pink	24	18065951
2083O	7,5 cm x 4,5 m gedehnt	orange	24	18065968
2083B	7,5 cm x 4,5 m gedehnt	blau	24	18065974
2084S	10 cm x 4,5 m gedehnt (steril)	beige	18	15292936
3M™ Coban™ (latexhaltig)				
1581	2,5 cm x 4,5 m gedehnt	beige	30	15292787
1581B	2,5 cm x 4,5 m gedehnt	blau	30	15292793
1582	5 cm x 4,5 m gedehnt	beige	36	15292801
1582B	5 cm x 4,5 m gedehnt	blau	36	15292818
1583	7,5 cm x 4,5 m gedehnt	beige	24	15292824
1583B	7,5 cm x 4,5 m gedehnt	blau	24	15401992
1584	10 cm x 4,5 m gedehnt	beige	18	15292853
1586	15 cm x 4,5 m gedehnt	beige	12	19696062

3M™ Medipore™ H

3M™ Medipore™ auf Liner

Fixationsvlies

Worum handelt es sich?

Medipore auf Liner ist ein flexibles Fixationsvlies zum Zuschneiden (mit Liner) oder Medipore H zum Abreißen (perforiert), das mit einem hautfreundlichen Polyacrylatklebstoff beschichtet ist.

Wie funktioniert es?

Medipore passt sich durch die flexible Struktur sehr gut den Körperkonturen an und garantiert dadurch einen sicheren Halt.

- Weich, querelastisch und anschmiegsam – hoher Tragekomfort
- Gute Haftung
- Atmungsaktiv
- Latexfrei
- Geringes Dermatitis-Potenzial

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Medipore eignet sich für die nicht kritische Fixierung von Verbänden, Schläuchen, Kathetern oder Drainagen auf der Haut.



3M™ Medipore™ H

3M™ Medipore™ auf Liner



zuschneidbar

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
3M™ Medipore™ H, perforiert			
2860S-1*	2,5 cm × 1,8 m	72	16007866
2861	2,5 cm × 9,1 m	24	07478957
2860S-2*	2,5 cm × 1,8 m	48	16007872
2862	5 cm × 9,1 m	12	07478963
2863	7,5 cm × 9,1 m	12	07478986
2860S-4*	10 cm × 1,8 m	24	16007889
2864	10 cm × 9,1 m	12	07478992
2860S-6*	15 cm × 1,8 m	16	16007903
2860-6	15 cm × 9,1 m	6	19403835
2866	15 cm × 9,1 m	12	07479000
2868	20 cm × 9,1 m	6	07479017
3M™ Medipore™ auf Liner			
2991/1	5 cm × 10 m	24	18907172
2991/2	10 cm × 10 m	12	18907189
2991/3	15 cm × 10 m	12	18844230
2991/4	20 cm × 10 m	6	18844247
2991P-1**	5 cm × 10 m	1	16827569
2991P-2**	10 cm × 10 m	1	16827575
2991NP-3**	15 cm × 10 m	1	00225727

*Kurzrolle, einzeln verpackt.

**Einzelpackung

3M™ Micropore™ S

Silikonrollenpflaster

Worum handelt es sich?

Das Silikonrollenpflaster ist ein besonders hautschonendes, medizinisches Rollenpflaster aus Polyestervlies, das mit einem Silikonkleber ohne Polyacrylat beschichtet ist.

Wie funktioniert es?

- Sanft und angenehm zur Haut
- Einfach und hautschonend ablösbar
- Atmungsaktiv
- Repositionierbar
- Leicht längs und quer reißbar
- Latexfrei
- Minimiert die Schmerzen bei der Entfernung
- Lösemittelfreier Silikonklebstoff



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Das extra hautschonende Rollenpflaster eignet sich für generelle Fixierungen.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
2770-1	2,5 cm x 5 m	12	16015512
2770-2	5 cm x 5 m	6	16015529
2770S-1	2,5 cm x 1,37 m	100	16015535
2770S-2	5 cm x 1,37 m	50	16039895
2775NP-1*	2,5 cm x 5 m	1	09079813

* Einzelpackung für den niedergelassenen Bereich

3M™ Tegaderm™ Roll

Transparentverband, gerollt, unsteril

Worum handelt es sich?

Tegaderm Roll ist ein transparenter, unsteriler und elastischer Polyurethanthalm, der mit einem latexfreien, hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet ist.

Wie funktioniert es?

Tegaderm Roll ist sauerstoff- und wasserdampfdurchlässig, wasserdicht und bietet eine effektive Barriere gegen externe Kontamination einschließlich Flüssigkeiten, Bakterien, Viren* und Hefepilzen.

- Frei von PVC, Kolophonium und Naturkautschuklatex
- Anschmiegsam; passt sich den Körperkonturen an
- Einfache Applikation und Handhabung - auch mit Handschuhen
- Schutz beim Duschen oder Baden



zuschneidbar

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Tegaderm Roll kann als Sekundärverband in Kombination mit sterilen Verbänden verwendet werden. Als Primärverband kann er zum Schutz gefährdeter aber noch intakter Haut benutzt werden. Mit Tegaderm Roll können Medizinprodukte wie zum Beispiel Infusionsleitungen oder Drainageschläuche auf der Haut fixiert werden.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
16002	5 cm x 10 m	1 Rolle	03816506
16004	10 cm x 10 m	1 Rolle	03816512
16004S	10 cm x 2 m	1 Rolle	01559991
16006	15 cm x 10 m	1 Rolle	03816529

*In-vitro-Tests zeigen, dass der Transparentverband Schutz gegen Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder mehr bietet, solange der Verband intakt und dicht bleibt.

3M™ Medipore™ + Pad

Wundverband mit nicht klebender Wundauflage

Worum handelt es sich?

Medipore + Pad ist ein steriler Wundverband mit nicht klebender Wundauflage, bestehend aus einem weichen, ungewebten Polyestervlies mit absorbierender Wundauflage und Anti-Haft Polyethylengitter.

Wie funktioniert es?

Die weiche Wundauflage nimmt das Exsudat auf und vermeidet ein Verkleben mit der Wunde.

- Schnell und einfach applizierbarer Wundverband mit absorbierender Wundauflage
- steril, anschmiegsam, atmungsaktiv
- Abgerundete Ecken für sicheren und langen Halt



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Medipore + Pad ist für die schnelle Versorgung von postoperativen und akuten Wunden wie Schnittwunden, Schürfwunden und Platzwunden bei schwach bis mäßiger Exsudation indiziert.

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Abmessung	Abmessung Wundauflage	Stück/Packung	PZN
3562NP	5 x 7 cm	2,5 x 3,8 cm	5	07194792
3566NP	10 x 10 cm	5,5 x 5,5 cm	5	07194800
3569NP	10 x 15 cm	5 x 10,5 cm	5	07194817
3562E	5 x 7 cm	2,5 x 3,8 cm	50	01681143
3564E	6 x 10 cm	3,4 x 6,5 cm	50	01681189
3566E	10 x 10 cm	5 x 5,5 cm	25	01681203
3569E	10 x 15 cm	5 x 10,5 cm	25	01681232
3570E	10 x 20 cm	5 x 15,5 cm	25	01681249
3571E	10 x 25 cm	5 x 20,5 cm	25	01681284
3573E	10 x 35 cm	5 x 30 cm	25	01681367

3M™ Tegaderm™ + Pad

Steriler Transparentverband mit nicht klebender Wundauflage

Worum handelt es sich?

Tegaderm + Pad ist ein steriler Transparentverband mit nicht klebender Wundauflage bestehend aus einem dünnen, latexfreien Polyurethanfilm, einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber und einer nicht klebenden Wundauflage.

Wie funktioniert es?

Der Transparentverband mit nicht klebender Wundauflage bietet sicheren Schutz vor Wasser und Keimen. Dank der speziellen Beschichtung verklebt die saugfähige Wundauflage nicht mit der Wunde. Der Applikationsrahmen unterstützt zudem ein einfaches Anbringen auf die Wunde.

- Wasserdichter, steriler und atmungsaktiver Folienverband
- Duschen mit Verband möglich
- Schützt die Wunde vor Bakterien und Viren[#]
- Passt sich den Körperkonturen an
- Das nicht haftende, saugfähige Pad klebt nicht an der Wunde



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Der Tegaderm + Pad ist für die Abdeckung von oberflächlichen und tiefen Wunden, chirurgischen Inzisionen, Schnittverletzungen, Schürf- und Platzwunden und IV-Katheterzugangstellen indiziert.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Abmessung Wundauflage	Stück/Packung	PZN
3582NP	5 x 7 cm	2,5 x 4 cm	5	07194846
3584NP	6 x 10 cm	2,5 x 6 cm	5	07194852
3586NP	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	5	07194869
3589NP	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	5	07194875
3582E	5 x 7 cm	2,5 x 4 cm	50	07590418
3584E	6 x 10 cm	2,5 x 6 cm	50	03100481
3586E	9 x 10 cm	4,5 x 6 cm	25	07590424
3589E	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	25	07590430
3590E	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	25	07590447
3591E	9 x 25 cm	4,5 x 20 cm	25	07590453
3593E	9 x 35 cm	4,5 x 30 cm	25	07590476

[#] *In-vitro*-Tests zeigen, dass der Transparentverband Schutz gegen Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder mehr bietet, solange der Verband intakt und dicht bleibt.

3M™ Topper™ 8 Kompreße

3M™ Topper™ 12 Kompreße

Sterile und unsterile Vliesstoffkompreße

Worum handelt es sich?

Topper 8 und Topper 12 Kompreßen bestehen aus Viskose-Rayon-Vliesstoff und Polyester. Diese kostengünstigen, saugfähigen und fusselarmen Kompreßen eignen sich ideal für alle allgemeinen Wisch- und Reinigungsvorgänge im Zusammenhang mit der Wundversorgung.

Wie funktioniert es?

Das Viskose-/Polyestergewebe ist weich und strapazierfähig und weist ein minimales Allergiepotezial auf. Die gerippte Struktur sorgt für eine strukturierte Oberfläche, die die Entfernung von Verunreinigungen erleichtert.

Das Vliesgewebe ermöglicht eine Saugfähigkeit ohne zu fusseln, im Gegensatz zu Mullkompreßen, wodurch sie sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand leichter zu handhaben sind.¹

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Die Topper Kompreßen können bei allen allgemeinen Reinigungs- und Säuberungsvorgängen im Zusammenhang mit der Wundversorgung, im Speziellen zum Entfernen von Exsudat und getrocknetem Blut, verwendet werden.¹ Sie können auch verwendet werden, um Verbandreste von der Oberfläche der intakten Haut um die Wunde herum zu entfernen.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Kompreßen/Beutel	Kompreßen/Packung	Packungen/Karton	PZN
3M™ Topper™ 8 Kompreßen (4-lagig)					
M50405	5 x 5 cm (unsteril)	n.a	100	50	03420464
M50407N	7,5 x 7,5 cm (unsteril)	n.a	100	56	03420470
M50410	10 x 10 cm (unsteril)	n.a	100	40	03420487
M53405N	5 x 5 cm (unsteril)	n.a	200	42	03420292
M53407N	7,5 x 7,5 cm (unsteril)	n.a	200	28	03420300
M53410	10 x 10 cm (unsteril)	n.a	200	20	03420317
M53420	10 x 20 cm (unsteril)	n.a	200	10	03420323
M12507	7,5 x 7,5 cm (steril)	2	100 (=50 Beutel)	12	04515988
M12510	10 x 10 cm (steril)	2	100 (=50 Beutel)	16	04516002
TS8052	5 x 5 cm (steril)	2	120 (=60 Beutel)	24	08821245
TS8072	7,5 x 7,5 cm (steril)	2	100 (=50 Beutel)	36	03420352
TS8102	10 x 10 cm (steril)	2	150 (=75 Beutel)	16	08821251
TS8202	10 x 20 cm (steril)	2	100 (=50 Beutel)	6	03420375
3M™ Topper™ 12 Kompreßen (6-lagig)					
M53605N	5 x 5 cm (unsteril)	n.a	200	33	03420381
M53607N	7,5 x 7,5 cm (unsteril)	n.a	200	28	03420398
M53610N	10 x 10 cm (unsteril)	n.a	200	15	03420406
M53620N	10 x 20 cm (unsteril)	n.a	200	7	03420412
MCKK100	5 x 5 cm (steril)	5	100 (=20 Beutel)	18	04784375
TS1052	5 x 5 cm (steril)	2	90 (=45 Beutel)	24	08821280
TS1072	7,5 x 7,5 cm (steril)	2	80 (=40 Beutel)	36	08821297
TS1102	10 x 10 cm (steril)	2	140 (=70 Beutel)	16	08821305
TS1202	10 x 20 cm (steril)	2	70 (=35 Beutel)	6	08821311

1. Thomas S. et al. Comparing non-woven, filmated and woven gauzew swabs. *Journal of wound care*, 1993, Jan 2(1): 35–41.

3M™ Steri-Strip™

3M™ Steri-Strip™ Blendtone

Wundverschlussstreifen

Worum handelt es sich?

Die aus mikroporösem Kunstseidenmaterial gefertigten 3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussstreifen sind atmungsaktiv, exsudatdurchlässig und auch für sensible Haut geeignet. Der feuchtigkeitsresistente Acrylat-Klebstoff sorgt für perfekte Haftung und die Rayon-Fadenverstärkung* für hohe Zugfestigkeit.



Wie funktioniert es?

- Mikroporöse Kunstseide – atmungsaktiv und exsudatdurchlässig
- Universell einsetzbar
- Hohe Zugfestigkeit, verstärkt durch Rayonfäden* für mehr Festigkeit
- Atraumatischer Verschluss der Wunde
- Keine zusätzliche Lokalanästhesie erforderlich
- Hoher Patientenkomfort

*dies gilt nur für 3M™ Steri-Strip™

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

Steri-Strip verschließt kleine Schnitte und Wunden. Sie können auch in Verbindung mit Hautnähten und Klammern oder nach deren Entfernung verwendet werden. Steri-Strip Blendtone Wundverschlussstreifen besitzen die gleichen Eigenschaften, sind aufgrund ihrer Farbe jedoch unauffälliger. Sie sind daher speziell für die plastische und kosmetische Behandlung entwickelt worden für ein kosmetisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung	Stück/Packung	PZN
3M™ Steri-Strip™			
1540NP-2	3 x 75 mm	Praxispackung, 2 Umschläge à 5 Streifen	12536065
1540NP-12	3 x 75 mm	Praxispackung, 12 Umschläge à 5 Streifen	03328853
1541NP-2	6 x 75 mm	Praxispackung, 2 Umschläge à 3 Streifen	12536071
1541NP-12	6 x 75 mm	Praxispackung, 12 Umschläge à 3 Streifen	03328876
1542NP-12	6 x 38 mm	Praxispackung, 12 Umschläge à 6 Streifen	03211938
1546NP-1	6 x 100 mm	Praxispackung, 1 Umschläge à 10 Streifen	12536088
1546NP-12	6 x 100 mm	Praxispackung, 12 Umschläge à 10 Streifen	03328882
1547NP-1	12 x 100 mm	Praxispackung, 1 Umschläge à 6 Streifen	12536094
1547NP-12	12 x 100 mm	Praxispackung, 12 Umschläge à 6 Streifen	03328899
R1540	3 x 75 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 5 Streifen	04586066
R1541	6 x 75 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 3 Streifen	04586072
R1542	6 x 38 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 6 Streifen	04586089
R1546	6 x 100 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 10 Streifen	04586095
R1547	12 x 100 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 6 Streifen	04586103
R1548	25 x 125 mm	Klinikpackung, 25 Umschläge à 4 Streifen	04586126
R1549	12 x 50 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 6 Streifen	06309112
3M™ Steri-Strip™ Blendtone			
1551NP-2	6 x 75 mm	Praxispackung, 40 Umschläge à 2 Streifen	18604862
B1551	6 x 75 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 3 Streifen	08754514
B1557	12 x 100 mm	Klinikpackung, 50 Umschläge à 6 Streifen	08754537

Notizen

Weitere Informationen finden Sie unter:



www.solventum.com/de-de/home

Hinweis: Für die hier genannten Produkte und Therapien liegen spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsinformationen vor. Bitte kontaktieren Sie vor der Anwendung medizinisches Fachpersonal und lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Produkt. Die vorliegenden Materialien richten sich an Gesundheitsfachpersonen.



Solventum
Medical Surgical

DE MedSurg-GE@solventum.com

©Solventum 2026. Solventum und das S Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Solventum oder seinen Tochtergesellschaften. 3M und das 3M Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von 3M. Alle Rechte vorbehalten. OMG1852687. 705900.