



Bewährte Lösungen zur
Verbesserung der Hautintegrität
und Lebensqualität Ihrer Patienten

3M™ Cavilon™ Produktfamilie



Ihr bester Schutz vor Einflussfaktoren, die die Heilung beeinträchtigen können.

Die Genesung Ihrer Patienten zu unterstützen liegt Ihnen am Herzen. Manchmal können Komplikationen jedoch den Heilungsprozess verzögern und sich negativ auf die Behandlungskosten und die Ressourcen Ihrer Einrichtung auswirken. Ist Ihr Patient Einflussfaktoren wie Reizstoffen, Feuchtigkeit, Reibung, Scherkräften und Klebstoffen ausgesetzt, kann dies zu Hautschäden führen. Dazu zählen feuchtigkeitsassoziierte Hautschäden (MASD, Moisture-Associated Skin Damage), Dekubitus (PU/I, Pressure Ulcer/Injury) und Hautschäden, die durch medizinische Klebstoffe verursacht wurden (MARSI, Medical Adhesive-Related Skin Injury).



Feuchtigkeitsassoziierte Hautschäden (MASD*)

MASD ist ein Überbegriff, der verschiedene Arten von Hautschäden beschreibt, die auftreten, wenn die Haut übermäßiger Feuchtigkeit und/oder Reizstoffen ausgesetzt ist. Durch eine Hyperhydratation wird das Stratum corneum (die äußerste Schicht der Epidermis) durchlässiger und der pH-Wert der Haut wird alkalischer, wodurch Entzündungen entstehen.

Obwohl Druck, Scherkräfte und Reibung allgemein als Risiken für die Hautintegrität bekannt sind, wird das erhebliche Risiko, das durch übermäßige Exposition der Haut gegenüber Körperflüssigkeiten entsteht, oft nicht als Ursache für Hautschäden erkannt. Für medizinisches Fachpersonal ist es besonders wichtig, die Hautintegrität zu erhalten und feuchtigkeitsassoziierte Hautschäden (MASD) frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um ein Fortschreiten und eine daraus resultierende Hautschädigung zu verhindern.

* Moisture-Associated Skin Damage



Feuchtigkeit und andere Körperflüssigkeiten können zu verschiedenen Formen von MASD führen:

- Inkontinenzassoziierte Dermatitis (IAD)
- Peristomale Dermatitis
- Mazeration der Wundumgebung
- Intertriginöse Dermatitis (ITD)

35% aller IAD-Fälle in der Akutversorgung sind als schwer einzustufen¹

41% der Pflegeheimbewohner haben möglicherweise IAD²


77% der Patienten mit Stomata entwickeln Hautkomplikationen³



Hautverletzung durch medizinische Klebstoffe (MARSI=Medical Adhesive-Related Skin Injury)


Medizinische Klebstoffe sind ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung, können jedoch zu Hautverletzungen wie MARSI führen.

MARSI kann Schmerzen verursachen, das Infektionsrisiko erhöhen und die Heilung verzögern – alles Faktoren, welche die Lebensqualität des Patienten/Bewohners beeinträchtigen.⁶ Hauteinrisse und -ablösungen sowie Spannungsblasen gehören zu den häufig auftretenden, aber oft vermeidbaren Formen von MARSI.

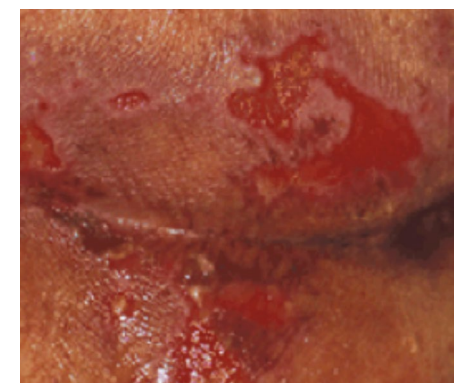

Dekubitus

Ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut und/oder des darunterliegenden Gewebes, typischerweise über knöchernen Vorsprüngen, infolge von Druck oder Druck in Kombination mit Scherkräften.

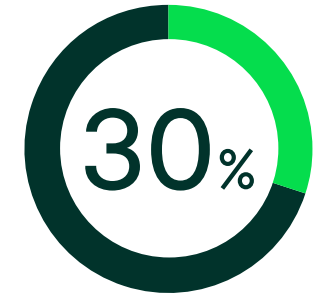

aller onkologischen Patienten entwickeln innerhalb von zwei Wochen MARSI an ihrer PICC-Einstichstelle.⁴


Eine Studie zeigt eine Prävalenz bei MARSI in der Akutversorgung von

21,4%

Die Prävalenz kann je nach Pflegesituation und Patient variieren.⁵

3x

höheres Risiko für Patienten mit IAD einen oberflächlichen sakralen Dekubitus zu entwickeln mit einer odds ratio von 2.99.⁷

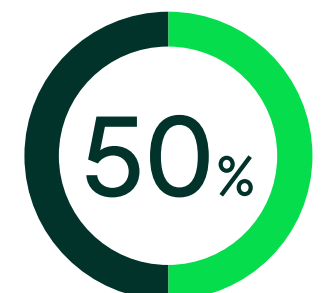

aller Dekubitus treten an anatomischen Stellen auf, die über einem knöchernen Vorsprung liegen, wie z. B. an der Ferse und dem Sacrum.^{8,9}

Erfüllen Sie unterschiedliche Patientenbedürfnisse mit bewährten Lösungen

Entscheiden Sie sich für Lösungen, die sich in Tests immer wieder von Mitbewerberprodukten abheben. Mit einem hochleistungsfähigen Hautschutz, innovativen Barriere-Produkten und weiteren Produkten, die zur Erhaltung der Hautintegrität beitragen, bieten wir Ihnen umfassende Lösungen zur Prävention und Behandlung von Hautschäden für Ihre Patienten.



3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

Cavilon Advanced Skin Protectant erzeugt mit seiner innovativen Polymer-Cyanacrylat-Technologie eine ultradünne und äußerst haltbare Barriere, die auf feuchter, nässender¹⁰ oder geschädigter Haut bis zu 7 Tage haftet.¹¹



3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

Dank seiner einzigartigen Terpolymer-Zusammensetzung gewährleistet Cavilon Reizfreier Hautschutz eine langanhaltende, flexible Barriere und ermöglicht eine sanfte, effektive Lösung für den routinemäßigen Schutz vor Reibung, medizinischen Klebstoffen und Körperflüssigkeiten für bis zu 72 Stunden.¹²



3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme

Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme ist eine hochergiebige, parfümfreie und feuchtigkeitsspendende Barrierecreme deren Zusammensetzung auf Polymerbasis beruht. Sie ist abwaschfest, ermöglicht die Haftung von medizinischen Klebstoffen und erhält die Aufnahmefähigkeit von Inkontinenzmitteln.¹²



3M™ Cavilon™ Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege

3M™ Cavilon™ Wasch- & Reinigungstücher

Cavilon Reinigungstücher sorgen auf optimale Weise dafür, dass sich Ihre Patienten wohl, sauber und geschützt fühlen. Mit diesen sanften medizinischen Reinigungstüchern können Sie jedes Körperteil schonend waschen und pflegen oder bei Bedarf schützen. Zugleich reduzieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination.

Finden Sie die optimale Lösung mit den Produkten der 3M™ Cavilon™ Familie

Finden Sie die passende Lösung zur Aufrechterhaltung einer intakten Hautbarriere

Versorgung geschädigter Haut

Reizstoffen

Gefährdete oder geschädigte Haut

Feuchtigkeit und Reibung und/oder Scherkräften

Klebstoffen

Feuchtigkeit und Trockenheit

Reinigung und Schutz

Beispiele: Flüssiger Stuhl, gemischte Ausscheidung (Urin/Stuhl), Verdauungsflüssigkeiten und Wundexsudat

Beispiele: fragile Haut, mazerierte Haut, starke Exsudation und langanhaltende Exposition, rezidivierende Hautschäden

Routinemäßiger Schutz

Beispiele: fragiler Haut, mazerierte Haut, starke Exsudation und langanhaltende Exposition, rezidivierende Hautschäden

Routinemäßiger Schutz

3M™ Cavilon™ Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege
3M™ Cavilon™ Wasch- & Reinigungstücher

3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant

3M™ Cavilon™ Reizfreier Hautschutz

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme









Feuchtigkeitsbedingte Hautläsionen (MASD=Moisture-Associated Skin Damage)

Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD)

Peristomale Dermatitis

Mazeration der Wundumgebung

Intertriginöse Dermatitis (ITD)

Dekubitus

Hautverletzung durch medizinische Klebstoffe (MARSI, Medical Adhesive-Related Skin Injury)

Versorgung geschädigter oder verletzter Haut

Schutz gefährdeter Haut

Ideal für den routinemäßigen Schutz

Routinemäßige Reinigung mit und ohne Hautschutz

Versorgung der IAD

Versorgung von Hautschäden um Stomata und Fisteln

Versorgung von Hautschäden der wundumgebenden Haut (z. B. Mazeration), einschließlich der Eignung zur Anwendung unter den 3M™ V.A.C.® Folien bei der Unterdruck-Wundtherapie

Versorgung oberflächlicher Hautschäden durch Feuchtigkeit und Reibung

Versorgung oberflächlicher Hautschäden an schwer zu versorgenden Körperregionen

Versorgung oberflächlicher Hautverletzungen (z. B. Hautablösung, Hauteinrisse) durch Anwendung medizinischer Klebstoffe, auch unter Verbänden für Gefäßzugänge

Schutz intakter Haut insbesondere bei Durchfall oder kombinierter Harn- und Stuhlinkontinenz

Schutz der Haut um problematische Uro- oder Enterostomata, Fisteln oder Tracheostomata

Schutz der wundumgebenden Haut (z. B. stark nässende Wunden wie diabetische Fußulcera, venöse Ulcera cruris oder infizierte Wunden)

Schutz intakter und geschädigter Haut vor Feuchtigkeit und Reibung und/oder Scherkräften

Schutz intakter und geschädigter Haut vor Feuchtigkeit und Reibung und/oder Scherkräften

Schutz intakter Haut vor klebenden Produkten (z. B. Rollenpflastern, Wundauflagen, Verbänden für Gefäßzugänge und Stomaprodukten, sowie Folien zur Unterdruck-Wundtherapie)

Spendet Feuchtigkeit und bietet Schutz für intakte Haut bei Patienten mit niedrigem Risiko

Schutz intakter Haut bei Patienten mit niedrigem Risiko

Schutz intakter Haut vor Feuchtigkeit und Reibung und/oder Scherkräften

Schutz intakter Haut vor Feuchtigkeit und Reibung und/oder Scherkräften

Schonende Reinigung mit und ohne Hautschutz nach jeder Inkontinenzepisode

Schonende Reinigung mit und ohne Hautschutz

Schonende Reinigung bei ITD

6

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Solventum Ansprechpartner.

7

	Art.-Nr.	Produkt	Größe	Stück/ Packung	PZN
	5050G	3M™ Cavityon™ Advanced Skin Protectant	2,7 ml Applikator (steril)*	20**	12407238
	5050G4P	3M™ Cavityon™ Advanced Skin Protectant	2,7 ml Applikator (steril)*	4	15635359
	5051G	3M™ Cavityon™ Advanced Skin Protectant	0,7 ml Applikator (steril)*	20**	16397703
	5051G4P	3M™ Cavityon™ Advanced Skin Protectant	0,7 ml Applikator (steril)*	4	16822684
	3343P	3M™ Cavityon™ Reizfreier Hautschutz	1 ml Schaumstoffapplikator	5	15258678
	3343E	3M™ Cavityon™ Reizfreier Hautschutz	1 ml Schaumstoffapplikator	25	15258661
	3345E	3M™ Cavityon™ Reizfreier Hautschutz	3 ml Schaumstoffapplikator	25	15258684
	3346P	3M™ Cavityon™ Reizfreier Hautschutz	28 ml Sprayflasche	1	15258655
	3346E	3M™ Cavityon™ Reizfreier Hautschutz	28 ml Sprayflasche	12	15258626
	3392GS	3M™ Cavityon™ Langzeit-Hautschutz-Creme	2 g Sachet	20	15581646
	3391G	3M™ Cavityon™ Langzeit-Hautschutz-Creme	28 g Tube	1	10286428
	3392G	3M™ Cavityon™ Langzeit-Hautschutz-Creme	92 g Tube	1	10286434
	9272	3M™ Cavityon™ Wasch- & Reinigungstücher	20 x 30 cm	8	10341587
	9274	3M™ Cavityon™ Reinigungstücher für die Inkontinenzpflege	20 x 30 cm	8	10341593

* Der Applikator ist steril, wenn die Verpackung intakt ist. Die Flüssigkeit in der Ampulle ist nicht steril.

** Die PZN bezieht sich auf den einzelnen Applikator, Mindestbestellmenge = 20 Stück

Quellenangaben

- Gray M., Bartos S. Incontinence Associated Dermatitis in the Acute Care Setting: A Prospective Multi-site Epidemiologic Study. Vorgestellt auf der 23. Jahrestagung der Wound Healing Society. 2013.
- Nix D, Haugen V. Prevention and management of Incontinence-Associated Dermatitis. *Drugs Aging*. 2010. 27(6); 491–6.
- Colwell JC, McNichol L, Boarini J. North America Wound, Ostomy, and Continence and Enterostomal Therapy Nurses Current Ostomy Care Practice Related to Peristomal Skin Issues. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2017; 44(3): 257–261.
- Zhao H, et al. Prevalence of medical adhesive-related skin injury at peripherally inserted central catheter insertion site in oncology patients. *J Vasc Access*. 2017 Nov 8;0. doi: 10.5301/jva.5000805.
- Quelle: <https://europepmc.org/abstract/med/15509110>.
- Cutting KF. Impact of adhesive surgical tape and wound dressing on the skin with reference to skin stripping. *J Wound Care*. 2008;157-158,160–162.
- Demarre L, et al. Factors predicting the development of pressure ulcers in an at-risk population who receive standardized preventive care: secondary analyses of a multicentre randomised controlled trial. *J Adv Nurs*. 2015;71(2):391–403.
- National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- VanGuilder, C., MacFarlane, G. D., & Meyer, S. (2008). Results of Nine International Pressure Ulcer Prevalence Surveys: 1989 to 2005. *Ostomy Wound Management*, 54(2).
- Brennan, Mary R.; Milne, Catherine T.; Agrell-Kann, Marie; Ekholm, Bruce P. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence-Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nurs*. 2017; 44(2):172–180.
- Daten bei Solventum verfügbar: EM-05-305812.
- Issberner K, Schuren J, A Comparative study of the Skin Protectant performance of five Barrier Films. 3M Germany Laboratory, Neuss, Germany, 2004.
- Hart J, (2002) Assessment of the incontinence pad blocking potential of Cavityon DBC compared with Sudocrem and Zinc and Castor oil. *Nursing Scotland* 2002, Issue July/August.



Solventum
Medical Surgical

GE MedSurg-GE@solventum.com

©Solventum 2026. Solventum und das S Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Solventum oder seinen Tochtergesellschaften. 3M und das 3M Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von 3M. Alle Rechte vorbehalten. OMG1508169. 1043500