

3M™ Tegaderm™ Antimikrobieller I.V. Advanced Fixierverband 9132


Das integrierte Design kombiniert antimikrobiellen Schutz mit der Sichtbarkeit der Kathetereinstichstelle, der Katheterfixierung und einer konsistenten Applikation für periphere Venenverweilkanülen (PVK).

Breiter Fixierstreifen mit Kerbe sowie Perforation

Unterstützt die gleichmäßige Applikation, sorgt für mehr Stabilität. Die Perforation erleichtert die Entfernung.

Schlüssellochkerbe

Eine Schlüssellochkerbe verbessert den Halt der Katheterlumen und minimiert deren Bewegungen.

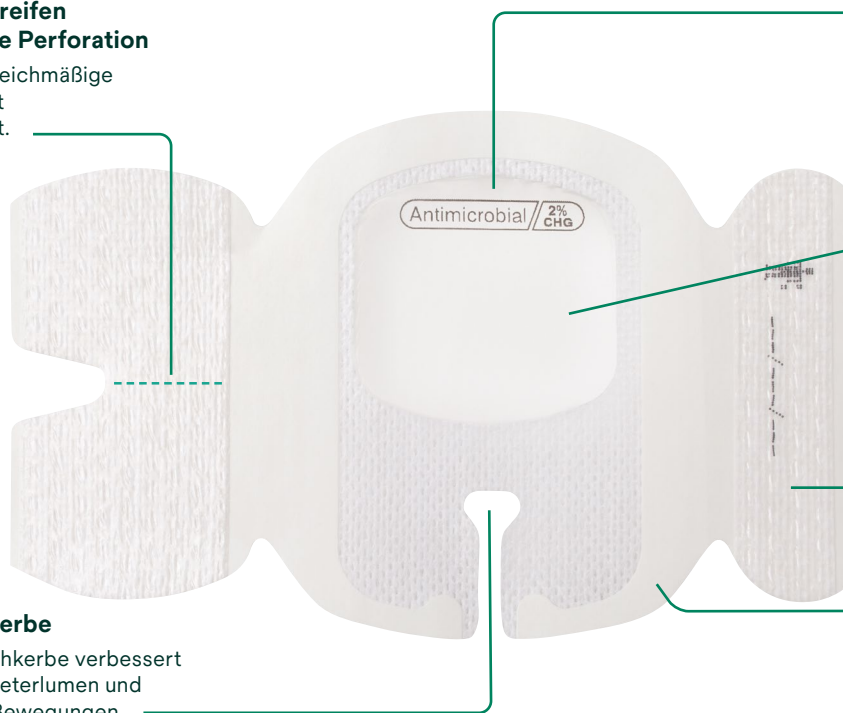

Eine wasserfeste, sterile Barriere schützt vor externen Verunreinigungen

Atmungsaktiver transparenter Film.*

Antimikrobieller Schutz

Für antimikrobiellen Schutz ist der Klebstoff des Verbands mit Chlorhexidingluconat (CHG) imprägniert. Zur Aktivierung ist keine zusätzliche Feuchtigkeit erforderlich.

Dokumentationsstreifen

Verbandsanlagen einfach dokumentieren.


Gut modellierbare Verbandränder

Spezielle Technologie, um ein Aufrollen am Verbandrand zu reduzieren..

Antimikrobieller Schutz

Unterdrückt das Nachwachsen der normalen Hautflora auf vorbereiteter Haut besser als nicht-antimikrobielle Verbände.**

Hautflorkonzentration (KBE/cm²)

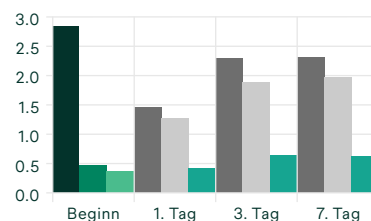

Referenzwert

Nach 70 % IPA

Nach 2 Gew.-% CHG in 70 %

Kontrollverband, Haut mit 70 % IPA desinfiziert

Kontrollverband, Haut mit 2 Gew.-% CHG in 70 % IPA desinfiziert

Tegaderm™ Antimikrobieller I.V. Advanced Fixierverband, Haut mit 2 Gew.-% CHG in 70 % IPA desinfiziert

Antimikrobieller Schutz

Unterdrückt nachweislich für bis zu 7 Tage das Nachwachsen der normalen Hautflora auf desinfizierter Haut.

Sichtbarkeit der Kathetereinstichstelle

Der Transparentverband ermöglicht das frühe Erkennen von Komplikationen an der Einstichstelle.

Katheterfixierung

Entwickelt, um Katheterbewegung und -dislokation zu minimieren.¹

Benutzerfreundlichkeit

Der CHG-Verband ist so konzipiert, die standardisierte richtige Applikation sicherzustellen.

*In vitro-Tests belegen, dass der Film eine Barriere gegen Viren mit einem Durchmesser von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt ist und keine undichten Stellen aufweist.

**Daten bei Solventum verfügbar. EM-05-305455

1. Nickel B, Gorski LA, Kleidon TM, et al. Infusion therapy standards of practice. *J Infus Nurs.* 2024;47(suppl1):S1-S285. doi:10.1097/NAN.0000000000000532

Kompatibel mit einer grossen Auswahl von peripheren Venenkathetern:



Standard-PVK ohne Einspritzport



BD® Nexiva™ Geschlossenes IV-Kathetersystem



B. Braun Introcath Safety® 3: Geschlossener Sicherheits-Intravenöskatheter

Applikation und Entfernung



1. Vorbereiten

Bereiten Sie die Stelle, an der der Verband appliziert werden soll, entsprechend dem Klinikstandard vor. Achten Sie darauf, dass die Stelle vollständig trocken ist.



2. Anmodellieren

Den Verband bei der Applikation nicht dehnen. Ziehen Sie die Schutzfolie vom dem Verband ab und platzieren Sie das Sichtfenster des Verbandes über der Einstichstelle. Richten Sie den Schlauch an der Kerbe aus. Üben Sie für optimale Haftung sanften Druck auf den gesamten Verband aus, während Sie mit der anderen Hand den Applikationsrahmen entfernen.



3. Fixieren

Bringen Sie den Fixierstreifen unterhalb der Einstichstelle und überlappend mit dem Verband an. Entfernen Sie die klebstofffreien Laschen.



4. Fixieren


Dokumentieren Sie den Verbandswechsel auf dem Dokumentationsstreifen. Bringen Sie den Dokumentationsstreifen oben am Verband, über dem Katheterlumen an. Entfernen Sie die klebstofffreien Laschen. Sichern Sie den Schlauch mit Fixierstreifen.



5. Überwachen

Verbandswechsel:


- Mindestens alle 7 Tage
- Wenn sich der Verband löst, verschmutzt oder feucht ist
- Entsprechend dem Klinikstandard

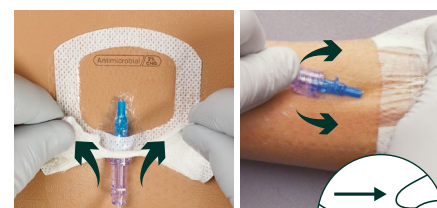

6. Entfernen

Entfernen Sie die Fixierstreifen. Beginnen Sie beim Entfernen des Verbandes an der Stelle, an der der Katheter oder der Schlauch aus dem Verband austritt, und ziehen Sie ihn langsam und flach in Richtung der Einstichstelle ab. Vermeiden Sie ein Hauttrauma, indem Sie den Verband flach abziehen.

Bestellinformation Tegaderm™ Antimikrobieller I.V. Advanced Fixierverband

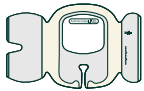Produkt	Artikelnummer	Verbandsgröße	Stk./Pkg.	Karton/VE	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGel
	9132	7 cm x 8,5 cm	25	4	16907340	5722531	7853242	03.07.04.05.1

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts.

Hinweis: Für die hier genannten Produkte und Therapien bestehen spezifische Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt und lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Produkts. Die vorliegenden Materialien richten sich an das medizinische Fachpersonal.



Solventum
Medical Surgical

GE MedSurg-GE@solventum.com
AT MedSurg-AT@solventum.com
CH MedSurg-CH@solventum.com

Mehr Info:
go.solventum.com/9132_Tegaderm

© Solventum 2026. Solventum und das S-Logo sind Warenzeichen von Solventum oder Tochtergesellschaften. 3M ist eine Marke der 3M Company. Andere Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. OMG2285070. 910650.

