

Usted conoce los conceptos científicos detrás de la Terapia 3M™ V.A.C.®

Ahora, conozca los datos detrás de la Terapia 3M™ Veraflo™
Basado en el metaanálisis publicado recientemente



Comience con la Terapia Veraflo: Cuanto antes, mejor¹


Un metaanálisis de 13 estudios comparativos que comprendieron 720 pacientes con una amplia variedad de tipos de heridas mostró un efecto positivo al usar NPWTi-d frente al control.¹

Una revisión sistémica y un metaanálisis de estudios comparativos conducida por Allen Gabriel, MD, FACS y Paul Kim, DPM, MS en la publicación Plastic and Reconstructive Surgery 2021.


La Terapia Veraflo* (NPWTi-d) fue significativamente mejor que las opciones tradicionales para el cuidado de heridas, incluida la Terapia V.A.C.® en los siguientes criterios de valoración: tradicionales para el cuidado de heridas, incluida la Terapia V.A.C.® en los siguientes criterios de valoración:

> 2X
veces

Hasta 2,39 veces mayor probabilidad de cierre de las heridas ($p = 0,01$)¹

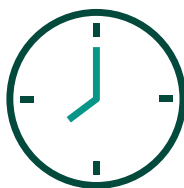

Heridas listas para el cierre casi el doble de rápido (7,88 días frente a 14,36 días, $p = 0,003$)^{1,2}

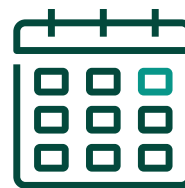

La duración de la terapia se redujo en más de la mitad (9,88 días frente a 21,8 días, $p = 0,02$)^{1,2}

Aproximadamente 1 vez menos desbridamientos (1,77 desbridamientos frente a 2,69, $p = 0,008$)^{1,2}



4,4 veces más probabilidades de reducir el recuento bacteriano ($p = 0,003$)¹

Comience con la Terapia Veraflo para iniciar el proceso de cicatrización.¹

Aproximadamente el 26 % de los pacientes que necesitan desbridamiento no son candidatos para el desbridamiento quirúrgico.**

Más del 90 % de las heridas crónicas tienen bacterias y hongos.³ La presencia de bacterias en las heridas puede retrasar la cicatrización.⁴

Hecho

Los datos han demostrado que las heridas tratadas con Terapia Veraflo tuvieron resultados clínicos positivos¹.

Hecho

El Vendaje 3M™ V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ es una opción avanzada de limpieza de heridas* para tratar el tejido no viable, cuando el desbridamiento quirúrgico se retrasa o no es posible.

Hecho

Se ha demostrado que en las heridas tratadas con Terapia Veraflo hay 4.4 veces mayor probabilidad de reducir el recuento bacteriano ($p = 0,003$)¹.

* Como parte de la buena práctica clínica (p. ej., antibióticos sistémicos, desbridamiento).

** Basado en 20 encuestas a médicos de ACS, ACOS y ASPS, 2015.

Recomendaciones del panel global

En función del documento de consenso de 2020 de NPWT con instilación de Paul Kim, DPM, MS et al. en la publicación International Wound Journal, la Terapia Veraflo debe considerarse en una etapa temprana del tratamiento en función de los datos y la experiencia.⁵

Características apropiadas de la herida:

- Heridas limpias
- Heridas limpias y desbridadas adecuadamente
- Heridas con carga biológica alta
- Heridas contaminadas/infectadas
- Heridas que son difíciles de granular

Parámetros de la terapia:

- Tiempo de NPWT: 2 a 3 horas
- Tiempo de permanencia: 10 minutos
- Configuración de NPWT: -125 mmHg
- Solución: Salina (u otras soluciones compatibles)
- Vendaje: Vendaje 3M™ V.A.C. Veraflo™ a menos que haya tejido no viable presente. Considere el Vendaje V.A.C. Veraflo Cleanse Choice como opción de limpieza avanzada de heridas antes del desbridamiento quirúrgico o si el desbridamiento se retrasa o no es posible.

Interrumpa la terapia cuando se cumplan los objetivos clínicos.



La Terapia Veraflo es más fácil de iniciar que nunca antes

La actualización tecnológica reciente al sistema de terapia 3M™ V.A.C.® Ultra 4 Therapy System + proporciona lo siguiente:

- Guía automática para la resolución de problemas
- Pospone la fase de instilación
- Temporizador de alarma inactiva de la terapia para proporcionar



La Cubierta 3M™ Dermatac™ utilizada con la Terapia Veraflo es:

- Adaptable, rápida y fácil de aplicar
- Fuerte y proporciona un sello eficaz
- Suave con la piel que rodea a la herida

Respaldado por un metaanálisis reciente de 720 pacientes, siga los datos detrás de la Terapia Veraflo. Vea por sí mismo lo que puede hacer cambiar su estándar de atención para sus pacientes y su práctica. **Comience de manera inteligente.**

Referências:

1. Gabriel A, Camardo M, O'Rourke E, Gold R, Kim PJ. Effects of Negative-Pressure Wound Therapy With Instillation versus Standard of Care in Multiple Wound Types: Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Plast Reconstr Surg*. 2021 Jan 1;147(1S-1):68S-76S. doi: 10.1097/PRS.0000000000007614. PMID: 33347065.
2. Camardo, Mark. "Veraflo Meta-Analysis Standardized and Non-Standardized Means.", 3M Internal Report, San Antonio, Texas, 2020.
3. Attinger C, Wolcott R. Clinically Addressing Biofilm in Chronic Wounds. *Adv Wound Care*. 2012;1(3):127-132. doi:10.1089/wound.2011.0333.
4. Kingsley A. The wound infection continuum and its application to clinical practice. *Ostomy Wound Manage* 2003;49:1-7.
5. Kim PJ, Attinger CE, Constantine T, Crist BD, Faust E, Hirche CR, et al. Negative pressure wound therapy with instillation: international consensus guidelines update. *Int Wound J*. 2020 Feb;17(1):174-186.

NOTA: Existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad para estos productos y terapias. Consulte a un médico clínico y las instrucciones de uso del producto antes de la aplicación. Solo con receta médica.



Para más información, visite
www.solventum.com/es-co

KCI Colombia SAS
Avda. Carrera 45 # 108-27, Torre 3, Of 1601, Bogotá, Colombia
productos.co@solventum.com
01 800 5185 200

© Solventum 2026. Solventum y el logotipo S son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.