



3M™ Attest™ Integradores Químicos para Esterilización con Vapor

1243A, 1243B, 1243RE

Resultados fáciles de leer

La tecnología innovadora de IQ de 3M optimiza su carga de trabajo

3M hace que sea más rápido y fácil saber si los instrumentos y dispositivos quirúrgicos se han esterilizado correctamente a la temperatura y durante el tiempo requeridos. Con los Integradores Químicos para Esterilización con Vapor Tipo 5, 3M™ Attest™ usted recibe el mismo rendimiento del producto de 3M pero ahora con un diseño mejorado, con mayor visibilidad y facilidad de lectura.



Fáciles de ver

Los colores vibrantes hacen que sean fáciles de localizar.



Resultados prácticos

La tecnología de frente móvil elimina el tiempo dedicado a interpretar los cambios de color.




Eficiencia mejorada

Simplemente escanee el código de barras para cargar la información al sistema de seguimiento de instrumentos de su hospital.



Materiales duraderos

La lámina de aluminio gruesa se fabrica para soportar las temperaturas extremas de la esterilización con vapor.

 **3 de cada 4**
profesionales de quirófano
están de acuerdo*

Los Integradores Químicos para Esterilización con Vapor tipo 5 3M™ Attest™ son visualmente más fáciles de encontrar en la bandeja que los de las marcas competidoras evaluadas.¹

El **66%**
de los usuarios afirma
que los resultados son
los más fáciles de leer**

El 66 % de los profesionales de quirófano afirman que los resultados de esterilización son los más fáciles de leer en los Integradores Químicos para Esterilización con Vapor Tipo 5 3M™ Attest™.¹

*Los IQ se colocaron en una bandeja de instrumentos real, que se presentó a los encuestados en imágenes de condiciones de uso simuladas.
**Los IQ se expusieron a un ciclo de esterilización con vapor, que se presentó a los encuestados en imágenes de condiciones de uso simuladas.

1. Basándose en la encuesta cuantitativa para clientes de diciembre de 2018, realizada por Gestalt para 3M, en comparación con los integradores evaluados: Integrador Químico 3M™ Comply™ SteriGage™, Integradores Químicos para Esterilización con Vapor Getinge™ e Integradores Químicos para Esterilización con Vapor Steris™.

El Integrador Químico para Esterilización con Vapor Tipo 5 3M™ Attest™ proporciona un elevado rendimiento

Comparación de Indicadores Químicos para Esterilización con Vapor*	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6
Para uso en objetos de carga individual	✓	✓	✓
Valores declarados proporcionados en la etiqueta del producto según lo recomendado por la norma ISO 11140-1:2014	✓	✓	✓
Una lista extensa de los ciclos indicados de 250 °F a 275 °F (121 °C a 135 °C) (elimina la necesidad de tener varios SKU); consulte las instrucciones de uso para obtener más información	✓	✓	
Capacidad para reaccionar a TODAS las variables cruciales del proceso de esterilización		✓	✓
El resultado se correlaciona con un indicador biológico		✓	
Recomendado en la AAMI ST79 y AORN para uso en la monitorización de cargas con un implante junto con un IB en un DDP		✓	

*ISO 11140-1:2014 y ANSI/AAMI ST79:2017



Frente

- **Resultado aceptar/rechazar fácil de leer:** Tecnología de frente móvil de tinta con zonas de colores intensos que indican "Aceptar" (verde) y "Rechazar" (rojo) que permite la fácil interpretación en segundos.
- **Código de barras 2D:** Rastrear y registrar el número de lote del IQ y la fecha de vencimiento en los sistemas de seguimiento de instrumentos.



Parte posterior

- **El llamativo color rojo y blanco impreso** en la parte posterior ayuda a que el IQ sea fácil de encontrar si gira en la bandeja quirúrgica.
- **La duradera lámina de aluminio** está diseñada para soportar las temperaturas extremas que implica la esterilización con vapor.

Información para pedidos

	Nombre del producto	Número del catálogo	Artículos/Bolsa	Bolsas/Embalaje
	3M™ Attest™ Integradores Químicos para Esterilización con Vapor, 1,9cm x 5,1 cm	1243A	500	2
		1243B	100	10
	3M™ Attest™ Integradores Químicos para Esterilización con Vapor con extensor 1,9 cm x 22,9cm	1243RE	500	2
	3M™ Attest™ Integradores Químicos para Esterilización con Vapor con extensor 1,9 cm x 10,9 cm	1243RES	500	2



También disponible en indicadores biológicos y DDP para indicadores químicos.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas o visite [go.3M.com/sterilization](https://go.3m.com/sterilization).



3M España, S.L.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel. +34 91 321 60 00
Fax +34 91 321 64 62
www.3m.com/es

3M y Attest son marcas y/o marcas registradas de 3M. Queda prohibido su uso no autorizado.
Recicle. © 3M 2020. Todos los derechos reservados.
EN_GL_70-2011-7921-8