



Science.
Applied to Life.™



3M Terveydenhoitotuotteet

Varmat valinnat luotettavat tulokset

Sisällys

Johdanto	3
Kun tarvitsette standardiratkaisun	4
Kun tarvitsette esijohdotettuja elektrodeja	5
Kun tarvitsette uudelleenkiinnitettäviä elektrodeja	6
Kun tarvitsette pediatria elektrodeja	7
Kun tarvitsette ratkaisun lyhytaikaiseen diagnostiikkaan	7
Kun tarvitsette ratkaisun voimakkaaseen hikoiluun	8
Kun tarvitsette ratkaisun herkälle iholle	8
Kun tarvitsette nesteitä läpäisemättömiä elektrodeja	9
Kun tarvitsette ratkaisun ihonvalmisteluun	9
Kun tarvitsette edullisen ratkaisun	10
Kun tarvitsette ratkaisun defibrillointiin	10
Tilaustiedot	10-12

Mitä tarvitsette? Mihin luottaisitte?

Nämä ovat kaksi tärkeintä elektrodien käyttöön liittyvää kysymystä terveydenhuollon ammattilaisille. 3M™ Red Dot™ Elektrodit ovat ansainneet luottamuksenne jo vuodesta 1974. 3M on tunnettu maailmanlaajuisista innovaatioistaan liimojen ja lääketieteellisten tuotteiden alalla. Kehitämme jatkuvasti myös uusia ja entistä parempia ratkaisuja EKG-valvontaan. Tarjoamme laajan valikoiman luotettavia tuotteita, jotka täyttävät asiakkaidemme erityisvaatimukset. Mitä tarvitsette? Mihin luottaisitte? Vastauksen löydätte tästä esitteestä.



Kun tarvitsette standardiratkaisun

3M elektrodivalikoimasta löytyy sopiva ratkaisu sairaaloiden kaikkiin tarpeisiin.

Nykyään sairaaloiden haasteena on pitää toimintakustannukset kurissa potilaiden hoidon laadusta tinkimättä. Vaahtomuovitaustaiset ja geelikiinnitteiset 3M™ Red Dot™ Elektrodit voivat olla tässä avuksi. Monet sairaalat ovat todenneet kyseisten elektrodien täyttävän suurimman osan aikuisten EKG-valvontatarpeista useilla eri osastoilla.

Pitkä käyttöaika. 3M™ 2560 Red Dot™ Elektrodit kestävät iholla jopa viisi päivää. Vaahtomuovitaustaisia 3M™ 2228 ja 2244 Elektrodeja voi puolestaan pitää paikoillaan jopa kolme päivää.

Erinomainen tarkkuus. Liimautuva vaahtomuovitausta ja 3M™-geeli takaavat elektrodien erinomaisen kiinnittymisen ihoon ja EKG:n piirtojälgjen erinomaisen tarkkuuden.

Kätevät pakkaukset. Red Dot™ Elektrodeja on saatavana edullisissa tukkupakkauksissa. 3M 2560 Red Dot™ Elektrodeja on saatavana 10 elektrodin perforoiduissa liuskoissa, joista tarvittava määrä elektrodeja on helppo repäistä irti.

Karhennin ihon valmisteluun. 2560 Elektrodin integroitu karhennin on tarkoitettu ihon hellävaraiseen valmisteluun ennen elektrodin kiinnittämistä. Tämä vähentää ihon sähköistä vastusta ja takaa EKG:n ylivertaisen laadun.



Vaahtomuovitaustainen
3M™2228 Elektrodi



Vaahtomuovitaustainen 3M™2244 Elektrodi on röntgen-negatiivinen ja MRI yhteensopiva



3M™ Red Dot™ -elektrodi
2560 – vaahtomuovitausta

Käyttökohteet	2228	2244	2560
Ensiapu	✓	✓	✓
Teho-osasto/ Sydänvalvonta	✓	✓	✓
Telemetry/Holter/ Tapahtuma	✓	✓	✓
Leikkaussali	✓	✓	✓
Sydänkeskus	✓	✓	✓
Rasituskoe	✓	✓	✓
Sydänkuntoutus	✓	✓	✓
Sydämen kaiku kuva	✓	✓	✓
Pediatrinen teho-osasto	✓	✓	✓


Kun tarvitsette esijohdotettuja elektrodeja

Esijohdotetut, vastasyntyneille tarkoitetut 3M™ 2269T Red Dot™ Elektrodit voivat vähentää hoitoon liittyvää infektioriskiä. Ne ovat lisäksi helppokäyttöisiä ja takaavat EKG:n erinomaisen tarkkuuden. Esijohdotetut elektrodit pienentävät myös kontaminaatoriskiä uudelleenkäytettäviin johtoihin verrattuna. Ominaisuudet:

Kevyet, matalaprofiiliset ja värikoodatut johdot. Parantavat potilaan mukavuutta. Helpottavat laittamista. 3 johtoa. Pituus 46 cm.

Erinomainen tarkkuus.

Ihoystävällinen liima. Vähentää ihorikkojen riskiä vastasyntyneiden hauraalla iholla.

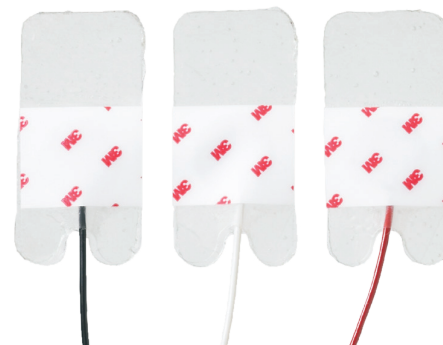

Esijohdotettu
3M™ Red Dot™ Elektrodi
2269T vastasyntyneille

Käyttökohteet	2269T
Sydämen kaikukuvaus	✓
Teho-osasto	✓



Kun tarvitsette uudelleenkiinnitettävyyttä

Uudelleenkiinnitettäviä 3M™ 2660 ja 2670 Red Dot™ Elektrodeja voidaan siirtää kerran välittömästi ensimmäisen kiinnittämisen jälkeen. Tämä auttaa välttämään elektrodien vaihtamiseen liittyviä kustannuksia.

Ominaisuudet:

Iso sähköjohtava ala. Vaikka uudelleenkiinnitettävät Red Dot™ Elektrodimme ovat kooltaan entistä pienempiä, niiden sähköjohtava ala on suurempi kuin tavallisten elektrodien. Se pienentää ihon sähköistä vastusta ja parantaa EKG:n laatua.

Miellyttävä ja muotoutuva materiaali. Matalaprofiilinen ja pehmeä kuitukangastausta helpottaa elektrodin kiinnittämistä ja irrottamista ja parantaa potilaan mukavuutta paksuihin ja jäykkiin elektrodeihin verrattuna. Lisäksi elektrodit eivät jää yhtä helposti kiinni lääketieteellisiin laitteisiin, liinoihin, leikkausvaatteisiin tai lakanoihin, mikä vähentää niiden tahatonta irtoamista.

Monikäyttöisyyttä lisäävä pieni koko. Pieni koko ja erityisen matala profiili mahdollistavat elektrodien nopean ja helpon kiinnittämisen eri-ikäisille ja -kokoisille potilaille. Ei ihonvalmistelua. Kun aikaa ei ole hukattavaksi, uudelleenasetettavien Red Dot™ Elektrodien matala sähköinen vastus vähentää ihonvalmistelun tarvetta ennen elektrodien kiinnittämistä.

Kaksi liimavaihtoehtoa. Uudelleenkiinnitettäviä Red Dot™ Elektrodeja on saatavana kahdella eri liimalla varustettuna.

Molemmat liimat tarttuvat nopeasti ihoon ja irtoavat hellävaraisesti, mutta uudelleenkiinnitettävän Red Dot™ 2670 Elektrodin liima on vahvempaa. Sitä tulee käyttää vain, jos uudelleenkiinnitettävän Red Dot™ 2660 Elektrodin liima ei ole riittävän tehokasta tiettyä potilasta tai käyttötilannetta varten.

Kätevät pakkaukset. Uudelleenkiinnitettäviä 3M™ 2660 ja 2670 Red Dot™ Elektrodeja on saatavana viiden elektrodin liuskoissa.



Uudelleenkiinnitettävä 3M™ 2660 Red Dot™ Elektrodi – metalli, MRI yhteensopiva



Uudelleenkiinnitettävä 3M™ 2670 Red Dot™ Elektrodi – röntgenläpäisevä ja MRI yhteensopiva

Käyttökohteet	2660	2670
Ensiapu	✓	✓
Teho-osasto/ Sydänvalvonta	✓	✓
Telemetria/Holter/ Tapahtuma	✓	✓
Leikkaussali	✓	✓
Sydänkeskus	✓	✓
Sydämen kaikuvaus	✓	✓
Pediatrinen teho-osasto	✓	✓

Kun tarvitsette pediatrisia elektrodeja

Vastasyntyneiden ja pienten lasten herkkä iho on otettava huomioon elektrodien taustamateriaalien ja kiinnittymisominaisuuksien suunnittelussa. Esijohdotettujen elektrodien lisäksi 3M tarjoaa pienten potilaiden hoitoon hellävaraisemmillä liimoilla ja miellyttävimmillä materiaaleilla varustettuja elektrodeja.

Hellävarainen liima. Vähentää ihon vaurioitumisen riskiä.

Pieni koko vauvoille ja lapsille. Elektrodit mahtuvat paremmin potilaan pienelle rintakehälle.

Kiinteä geeli ja kaksi taustamateriaalivaihtoehtoa. Kiinteä geeli on hellävarainen iholle eikä siitä jää paljon jäämiä irrottamisen jälkeen. Pehmeän 3M™ Micropore™ tai Soft Cloth -kuitukan-gasteipin ansiosta elektrodin profiili on matala. Tämä vähentää elektrodin irtoamisen riskiä, sillä sen reunat eivät jää kiinni kan-kaisiin tai lääketieteellisiin laitteisiin. Lisäksi elektrodi muotoutuu potilaan iholle ja parantaa mukavuutta.



Pediatriinen 3M™ 2248 Red Dot™ Micropore™ -taustainen elektrodi



Pehmeällä kuitukangastaustalla varustettu 3M™ 2268 Red Dot™ EKG-elektrodi vastasyntyneille

Käyttökohteet	2248	2268-3
Pediatriinen teho-osasto	✓	✓

Kun tarvitsette ratkaisun lyhytaikaiseen diagnostiikkaan

3M elektrodivalikoimasta löytyy myös lepo-EKG:n erityistarpeisiin suunniteltuja elektrodeja.


Helppo kiinnittää ja irrottaa. Kiinnitysliuskan kätevän sijainnin ansiosta elektrodia on helppo ja nopea käsitellä myös yhdellä kädellä. Liuska helpottaa myös johtojen kiinnittämistä ja elektrodin irrottamista.

Erinomainen liimautuvuus. Hyvä liimautuvuus ja mahdollisuus asettaa elektrodi uudelleen säästävät hoitohenkilökunnan aikaa ja pienentävät kustannuksia.

Hyvä ihokontakti. 3M™ 2330 Red Dot™ Lepo-EKG-elektrodien 2330 sähköjohtava liima mahdollistaa hyvän ihokontaktin ja varmistaa tarkan EKG:n myös haastavissa olosuhteissa.

Defibrillaation kestävyys. 2330 Red Dot™ Lepo-EKG-elektrodien hauenleukaliitettä toimii myös defibrillaation jälkeen.

Ympäristönsuojelu. Red Dot™ Lepo-EKG-elektrodien liukenevan hopean määrä alittaa reilusti Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston EPA:n raja-arvot.

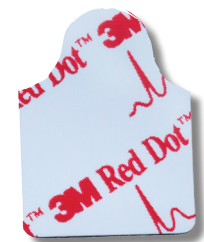

3M™ 2330 Red Dot™ Lepo-EKG-elektrodi

Käyttökohteet	2330
Lepo-EKG	✓

Kun tarvitsette ratkaisun voimakkaaseen hikoiluun

Potilaan voimakas hikoilu voi estää luotettavan ihokontaktin ja laadukkaiden EKG-tulosten saamisen. 3M:n valikoimasta löytyy myös elektrodeja, jotka ratkaisevat kyseiset ongelmat.


Iso koko ja liimautuva alue. Hikoilua kestävässä 3M™ Red Dot™ Elektrodeissa on laaja pinta-ala ja vahva liimautuvuus, jotka parantavat EKG:n laatua.

Tausta pehmeää kuitukangasta. Taustamateriaalinsa ansiosta elektrodin profiili on entistä matalampi. Lisäksi elektrodi on miellyttävämpi ja myötäilee paremmin potilaan ihoa.

Karhennin ihon valmisteluun. 3M™ 2271 Red Dot™ Elektrodit sisältävät karhentimen ihon hellävaraiseen valmisteluun. Karhennus pienentää ihon sähköistä vastusta ja parantaa EKG:n laatua.



3M™ 2271 Red Dot™ Elektrodi, pehmeää kuitukangasta, hikoilevalle iholle

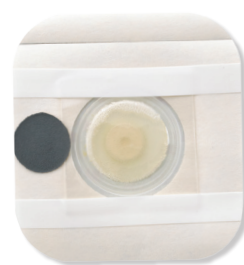

3M™ 2271 Red Dot™ Elektrodi, pehmeää kuitukangasta, hikoilevalle iholle - takaa kuvattuna

Käyttökohteet	2271
Ensiapu	✓
Telemetria/Holter/Tapahtuma	✓
Sydänkeskus	✓
Rasituskoee	✓
Sydänkuntoutus	✓
Sydämen kaikukuvaus	✓

Kun tarvitsette ratkaisun herkälle iholle

Herkkä iho on nykyään yleinen ongelma. Se voi johtua potilaan iästä tai lääkityksestä tai hoidossa toistuvasti käytettävistä liimallisista tuotteista. Tasapaino potilaan ihosta huolehtimisen ja elektrodin hyvän liimautuvuuden välillä tulee löytää, jotta saavutetaan hyväksyttävä EKG:n laatu.

Ihon muotoja myötäilevät taustamateriaalit. 3M™ Micropore™- ja pehmeä kuitukangasteippitausta ovat matalaprofiilisia, mikä vähentää niiden takertumista kankaisiin ja lääketieteellisiin laitteisiin. Tämä pienentää riskiä elektrodien ennenaikaisesta irtoamisesta ja vähentää niiden vaihtamisen tarvetta.

Hellävarainen liima. Paineherkkä liima toimii parhaiten, kun siihen kohdistuu sekä painetta että lämpöä (potilaan kehosta). 3M on vähentänyt tiettyjen paineherkkien liimojensa tahmaisuutta, minkä ansiosta ne ovat hellävaraisempia iholle.



3M™ 2255 Red Dot™ Elektrodi, pehmeää kuitukangasta



3M™ 2239 Red Dot™ Micropore™ -taustainen elektrodi

Käyttökohteet	2255	2239
Sydänkeskus	✓	✓
Sydämen kaikukuvaus	✓	✓

Kun tarvitsette nesteiden läpäisemättömyyttä

Useissa 3M™ Red Dot™ Elektrodeissa on polyeteenistä valmistettu vaahtomuovitausta, joka on nesteitä läpäisemätön. Ne eivät siis ime itseensä elektrodin tarttuvuutta heikentäviä nesteitä. Kysymiset elektrodit sopivat hyvin tilanteisiin, joissa ne voivat joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.

Tausta vaahtomuovia Vaahtomuovitaustaisen, läpäisemättömän elektrodin profiili on hieman korkeampi kuin kankaisen.



3M™ 2237 Red Dot™
Foam valvontaelektrodi



3M™ 2259 Red Dot™
Elektrodi
vaahtomuovia

Käyttökohteet	2259	2237
Ensiapu	✓	✓
Teho-osasto/ Sydänvalvonta	✓	✓
Telemetria/Holter/ Tapahtuma	✓	✓
Leikkaussali	✓	✓
Sydänkeskus	✓	✓
Sydämen kaikukuvaus	✓	✓

Kun tarvitsette edullisen ratkaisun

Edulliset, vaahtomuovitaustalla varustetut 3M™ Elektrodit vastaavat kahteen nykyajan sairaaloiden tärkeimmästä haasteesta: toimintakustannusten pienentämiseen ja hoidon laadun säilyttämiseen. Ominaisuudet:

Elektrodit säilyvät käyttövalmiina 30 päivää pussin avaamisesta.

Elektrodeja voi pitää kolme päivää. Elektrodit ovat miellyttäviä ja niitä voidaan pitää jopa kolme päivää.

Kätevät pakkaukset. Vaahtomuovitaustaiset 3M™2228 Elektrodit on pakattu edulliseen tukkupakkaukseen. Myös vaahtomuovitaustaisia, röntgennegatiivisia 3M™ 2244 ja banaaniliittimellä varustettuja 2228BA Elektrodeja on saatavana tukkupakkauksina. Kaikissa tukkupakkauksissa on 10 elektrodia per liuska.

Vaahtomuovitausta. Miellyttävää ja muotoutuvaa materiaalia.

Kolme mallia. Elektrodeja on saatavana metalli ja röntgennegatiivisella neppariinnityksellä sekä banaanikiinnityksellä.



Vaahtomuovitaustainen
3M™2228 Elektrodi –
metallineppari



Vaahtomuovitaustainen
3M™2244 Elektrodi –
röntgennegatiivinen



Vaahtomuovitaustainen
3M™ 2228BA Elektrodi
– banaaniliitin

Käyttökohteet	2228	2244	2228BA
Ensiapu	✓	✓	✓
Teho-osasto/Sydänvalvonta	✓	✓	✓
Telemetria/Holter/ Tapahtuma	✓	✓	✓
Leikkaussali	✓	✓	✓
Sydänkeskus	✓	✓	✓
Rasitusko	✓	✓	✓
Sydänkuntoutus	✓	✓	✓
Sydämen kaikukuvaus	✓	✓	✓
Pediatrinen teho-osasto	✓	✓	✓

Kun tarvitsette ratkaisun ihonvalmisteluun

Edistyksellinen EKG-valvonta edellyttää ihon hyvää valmistelua erinomaisten tulosten saamiseksi. Käytännössä jokainen EKG-valvontalaitteiden ja -elektrodien valmistaja suosittelee ihon valmistelua ihanteellisen suorituskyvyn takaamiseksi. Tähän on hyvä syy. Tehokkailla valmistelutuotteilla saadaan irrotettua ihon pinnasta heikosti sähköä johtava kerros, mikä parantaa EKG:n laatua.

Paremmat tulokset puolestaan ovat avuksi terveydenhuollon ammattilaisten työssä. Diagnoosin tekeminen helpottuu ja hoitajien työtaakka kevenee. Ongelmien ehkäisy vähentää myös turhia EKG-tulosteita sekä hukan menevien elektrodien määrää.

Potilaiden iho pysyy paremmassa kunnossa. Elektrodien vaihtotarve vähenee.



Kun tarvitsette ratkaisun defibrillointiin

Kun hoitotyön tarkoituksena on potilaan elämän pelastaminen, jokainen sekunti on tärkeä. Käytä siksi defibrilloinnissa ja sydämen rytminsiirroissa hyväksesi 3M™ Defib-Pad Defibrilointityynyjen käyttönopeutta. Käyttövalmiit tynnyt (sähköäjohtava geeli, hengittävällä kuitukangastaustalla) ovat nopeammat laittaa paikoilleen kuin geelit ja voiteet ja tynnyjen kirkkaanoranssi väri on helppo erottaa vaikeissakin olosuhteissa.

Nopea ja kätevä. Säästää aikaa – avaa vain pakkaus ja kiinnitä tynnyt potilaaseen ja noudata sitten normaaleja defibrilloinnin hoitokäytäntöjä. Helppo poistaa potilaan iholta, eikä iholle jää paineluelvytystä häiritseviä liukastainaineita. Ihoa ei siksi tarvitse puhdistaa tynnyjen käytön jälkeen.

Turvallinen. Kiinteägeeliset tynnyt estävät geelin valumisen. Valuminen voi aiheuttaa ihovaurioita ja palovammoja joko potilaalle tai hoitajalle. Kiinteä geeli varmistaa myös sen, että potilaan sydän saa oikean määrän sähköä. Antureihin ei kerry geeliä, joka huonosti puhdistetuna voisi aiheuttaa vaaratilanteita.

Tehokas. Kymmenien vuosien erinomaiset käyttökokeemukset. Onnistumisprosentti on sama kuin alhaisimman resistenssin omaavilla geeleillä. Ei aiheuta anturien syöpymistä tai ruostumista

Omat koot lapsille ja aikuisille.



3M™ Defib Pad 2346N

Tilaustiedot

Standardivalikoiman elektrodit

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2228	3,3 × 3,7 cm	Vaahtomuovi	Liimageeli			1000 elektrodia/pakkaus 10/liuska, 5 liuskaa/pakkaus, 20 /pussia/pakkaus
2228BA	3,3 × 4 cm	Vaahtomuovi	Liimageeli	Kyllä		800 elektrodia/pakkaus
2244	3,3 × 4 cm	Vaahtomuovi	Liimageeli	Kyllä		1000 elektrodia/pakkaus 10/liuska, 5 liuskaa/pakkaus, 20 /pussia/pakkaus
2560	3,3 × 4 cm	Vaahtomuovi	Liimageeli			1000 elektrodia/pakkaus 10/liuska, 5 liuskaa/pakkaus, 20 /pussia/pakkaus

Esijohdotetut elektrodit (vastasyntyneille)

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2269T	2 × 4 cm	Kirkas teippi	Sähköä johtava liima	Kyllä		300 elektrodia/pakkaus 3/liuska, 10 liuskaa/pussi, 10 pussia/pakkaus

Uudelleenkiinnitettävät

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2660-5	4 × 3,1 cm	Uudelleenkiinnitettävä	Kaksiteho hydrogeeliliima	Kyllä		1000 elektrodia/pakkaus, 5/liuska, 1 liuska/pussi, 200 pussia/pakkaus
2670-5	4 × 3,1 cm	Uudelleenkiinnitettävä	Kaksiteho hydrogeeliliima	Kyllä		1000 elektrodia/pakkaus, 5/liuska, 1 liuska/pussi, 200 pussia/pakkaus

Pediatrics

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2248	4,4 cm halkaisija	Micropore	Kiinteä geeli			1000 elektrodia/pakkaus 50/pussi, 20 /pussia/pakkaus
2268-3	3,2 cm halkaisija	Pehmeä kuitukangas	Kiinteä geeli			60 elektrodia/pakkaus 3/pussi, 20 pussia/pakkaus

Lyhytaikainen diagnostiikka

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2330	3 × 2 cm	Muovi, hauenleukakiinnitys	Sähköä johtava hydrogeeliliima	Kyllä		4000 elektrodia/pakkaus 10/liuska, 10 liuskaa/pussi, 40 pussia/pakkaus

Voimakkaaseen hikoiluun

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2271	5,1 × 5,5 cm	Pehmeä kuitukangas	Kiinteä geeli		Kyllä	1000 elektrodia/pakkaus 5/pussi, 200 pussia/pakkaus

Tilaustiedot

Herkälle iholle

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2255	6 cm halkaisija	Pehmeä kuitukangas	Kiinteä geeli		Kyllä	1000 elektrodi/pakkaus 50/pussi, 20 pussia/pakkaus
2239	6 cm halkaisija	Micropore	Kiinteä geeli		Kyllä	1000 elektrodi/pakkaus 50/pussi, 20 pussia/pakkaus

Nesteitä läpäisemättömät

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2237	4 x 4 cm halkaisija	Vaahtomuovi	Kiinteä geeli			1000 elektrodi/pakkaus 5/liuska 20 pussia/pakkaus
2259	5,1 cm halkaisija	Vaahtomuovi	Kiinteä geeli		Kyllä	1000 elektrodi/pakkaus 10/liuska, 50/pussi, 20 pussia/pakkaus
2560	4 x 3,5 cm	Vaahtomuovi	Liimageeli			1000 elektrodi/pakkaus 10/liuska, 50/pussi, 20 pussia/pakkaus

Edulliset elektrodit

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Geelin tyyppi	Röntgenläpäisevä	Sisältää karhentimen	Pakkaus
2228	3,7 x 3,3 cm	Vaahtomuovi				1000 elektrodi/pakkaus 5 liuskaa/pussi, 20 pussia/pakkaus
2244	3,3 x 4 cm	Vaahtomuovi		Kyllä		1000 elektrodi/pakkaus 5 liuskaa /pussi, 20 pussia/pakkaus
2228BA	3,3 x 4 cm	Vaahtomuovi				800 elektrodi/pakkaus

Ihon valmistelu

Tuotenro	Koko	Taustamateriaali	Pakkaus
2236	1,91 x 3,04 cm	Karhennusteippi	1 rulla, 36 rullaa/pakkaus

Defibrillointiin

Tuotenro	Koko	Pakkaus
2346N	11,4 x 15,3cm	10 paria/pakkaus 1 pari/pussi
2345N	11,4 x 11,4cm	10 paria/pakkaus 1 pari/pussi

Lisätietoa 3M™ Red Dot™ Elektrodeista saat asiakaspalvelustamme numerossa (09) 525 21 tai verkkosivuiltamme www.3M.fi.



Suomen 3M Oy
Terveystuotteet
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Puh. (09) 525 21
www.3M.fi

3M ja Red Dot ovat 3M Company:n tavaramerkkejä. Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa.
© 3M 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.
BR530033-2FI150804



4041 0895
Painotuote