

3M Science.
Applied to Life.™

Terveystuotteet

3M™ Tegaderm™ CHG I.V. suojasidos



3M™ Tegaderm™ CHG I.V. suojasidos

Ohje asettamiseen




1 Noudata aina osastosi hygieniaohjeita I.V.-sidosten asettamisessa ja poistamisessa. Poista sidoksen taustapaperi.




2 Aseta CHG-suojasidos katetrin päälle niin, että geelityyny tulee pistokohdan ja katetrin päälle. Mikäli katetri on kiinnitetty ompeleilla suojasidoksen geelityyny voidaan asettaa ompeleiden päälle.




3 Painele sidos ja myös sidoksen reunat hyvin ihoon kiinni, jotta saat aikaan tukevan kiinnityksen.

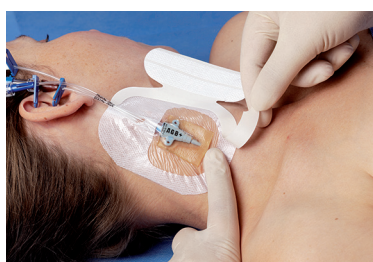

4 Poista paperiset kehykset. Voit painella sidosta vielä lämpimällä kädellä, jotta liima tarttuu hyvin ihoon.

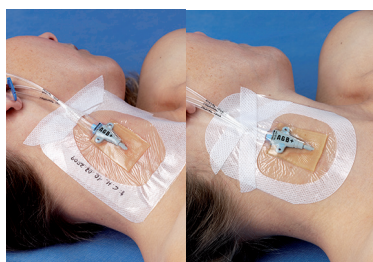

5 Sidoksen mukana tulee ylimääräisiä teippiliuskoja. Teippiliuskat voit asettaa letkujen alle sekä päälle varmistamaan kiinnityksen.

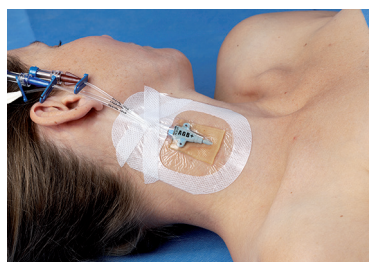


6+7 Tegaderm™ CHG suojasidos on syytä vaihtaa, mikäli

- geelityyny on muuttunut löysäksi, eikä enää palaudu painettaessa takaisin muotoonsa
- suojasidos on likaantunut ja nuhjuinen
- nestettä/eritettä vuotaa sidoksen alle
- pistokohtaa ei voi enää tarkkailla

Ohje poistamiseen



1 Noudata aina osastosi hygieniaohjeita I.V.-sidosten asettamisessa ja poistamisessa. Poista ensin ylimääräiset teippiliuskat.

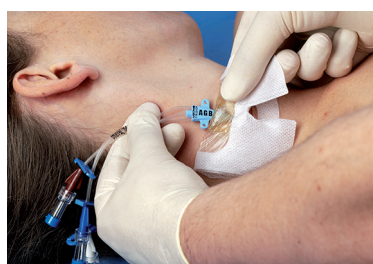

2 Aloita poistaminen sidoksen reunasta ja etene pistokohtaa kohden. Poista sidosta varovasti tukien samalla ihoa. Irrota sidosta ihon myötäisesti ja hitaasti vetäen.



3 Tue katetria suojasidoksen poistamisen yhteydessä ja jos geelityyny on tarttunut ihoon tai katetriin, voit kostuttaa geelityynyä keittosuolaliuksella tai alkoholilla.



Suomen 3M Oy
Terveystuotteet
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Puh. (09) 525 21
www.3M.fi

Muistathan kierrättää.
Painettu Suomessa. © 3M 2017.
Kaikki oikeudet pidätetään. PL531096-1F170117