

3M™ Tegaderm™ CHG IV kiinnitys- ja suojasidos (Klooriheksidiini glukonaatti)

SIDOKSEN LAITTAMINEN JA POISTAMINEN

Sidoksen valinta

- Valitse sidos, joka ulottuu ainakin 2,5 cm katetrin pistokohdasta, sitä ympäröivälle, kuivalle, terveelle iholle.

Pistokohdan ympärysihon valmistelu

- Suorita ihonvalmistelu hoitolaitoksenne käytäntöjen mukaisesti.
- Ihokarvojen leikkaus sidoksen kiinnitysalueelta parantaa sidoksen kiinnittyvyyttä.
- Älä ajele ihoa.
- Anna ihonvalmistelu- ja ihonsuojatuotteiden kuivua täysin ennen kuin kiinnität Tegaderm™ CHG sidoksen iholle, jotta sidos kiinnittyisi mahdollisimman hyvin, eikä se ärsyttäisi ihoa.



1.

Avaa suojakuori ja ota steriili Tegaderm CHG IV Kiinnitys- ja suojasidos esiin.



2.

Poista sidoksen taustapaperi, niin että liimapinta tulee näkyviin. Aseta sidos niin, että sen liimapuoli on ihoa vasten.



3.

Keskitä CHG geelityyny pistokohdan päälle, ja silittele sidoksen sisemmät reunat kiinni kevyesti painellen. Mikäli katetri on ommeltu paikoilleen, geelityyny voi asettaa sekä pistokohdan että ompeleiden päälle.




4.

Poista sidoksen paperikehykset hitaasti samalla, kun silität sidoksen läpinäkyviä, ulompia reunoja kiinni.



5.

Silitä vielä sidos keskeltä reunoja kohti samalla kevyesti painellen, jotta sidos kiinnittyisi mahdollisimman hyvin.

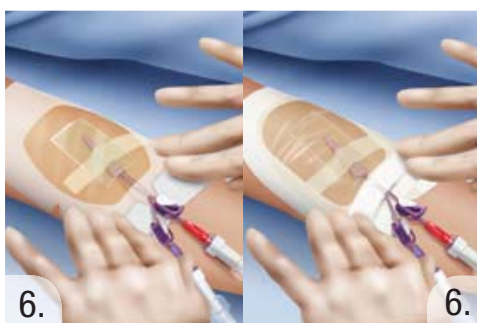

6.



7.

1658 sidoksessa on mukana lovettu Medipore-teippi, joka laitetaan letkujen alle ja sidoksen reunojen yli. Tällä varmistetaan katetrin kiinnitys. 1657 ja 1659 sidoksissa on mukana kaksi Micropore -teippiliuskaa. Toinen laitetaan letkujen alle ja toinen niiden päälle.

Kirjaa etikettiliuskaan sidoksen laitto aika hoitolaitoksenne käytäntöjen mukaisesti. Kiinnitä etikettiliuska sidokseen. Varmista kaikkien katetrien, letkujen ja jatkeiden kiinnitys.



1.

Aloita poistamalla teippiliuskat, joilla letkujen kiinnitys on varmistettu. Ota varovaisesti kiinni sidoksen yhdestä vahvistetusta reunasta ja irroita sidos varovaisesti iholta vetämällä sitä pistokohtaa kohti tai ihokarvoituksen kasvun suuntaisesti. Irroita sidos hitaasti ihoa pitkin vetäen, nostamatta sidosta ylös iholta. Liimapoistoainetta voidaan haluttaessa käyttää helpottamaan irrottamista, mutta se ei ole välttämätöntä.



2.

Kun sidosta vedetään taaksepäin, itsensä päälle, tue sidosta painamalla peukalo geelitynyyn päälle, helpottamaan sidoksen irrottamista. Sidosta tulee poistaa niin, että geelityyny pysyy ehjänä. Vedä sidosta katetrin pistokohtaa kohti, samalla ihoa ja katetria tukien, ettei katetri irtoaisi paikoiltaan. Älä vedä sidosta suoraan ylös iholta, sillä silloin poistaminen tuntuu epämiellyttävältä ja iho saattaa vaurioitua.

Kivuton poistaminen

HUOM! Jos klooriheksidittyyny on tiukasti kiinni katetrissa tai sen siivekkeessä, kostuta tyynyä steriilillä keittosuolaliuoksella tai alkoholilla/klooriheksidiinillä, jolloin tyyny irtaantuu helposti katetrasta ja sen siivekkeistä.