

3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidoksen asetuksen pikaopas

Rajoitetun kaupallisen julkistuksen lopussa tehdyssä lääkärikyselyssä 24 terveydenhuollon ammattilaista antoi seuraavat vastaukset¹:

85 %

lääkäreistä (20/24)

oli sitä mieltä, että V.A.C. Dermatac -kalvosidos

- oli helppokäyttöinen
- oli kätevä käsiteltävä uudelleenasettelun ansiosta
- oli nopea asettaa ja poistaa

75 %

lääkäreistä (18/24)

koki, että V.A.C. Dermatac -kalvosidosta käytettäessä tarvittiin...

- VÄHEMMÄN kalvosidosta sidosten vaihdossa
- VÄHEMMÄN ikkunaruuututekniikan käyttöä
- EIKÄ tarvittu lainkaan tiivistystä helpottavia lisä tuotteita

Helppokäyttöisyyttä koskevassa sisäisessä tutkimuksessa:

86 %

lääkäreistä (17/20)

piti V.A.C. Dermatac -kalvosidosta parempana kuin tavanomaista alipaineimuhoidon kalvosidosta²

Asetuksen vaiheet

Ennen alipaineimuhoidon aloittamista ja ennen jokaista sidoksen asetuskertaa haava ja haavaa ympäröivä alue on puhdistettava perusteellisesti lääkärin määräyksen tai laitoksen käytännön mukaan. Katso lisätietoja V.A.C. Dermatac -kalvosidoksen käyttöohjeista.

1

Leikkaa kalvosidos tarvittaessa käsittelyliuskastä käsittelyliuskaan jättäen vähintään 5 cm:n reunus.

- Tämä mahdollistaa kalvosidoksen helpomman asettelun, kun käsittelyliuskat ovat vielä paikoillaan.

2

Aseta V.A.C. Dermatac -kalvosidos väljästi haava-alueen päälle – älä venytä

- Venyttäminen voi aiheuttaa kireyttä, kun 3M™ V.A.C.® -hoito aloitetaan.

3


Tasoita rypyt ja asettele tarvittaessa uudelleen

- Uudelleenasettelu käsittelyliuskojen ollessa kiinnitettynä voi helpottaa kalvosidoksen yleistä käsittelyä, mutta kalvosidos voidaan asettaa uudelleen 15–20 minuutin kuluessa alkuasetuksesta, vaikka käsittelyliuskat olisi irrotettu ja V.A.C.®-hoito aloitettu.
- Voit asettaa kalvosidoksen uudelleen useita kertoja sidoksen asetuksen aikana ilman, että sidoksen kiinnittymiskyky heikkenee.

4


Irrota käsittelyliuskat vetämällä rei'itetyjen reunojen kohdalta.

- Tue asetettua kalvosidosta toisella kädellä, kun vedät liuskat irti.

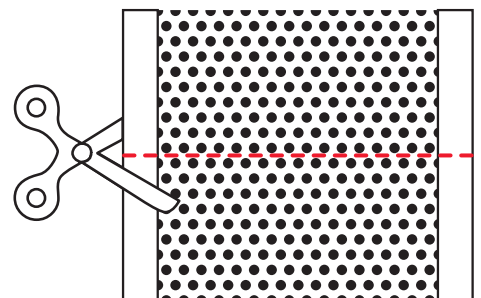

Asetustekniikat

- Muotoile 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos kaarevan anatomian mukaiseksi (katso kuvaa) leikkaamalla kalvosidokseen kolmiokuvio tai lovi ja tasoittamalla kalvosidos kaarevia muotoja myötäileväksi.
- Aseta kalvosidos yhden kaarevan alueen päälle ja leikkaa sitten sidokseen lovia.
- Taita lovia ympäröivät reunat päällekkäin ja leikkaa tarvittaessa lovia lisää, jotta kalvosidos myötäilee paremmin kaarevaa anatomiaa.
- Päällekkäin taitettu kalvosidoksen osa muodostaa itsessään tiivsteen.
- Jatka 3M™ V.A.C.® -hoidon aloittamista puhkaisemalla kalvosidos ja leikkaamalla sen läpi 2,5 cm:n eli suunnilleen 2 euron kolikon kokoinen reikä, jotta SensaT.R.A.C.™-tyyny voidaan asettaa paikalleen tai sen silloittaminen voidaan aloittaa.
- Aktivoi V.A.C.®-hoito.

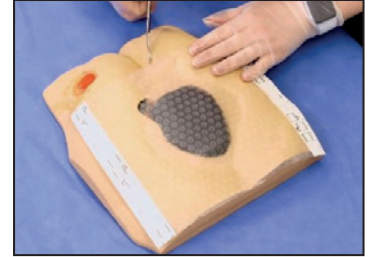

Tilaus:	Myyntierä	Tilaustiedot
3M™ Dermatac™ -kalvosidos	DTAC10LDP	10 kpl:n laatikko
3M™ Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – pieni	DTGF10PKS	10 kpl:n laatikko – 1 x 3M™ Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – pieni	DTGF05PKS	5 kpl:n laatikko – 1 x 3M™ Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – keskikokoinen	DTGF10PKM	10 kpl:n laatikko – 1 x 3M™ Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – keskikokoinen	DTGF05PKM	5 kpl:n laatikko – 1 x 3M™ Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – suuri	DTGF10PKL	10 kpl:n laatikko – 2 x 3M™ Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – suuri	DTGF05PKL	5 kpl:n laatikko – 2 x 3M™ Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti

Huomaa: Jotkin tässä luettelossa luetellut tuotteet eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa. Tuotekoodi voi vaihdella maan mukaan. Kysy maakohtaiset tuotenumerot paikalliselta edustajalta.



Jakelija
Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D,
02200 Espoo

puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

KCI
part of 3M

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikalliseen edustajaan.

Viitteet

1. KCI. CLINICIAN SURVEYS. 17. TOUKOKUUTA 2019.
2. KCI. HEOR-2019-004-DERMATAC.Time.Study.Econ.Model.

HUOMAUTUS: Näille tuotteille ja hoidoille on olemassa erityisiä käyttöaiheita, vasta-aiheita, varoituksia, varotoimenpiteitä ja turvallisuustietoja. Keskustele lääkärin kanssa ja lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Tämä materiaali on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

© 2021 3M. Kaikki oikeudet pidätetään. 3M ja muut asiakirjan sisältämät merkit ovat tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Luvaton käyttö kielletty. Käytetään lisenssillä Kanadassa. PRA-PM-FI-00033 (09/2021). OMG207252