

3M Science.
Applied to Life.™

3M Medical Solutions Division

Vain kaksi askelta tehokkaaseen ja mukavaan kompressiohoitoon

3M™ Coban™ 2
2-kerros kompressiosidosjärjestelmä



3M™ Coban™ 2

2-kerros

kompressiojärjestelmä

3M™ Coban™ 2 2-kerros kompressiosidosjärjestelmä on suunniteltu laskimoperäisten säärihaavojen kompressiohoitoon. 3M Coban 2 kompressiosidosjärjestelmä koostuu kahdesta lateksittomasta sidoskerroksesta, jotka kiinnittyvät saumattomasti toisiinsa. Toisiinsa kiinnittyvät sidoskerrokset pitävät kompressiosidoksen paikoillaan ja pienentävät merkittävästi sidoksen liukumisen riskiä. Kompressiosidosta voi pitää yhtäjaksoisesti maksimissaan 7 päivän ajan.

Tehokas ja tasainen kompressio

- Kompressiosidosjärjestelmä laskee turvotusta, sekä edistää haavanparanemista ja se pystyy ylläpitämään terapeutista kompressiota 7 päivän ajan.
- Antaa tehokasta kompressiohoitoa 7 päivän ajan
- Tutkimukset osoittavat, että kompressiosidoksen liukuminen / valuminen alaspäin oli minimaalisen pientä 7 päivän hoitojakson jälkeen¹

Helppokäyttöinen

- Nopea laittaa, koska kompressiosidoksessa on vain kaksi kerrosta
- Yhdenmukainen ja helppo sitomistekniikka, kun päällimmäisen kompressiokerroksen voi laittaa raajaan täysin venytettynä
- Kaksi sidoskerrosta kiinnittyvät toisiinsa luotettavasti, jolloin ylimääräisiä teippejä tai kiinnikkeitä ei tarvita pitämään kompressiosidosta paikoillaan

Ohut ja mukava kompressio

- Kaksikerros kompressiosidosjärjestelmä on huomattavasti ohuempi kuin perinteiset 4-kerros kompressiosidosjärjestelmät
- Tasainen kompressio, joka on helppo saavuttaa
- Potilas voi käyttää omia kenkiään kompressiohoidon aikana
- Potilas pystyy liikkumaan ja osallistumaan sosiaalisiin tapahtumiin kompressiohoidon aikana



Askel 1: Pehmustettu sisäkerros - mukavuuskerros

- Polyuretaanivaahdo ja Coban™ -laminaatti
- Pehmustekerroksen vaahdonmuovipuoli laitetaan ihoa vasten
- Imukykyinen, pehmeä ja mukava
- Pysyy paikoillaan ihoa vasten
- Korvaa muut pehmusteet

Askel 2: Ulompi kompressiokerros

- Muunneltu Coban™
- Antaa tehokkaan, jatkuvan kompression 7 päivän ajan
- Kiinnittyy yhteen sisäkerroksen kanssa ja muodostaa kevyen ja ohuen kompressiosidoksen

3M Tuotenmero	Tuotetiedot	Kpl/rasia	Rasiat/kulj. pakkaus.
2094	3M™ Coban™ 2 2-kerros kompressiosidosjärjestelmä	1 setti	8 settiä

Käyttötarkoitus

Suunniteltu laskimoperäisten säärihaavojen kompressiohoitoon. 3M™ Coban™ 2 2-kerros kompressiosidosjärjestelmä sopii potilaille, joiden ABI-indeksi on >0,8.

1) Hampton S., et al. Summary of five case studies on the treatment of venous leg ulcers with a new two layer compression system in a community setting. Data on File. 3M Health Care, May 2006. 2 Schnobrich E., et al. 7-Day In-use Assessment Of a Unique, Innovative Compression System. Poster presented at The 19th Annual Symposium on Advanced Wound Care & Medical Research, San Antonio, USA May 2006.



Suomen 3M Oy
Medical Solutions Division
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puh. (09) 525 21

3M, "3M Scienc. Applied to Life" ja Coban ovat 3M Companyn omistamia tuotemerkkejä. Muistathan kierrättää. © 3M 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. 152018762-1FI20200508