



Science.
Applied to Life.™

Terveystuotteet

Vain kaksi askelta tehokkaaseen ja mukavaan kompressiohoitoon

Coban™ 2 Lite
2-kerros kompressiosidosjärjestelmä



3M™ Coban™ 2 Lite

2-kerros

kompressiosidosjärjestelmä

3M™ Coban™ 2 Lite 2-kerros kompressiosidosjärjestelmä on erityisesti suunniteltu antamaan kevennettyä kompressiohoitoa pienemmän terapeuttisen kompression avulla.

Samanaikaisesti 3M™ Coban™ 2 Lite on mukava ja hyväksytty hoitomuoto potilailla, joiden toleranssi kompressiohoitoon on heikentynyt, sekä potilailla joilla on:

- Laskimoperäinen säärihaava sekamuotoisella taudinkuvalla
- Nilkka-olkavarsipainesuhde (ABI-indeksi) vähintään 0,5 tai enemmän
- Huonontunut liikkuvuus
- Äskettäin määrätty kompressiohoito tai jos toleranssia kompressiohoitoon ei tiedetä

3M™ Coban™ 2 Lite tarjoaa optimaalisen dynaamisen työpaineen, samoin kuten 3M™ Coban™ 2 Kaksikerroksinen kompressiojärjestelmä, mutta 25% pienemmällä lepopaineella. 3M™ Coban™ 2 kompressiosidosjärjestelmä koostuu kahdesta lateksittomasta sidoskerroksesta, jotka kiinnittyvät saumattomasti toisiinsa.

Helppokäyttöinen

- Nopea laittaa, koska kompressiosidoksessa on vain kaksi kerrosta
- Yhdenmukainen ja helppo sitomistekniikka, kun päällimmäisen kompressiokerroksen voi laittaa raajaan täysin venytettynä
- Kaksi sidoskerrosta kiinnittyvät toisiinsa luotettavasti, jolloin ylimääräisiä teippejä tai kiinnikkeitä ei tarvita pitämään kompressiosidosta paikoillaan

Ohut ja mukava kompressio

- Kaksikerros kompressiosidosjärjestelmä on huomattavasti ohuempi kuin perinteiset 4-kerros kompressiosidosjärjestelmät
- Tasainen kompressio, joka on helppo saavuttaa
- Potilas voi käyttää omia kenkiään kompressiohoidon aikana
- Potilas pystyy liikkumaan ja osallistumaan sosiaalisiin tapahtumiin kompressiohoidon aikana



Askel 1: Pehmustettu sisäkerros - mukavuuskerros

- Polyuretaanivahto ja Coban™-laminaatti
- Pehmustekerroksen vahtomuovipuoli laitetaan ihoa vasten
- Imukykyinen, pehmeä ja mukava
- Pysyy paikoillaan ihoa vasten
- Korvaa muut pehmusteet

Askel 2: Ulompi kompressiokerros

- Muunneltu Coban™
- Antaa tehokkaan, jatkuvan kompression 7 päivän ajan
- Kiinnittyy yhteen sisäkerroksen kanssa ja muodostaa kevyen ja ohuen kompressiosidoksen

3M tuotenumero	Tuotetiedot	Kpl/rasia	Rasiat/ kuljetuspakkaus
2794E	3M™ Coban™ 2 Lite 2-kerros kompressio- sidosjärjestelmä	1 setti	8 settiä/ kuljetuspakkaus

Käyttötarkoitus

Sopii käytettäväksi potilailla, joilla on heikentynyt toleranssi (sietokyky) kompressiohoitoon. 3M™ Coban™ 2 Lite -kaksikerros kompressiosidosjärjestelmä sopii potilaille, joiden ABI-indeksi on >0,5.



Suomen 3M Oy
Medical Solutions Division
Keilaranta 6
02150 Espoo
Puh. (09) 525 21

3M, "3M Science. Applied to Life" ja Coban ovat 3M Companyn omistamia tuotemerkkejä. Muistathan kierrättää. ©3M 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. 14883395-1FI20200427