

**Toimivuus
iholla:**

Höyhenmerkki
kuvaa tuotteita, joilla on
tarvittava kiinnitysteho,
mutta ihovaurion riski
on minimoitu.

3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidos


Kiinnitys- ja irrotusohje

3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidoksen asettaminen



Valmistele iho


- Ihon ja letkun tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaat epäpuhtauksista ja ihon rasvasta.
- Jotta kiinnitys pitää, anna puhdistus- ja suoja-aineen kuivua kunnolla ennen kiinnitystä.
- Avaa pakkaus ja laita se sivuun.

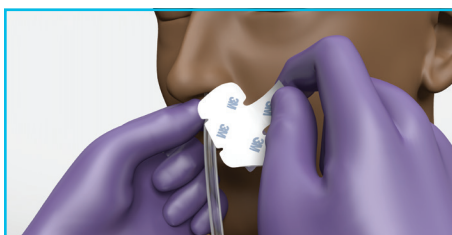

Irrota sidoksen päällispaperi


- Vie letku paikalleen laitoksen käytännön mukaisesti.
- Irrota yläpuolinen paperisuojaus, jotta liimapinta tulee esiin.

Huomaa: Pidä letku stabiloituna koko kiinnityksen ajan.

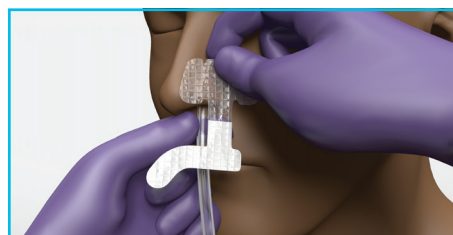


Aseta sidos paikalleen

- Sijoita sidos nenän sille sivulle, jolta letku viedään sisään.
- Jätä sierainaukko keskelle ja aseta sidos nenän päälle.
- Jos mahdollista, sovita niin, että aukko istuu nenän muotoon.
- Tehosta kiinnittymistä ihoon painamalla lujasti.

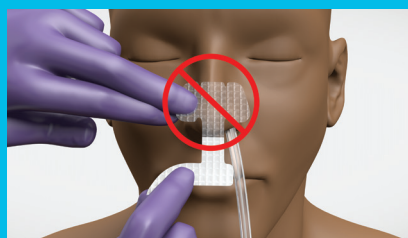


HUOMAA: kiinnityssidoksen EI pidä olla keskellä nenää

Sivuun sijoittamalla letku pysyy varmemmin vapaana ja kosketus sieraimen minimoidaan.

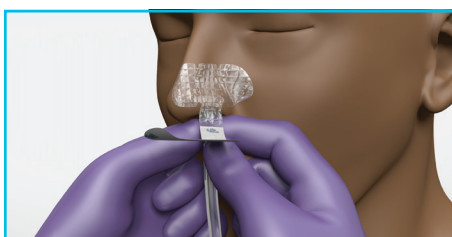

Irrota alapuolen suojapaperi

- Irrota alapuolinen paperisuojaus, jotta liimapinta tulee esiin.
- Sijoita letku siten, että se on linjassa kiinnityssidoksen pystyliepeen kanssa.
- Tehosta kiinnittymistä letkuun painamalla lujasti.

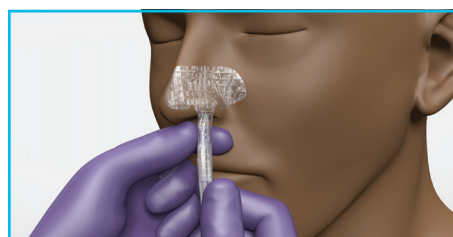


Kiedo ja kiinnitä

- Kiedo vaakalieve spiraalimaisesti letkun ympärille.
- Varmista kiinnittyminen painamalla välinettä lujasti.


Huomaa: Älä kiedo 3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidoksen lieventä liian kireälle tai lähelle sierainta, ettei siitä aiheudu painevauriota.

3M™ Nenä-mahaletkun kiinnityssidoksen huolto ja vinkit

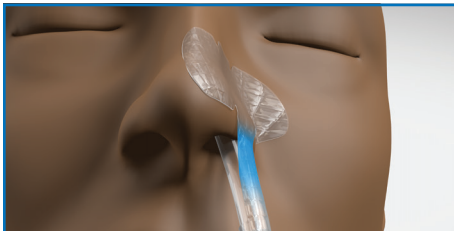

Liimaton osa


- Liimaton alue nenän juuressa on tarkoitettu avustamaan letkun vapaana riippumista.
- Älä kiinnitä lisäteippiä sen päälle tuotteen kiinnittymisen tehostamiseksi.
- Liimaton uloke liepeen kärjessä on tarkoitettu avustamaan irrottamisessa.

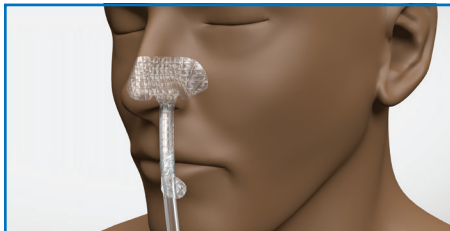

Seuranta


- Kiinnityskohta tulee tarkistaa säännöllisesti toimipisteen käytännön mukaisesti, jotta huomaat heti, jos iho alkaa oireilla tai letku siirtyy paikaltaan.
- Ihon oireilu voi ilmetä punoituksena, värimuutoksina, kuumotuksena tai kylmenemisenä, valkoisen painallusjäljen puuttumisena, kipuna, pistelynä tai kutinana.
- Jos epäilet ihon ärsytystä tai vauriota, irrota kiinnityssidos, tarkasta ihoalue paljaana ja päättä, millaista hoitoa se tarvitsee.

Sidoksen vaihto

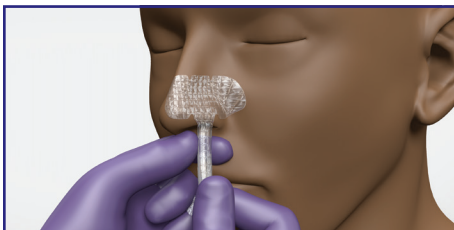

Irrota letkusta

- Pidä letkua paikallaan ja tartu liepeen kärjen liimattomaan ulokkeeseen irrottaaksesi lieve letkusta.

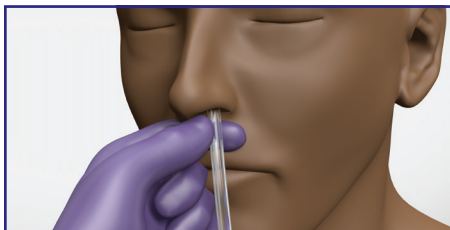


Irrota ja vaihda

- Irrota kiinnityssidos nenästä pitäen samalla letkua paikallaan.
- Kun sidos on irrotettu, voit kiinnittää uuden.

Huomaa: Vedä matalalla ja hitaasti.

Huomaa: Varmista, että iho ja letku ovat puhtaat, kuivat ja vapaat liimajäämistä ja ihon rasvasta ennen uuden välineen kiinnitystä.

Sidoksen irrotus

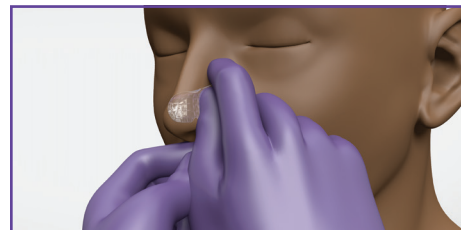

Nenä-mahaletkun poistaminen

- Irrota kiinnityssidos nenästä.
- Irrota letku potilaasta.

Huomaa: Vedä matalalla ja hitaasti.

Tuotteen käyttöohjeista saat tärkeitä lisätietoja.

Katso lisätietoja osoitteesta
[3M.com/MedicalSecurement](https://www.3m.com/MedicalSecurement).



Suomen 3M Oy
Medical Solutions Division
Keilaniementie 1
02150 Espoo
(09) 525 21

© 2022 3M. Kaikki oikeudet pidätetään.
3M ja muut tavaramerkit ovat suojattuja. Luvaton käyttö kielletty.
Käytetään luvanvaraisesti Kanadassa.
GL_ENG_70-2013-1311-4