


Vahvistettu
kuitukangastausta
parantaa pitoa

Ainutlaatuinen muoto
minimoi ihon ja
letkun kosketuksen

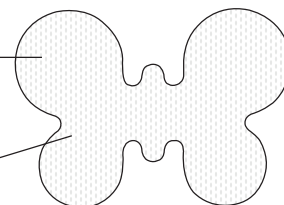


**Toimivuus
iholla**

Höyhenmerkki kuvaa
tuotteita, joilla on
tarvittava kiinnitysteho,
mutta ihovaurion riski
on minimoitu.

3M™ Letkun kiinnityssidos


Kiinnitys- ja irrotusohje

3M™ Letkun kiinnityssidoksen asettaminen paikalleen

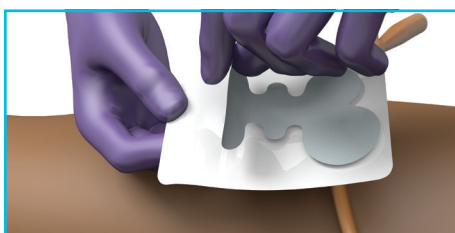

Alkutoimenpiteet


- Avaa pakkaus.
- Irrota taustapaperi kokonaan.

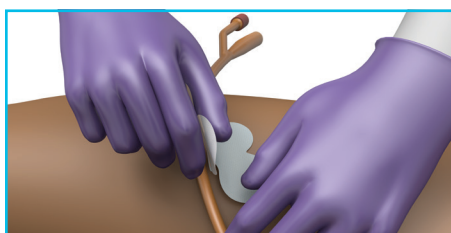

Kiinnitä ensimmäinen siipi

- Kosketa letkua mahdollisimman vähän ja aseta sidoksen yksi siipi (puoli) potilaan ihoa vasten.

Huomaa: Älä venytä sidosta kiinnityksen yhteydessä, sillä pingotus voi johtaa ihovaurioon.

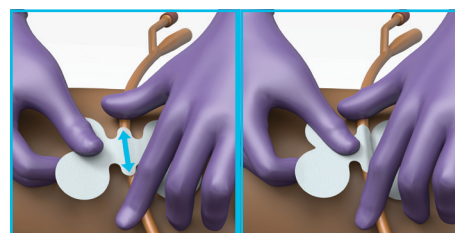


Tarkista letkun asento

- Letkun tulisi asettua sidoksen keskilinjaan.
- Kiedo sidos letkun ympärille.




Kiinnitä toinen siipi

- Aseta sidoksen toinen siipi (puoli) potilaan ihoa vasten.
- Paina kunnolla reunoja myöten ja varmista hyvä tarttuminen ihoon ja letkuun.

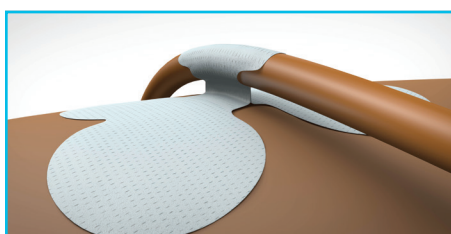


Tarkista lopullinen asento

- Varmista, että letku on hieman koholla iholta painevaurioiden ehkäisemiseksi.

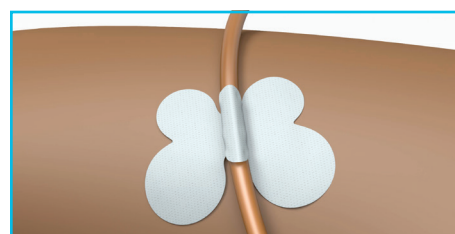


Kiinnitetty sidos

3M™ Letkun kiinnityssidoksen vaihto ja irrotus

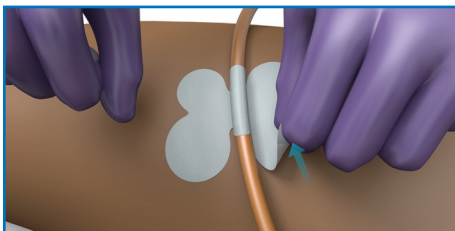

Irrotustoimenpiteet


- Käsittele letkua mahdollisimman vähän irrotettaessa.
- Irrota ensin yksi kulma.

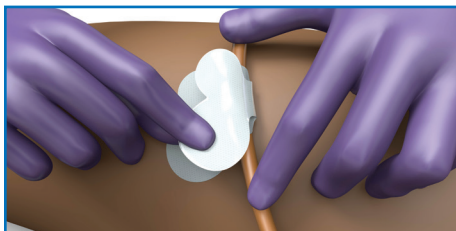

Irrota ensimmäinen siipi

- Stabiloi letku potilaaseen.
- Pidä sidos ihon suuntaisena.
- Irrota yksi siipi kokonaan.

Huomaa: Vedä matalalla ja hitaasti.

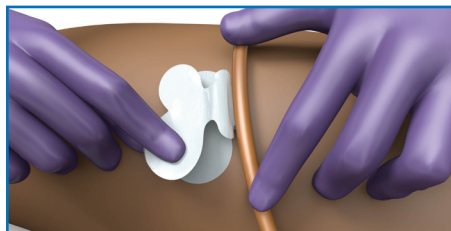

Stabiloi ja irrota

- Irrota keskiosa varoen letkun ympäriltä.
- Irrota sidoksen toinen siipi ihosta.

Huomaa: Vedä matalalla ja hitaasti.

Tuotteen käyttöohjeista saat tärkeitä lisätietoja.

Katso lisätietoja osoitteesta
3M.com/MedicalSecurement.



Suomen 3M Oy
Medical Solutions Division
Keilaniementie 1
02150 ESPOO
(09) 525 21

© 2022 3M. Kaikki oikeudet pidätetään.
3M ja muut mainitut tavaramerkit ovat
suojattuja ja/tai rekisteröityjä. Luvaton käyttö
kielletty. Käytetään luvanvaraisesti Kanadassa.
GL_EN_70-2013-1330-4