

3M™ Tegaderm™ CHG -klooriheksidiiniglukonaattigeelityyny 1664R

3M™ Tegaderm™ CHG -tekniikka on ollut käytössä suonensisäisten katetrien antimikrobisena suojana jo yli vuosikymmenen ajan. Nyt se on saatavilla erilaisten perkutaanisten laitteiden helppoon suojaukseen.

Läpinäkyvä CHG-geelityyny

Tarjoaa antimikrobisen suojan ja näköyhteyden pistokohtaan. Ylimääräistä kostutusta ei tarvita aktivointia varten. Imee nesteitä.*

Erittäin hengittävä kalvo

Auttaa kosteutta poistumaan.

Valmiiksi lovettu

Muotoutuu useisiin perkutaanisiin laitteisiin.

Liimareunus

Hellävarainen, mutta vahva kiinnitys ihoon.

Kuvaa on suurennettu yksityiskohtien havainnollistamiseksi.

Antimikrobinen suoja

Aktivoituu heti ja vähentää tutkitusti ihon flooraa ja estää sen uudelleenkasvua yli 7 päivän ajan.¹ Tehokas grampositiivisia ja gramnegatiivisia bakteereja, hiivaa ja homeita vastaan.² Kykenee absorboimaan verta ja haavaeritettä vaarantamatta antimikrobista suoja.

Monikäyttöisyys

Muotoutuu monenlaisiin perkutaanisiin laitteisiin (kokoon 40 FR asti) ja pysyy kiinnittyneenä pistokohtaa ympäröivään ihoon.

Pistokohdan näkyvyys

Läpinäkyvä kalvo mahdollistaa pistokohdan jatkuvan seurannan, jotta komplikaatiot havaitaan varhain.

*Testeissä on todettu, että CHG-geelityyny absorboi 8x painonsa verran keittosuolaliuosta ja 3x painonsa verran verta.

1 Normaalin ihoflooran *in vivo* time-kill, EM-05-136567, EM-05-000803.

2 Antimikrobisen tehon laboratoriotestaus, EM-05-666609, EM-05-666611. Laboratoriotestaus ei takaa kliinistä korrelaatiota.


1664R

3M™ Tegaderm™ CHG -klooriheksidiini-glukonaattigeelitynny soveltuu käyttöön erilaisten perkutaanisten latteiden kanssa. Aseta ja irrota tyyngy seuraavia ohjeita noudattaen:

Tuoteopas


Dreenit, ulkopuoliset kiinnitysnastat ja muut perkutaaniset laitteet

Valmistele

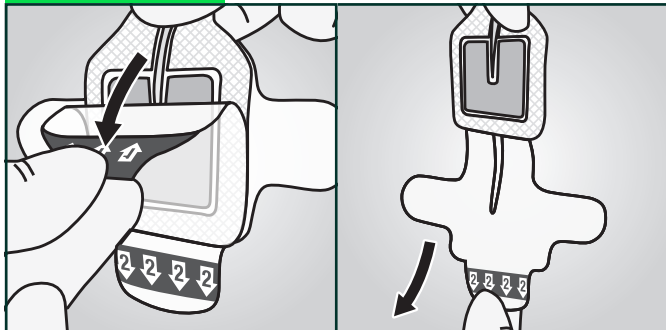


Valmistele ihoalue noudattaen laitoksen hoitokäytänteitä. Varmista, että ihoalue on täysin kuiva. Poista taustapaperit, ensin 1 ja sitten 2, kuvan mukaisesti.

Painele

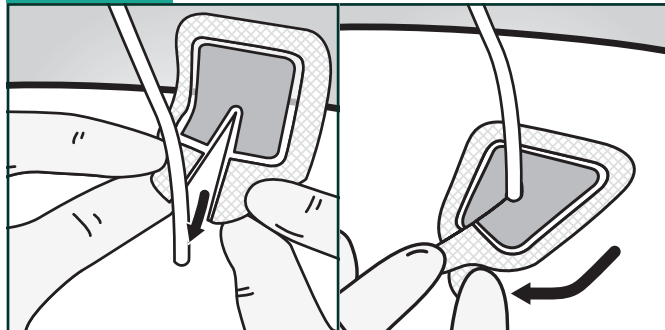

Sijoita CHG-geelitynny laitteen ympärille pistokohta peittäen ja varmista, että laite nojaa geelitynny lovea vasten. Laitoksen hoitokäytäntöjen mukaan CHG-geelitynnyä voi käyttää yhdessä läpinäkyvän puoliläpäisevän kalvosidoksen kanssa (esim. 3M™ Tegaderm™ HP, 3M™ Tegaderm™ I.V. Port, 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced -sidos).

Seuraa

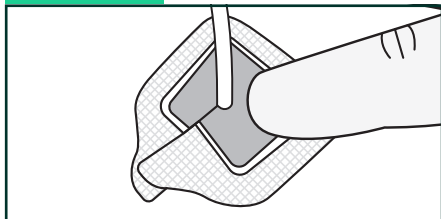

Tarkista CHG-geelitynny päivittäin ja vaihda tarvittaessa noudattaen laitoksen hoitokäytänteitä.

Vaihda sidos:

- Vähintään 7 päivän välein tai laitoksen hoitokäytänteiden mukaan
- Jos geelitynny jää pois paikoltaan, kun sitä on painettu käsiin suojaamalla sormella
- Jos geelitynny on erittäin kyllästämä, sidos on löystynyt tai likaantunut tai jos on turvotusta tai näkyvää eritevuotoa, tai jos pistokohtaan ei enää ole näköyhteyttä
- Jos geelitynny ulkopuolella on verenvuotoa tai verta


Geelitynnyä ei ole tarkoitettu imemään suuria veritai haaveritemääriä. Peitä ja suojaa geelitynny potilaan kylvettämisen tai suihkun jaksii.

Irrottaminen



Irrota suojaavat sidokset irrotusmekanismia käyttäen. Irrota CHG-geelitynny vetämällä valkoisia liuskoja hitaasti ihon suuntaisesti. Käytä tarvittaessa steriiliä nestettä geelitynny irroituksen apuna.

Muut käyttökohteet

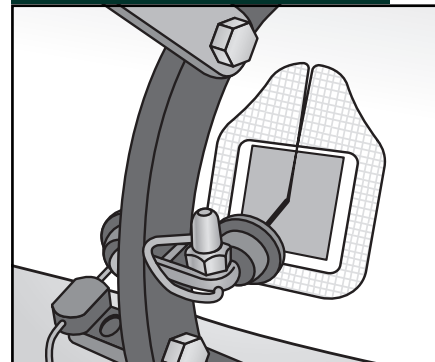

Ulkopuolinen kiinnitysnasta

Tärkeää turvallisuustietoa liittyen 3M™ Tegaderm™ CHG -klooriheksidiini-glukonaattigeelitynny käyttöön:

Älä käytä Tegaderm™ CHG -geelitynnyä keskosen tai alle kahden kuukauden ikäisen vauvan hoidossa. Tämän tuotteen käyttö keskosilla voi aiheuttaa yliherkkyysoireita tai ihon nekroosia. Tegaderm™ CHG -geelitynny turvallisuuata ja tehoa ei ole selvitetty alle 18-vuotiailla.

Saat täydelliset tuotetiedot käyttöohjeista.

Tilaustiedot

Tuote	Tuotenumero	CHG-geelitynny koko	Sidoksen koko	Sidosta/laatikko	Laatikkoo/pakkaus
	1664R	3,0 cm x 3,0 cm	6,2 cm x 4,9 cm	25	4



Solventum Medical Surgical

Keilaniementie 1
02150 Espoo
Suomi, Finland

© Solventum 2025. Kaikki oikeudet pidätetään. Solventum ja S-logo ovat Solventumin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M-logo ovat 3M:n tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. OMG1082080.