


3M™ Tegaderm™ CHG -klooriheksidiiniglukonaattigeelityyny 1664R

3M™ Tegaderm™ CHG
-klooriheksidiiniglukonaattigeelityyny on suunniteltu moneen käyttöön sopivaksi ja antimikrobisen suojan antavaksi. Helppokäyttöinen rakenne suojaa erilaisten perkutaanisten laitteiden pistokohtia.

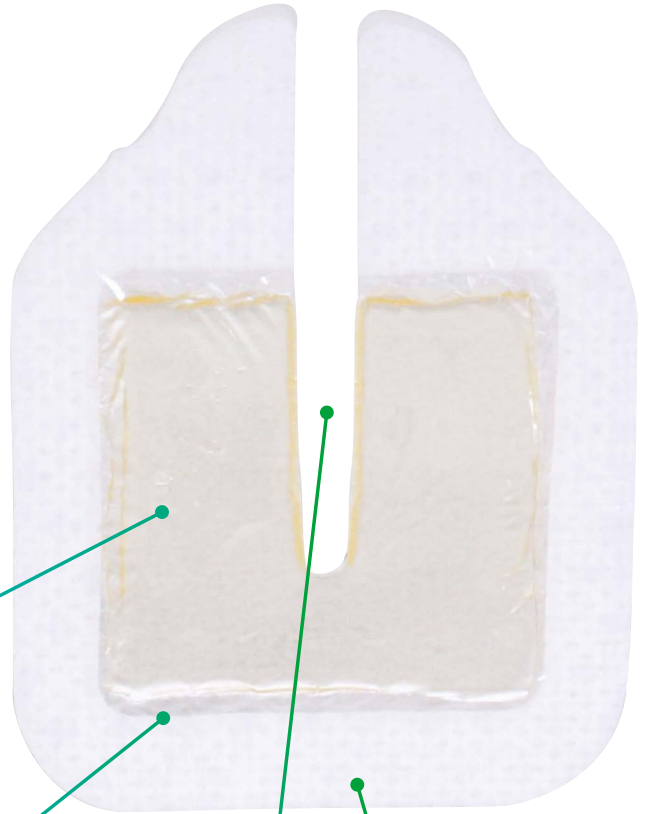

Läpinäkyvä CHG-geelityyny

Tarjoaa antimikrobisen suojan ja näköyhteyden pistokohtaan. Ylimääräistä kostutusta ei tarvita aktivointia varten. Imee nesteitä.*

Erittäin hengittävä kalvo

Auttaa vapauttamaan kosteutta.

Valmiiksi lovettu

Muotoutuu useisiin perkutaanisiin laitteisiin.

Liimareunus

Hellävarainen, mutta vahva kiinnitys.

Kuvaa on suurennettu yksityiskohtien havainnollistamiseksi

Antimikrobinen suoja

Aktivoituu välittömästi ja vähentää tutkitusti ihon flooraa ja estää bakteerien uudelleenkasvua yli 7 päivän ajan.¹ Tehokas grampositiivisia ja gramnegatiivisia bakteereja, hiivaa ja homeita vastaan.² Kykenee absorboimaan verta ja eritettä vaarantamatta antimikrobista suojaa.

Monipuolisuus

Muotoutuu monenlaisiin perkutaanisiin laitteisiin (kokoon 40 FR asti) ja pysyy kiinnittyneenä pistokohtaa ympäröivään ihoon.

Pistokohdan näkyvyys

Läpinäkyvä kalvo mahdollistaa pistokohdan jatkuvan seurannan, jotta komplikaatiot havaitaan varhain.

*Testeissä on todettu, että CHG-geelityyny absorboi 8x painonsa verran keittosuolaliuosta ja 3x painonsa verran verta.

1 Normaalin ihoflooran *in vivo* time-kill, EM-05-136567, EM-05-000803.

2 Antimikrobisen tehon laboratoriotestaus, EM-05-666609, EM-05-666611. Laboratoriotestaus ei takaa kliinistä korrelaatiota.


1664R

Tuoteopas

Suonensisäiset laitteet


3M™ Tegaderm™ CHG -klooriheksidiiniglukonaattigeelityyny soveltuu eri toimenpiteissä käytetyn verisuoniyhteyden suojaamiseen. Aseta ja irrota tyynty seuraavia ohjeita noudattaen:

Valmistele

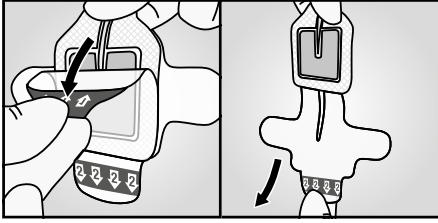


Valmistele ihoalue noudattaen laitoksen hoitokäytänteitä. Varmista, että ihoalue on täysin kuiva. Poista taustapaperit, ensin 1 ja sitten 2, kuvan mukaisesti.

Painele

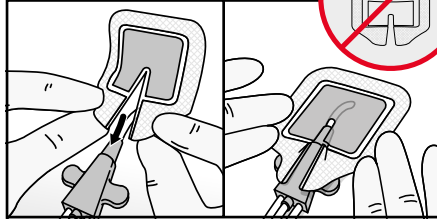


Sijoita CHG-geelityyny laitteen ympärille pistokohta peittäen ja varmista, että laite nojaa geelityynyn lovea vasten. Laitoksen hoitokäytäntöjen mukaan CHG-geelityynyä voi käyttää yhdessä läpinäkyvän puoliläpäisevän kalvosidoksen kanssa (esim. 3M™ Tegaderm™ HP, 3M™ Tegaderm™ Diamond, 3M™ Tegaderm™ I.V. Port, 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced -sidos).

Kiinnitä

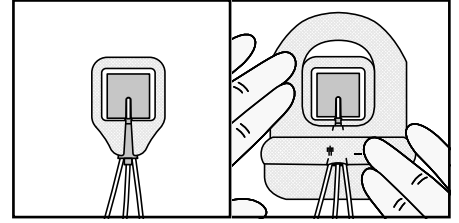

Kiinnitä katetri laitoksen protokollaa noudattaen käyttäen läpinäkyvää, puoliläpäisevää kalvosidosta (esim. 3M™ Tegaderm™ HP, 3M™ Tegaderm™ Diamond, 3M™ Tegaderm™ I.V. Port, 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced -sidos).

Seuraa

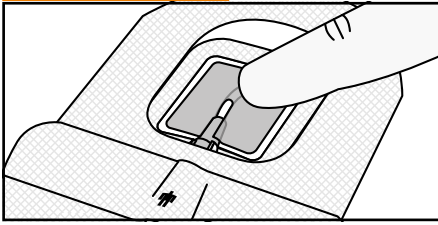


Tarkista CHG-geelityyny päivittäin ja vaihda tarvittaessa noudattaen laitoksen hoitokäytänteitä.

Vaihda sidos:

- Vähintään 7 päivän välein tai laitoksen hoitokäytänteiden mukaan
- Jos geelityyny jää pois paikoiltaan, kun sitä on painettu käsiin suojaamalla sormella
- Jos geelityyny on erittäin kyllästämä, sidos on löystynyt tai likaantunut tai jos on turvotusta tai näkyvää eritevuotoa, tai jos pistokohtaan ei enää ole näköyhteyttä
- Jos geelityynyn ulkopuolella on verenvuotoa tai verta


Geelityynyä ei ole tarkoitettu imemään suuria veri- tai haavaeritemääriä. Peitä ja suoja geelityyny potilaan kylvettämisen tai suihkun ajaksi.

Irrottaminen

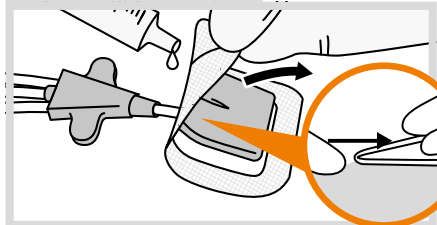

Kun CHG-geelityyny on paljaana, tartu geelityynyn ja sidoskalvon kulmaan peukalo-etusormioteella. Lisää tarvittaessa muutama tippa keittosuolaliuosta tai alkoholia, jotta geelityynyn irtoaa vaivatta. CHG-geelityyny saattaa jäädä irrotettaessa kiinni läpinäkyvään sidokseen. Kalvoa on ehkä venytettävä, jotta kalvosidos irtoaa CHG-geelityynystä.

Muut käyttökohteet

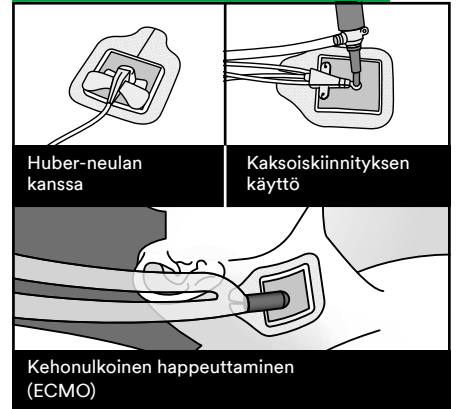

Huomaa: Kiinnitä sopivalla suojasidoksella laitoksen hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Tärkeää turvallisuustietoa 3M™ Tegaderm™ CHG -klooriheksidiiniglukonaattigeelityynystä

Tegaderm™ CHG -geelityynyä ei saa käyttää keskosilla tai alle kahden kuukauden ikäisillä vauvoilla. Tämän tuotteen käyttö keskosilla voi aiheuttaa yliherkkyysoireita tai ihon nekroosia. Tegaderm™ CHG -geelityynyn turvallisuutta ja tehoa ei ole selvitetty alle 18-vuotiailla. **Saat täydelliset tuotetiedot käyttöohjeista.**

Tilaustiedot

Tuote	Tuotenumero	CHG-geelityynyn koko	Sidoksen koko	Sidosta/laatikko	Laatikkoo/pakkaus
	1664R	3,0 cm x 3,0 cm	6,2 cm x 4,9 cm	25	4



Käytä QR-koodia päästäksesi IV-ratkaisujen koulutussivuille



Solventum Medical Surgical

Keilaniementie 1
02150 Espoo
Suomi, Finland

Solventum 2024. Kaikki oikeudet pidätetään. Solventum ja S-logo ovat Solventumin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M-logo ovat 3M:n tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.