



Prevena Restor^{MC}
Récupération postopératoire

Votre médecin a choisi le système
de prise en charge des incisions

3M^{MC} Prevena Restor^{MC}

Il s'agit d'un dispositif
transportable et
jetable pour favoriser
la cicatrisation et
la rémission.




Découvrez votre système de thérapie 3M^{MC} Prevena Restor^{MC}



Le système de thérapie Prevena Restor comporte les composants suivants :



Une unité de thérapie
qui fournit une pression
négative au pansement.

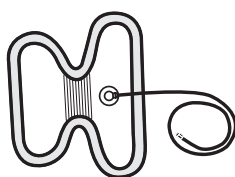


Un pansement placé
sur votre incision.




Un tube de raccord.



Un réservoir où le fluide
peut s'accumuler.

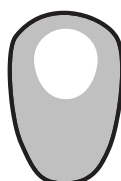

Une sacoche de transport
avec une sangle réglable.

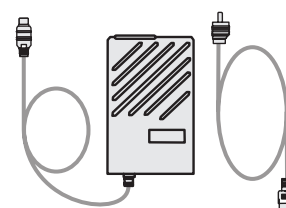

Un chargeur pour la batterie
rechargeable du système.


Le système de prise en charge des incisions Prevena Restor vous permet de participer activement à votre guérison.

L'idée de se remettre debout si tôt après la chirurgie peut paraître étrange, mais une activité légère est importante pour la réussite à long terme.


Vous constaterez une période de « gonflement maximal » après votre chirurgie. Ce phénomène est tout à fait normal. Le système 3M^{MC} Prevena Restor^{MC} est conçu pour aider à réduire le gonflement, ce qui peut permettre de bouger davantage après l'intervention.

Grâce au système de thérapie Prevena Restor, vous pouvez accélérer votre rétablissement et vous lancer dans la rééducation en toute confiance.

Votre pansement doit couvrir toute la zone concernée par la chirurgie. Il utilise une technologie de pointe pour éliminer les éléments infectieux.

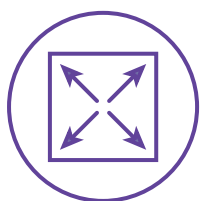


Recouvre entièrement l'incision et les tissus mous environnants.

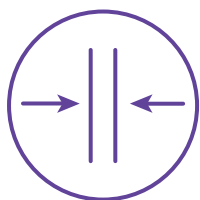

Maintient ensemble les bords de l'incision¹.



Protège contre les sources d'infection externes².

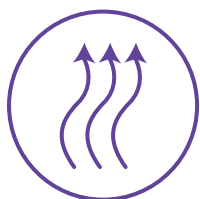

Élimine les fluides du site de l'incision³.



Réduit le gonflement⁴.



Le système de thérapie Prevena Restor est facile à utiliser et à entretenir.



Gardez votre pansement aussi longtemps que votre médecin vous l'indique – jusqu'à 14 jours. N'essayez pas d'ajuster ou de retirer votre pansement. Vous devez retourner voir votre médecin traitant pour retirer le pansement.



Laissez l'unité de thérapie allumée. L'unité de thérapie s'éteint automatiquement après 7 ou 14 jours, selon les instructions de votre médecin.




Vous pouvez ou non voir du liquide s'accumuler dans le réservoir. Certaines incisions coulent plus que d'autres. Certaines ne coulent pas du tout. Si le réservoir se remplit de liquide, éteignez l'unité et contactez votre médecin pour obtenir des instructions.



Rangez votre unité de thérapie en sécurité et au sec. Ne laissez pas tomber l'unité de thérapie, ne la mouillez pas et ne laissez pas le tuyau se plier, se tordre ou se pincer. Vous devez toujours garder l'unité de thérapie (la pompe) au sec, vous pouvez prendre une douche légère pendant que vous portez votre pansement, avec l'accord d'un médecin. Consultez la page suivante pour obtenir plus de renseignements.



Le système est livré avec une batterie rechargeable. N'oubliez pas de recharger la batterie lorsque vous vous reposez ou que vous dormez. Une fois complètement chargée, la batterie dispose d'une autonomie d'environ 9 heures.

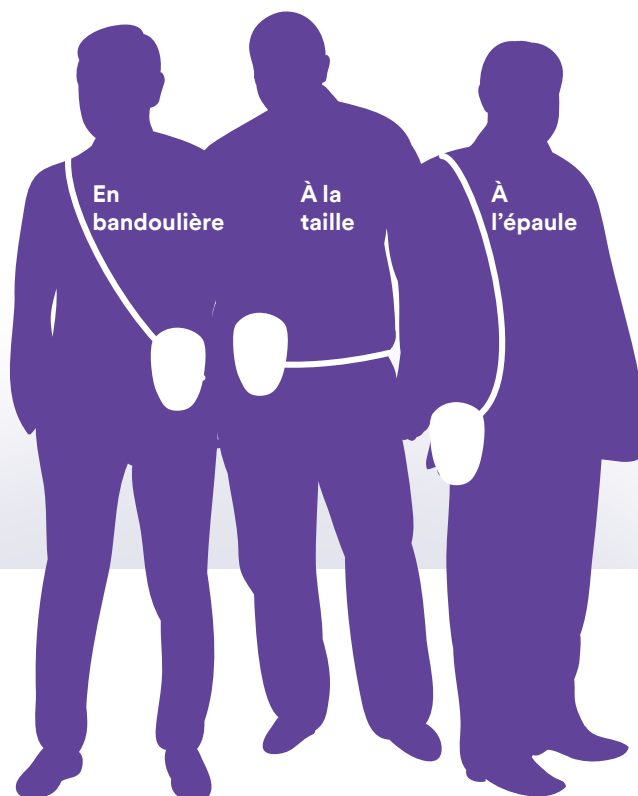

Porter le système de thérapie Prevena Restor

L'unité de thérapie se porte sur ou sous les vêtements. Elle s'accompagne d'une sacoche de transport dotée d'une sangle ajustable et d'une attache pour ceinture que vous pouvez utiliser de plusieurs façons.

Pour en savoir plus, consultez le guide du patient sur la thérapie 3M^{MC} Prevena Plus^{MC}.



Dormir avec votre système de thérapie Prevena Restor

Placez le pansement et la pompe dans une position où la tubulure ne risque pas d'être pliée, tordue ou pincée.

Gardez l'unité de thérapie près de vous, en veillant à ce qu'elle soit dans une position sûre afin qu'elle ne soit pas tirée d'une table ou d'un lit et ne tombe pas sur le sol.



Prendre une douche avec votre système de thérapie Prevena Restor

Avec l'accord de votre médecin, vous pouvez prendre une douche légère. Toutefois, ne vous baignez pas avec le système 3M^{MC} Prevena Restor^{MC}.

Le pansement peut être exposé aux savons classiques et être rincé indirectement avec le jet de la douche. N'immergez pas le pansement. Ne retirez pas le pansement.

Avant de prendre une douche, éteignez l'unité de thérapie en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Une fois la thérapie arrêtée, déconnectez l'unité du pansement et rangez-la en sécurité, à l'abri de l'eau.

Lorsque vous vous séchez avec une serviette, évitez de toucher ou d'endommager le pansement.

Pour en savoir plus, consultez le guide du patient sur la thérapie 3M^{MC} Prevena Plus^{MC}.



Avertissement : Si l'unité de thérapie tombe dans la baignoire, la douche ou le lavabo, débranchez-la immédiatement (si elle est branchée sur une source électrique) et déconnectez l'unité du pansement. Contactez votre médecin ou votre soignant.

Fonctionnement de base et indicateurs

Touche d'interruption de l'alarme

Pour couper une alerte sonore, appuyez sur la touche d'interruption de l'alarme et maintenez pendant 3 secondes. L'alerte s'arrête alors pendant 2 minutes. Une fois enfoncé, le bouton de mise en sourdine s'allume, indiquant que la sourdine est sélectionnée. L'alarme sonore reprendra après 2 minutes, à moins que la situation ait été corrigée.

Bouton Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre l'unité, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Vous ne devez éteindre l'unité que lorsque vous vous préparez à prendre une douche. Consultez les instructions relatives à la douche à la page précédente.



Alarme de blocage

Alarme de prise d'air

Alimentation branchée

Niveau de charge

Durée de vie de l'appareil

Durée de la thérapie Indicateur

Niveau de charge Indicateur

Charge complète



Charge moyenne



Charge faible



Indicateur d'alimentation connectée

Lorsque l'unité de thérapie est branchée sur une source d'alimentation, le voyant Alimentation connectée s'allume en jaune, indiquant que l'alimentation est en route et que le système est en cours de chargement. Le voyant devient vert lorsque l'unité est complètement chargée.

Alimentation connectée




Entièrement chargée



Aspect du pansement



Pendant le fonctionnement, le pansement doit avoir un aspect plissé et la mousse doit être comprimée.

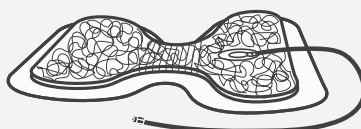


Si la mousse n'est pas comprimée, ou si l'unité de thérapie émet une alerte, consultez la section de dépannage de la page suivante.



Pour en savoir plus, consultez le guide du patient sur la thérapie 3M^{MC} Prevena^{MC}.

Conseils de dépannage

Alarme de blocage

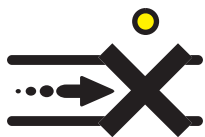

Un voyant LED jaune fixe au-dessus du symbole d'obstruction s'allume et une alerte sonore d'obstruction retentit (2 bips se répétant toutes les 15 secondes).

- Vérifiez si la tubulure est tordue ou si le réservoir est plein. Si le réservoir est plein, contactez votre médecin.
- Lorsque l'obstruction est résolue, les alertes visuelles et sonores s'éteignent.

Alarme de prise d'air



Un voyant LED jaune fixe au-dessus du symbole de fuite s'allume et une alarme sonore de prise d'air retentit (2 bips se répétant toutes les 15 secondes).

- Vérifiez que le réservoir est bien verrouillé sur l'unité de thérapie et que la tubulure est correctement connectée et verrouillée.
- En laissant l'unité de thérapie allumée, appuyez lentement et fermement autour des bords du pansement pour assurer un bon contact de l'adhésif avec la peau. Si une fuite est repérée, utilisez des bandelettes adhésives 3M^{MC} Prevena^{MC} (comprises dans l'emballage du pansement) pour colmater la fuite. Dans le cas de plis importants, placez les bandelettes de manière à ce qu'elles suivent les plis, sans les croiser. Si l'alerte ne s'éteint pas après avoir tenté de colmater la fuite, contactez votre médecin.

Alarme de batterie faible



Une alerte de batterie faible indique qu'il reste environ 2 heures de thérapie.

- Rechargez votre batterie immédiatement

Thérapie terminée



Un voyant à DEL jaune s'allume au-dessus de l'indicateur de durée de la thérapie.

L'unité de thérapie émet 8 bips, puis un bip continu de 5 secondes, avant de s'éteindre automatiquement.

- Prévenez votre médecin lorsque cela se produit.
- Si l'unité de thérapie a terminé la thérapie et que le temps s'est écoulé, elle émettra une alarme sonore de 3 secondes, puis s'éteindra après toute tentative de mise en marche.

Alarme de défaillance système



Pour indiquer une défaillance du système, tous les voyants LED s'allument et clignotent et l'appareil émet deux bips toutes les 15 secondes.

- Éteignez simplement l'unité de thérapie en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Rallumez ensuite l'unité de thérapie en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.
- Si cela ne résout pas l'alerte de défaillance du système, veuillez contacter votre médecin.

N'oubliez pas qu'un gonflement est normal après votre chirurgie.

Toutefois, vous devez contacter votre médecin si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre intervention chirurgicale ou votre rétablissement.



Il est important de discuter avec votre médecin des avantages et des risques associés à un traitement avant de l'adopter. Veuillez consulter votre professionnel de la santé traitant concernant toute question ou information importante liée à l'utilisation, à la sécurité et au fonctionnement du système 3M^{MC} Prevena Restor^{MC}.

Références :

- ¹ Wilkes, R.P.; Kikpad, D.V.; Zhao, Y.; Kazala, R.; McNulty, A. Closed Incision management with negative pressure wound therapy (CIM): biomechanics. Surg. Innov. 2012; 19(1): 67-75.
- ² Payne J. Evaluation of the resistance of the Prevena incision dressing top film to viral penetration. San Antonio, TX: Kinetic Concepts, Inc.; 2009. N° de rapport : 0000021109.
- ³ Kilpadi, D.V.; Cunningham, M.R. Evaluation of closed incision management with negative pressure wound therapy (CIM): hematoma/seroma and involvement of the lymphatic system. Wound Repair Regen. 2011 Sep.-Oct.; 19(5):588-596. doi:10.1111/j.1524-475X.2011.00714.x.
- ⁴ Glaser, D.A.; Farnsworth, C.L.; Varley, E.S.; Nunn, T.A.; Sayad-Shah, M.; Breisch, E.A.; Yaszay, B. Negative pressure therapy for closed spine incisions: a pilot study. Wounds. 2012; 24(11): 308-316.



Disponible au Canada auprès des distributeurs 3M-KCI autorisés.
KCI USA, Inc., une société 3M
Propriété de KCI et exploitée par 3M Company

KCI Medical Canada Inc.
75 Courtneypark Dr W, Unit 4
Mississauga, ON
L5W 0E3

KCI USA, INC.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX
78249

Remarque : ces produits et thérapies sont associés à des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des renseignements de sécurité. Veuillez consulter un médecin et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

© 2021, 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est interdite. Utilisées sous licence au Canada. PRA-PM-CA-00172 2105-20638 E