



Traitement
Veraflo^{MC}


Commencer intelligemment avec le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} pour des soins des plaies efficaces et efficaces

Le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC}, doté de la Fonctionnalité Smart Instill^{MC} 3M^{MC} et du Champ Dermatac^{MC} 3M^{MC}, facilite plus que jamais le démarrage du traitement.



La cicatrisation retardée et les complications de la plaie sont des fardeaux importants en termes de soins et de coûts


40 %

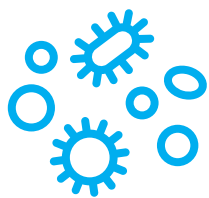

de toutes les plaies sont infectées ou colonisées de manière critique¹.

Moins de 6 % des 3,9 milliards \$ dépensés dans les soins des plaies chaque année au Canada sont en fait alloués aux produits de soins des plaies².

< 6 %

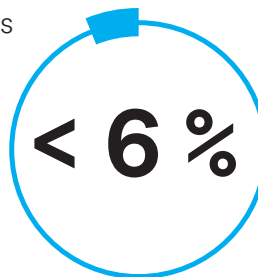

On s'attend à ce que les coûts augmentent encore plus à cause du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'incidence des conditions comorbides à l'origine des plaies³.



Les coûts peuvent se multiplier si la plaie ne reçoit pas le bon traitement au bon moment :

- les plaies stagnantes peuvent entraîner des complications comme l'infection, ce qui entraîne des coûts plus élevés et des séjours plus longs à l'hôpital⁴.



Commencer intelligemment à gérer la charge microbienne

Le nombre de microorganismes par lesquels un objet est contaminé est désigné par le terme de « charge microbienne »⁵.

On considère généralement que la formation de la charge microbienne se produit en cinq phases principales⁶ :

La dispersion des bactéries à partir de biofilms matures provoque la recolonisation⁷.

Les bactéries flottantes s'attachent à la surface⁷.

Les bactéries peuvent commencer à sécréter une matrice dans les 15 minutes suivant leur adhérence⁸.

La réceptivité au traitement diminue à mesure que le biofilm mûrit¹².

Un biofilm mature peut être observé dans les 8 à 10 heures^{10, 11}.

Les bactéries se répliquent aussi vite que toutes les 30 minutes⁹ et les caractéristiques du biofilm se manifestent dans les 5 heures¹⁰.

Le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} aide à gérer la charge microbienne à travers des cycles de nettoyage répétés.

Il peut aider à :



Nettoyer

Il distribue les solutions topiques pour les plaies qui demeurent dans la plaie pour aider à diluer et à solubiliser les matières infectieuses¹³.



Retirer

Il retire les débris solubilisés dans la plaie et les matières infectieuses, sous la pression négative pour diminuer la charge microbienne¹⁴.



Favoriser

Il favorise la formation de tissu de granulation et la perfusion afin de préparer la plaie pour la fermeture¹⁵.

Il est prouvé que le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} favorise la formation de tissu de granulation




Une augmentation
importante
de l'épaisseur
de granulation

43 %*

($p = 0,05$)

* Ces résultats n'ont pas été confirmés
dans des études humaines.

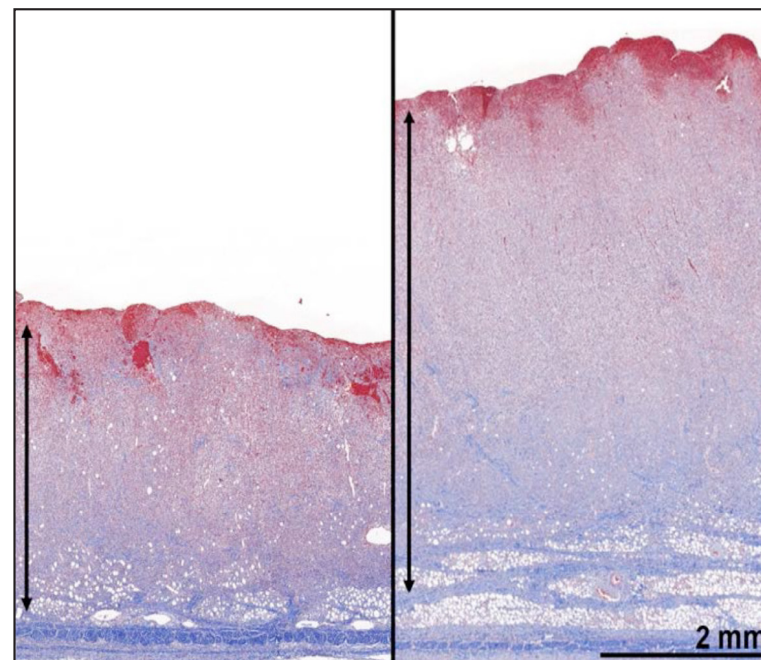

Les images histologiques d'une étude porcine montrent une augmentation de 43 % dans l'épaisseur du tissu de granulation entre le Traitement V.A.C.[®] 3M^{MC} avec le Pansement Granufoam^{MC} V.A.C.[®] 3M^{MC} (à gauche) et le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C.[®] Veraflo^{MC} 3M^{MC} (à droite) après 7 jours de traitement¹⁶.

Le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} peut fournir des résultats cliniques améliorés par rapport à la norme de soins pour divers types de plaies


Une revue systématique des études et des méta-analyses comparatives¹⁷ a évalué l'efficacité du Traitement Veraflo par rapport au témoin dans le cadre de 13 études menées auprès de 720 patients présentant divers types de plaies. **Les résultats de l'analyse révèlent que le Traitement Veraflo fournit des avantages importants par rapport à la norme de soins, y compris le traitement des plaies par pression négative standard.**



> 30 % moins de
débridements chirurgicaux^{17, 18}.
(1,77 débridements vs 2,69 débridements, $p = 0,008$)




Les plaies sont prêtes à **se refermer**
jusqu'à **deux fois plus vite**^{17, 18}.
(7,88 jours vs 14,36 jours, $p = 0,003$)

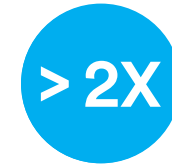

La probabilité que les plaies se
referment était **2,39 fois**
plus élevée¹⁷.
($p = 0,01$)



Réduction de > 50 %
de la durée de traitement^{17, 18}.
(9,88 jours vs 21,8 jours, $p = 0,02$)

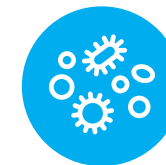


La probabilité de **réduire la quantité de**
bactéries était **4,4 fois** plus élevée¹⁷.
(La probabilité était 4,4 fois plus élevée; $p = 0,003$)

L'utilisation du Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} pourrait réduire les coûts par rapport à la norme de soins

- Les résultats améliorés liés à la plaie peuvent générer des avantages économiques de la santé
- Une analyse économique de la méta-analyse¹⁷, menée par Gabriel et coll., avec des moyennes non standardisées¹⁸ illustre la rentabilité potentielle du Traitement Veraflo

Exemple de modèle économique de la santé du Traitement Veraflo

	Groupe témoin	Traitement Veraflo ^{MC} 3M ^{MC}	Réduction potentielle
Visites en salle d'opération pour un débridement	2,69	1,77	34 %
Coût moyen d'un débridement en salle d'opération ^A	3 393 \$	3 393 \$	
Coût total d'un débridement en salle d'opération (nombre de visites x coût)	9 127 \$	6 005 \$	34 %
Temps écoulé avant la dernière intervention chirurgicale	14,36	7,88	45 %
Durée du traitement (en jours)	21,8	9,88	55 %
Coût quotidien du traitement ^B	94 \$	143 \$	
Coûts totaux associés au traitement (jours x coût quotidien)	2 070 \$	1 414 \$	32 %
Coût total par patient	11 197 \$	7 419 \$	34 %
Économies potentielles liées à moins de visites en salle d'opération		3 121 \$	
Économies potentielles liées à une plus courte durée de traitement		655 \$	
Économies totales potentielles par patient		3 777 \$	

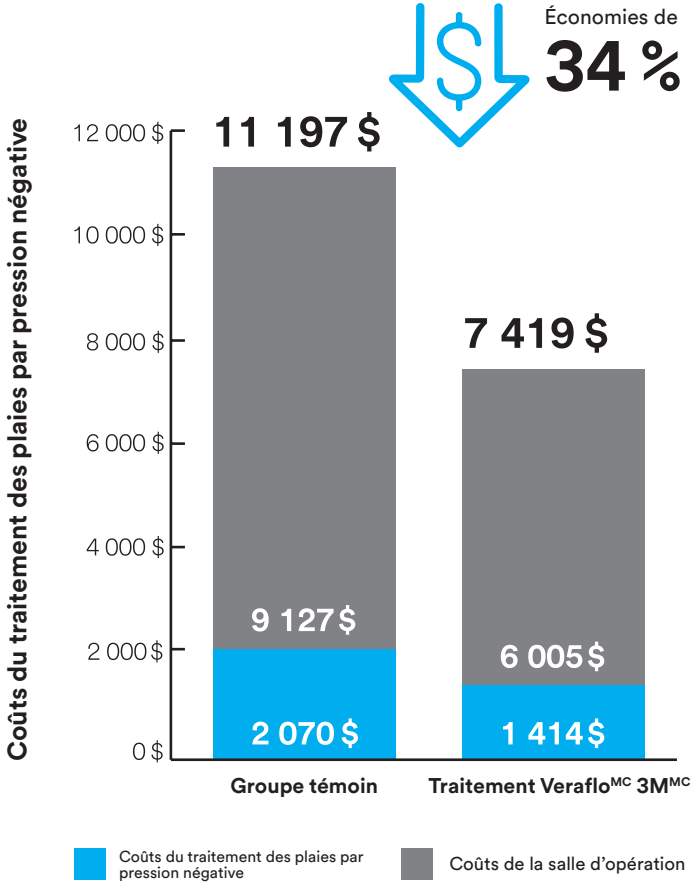


Notes de bas de page : A. CAPUTO, W.J., D. J. BEGGS, J. L. DEFEDÉ, L. SIMM, et H. DHARMA. « A prospective randomised controlled clinical trial comparing hydrosurgery debridement with conventional surgical debridement in lower extremity ulcers », *Int Wound J*, vol. 5 (2008), p. 288-294. B. Les coûts témoins varient considérablement. Les coûts quotidiens moyens du Traitement V.A.C.[®] sont utilisés afin d'être conservateurs. Le coût quotidien du Traitement Veraflo n'est qu'une estimation, les coûts individuels d'un établissement peuvent varier.

Remarque : Tous les chiffres financiers sur cette page sont en dollars américains.

Le modèle ci-dessus utilise certaines données d'étude afin de fournir, à titre illustratif, une estimation des coûts liés à l'utilisation du Traitement Veraflo ou de la norme de soins (témoin). Ce modèle est fourni à titre illustratif et ne constitue pas une garantie de coûts, d'économies ou de résultats individuels réels. Il est conseillé à l'établissement d'utiliser ce modèle uniquement à titre illustratif pour faciliter l'évaluation générale des produits et des prix.

Des résultats de patients qu'il faut voir pour y croire : le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} et le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice^{MC} 3M^{MC}

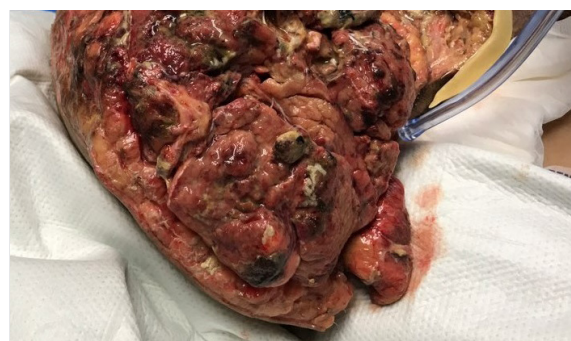


Le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice pour une déficience des tissus mous suite à une amputation transfémorale.



Le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice pour une plaie du pied diabétique.



Le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice pour une lésion de pression de stade IV.

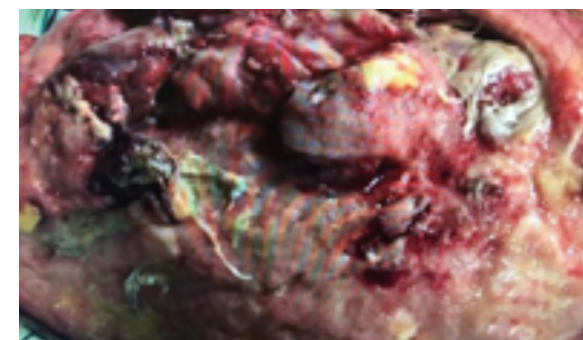

Le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice pour amputé avec une plaie traumatique au moignon.

Le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice^{MC} 3M^{MC} avec le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} : la déficience des tissus mous suite à une amputation transfémorale


Suite à une blessure subie sur un bateau, une femme de 26 ans a reçu une amputation transfémorale qui a causé une déficience des tissus mous mesurant environ 90 cm x 45 cm². Des antibiotiques ont été administrés pendant la durée de traitement de la patiente.



Jour 1 : La plaie est extensive sur la jambe blessée qui a subi un débridement des tissus dévitalisés et a été irriguée. Application du Traitement V.A.C.® à -125 mm de Hg.



Jour 6 : Suite au diagnostic du syndrome d'activation des macrophages, la patiente a reçu plus de débridement et d'irrigation à cause d'une infection agressive.

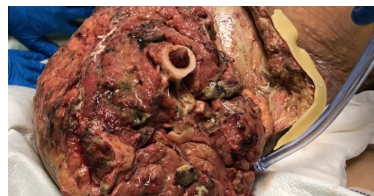

Jour 9 : La patiente étant en état critique, et le débridement n'étant plus une option, le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice a été initié.

Temps de pose : 5 minutes

Durée du traitement des plaies par pression

négative : 2 heures à -150 mm de Hg

Solution : 100 ml de Solution Dakin's®



Jour 13 : La plaie démontre la cicatrisation dans les 4 jours suivant l'initiation du Traitement Veraflo.



Jour 17 : La plaie a montré l'absence de tissu dévitalisé avec une augmentation de la vascularisation et une granulation considérable. Le Traitement Veraflo a été remplacé par le Pansement V.A.C. Veraflo.



Jour 25 : La plaie mesurait environ 25 cm x 30 cm avec un tissu de granulation et une couverture considérables sur le fragment fémoral.



Jour 43 : La patiente a subi une excision tangentielle et une greffe cutanée de demi-épaisseur, qui a été couverte d'une couche non adhérente et a été renforcée grâce au Traitement V.A.C.®.

Le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice^{MC} 3M^{MC} avec le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} pour le patient diabétique présentant une plaie chronique au pied

Un homme de 54 ans souffrant d'hypertension, de diabète de type 1 et de pied de Charcot a été admis à l'hôpital en raison d'une plaie chronique au pied gauche. Le patient est traité au moyen d'un antibiotique intraveineux, suivi d'un débridement chirurgical avec excision des tissus nécrosés.



Figure A : Plaie de départ

Temps de pose : 10 minutes

Durée du traitement des plaies par pression négative : 3,5 heures à -125 mm de Hg

Solution : Solution pour le traitement des plaies Vashe®



Figure B : Le patient est traité au moyen d'un antibiotique intraveineux, suivi d'un débridement chirurgical avec excision des tissus nécrosés (figure B). Le patient commence le Traitement Veraflo utilisant le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice.




Figure C : Après deux jours de Traitement Veraflo, le lit de la plaie présente du tissu de granulation sain avec un minimum de tissus dévitalisés ou un sphacèle épais. Le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice est changé.



Figure D : Au bout de 14 jours et de 4 changements de pansement, le Traitement Veraflo est interrompu et du collagène humain est appliqué.

Le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} et le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice^{MC} 3M^{MC} : la lésion de pression de stade IV

Un homme de 64 ans avec de multiples comorbidités a présenté une lésion de pression de stade IV au sacrum présente depuis plus de 4 ans.

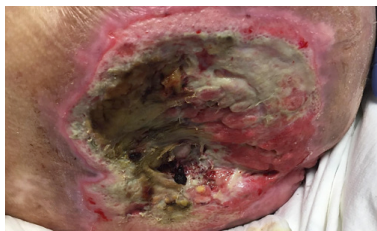


Jour 0 : Le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice a été initié.

Temps de pose : 1 minute

Durée du traitement des plaies par pression négative :
30 minutes à -150 mm de Hg


Solution : Solution physiologique salée (22 ml)

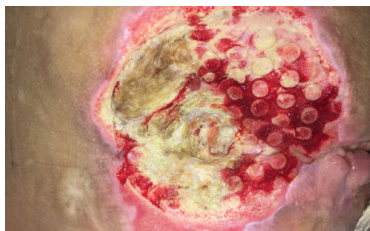


Jour 3 : La plaie au premier changement de pansement suite à trois jours de Traitement Veraflo et de Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice.



Jour 7 : La plaie après une semaine de Traitement Veraflo et de Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice et le débridement chirurgical pour enlever le bout du coccyx et le sphacèle/les tissus adipeux non viables.

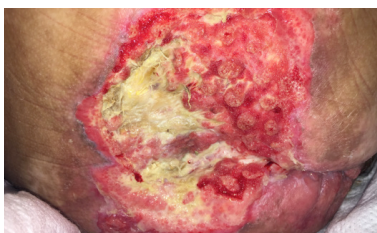


Jour 12 : La plaie après l'abandon du Traitement Veraflo, la colostomie et la reprise du Traitement Veraflo pendant cinq jours. Le patient est passé au Traitement V.A.C.®.

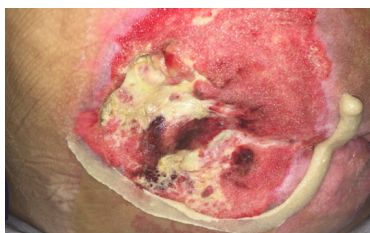

Jour 16 : La plaie après neuf jours de Traitement V.A.C.®. Le patient est sorti de l'hôpital.

Le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice^{MC} 3M^{MC} avec le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC} : la plaie traumatique

Un homme de 33 ans ayant subi une amputation, avec une histoire de tabagisme, de l'anémie et des antécédents d'infection à *Staphylococcus aureus* s'est présenté avec une infection du moignon au-dessus du genou. Un débridement chirurgical conservateur a été effectué au chevet du patient et un traitement antibiotique oral a été amorcé.

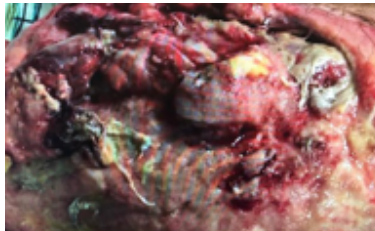

Jour 0 : Le Traitement Veraflo avec le Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice a été initié.

Temps de pose : 10 minutes


Durée du traitement des plaies par pression

négative : 2 heures à -125 mm de Hg


Solution : Solution hypochloreuse
(80 ml à 100 ml)



Jour 3 : La plaie après trois jours de Traitement Veraflo et de Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice.

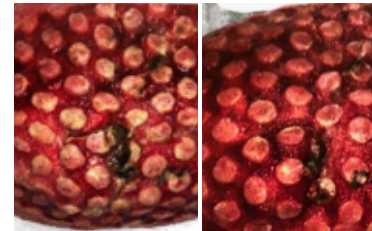

Jours 6 et 9 : Granulation de tissu et réduction de sphacèle plus importantes après 6 et 9 jours d'utilisation du Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice. Le Traitement Veraflo est abandonné et le patient est passé au Traitement V.A.C.®.

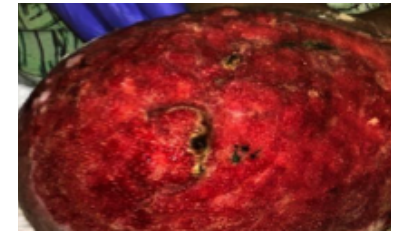

Jour 12 : La plaie après 1 jour de Traitement V.A.C.®. Le patient a été admis dans un établissement de soins de longue durée 12 jours après l'admission à l'hôpital.

Commencer intelligemment grâce à l'Unité de traitement V.A.C.® Ultra 3M^{MC}

Le seul dispositif qui vous offre une sélection complète de solutions de pression négative grâce à une pompe unique et pratique. Améliorez vos résultats en créant une rentabilité plurielle à travers de multiples paramètres.



Utilisez l'Unité de traitement V.A.C.® Ultra pour :

Rationaliser

→ les exigences de stock

Standardiser

→ les protocoles d'approvisionnement

Réduire

→ le nombre d'UGS requises sur l'étagère

Gérer

→ le fardeau de la formation

Aider

→ les cliniciens à répondre plus rapidement aux patients changeant de solution par pression négative



Voici la toute nouvelle Fonctionnalité Smart Instill^{MC} 3M^{MC} pour le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC}

La Fonctionnalité Smart Instill utilise un logiciel sophistiqué qui automatise plusieurs étapes du Traitement Veraflo et offre une interaction plus facile et moins fastidieuse au début du traitement :

Maintenant doté de la Fonctionnalité Smart Instill



Une détermination automatique du volume de solution topique pour les plaies à instiller.



Les paramètres de traitement prééglés correspondent aux recommandations consultatives mondiales.



Le dépannage automatisé, les alarmes personnalisables et la fonction permettant de reporter l'instillation.

Les étapes d'initiation du traitement grâce à la Fonctionnalité Smart Instill^{MC} 3M^{MC}


Simplement une autre raison de commencer intelligemment avec le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC}.

Sélectionner
le Traitement Veraflo


Sélectionner
la Fonctionnalité
Smart Instill




Sélection du réservoir

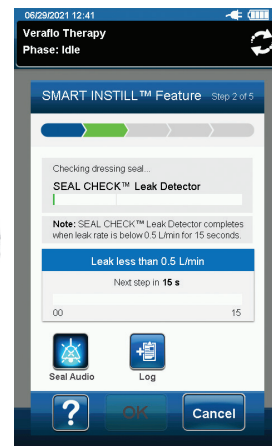

Vérification
de l'étanchéité

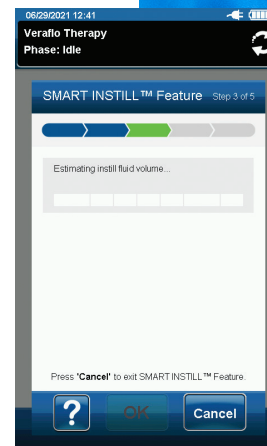

Estimation
de remplissage

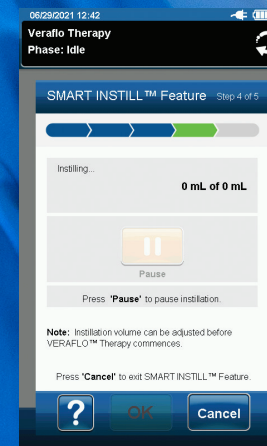

Instillation



Confirmation (optionnelle)



Trousse de pansement Veraflo^{MC} Cleanse Choice Complete^{MC} 3M^{MC}

La mousse du Pansement Veraflo Cleanse Choice Complete possède une série de trous de 1 cm qui offre un mouvement mécanique travaillant harmonieusement avec l'administration cyclique du fluide d'instillation topique et du traitement des plaies par pression négative. Cette combinaison crée un mouvement mécanique, conçu spécifiquement, dans le lit de la plaie qui facilite le retrait d'exsudat épais de la plaie et des matières infectieuses, entraînant le retrait des tissus solubilisés non viables.

Caractéristiques :

- la couleur bleue unique de la mousse facilite l'identification du produit
- la mousse monopiece simplifie l'application
- la mousse à double face unique réduit le besoin d'UGS multiples
- elle est offerte en diverses tailles pour minimiser les déchets
- elle aide à faciliter le retrait d'exsudat épais de la plaie et d'autres matières infectieuses



Objectifs du traitement :



Nettoyer

Nettoyer les plaies en présence de sphacèles ou de tissus non viables.



Retirer

Retirer l'exsudat épais de la plaie, les tissus non viables et les matières infectieuses.



Favoriser

Favoriser la formation de tissu de granulation.



Préparer

Aider à préparer à la fermeture de la plaie.


La Trousse de pansement Veraflo Cleanse Choice Complete inclut le Champ V.A.C. Dermatac

Le matériau hybride en silicone-acrylique innovateur aide au confort du patient pendant le changement du pansement.



Une application facile

S'adapte à différents endroits anatomiques et peut être repositionné lors de l'application initiale

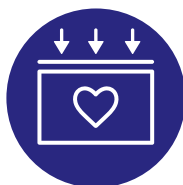

Une cicatrisation étanche

Maintient une étanchéité très efficace pour la protection de la plaie



Un retrait en toute douceur

Le retrait doux pour la peau favorise une guérison optimale et le confort du patient, par rapport à la norme de soins

Soyez confiant avec un champ doux pour la peau qui maintient une étanchéité pendant 72 heures.


Soutient le processus de cicatrisation :

- il est doux pour la peau et fournit une protection de la peau périlésionnelle
- les propriétés adhésives à faible prise du Champ V.A.C. Dermatac sont assez puissantes pour maintenir une étanchéité pour le Traitement V.A.C.[®] et le Traitement Veraflo, et pourtant assez douces pour aider à réduire la douleur pendant les changements de pansement¹⁹
- il est facile à utiliser et réduit le temps associé aux changements de pansement par rapport à la norme de soins¹⁹

Améliore le confort des patients²⁰ :

Le Champ V.A.C. Dermatac a été placé sur 17 patients pendant une période de 2 semaines, avec des changements de pansement toutes les 48 à 72 heures. Lors des changements de pansement, on a demandé aux patients comment ils se sentaient une fois le Champ V.A.C. Dermatac retiré.

100 % (n = 17) des patients ont convenu que le retrait du Champ V.A.C. Dermatac **était indolore**.

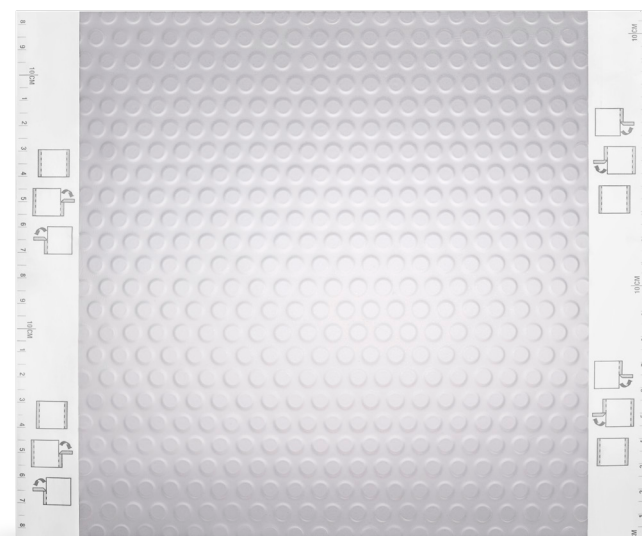

Avec une gamme complète de solutions de pointe pour le traitement des plaies, 3M figure au premier plan de l'innovation scientifique, en collaboration avec les partenaires cliniques afin de développer des traitements cliniques éprouvés à chaque étape du parcours du patient. En transformant les résultats grâce à la science axée sur les patients, 3M établit des normes élevées à travers le continuum de soins.



> 10 millions

de plaies traitées dans le monde avec le Traitement V.A.C.[®] 3M^{MC} 21.




Plus de 1 900

publications évaluées par les pairs qui soutiennent la valeur de la technologie de la pression négative de 3M.




> 100

de publications évaluées par les pairs sur le Traitement Veraflo.

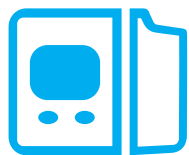

> 25 ans

de technologie transformative dans le cadre de leadership du traitement des plaies par pression négative.

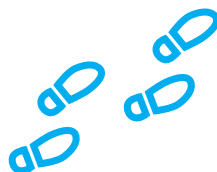


Soutenez votre patient à chaque étape du parcours.

3M offre des dizaines de solutions uniques pour la peau et les plaies pour aider les patients dans leur parcours de guérison.



Des programmes éducatifs, **primés et de renommée mondiale.**

Les spécifications du Pansement V.A.C. Veraflo^{MC} 3M^{MC} *

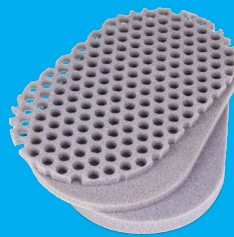	Trousse de pansement Veraflo^{MC} Cleanse Choice Complete^{MC} 3M^{MC} 	Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice^{MC} 3M^{MC} * 	Pansement V.A.C. Veraflo^{MC} 3M^{MC} : petit et moyen* 	Pansement V.A.C. Veraflo^{MC} 3M^{MC} : grand* 
Caractéristiques de la plaie	Des plaies avec un exsudat épais, comme la fibrine, le sphacèle ou les matières infectieuses. Des plaies ouvertes, y compris les plaies avec décollement peu profond ou avec des zones de tunnellation où l'aspect distal est visible.	Des plaies avec un exsudat épais, toute comme la fibrine, le sphacèle ou les matières infectieuses.	Des plaies ouvertes, y compris les plaies avec décollement peu profond ou avec des zones de tunnellation où l'aspect distal est visible.	Des plaies ouvertes de grande taille, y compris les plaies avec un décollement peu profond ou avec des zones de tunnellation où l'aspect distal est visible.
Spécifications du pansement	Moyen : L x l x p 18,0 cm x 12,5 cm x 1,6 cm 7,1 po x 4,9 po x 0,6 po Grand : L x l x p 25,6 cm x 15,0 cm x 1,6 cm 10,1 po x 5,9 po x 0,6 po La trousse comprend : 1 pansement hydrocellulaire 2 feuilles de Champ Dermatac^{MC} 3M^{MC} 1 Tampon VeraT.R.A.C.^{MC} 3M^{MC} 1 règle jetable	Moyen : L x l x p1 ou p2 ou p3 18,0 cm x 12,5 cm x p1 ou p2 ou p3 7,1 po x 4,9 po x p1 ou p2 ou p3 Grand : L x l x p1 ou p2 ou p3 25,6 cm x 15,0 cm x p1 ou p2 ou p3 10,1 po x 5,9 po x p1 ou p2 ou p3 p = épaisseur de la couche p1 = 0,8 cm (0,3 po) couche supérieure mince p2 = 1,6 cm (0,6 po) couche supérieure épaisse p3 = 0,8 cm (0,3 po) couche de contact avec la plaie (trous circulaires de 1,0 cm; espacement de 5 mm)	Petit : L x l x p 7,7 cm x 11,3 cm x 1,8 cm 3,0 po x 4,4 po x 0,7 po Moyen : L x l x p 14,7 cm x 17,4 cm x 1,8 cm 5,8 po x 6,8 po x 0,7 po	Grand : L x l x p 25,6 cm x 15,0 cm x 1,6 cm 10,1 po x 5,9 po x 0,6 po

* Les Trousse de pansement V.A.C. Veraflo^{MC} 3M^{MC} contiennent des pansements hydrocellulaires, un Champ évolué V.A.C.[®], un Tampon V.A.C. VeraT.R.A.C.^{MC} 3M^{MC} (petite et moyenne tailles) ou un Ensemble de tubulures V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo^{MC} (grande taille) et le Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC} (si disponible)

Pansements V.A.C. Veraflo^{MC} 3M^{MC} et accessoires à utiliser avec le Traitement Veraflo^{MC} 3M^{MC}

Pompe et composants		Trousse et pansements	
ULTDEV01	Unité de traitement V.A.C.® Ulta 3M ^{MC}	VFCCC05MD	Trousse de pansement Veraflo ^{MC} Cleanse Choice Complete ^{MC} 3M ^{MC} , moyen, paquet de 5
ULTLNK0500	Cassette V.A.C. Veralink ^{MC} 3M ^{MC} , paquet de 5	VFCCC05LG	Trousse de pansement Veraflo ^{MC} Cleanse Choice Complete ^{MC} 3M ^{MC} , grand, paquet de 5
ULTDUO0500	Ensemble de tubulure V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo ^{MC} 3M ^{MC} , paquet de 5	DTAC10LDP	Champ Dermatac ^{MC} 3M ^{MC} , caisse de 10
M8275063/5	Réservoir de 500 ml avec gel pour une utilisation avec le Système de traitement V.A.C.® Ulta 3M ^{MC} , paquet de 5	ULTVFL05SM	Pansement V.A.C. Veraflo ^{MC} 3M ^{MC} , petit, paquet de 5
M8275063/10	Réservoir de 500 ml avec gel pour une utilisation avec le Système de traitement V.A.C.® Ulta 3M ^{MC} , paquet de 10	ULTVFL05MD	Pansement V.A.C. Veraflo ^{MC} 3M ^{MC} , moyen, paquet de 5
M8275093/5	Réservoir de 1 000 ml avec gel pour une utilisation avec le Système de traitement V.A.C.® Ulta 3M ^{MC} , paquet de 5	ULTVFL05LG	Pansement V.A.C. Veraflo ^{MC} 3M ^{MC} , grand, paquet de 5
		ULTVCC05MD	Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice ^{MC} 3M ^{MC} , moyen, paquet de 5
		ULTVCC05LG	Pansement V.A.C. Veraflo Cleanse Choice ^{MC} 3M ^{MC} , grand, paquet de 5

Bibliographie :

1. Sondage de septembre 2014, n = 240, chirurgiens, podiatres, infirmières stomathérapeutes et patients
2. LawA.CanadianWoundProductMarketSpend.Nov112018.HEOR-2018-203-DAR.
3. Department of Health (DOH). « Comorbidities : A framework of principles for system-wide action », Londres : DOH, 2014. Consulté en mars 2019 à : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307143/Comorbidities_framework.pdf.
4. DOWSETT, C. « Breaking the cycle of hard-to-heal wounds: balancing cost and care », *Wounds Int*, vol. 6, n° 2 (2015), p.17-21.
5. SALCIDO, R. « What is bioburden? The link to chronic wounds. », *Adv. Skin Wound Care*, vol. 20, n° 7 (juillet 2007), p. 368-369.
6. « A fact a day – biofilms and wound care. », *Wound Source* (2018). Disponible à : <https://pages.woundsources.com/woundsources-practice-accelerator-biofilms-and-wound-care/>.
7. COSTERTON, J. W., P. S. STEWART, et E. P. GREENBERG. « Bacterial Biofilms: A Common Cause of Persistent Infection. », *Science*, vol. 284, n° 5 418 (1999), p. 1 318-1 322.
8. DAVIES, D. G., et G. G. GEESEY. « Regulation of the alginate biosynthesis gene algC in Pseudomonas aeruginosa during biofilm development in continuous culture. », *Appl Environ Microbiol*, vol. 61, n° 3 (1995), p. 860-867.
9. CICMANEC, F., et I. A. HOLDER. « Growth of Pseudomonas aeruginosa in Normal and Burned Skin Extract: Role of Extracellular Proteases », *Infect Immun*, vol. 25, n° 2 (1979), p. 477-483.
10. HARRISON-BALESTRA, C., B. S. CAZZANIGA, S. C. DAVIS, et coll. « A wound-isolated pseudomonas aeruginosa grows a biofilm in vitro within 10 hours and is visualized by light microscopy. », *Dermatol Surg*, vol. 29, n° 6 (2003), p. 631-635.
11. SCHABER, W. J. TRIFFO, S. J. SUH, et coll. « Pseudomonas aeruginosa forms biofilms in acute infection independent of cell-to-cell signaling. », *Infect Immun*, vol. 75, n° 8 (2007), p. 3 715-3 721.
12. WOLCOTT, K. P. RUMBAUGH, G. JAMES, et coll. « Biofilm maturity studies indicate sharp debridement opens a time-dependent therapeutic window. », *J Wound Care*, vol. 19, n° 8 (2010), p. 320-328.
13. TEOT, L., F. BOISSIERE, et S. FLUIERARU. « Novel foam dressing using negative pressure wound therapy with instillation to remove thick exudate. », *Int. Wound J.*, vol. 14, n° 5 (2017), p. 842-848.
14. BRINKERT, D., A. MAZEN, M. NAUD, et N. MAIRE. « Trial C, Teot L. Negative pressure wound therapy with saline instillation: 131 patient case series. », *Int. Wound J.*, vol. 10, suppl. 1 (décembre 2013), p. 56-60.
15. GUPTA, S., A. GABRIEL, J. LANTIS, et L. TEOT. « Clinical recommendations and practical guide for negative pressure wound therapy with instillation. », *Int. Wound J.*, vol. 13, n° 2 (avril 2016), p. 159-174.
16. LESSING, C., P. SLACK, K. Z. HONG, D. KILPADI, et A. MCNULTY. « Negative pressure wound therapy with controlled saline instillation (NPWT): dressing properties and granulation response in vivo. », *Wounds*, vol. 23, n° 10 (octobre 2011), p. 309-319.
17. GABRIEL, A., M.D., F.A.C.S.; M. CAMARDO, M. SC.; E. O’RORKE, B. SC.; R. GOLD, B. SC.; P. J. KIM, D.P.M., M. SC, F.A.C.F.A.S. « Effects of Negative-Pressure Wound Therapy With Instillation versus Standard of Care in Multiple Wound Types: Systematic Literature Review and Meta-Analysis », *Plastic and Reconstructive Surgery*, vol. 147, n° 1S-1 (janvier 2021), p. 68S-76S doi : 10.1097/PRS.00000000000007614.
18. KIM, P.J., S. LOOKESS, C. BONGARDS, L. P. GRIFFIN, et A. GABRIEL. « Economic model to estimate cost of negative pressure wound therapy with instillation vs control therapies for hospitalised patients in the United States, Germany, and United Kingdom », *Int. Wound J.*, 2021, p. 1-7.
19. ICG, « Dermatac Opportunity Assessment: Qualitative & Quantitative Market Research Final Report » (8 octobre 2015).
20. GALARZA, L. « Initial clinical observations using a novel negative pressure wound therapy drape comprised of acrylic and silicone », SAWC Spring, San Antonio, Texas (mai 2019).
21. KCI, « Cumulative NPWT Wounds » (2018).



Offert au Canada auprès des distributeurs autorisés de 3M-KCI.
KCI USA, Inc., une société de la Compagnie 3M.
KCI est détenue et exploitée par la Compagnie 3M.

KCI Medical Canada Inc.
75, rue Courtneypark O, bureau 4
Mississauga (Ontario)
L5W 0E3

KCI USA, INC.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX
78249

Remarque : Il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des renseignements sur la sécurité propres à ces produits et traitements. Veuillez consulter un clinicien et les directives d’utilisation du produit avant l’utilisation. Ce matériel est destiné aux professionnels des soins de santé.

3M, Veraflo, Smart Instill, V.A.C., Granufoam, Veraflo Cleanse Choice Complete, V.A.C. Dermatac, Veraflo Cleanse Choice, Veralink et V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés. 2208-24724 F