



Prevena Restor™
Postoperative Recovery

Votre guide pour repenser votre rétablissement

Jouez un rôle actif dans votre guérison avec le système de prise en charge des incisions 3M™ Prevena Restor™. Un dispositif portable à usage unique qui prend en charge votre site opératoire afin de vous accompagner dans votre parcours de guérison.



Faire en sorte que le processus de rétablissement soit plus facile

En vous donnant plus de confiance dans votre parcours de guérison

Contrairement aux pansements postopératoires classiques, qui couvrent et protègent uniquement l'incision, les pansements 3M™ Prevena Restor™ couvrent l'ensemble du site opératoire, en délivrant une pression négative pour la thérapie des plaies.

Le système utilise une technologie de pointe pour protéger la zone et optimiser la guérison.

Il fournit une thérapie jusqu'à 14 jours, selon la décision de votre médecin.

Expérimentez la différence

Une fois votre site d'incision protégé, vous pouvez reprendre de nombreuses activités quotidiennes normales, ce qui peut vous aider à vous sentir à nouveau vous-même.

Le système de prise en charge des incisions 3M™ Prevena Restor™ :



Recouvre entièrement l'incision et la zone environnante



Aide à maintenir ensemble les bords de l'incision¹



Protège contre les sources d'infection extérieures²



Élimine les liquides et les éléments infectieux du site de l'incision^{3*}



Réduit le gonflement⁴


*Dans un réservoir




Le système de prise en charge des incisions Prevena Restor inclut :



Unité de thérapie

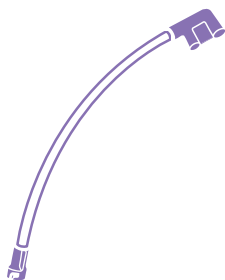


Tubulure de connexion

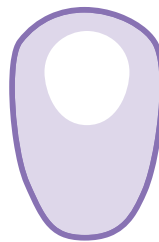



Sacoche de transport



Cartouche

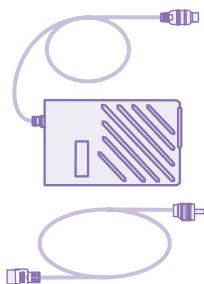

Chargeur

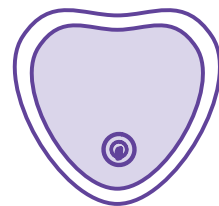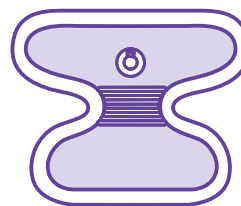

*Pansement

Les pansements existent en plusieurs formes adhésives.

Celui qui vous a été fourni est approprié pour votre intervention chirurgicale.*

Pansement 3M™ Prevena
Restor™ Bella●Form™




Pansement 3M™ Prevena
Restor™ Arthro●Form™



*La disponibilité des pansements peut également varier selon les pays.

Comment utiliser et entretenir le système de prise en charge des incisions 3M™ Prevena Restor™

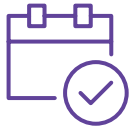

Gardez votre pansement aussi longtemps que votre médecin vous le recommande — jusqu'à quatorze jours

N'essayez pas d'ajuster ou d'enlever votre pansement. Vous devez retourner chez votre médecin pour le faire retirer.



Laissez l'unité de thérapie allumée

L'unité de thérapie s'éteint automatiquement après quatorze jours.



Gardez votre unité de thérapie en sécurité et au sec

- Ne laissez pas tomber l'unité de thérapie et ne laissez pas le tuyau se plier, se tordre ou se pincer.
- Vous devez toujours vous efforcer de garder l'unité de thérapie au sec, mais vous pouvez prendre une douche rapide pendant que vous portez votre pansement si votre professionnel de santé vous l'autorise.



Vous pouvez voir ou non du liquide s'accumuler dans le réservoir

Certaines incisions se drainent plus que d'autres. Certaines ne se drainent pas du tout. Si le réservoir est complètement plein, éteignez le dispositif et contactez votre médecin pour obtenir des instructions.




Le système est livré avec une batterie rechargeable

Lorsqu'elle est complètement chargée, la batterie a une autonomie d'environ neuf heures.

Porter le système de prise en charge des incisions Prevena Restor

L'unité de thérapie peut être portée par-dessus ou sous vos vêtements et comprend une sacoche de transport avec une sangle réglable et une attache pour ceinture.

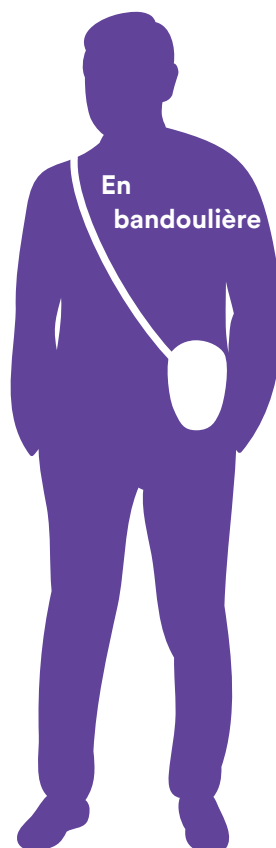



Dormir avec le système de prise en charge des incisions Prevena Restor


- Placez le pansement et la pompe dans une position dans laquelle la tubulure ne sera pas pliée, tordue ou pincée
- Gardez l'unité de thérapie près de vous afin qu'elle ne tombe pas d'une table ou d'un lit sur le sol



Se doucher avec le système de prise en charge des incisions Prevena Restor

Si votre professionnel de santé est d'accord, une douche rapide est généralement acceptable. Cependant, ne prenez pas de bain avec le système.

- Avant de prendre une douche, éteignez l'unité de thérapie en maintenant le bouton On/Off enfoncé pendant trois secondes. Une fois la thérapie éteinte, débranchez l'unité du pansement et rangez-la dans un endroit sûr, à l'abri de l'eau.
- Un peu d'eau ou de savon de douche n'affectera pas le pansement. Il est possible de le rincer légèrement.
- Lorsque vous vous séchez avec une serviette, ne déplacez pas et n'endommagez pas le pansement.

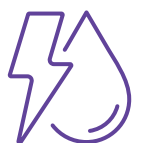

Avertissement

Si l'unité de thérapie tombe dans la baignoire, la douche ou le lavabo, débranchez-la immédiatement (si elle est branchée sur une source électrique) et débranchez l'unité du pansement. Contactez ensuite votre médecin ou votre soignant.

Fonctionnement de base et indicateurs

Arrêt de l'alarme

En cas d'alerte, maintenez le bouton central de coupure de l'alerte enfoncé pendant trois secondes pour couper l'alerte sonore pendant deux minutes. Lorsqu'il est enfoncé, le bouton de coupure de l'alerte s'allume pour indiquer que la coupure a été activée. L'alerte réapparaîtra après deux minutes, sauf si l'alerte a été réactivée.


Bouton marche/arrêt

Pour allumer ou éteindre le dispositif, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes. Vous ne devez éteindre le dispositif que lorsque vous êtes prêt à prendre une douche. Reportez-vous aux instructions relatives à la douche à la page précédente.

Indicateur de durée de la thérapie

L'unité de thérapie a une durée de vie fixe.

Attention : Cette durée de vie commence après que le dispositif ait fonctionné pendant une heure, sans interruption. Le décompte de la durée de vie se poursuit même si le dispositif est éteint. Les LED situées autour du bouton On/Off indiquent le nombre de jours restants de la durée de vie.

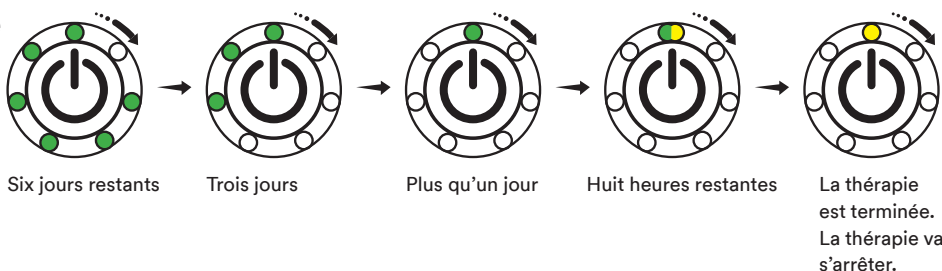

Indicateur du niveau de la batterie



Pleine charge



Charge moyenne



Faible charge

Indicateur d'alimentation connectée

Lorsque l'unité de thérapie est branchée sur une source d'alimentation, l'icône Alimentation connectée devient jaune, indiquant que l'alimentation est connectée et que le système est en cours de recharge. L'icône devient verte lorsque la charge est complète.

Alimentation connectée




Entièrement chargé




Aspect du pansement

Pendant le fonctionnement, le pansement doit avoir un aspect plissé et la mousse doit être comprimée.

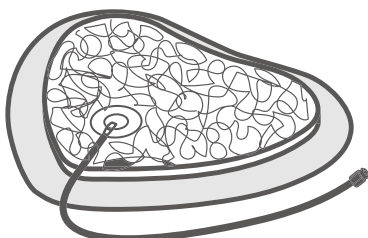

Si la mousse n'est pas comprimée ou si l'unité de thérapie émet une alerte, reportez-vous à la section de Résolution des problèmes de la page suivante.

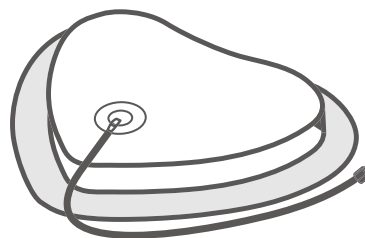

Résolution des problèmes



Alerte de blocage

Un voyant LED jaune fixe au-dessus du symbole de blocage s'allume et une alerte de blocage est émise (deux bips se répétant toutes les 15 secondes).

- Vérifiez que le tuyau n'est pas tordu ou que la cartouche n'est pas pleine. Si la cartouche est pleine, contactez votre professionnel de santé.
- Lorsque l'obstruction est supprimée, les alertes visuelles et sonores s'éteignent.



Alerte de fuite

Un voyant LED jaune fixe au-dessus du symbole de fuite s'allume et une alerte de fuite est émise (deux bips se répétant toutes les 15 secondes).

- Assurez-vous que la cartouche est bien verrouillée sur l'unité de thérapie et que tous les tuyaux sont correctement connectés et verrouillés.
- Si l'alerte ne s'éteint pas après avoir tenté de sceller la fuite, contactez votre médecin.



Alerte de niveau de batterie faible

Une alerte de batterie faible indique qu'il reste environ deux heures de thérapie.


- Rechargez votre batterie immédiatement. Branchez l'unité de thérapie sur une prise de courant ou une autre source d'alimentation.



La thérapie est terminée

Un voyant LED jaune fixe situé en haut de l'indicateur de durée de thérapie s'allume. L'unité de thérapie émet huit bips, puis un bip continu pendant cinq secondes avant de s'éteindre automatiquement.

- Informez votre professionnel de santé lorsque cela se produit
- Si l'unité de thérapie a terminé la thérapie et s'est arrêtée, et que l'on tente de la rallumer, l'unité de thérapie émet une alerte sonore pendant trois secondes, puis s'éteint.

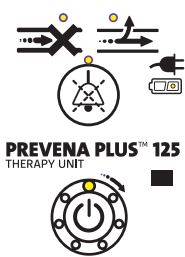

Alerte de défaillance du système

En cas de défaillance du système, tous les témoins LED s'allument et clignotent et le dispositif émet deux bips toutes les 15 secondes.

- Il suffit d'éteindre l'unité de thérapie en maintenant le bouton marche/arrêt pendant trois secondes. Puis, remettez le dispositif en marche en maintenant le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.
- Si cela ne résout pas l'alerte de défaillance du système, veuillez contacter votre professionnel de santé.



Questions ou inquiétudes ?

Si vous avez des questions concernant votre incision ou d'autres problèmes médicaux, contactez votre professionnel de santé.



Votre parcours de guérison continue avec le système de prise en charge des incisions 3M™ Prevena Restor™

- ✓ Couvre l'ensemble du site opératoire
- ✓ Utilise une technologie de pointe
- ✓ Fournit une thérapie jusqu'à quatorze jours, selon la décision de votre médecin
- ✓ Fait en sorte que le processus de rétablissement soit plus facile



Questions ou inquiétudes ?

Si vous avez des questions concernant votre incision ou d'autres problèmes médicaux, informez-en votre médecin.

Points clés à retenir :

- Gardez votre pansement aussi longtemps que votre professionnel de santé vous l'indique — jusqu'à quatorze jours. N'essayez pas d'ajuster ou de retirer votre pansement. Seul votre professionnel de santé doit retirer le système de prise en charge des incisions Prevena Restor.
- Laissez l'unité de thérapie allumée. L'unité de thérapie s'éteint automatiquement au bout de quatorze jours.
- Contactez votre professionnel de santé si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre intervention chirurgicale, un gonflement ou des problèmes de rétablissement

Il est important que vous discutiez des avantages et des risques potentiels de toute thérapie spécifique avec votre professionnel de santé afin de décider si elle vous convient. Veuillez consulter votre médecin traitant pour toute question spécifique et toute information importante relative à la sécurité d'utilisation et au fonctionnement du système de prise en charge des incisions Prevena Restor.

Références : 1. Wilkes RP, Kikpad DV, Zhao Y, Kazala R, McNulty A. Closed Incision management with negative pressure wound therapy (CIM): biomechanics. Surg Innov. 2012;19(1):67-75. 2. Payne J. Evaluation of the resistance of the Prevena incision dressing top film to viral penetration. San Antonio, TX: Kinetic Concepts, Inc.; 2009. Report No.: 0000021109. 3. Kilpadi DV, Cunningham MR. Evaluation of closed incision management with negative pressure wound therapy (CIM): hematoma/seroma and involvement of the lymphatic system. Wound Repair Regen. 2011;19(5):588-596. doi:10.1111/j.1524-475X.2011.00714.x. 4. Glaser DA, Farnsworth CL, Varley ES, Nunn TA, Sayad-Shah M, Breisch EA, Yaszay B. Negative pressure therapy for closed spine incisions: a pilot study. Wounds. 2012;24(11):308-316.



3M France
Division Solutions Médicales
1 Parvis de l'Innovation
CS20203
95006 CERGY PONTOISE Cedex
Tél : 01 30 31 61 61
Fax : 01 30 31 85 65
www.3MFrance.fr/medical

3M (Schweiz) GmbH
Health Care
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Tel +41 (0)44 724 90 90
innovation.ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/medicalsolutions

Remarque : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation.

Prevena Restore est un dispositif médical de classe IIa. Marquage CE 2797. Fabriqué par KCI USA. Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise cedex

© 2021 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation interdite sans autorisation. PRA-PM-EU-00603 (12/21)