

Guide de sélection, d'application et de retrait pour les produits de fixation médicale

La sensibilisation et la formation aux dernières approches en matière de la sélection, de l'application et du retrait des produits adhésifs médicaux peuvent contribuer à améliorer la cohérence des soins dans votre établissement et à réduire le risque de contamination croisée et de lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux.



3M propose des rouleaux de longueur à usage unique couvrant les quatre catégories de fixation.

Évaluer et préparer la peau



- Évaluer la peau
- Couper/raser les poils
- Nettoyer et sécher la peau
- Pour protéger la peau à risque, envisager l'utilisation du Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC} sous les adhésifs acryliques et le laisser sécher complètement avant d'appliquer le ruban
- Éviter l'utilisation systématique d'agents poisseux



Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC}

Sélectionnez le produit pour l'utilisation prévue

Dans la plupart des établissements, nous trouvons que les besoins en matière d'acquisition se divisent en quatre catégories de base, regroupées par type d'applications cliniques, comme illustré ci-dessous. 3M a mis à jour l'emballage des produits avec la couleur de la catégorie pour aligner visiblement chaque produit avec sa catégorie de fixation. La formation sur ce cadre peut contribuer à la normalisation.

- En fonction de votre travail clinique, déterminez la catégorie de fixation requise.
- Sélectionnez un ruban ou un emballage dans la catégorie de fixation. Envisagez un produit avec la désignation de rendement de la peau de 3M, si disponible.
- Sélectionnez des rouleaux de longueur à usage unique lorsque cela est possible.



Le rendement sur la peau : La plume désigne les produits qui procurent la fixation dont vous avez besoin tout en minimisant les effets dommageables à la peau.



Les rouleaux de longueur à usage unique emballés individuellement peuvent contribuer à réduire le risque de contamination croisée*.

Non adhésif



- Convient à tous les patients, notamment ceux qui ont une peau fragile et à risque
- Adhère à lui-même sans nécessiter d'adhésif, d'épingles ni d'agrafes, et s'applique facilement et rapidement
- Peut être déchiré à la main éliminant ainsi le besoin de ciseaux
- Ce produit est exempt de latex de caoutchouc naturel



Bandage autoadhérent sans latex NL Coban^{MC} 3M^{MC}

Autres solutions de fixation médicale 3M non adhésives :

Bandage autoadhérent Coban^{MC} 3M^{MC} (contient du latex)

** Longueur étirée

Usages multiples



- Un ruban doux qui convient à tous les patients, notamment les personnes âgées et les patients pédiatriques
- Une adhérence fiable qui reste en place jusqu'à 48 heures⁶
- Se retire proprement avec une perturbation minimale des couches cutanées sans causer d'inconfort excessif chez les patients
- Un déchirement bidirectionnel facile



Ruban chirurgical Micropore^{MC} S 3M^{MC}

Autres solutions de fixation médicale 3M à usages multiples :

Ruban chirurgical blanc

Transpore^{MC} 3M^{MC}

Ruban chirurgical Micropore^{MC} 3M^{MC}

Ruban chirurgical Transpore^{MC} 3M^{MC}

Souple



- Un tissu souple qui permet de conserver l'intégrité cutanée
- Une capacité d'étirement dans plusieurs sens qui aide à réduire au minimum le risque de lésion cutanée
- Une souplesse permettant au ruban de s'adapter à l'enflure, à la distension et au mouvement
- Un ruban perméable à l'air convenant à une vaste gamme d'utilisations
- Perforé et facile à déchirer



Ruban chirurgical en toile souple Medipore^{MC} H 3M^{MC}

Autres solutions de fixation médicale 3M souples :

Ruban chirurgical Microfoam^{MC} 3M^{MC}

3M^{MC}

Haute résistance



- Un ruban en toile soyeux procurant une adhérence sûre
- Un matériau robuste également idéal pour les applications d'immobilisation
- Un déchirement bidirectionnel facile



Ruban chirurgical Durapore^{MC} 3M^{MC}

Autres solutions de fixation médicale 3M à haute résistance :

Ruban chirurgical sec


Multipore^{MC} 3M^{MC}

* Les rouleaux à usage unique aident à limiter l'exposition aux contaminants infectieux de l'environnement, réduisent au minimum le contact avec les mains des travailleurs de la santé, les surfaces et l'équipement. Pratiquer une bonne technique de prévention des infections conformément au protocole de l'établissement.


Utilisation

- Utiliser un nouveau rouleau propre, de préférence un rouleau de longueur à usage unique
- Ne pas placer de ruban adhésif ou d'emballage sur les surfaces avant de les placer sur la peau; cela pourrait réduire l'adhérence et augmenter le risque de contamination croisée

Rubans médicaux

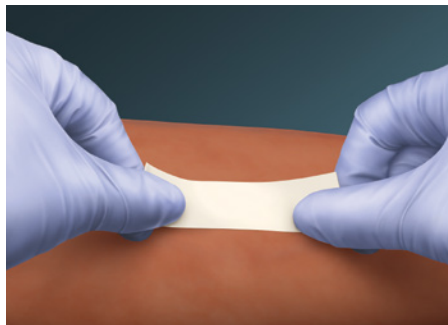

- Appliquer le ruban sur la peau.

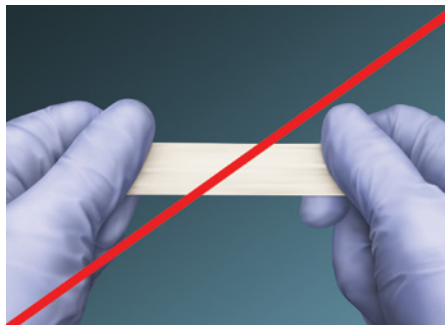

- **Ne pas** tirer ni étirer le ruban pendant l'application. Cela peut entraîner des phlyctènes de tension lorsque le ruban tente de rebondir à son état initial.



- Appliquer une pression ferme pour activer l'adhésif et toucher complètement la peau. Les adhésifs acryliques, en particulier, sont sensibles à la pression.
- Jeter le ruban non utilisé.

Bandages autoadhérents



- Dérouler... et laisser le bandage relaxer.
- Sans étirer, appliquer un tour complet de bandage et le faire chevaucher. Appuyer légèrement sur le chevauchement pour bien le fixer.
- Ne pas utiliser le bandage directement sur une plaie ouverte, car cela peut entraîner une infection.



- Continuer à envelopper en appliquant une tension sur le bandage afin d'obtenir la compression souhaitée. Appliquer une légère pression à la fin de l'application pour fixer le bandage.
- Ne pas serrer le bandage afin d'éviter de gêner la circulation et de causer des blessures graves.




- Les couches se serrent les unes contre les autres pour que les enroulements du bandage soient cohérents entre eux.
- Surveiller fréquemment la région (au moins toutes les 24 heures) pour déceler les signes d'enflure, de décoloration, de douleur, d'engourdissement, de fourmillement, ou d'autres changements dans la sensation. Si ces symptômes se manifestent, retirer immédiatement le bandage et communiquer avec un professionnel de la santé.


Retrait

Rubans médicaux


En plus de la sélection et de l'application appropriées des produits, il est essentiel de bien retirer le ruban afin de réduire l'incidence des lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux¹. Les lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux peuvent causer de la douleur, augmenter le risque d'infection et retarder la guérison². Il s'agit d'une complication prévalente, mais sous-diagnostiquée, sous-signalée et évitable qui peut avoir une incidence sur l'expérience du patient, la satisfaction du patient et être suffisamment grave pour nécessiter un traitement supplémentaire¹.

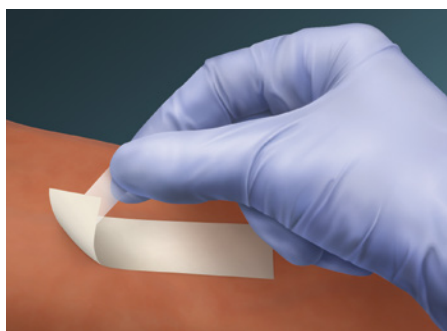

- Desserrer le bord guidant du ruban.
- Lorsqu'un ruban adhère très fortement à la peau, on peut envisager d'utiliser un décapant d'adhésif de qualité médicale ou un désinfectant pour les mains pour ramollir l'adhésif le long de la ligne de décollement du ruban.

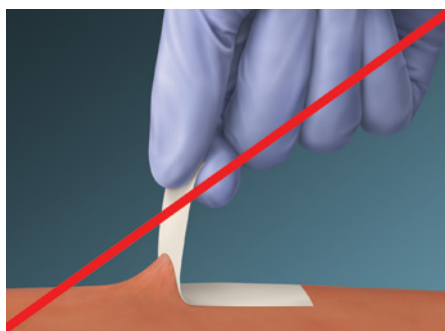

- **Ne pas** tirer le ruban perpendiculairement à la peau, car il tire sur l'épiderme, ce qui augmente le risque de lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux.

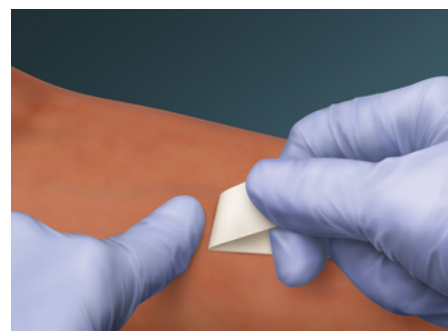

- Stabiliser la peau avec un doigt au niveau de la ligne de décollement et le déplacer continuellement le long de la ligne de décollement pour soutenir la peau pendant le retrait.
- Retirer le ruban lentement et doucement dans le sens de la pousse du poil en tirant le ruban sur lui-même de façon à ce qu'il soit bas (près de la surface de la peau) et en le retirant lentement.

Bandages autoadhérents

- Desserrer le bord guidant du bandage et le déballer.
- Jeter le bandage inutilisé.

Au cœur de la fixation

3M vous permet de choisir plus facilement le meilleur produit de sécurité à usage unique pour chacune de vos applications cliniques.

Autoadhérent						
Nom du produit		Numéro de produit	Format	Unités		
Bandage autoadhérent sans latex NL Coban^{MC} 3M^{MC} 	2083S	7,5 cm x 4,57 m (3 po x 5 vg) 10 cm x 4,57 m (4 po x 5 vg) 15 cm x 4,57 m (6 po x 5 vg)	24			
	2084S		18			
	2086S		12			
À usages multiples						
Nom du produit		Numéro de produit	Format	Rouleaux/boîte	Boîtes/caisse	
Ruban chirurgical Micropore^{MC} S 3M^{MC} 	2770S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 vg) 5 cm x 1,37 m (2 po x 1,5 vg) 2,5 cm x 5 m (1 po x 5,5 vg) 5 cm x 5 m (2 po x 5,5 vg)	100	5		
	2770S-2 		50	5		
	2770-1		12	10		
	2770-2		6	10		
Ruban chirurgical blanc Transpore^{MC} 3M^{MC} 	1534S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 vg)	100	5		
Ruban chirurgical Transpore^{MC} 3M^{MC} 	1527S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 vg)	100	5		
Ruban chirurgical Micropore^{MC} S 3M^{MC} 	1530S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 vg)	100	5		
Souple						
Nom du produit		Numéro de produit	Format	Unités		
Ruban chirurgical en toile souple Medipore^{MC} H 3M^{MC} 	2860S-2U	5 cm x 1,8 m (2 po x 2 vg) 10 cm x 1,8 m (4 po x 2 vg) 15 cm x 1,8 m (6 po x 2 vg)	64			
	2860S-4U		36			
	2860S-6U		16			
Adhérence accrue						
Nom du produit		Numéro de produit	Format	Rouleaux/boîte	Boîtes/caisse	
Ruban chirurgical Durapore^{MC} 3M^{MC} 	1538S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 vg)	100	5		

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web **3M.ca/Fr/MedicalTapes** ou communiquez avec le représentant de 3M de votre région.

Bibliographie :

* Données internes de 3M. EM-05-014598.

1. MCNICHOL, L., C. LUND, T. ROSEN et M. GRAY. « Medical adhesives and patient safety: state of the Science. Consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries », *Journal of WOCN*, vol. 40, n° 4 (2013), p. 365-380.
2. CUTTING, K.F. « Impact of adhesive surgical tape and wound dressings on the skin, with reference to skin stripping », *J Wound Care* (2008), p.157-158, p.160-162.



Produits offerts au Canada par :

La Compagnie 3M Canada
Division des solutions médicales 3M
300, rue Tartan
London (Ontario) N5V 4M9
Canada

Téléphone 1 800 364-3577
Site Web 3M.ca

Voir l'étiquetage spécifique du fabricant pour toute directive supplémentaire ou contraire relative à la préparation, à l'application et au retrait.

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Coban, Cavilon, Transpore, Medipore, Durapore, Micropore, Microfoam et Multipore sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2023, 3M. Tous droits réservés. 2307-26723 F