



[質問]

モデル775本体のエアーフィルタは、交換する必要がありますか？
また、どれくらいの頻度で交換すればよいですか？

よくある質問 4



[答え]

エアーフィルタは、定期交換が必要です。500時間使用毎、
または500時間に満たない場合でも12ヶ月毎に交換してください。



フィルタ交換を怠ると、風量が減少し、
適正な患者加温ができなくなるおそれがあります。



3M™ ベアーハガー™
パシエントウォーミング
モデル775

本体の液晶画面で、累積作動時間数を確認することができます。

累積作動時間の確認方法

1. 「スタンバイ」モードから「室温」ボタンを押す。
2. 「機能選択」ボタン（ベアーマーク）を3秒間押し続ける。
3. 液晶画面に「Hours」の文字が表示され装置の累積作動時間が表示されます。
4. 60秒後、または「機能選択」ボタン（ベアーマーク）を押すと「室温」の温度表示にもどります。

- 「機能選択」ボタン
- 「室温」ボタン
- 「スタンバイ」ボタン




専用ローリングカートにセットされている状態でもフィルタ交換が可能です。

フィルタ交換の方法

フィルタは、本体の底面にセットされています。

1. 本体底面カバーの前後2カ所のネジを緩め、カバーを外します。
2. 古いフィルタを取り外し、新しいフィルタをセットします。
3. カバーを元の位置に付けて交換完了です。

古いフィルタは、各自治体または施設の基準に従って廃棄してください。
洗浄再利用はできません。

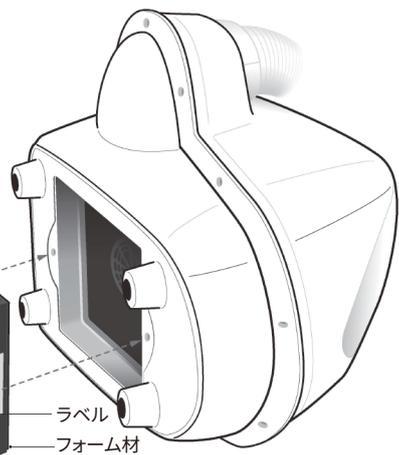

3M™ ベアーハガー™ エアーフィルタ 90047
ラベル、フォーム材の位置を確認して
表裏を間違えないようにセットしてください。

カバー
排気方向が後ろ向きになるように
セットしてください。

《別売り》3M™ ベアーハガー™ エアーフィルタ 90047 モデル 750、775 共通



交換時期を過ぎた
フィルタは目詰まりを
おこしています。

同梱されているラベルに日付と累積作動時間や次回交換時間を記載し
装置本体の見やすい場所に貼用してください。必要に応じて、点検記録表等にも
フィルタ交換の日付とアワーメータの累積作動時間を記入してください。

フィルタは12ヵ月後または500時間使用後に交換して下さい。

日付	交換実施 年 月 日 + 12ヵ月	⇒	次回交換 年 月 日
アワーメータ	+ 500時間		⇒

3M、Bair Hugger、ベアーハガーは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

感染管理製品事業部

<http://www.mmm.co.jp/hc/medical/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.
HPM-616-C(041710)TP

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

2017年4月発行