



V.A.C. ULTA®
THERAPY SYSTEM

V.A.C. ULTA®型 陰圧維持管理装置

本邦初の周期的自動洗浄液注入機能付きV.A.C.®治療システム



- V.A.C.®ベラフロ治療による洗浄液の周期的自動注入機能を追加
- ワンタッチで治療方法を選択 (V.A.C.®ベラフロ治療/V.A.C.®治療)
- 創傷に合わせてV.A.C.®ベラフロ治療の各サイクル (洗浄液の注入量、浸漬時間、陰圧閉鎖療法時間) を設定できます
- 設置場所を制限しない大型のハンガーアームを搭載
- 洗浄液注入ポンプにより高低差の影響なく洗浄液の注入が可能
- 大型7インチタッチパネルにより直感的な操作が可能
- 簡易操作でキャニスター/V.A.C.®ベラリンクカセット™の脱着が可能
- 治療をモニタリングし、トラブルが発生した際に早期に警告音で知らせ、状況に応じて自動で治療を停止※します (※原因を取り除くことで再開します)



V.A.C. ULTA®型陰圧維持管理装置

新たに追加された様々な機能(オプション)

- V.A.C.®ベラフロ治療:創面上への洗浄液注入および浸漬、局所創洗浄といった機能と陰圧閉鎖療法とで構成されます
- 洗浄液注入補助機能:創部のドレッシング貼付後、洗浄液注入補助を選択し、創傷への洗浄液注入量を観察しながら手動で開始および停止することで、適切な注入量を決定できます。決定した注入量は設定値となり、以降の各注入フェーズにおいて適用されます
- フォームの浸漬機能:ドレッシング交換時に前もって洗浄液を注入、浸漬することでフォームの除去を容易にし、患者の不快感を軽減
- Dynamic Pressure Control (DPC) 治療:これまでの間欠治療を発展させた治療法で、治療サイクル間の陰圧を最低レベルに保ちます。リークや浸出液の貯留を防ぎ、フォームの伸縮による患者の不快感を低減します

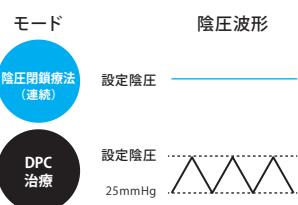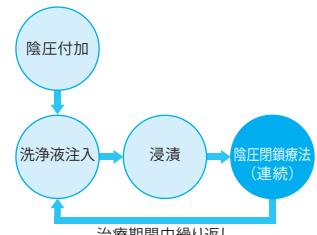

3M • KCI™

V.A.C.ULTA®型 陰圧維持管理装置概要

電池	リチウムイオン充電池	電気的定	定格電圧 100-240VAC 電源周波数 50-60Hz電源入力(最大) : 72W
キャニスター	300ml、500ml、1000ml		電擊に対する保護の形式による分類 クラス I 機器/内部電源機器
陰圧設定範囲	NPWT*:陰圧25~200mmHg (25mmHgきぎみ) NPWTi-d**:陰圧50~200mmHg (25mmHgきぎみ)		電擊に対する保護の程度による装着部の分類 BF形装着部 水の有害な侵入に対する保護の程度による分類 IPX1
治療モード	NPWTi-d*モード NPWT*モード	適合規格	電気的安全性 IEC 60601-1 Ed 3.0 電磁両立性 IEC 60601-1-2 Ed 3.0
立上がり時間	1~10分(1分きぎみ)	動作環境	温度範囲 10~30°C
立下り時間	1~10分(1分きぎみ)		相対湿度範囲 10~85%(結露しないこと)
吸引度	高/中/低		大気圧範囲 700hPa~1060hPa
		付属品	非アルコール性皮膜(ワイフ)

* NPWT:V.A.C.®治療 / **NPWTi-d:V.A.C.®ベラフロ治療

製品名(陰圧維持管理装置)	製品番号	寸法/重量/付属品	バッテリー持続時間
V.A.C.ULTA®型陰圧維持管理装置 レンタル	ULTDEV01/JP.R	約21.7(横)×26.0(高さ)×19.1(奥行)cm、 3.35kg (付属品) 電源アダプタ、電源コード	約4時間充電後 標準的な治療を行う場合、最長6時間
V.A.C.®ベラフロフォーム™	スマートキット	ULTVFL05SM/1.S	1キット/袋
	ミディアムキット	ULTVFL05MD/1.S	1キット/袋
	ラージキット	ULTVFL05LG/1.S	1キット/袋
V.A.C.®ベラフロクレンズフォーム™	ミディアムキット	ULTVCL05MD/1.S	1キット/袋
V.A.C.®ベラフロ クレンズチョイスフォーム™	ミディアムキット	ULTVCC05MD/1.S	1キット/袋
	ラージキット	ULTVCC05LG/1.S	1キット/袋
V.A.C.®グラニューフォーム®	スマートキット	M8275051/1N.S	1キット/袋
	ミディアムキット	M8275052/1N.S	1キット/袋
	ラージキット	M8275053/1N.S	1キット/袋
	Xラージキット	M8275065/1N.S	1キット/袋
V.A.C.®グラニューフォーム® シンプレイスEX	スマート	M8275046/1N.S	1キット/袋
	ミディアム	M8275045/1N.S	1キット/袋
V.A.C.®ホワイトフォーム™	スマートキット	M8275068/1N.S	1キット/袋
	ラージキット	M8275067/1N.S	1キット/袋
	スマート	M6275033/1N.S	V.A.C.®ホワイトフォーム™ 約7.5×10.0×1.0cm 1個/袋
	ラージ	M6275034/1N.S	V.A.C.®ホワイトフォーム™ 約10.0×15.0×1.0cm 1個/袋
V.A.C.®ベラリンクカセット™	ULTLNK0500/1.S	——	1個/袋
V.A.C.®ベラトラックデュオチューブ™	ULTDUO0500/1.S	——	1個/袋
INFOV.A.C.®1000 キャニスター	M8275093/1.S	容量 1,000ml(ゲル化剤入り)	1個/袋
INFOV.A.C.®500 キャニスター	ゲル化剤入り	M8275063/1.S	容量 500ml(ゲル化剤入り)
	ゲル化剤なし	M8275071/1.S	容量 500ml(ゲル化剤なし)
ACTIV.A.C.® キャニスター	M8275058-JP/1.N.S	容量 300ml(ゲル化剤入り)	1個/袋

製造販売元

ケーシーアイ株式会社

<http://www.kcij.com>

販売名 : V.A.C.Ultate 治療システム

医療機器承認番号 : 22900BZX00204000

NOTE: Specific indications, contraindications, warnings, precautions and safety information exist for these products and therapies. Please consult a clinician and product instructions for use prior to application. This material is intended for healthcare professionals.

©Copyright 2020 3M. All rights reserved 3M and the other marks shown are marks and / or registered marks. Unauthorized use prohibited. PRA-PM-JP-00118 (07/20) 2020年7月作成

⑧はKCIの登録商標です。

