

3M™ アダプティック™ ドレッシング

アセテート繊維メッシュに独自のワセリンを
含浸させた非固着性ドレッシング材です。



創部に固着しにくいいため、
着脱が容易で疼痛を軽減します。¹




滲出液などをスムーズに透過するように、
小孔サイズを設計しています。

使用方法

創部を消毒又は十分に洗浄してください。

貼付方法

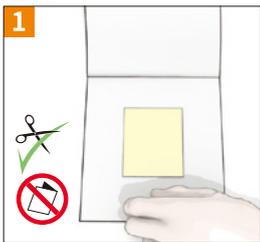

1 創部に合ったサイズを選択し、本品を
取り出します。
必要に応じて本品を滅菌済剪刀で
カットします。



2 創部に直接貼付します。
複数枚使用する場合は、ドレッシング
材の一部が重なるように貼付する
ことで、二次ドレッシング材への固着
を低減します。

二次ドレッシング材貼付方法



3 本品を二次ドレッシング材で被覆
してください。二次ドレッシング材は
滲出液の量に応じて選択してくだ
さい。

交換について



4 創傷の状態、滲出液の量に応じて
交換頻度を決定してください。

本品を取り除く際は、痛みが出ない
ようにゆっくりと剥がしてください。

主たる使用用途

滲出液の量にかかわらず、以下のような創傷に適応と
なります。

- I度およびII度の熱傷
- 裂傷、擦過創
- 植皮部
- 静脈うっ滞性潰瘍
- 褥瘡
- 抜爪を行った創
- 皮膚炎
- 縫合創
- 術後創傷

製品番号	サイズ	入数/箱
2012	7.6cm x 7.6cm	50枚
2013	7.6cm x 20.3cm (3枚/パック)	36パック
2014	7.6cm x 40.6cm	36枚
2015	7.6cm x 20.3cm	24枚
2018	7.6cm x 152.4cm	10巻
2019	12.7cm x 22.9cm	12枚

販売名：アダプティックドレッシング
管理医療機器：非固着性創傷被覆・保護材
医療機器認証番号：304ADBZX00021000

[使用目的、効能又は効果]
創部の保護及び固着防止に用いること。


- * 再使用禁止
- * 再滅菌禁止

[保険適用]
非固着性シリコンガーゼ
(1) 広範囲熱傷用 (2) 平坦部位用
保険請求：償還価格による。
使用上の注意などは電子添文を
ご参照ください。

¹Terrill, P.J., and Varughese, G. A comparison of three primary non-adherent dressings applied to hand surgery wounds. J Wound Care. 2000; 9:359-363.

3M™ アダプティック™ フィンガー／トードレッシング


特殊な微粘着シリコンでコーティングされた非固着性のドレッシング材と筒状包帯を一体化した、手指・足趾専用のドレッシング材です。

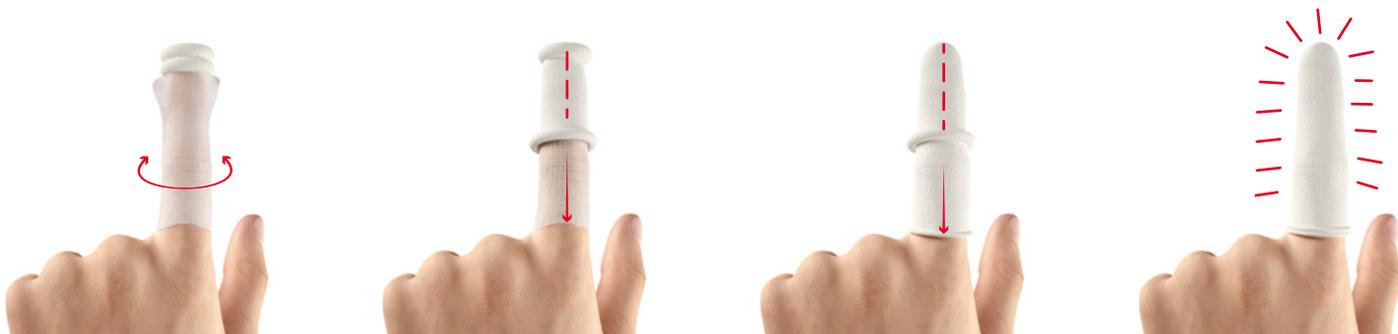

使用方法

手指または足趾のサイズに合わせて3M™ アダプティック™ フィンガー／トードレッシングを選択します。創部を清拭・消毒し、創周囲の健常皮膚が乾いていることを確認してください。

貼付方法

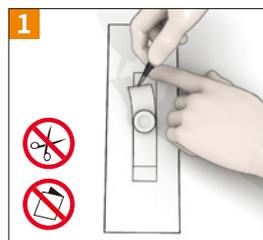

1 剥離紙からシリコンドレッシングを剥がします。



2 シリコンドレッシングで創部を覆う。ずれないように注意しながら、1層目の筒状包帯をおろし、続いて2層目の包帯をおろし、固定・保護する。

交換について



3 創傷の状態、滲出液の量に応じて交換頻度を決定してください。外側、内側の筒状包帯を順番にゆっくりと巻き上げます。続いてシリコンドレッシングを愛護的に除去してください。

主たる使用用途

手指・足趾において以下のような創傷が適応となります。

- 裂傷、擦過創
- 外傷
- 抜爪を行った創
- 縫合創

3M™ アダプティック™ フィンガー／トードレッシングは創傷治療を目的とした一次被覆、固定を目的とした二次被覆にご使用いただけます。

製品番号	直径	非固着性シリコンレイヤーサイズ	入数／箱
MAD003	S 2.0cm	2.0 x 7.6cm	10 個
MAD013	M 2.4cm	3.0 x 12.7cm	10 個
MAD023	L 2.8cm	3.0 x 12.7cm	10 個
MAD042	XL 3.0cm	3.0 x 12.7cm	10 個
MAD062	足趾 2.8cm	4.0 x 7.6cm	10 個

販売名：アダプティックドレッシング
管理医療機器：非固着性創傷被覆・保護材
医療機器認証番号：304ADBZX00021000

[使用目的、効能又は効果]
創部の保護及び固着防止に用いること。

- * 再使用禁止
- * 再滅菌禁止

[保険適用]
非固着性シリコンガーゼ
凹凸部位用
保険請求：償還価格による。
使用上の注意などは電子添文をご参照ください。

3M、アダプティックは3M社の商標です。

2023年3月発行

3M
スリーエム ジャパン株式会社
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
HPM-1097-A(0323)

カスタマーコールセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-321
9:00~17:00/月~金 (土日祝年末年始は除く)