

**3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング**

**3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング**





# カテーテルをしっかりと固定

## 荷重に強くしっかりと固定し、抜去リスクを低減


### 荷重を分散させる切り込み

切り込みによってドレッシング材の中央で引っ張る力を分散させるため、しっかりと固定が可能です。



### 耐荷重データ

切り込みのないフィルムドレッシング材との耐荷重の比較  
カテーテルを引き抜いた時の最大荷重

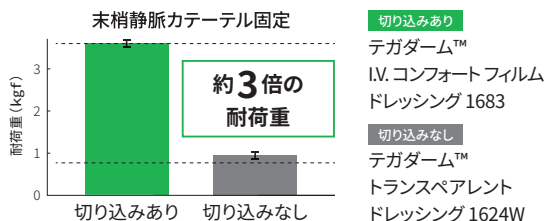


※弊社社内試験であり、当該製品の規格を保証するものではありません。

## フィルムの柔軟性を活かし、密閉性を高め、留置針のズレ対策

### フレイムデリバリー

フレイムデリバリー構造によって留置針とフィルムの間を隙間なく固定できることでドレッシングの密閉性を高め、浮き・剥がれ、留置針のズレ対策に寄与します。

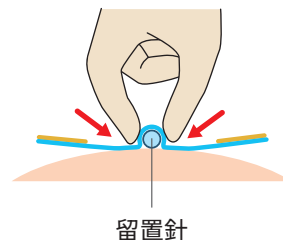


## ドレッシング材全体の浮きや剥がれを低減

### 高水蒸気透過性フィルム、 パターンコーティング粘着剤

高水蒸気透過性フィルムにアクリル系粘着剤を独自の技術でパターンコーティングしました。パターンコーティングにより、粘着力を保ちつつドレッシング全体の水蒸気透過性の向上を実現しました。

### 水蒸気透過性データ

従来のフィルムドレッシング材との水蒸気透過性の比較  
(透明フィルム部分) JIS L 1099 Inverted Water 法 準拠

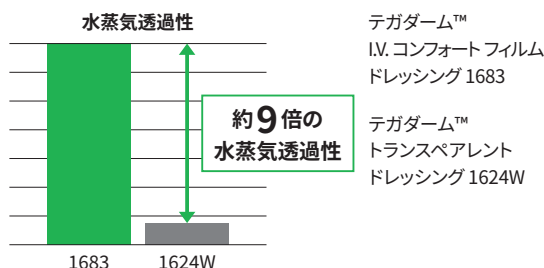

※弊社社内試験であり、当該製品の規格を保証するものではありません。

### 周囲補強用 不織布テープ

ドレッシング材周囲の浮きや剥がれを低減し、貼付中の固定性を高めます。



### 固定用テープ、 記録用ラベル

カテーテルやラインの固定に使用できます。滅菌されているためドレッシング材貼付前に留置針をテープで固定することも可能です。  
また、記録用ラベルは貼付日等を記入して管理することも可能です。






# 肌へのやさしさ

汗による皮膚の蒸れを抑え、剥がす際の皮膚への負担を軽減

## 高水蒸気透過性フィルム、 パターンコーティング粘着剤


透明フィルムおよび周囲補強用不織布テープの粘着剤をパターンコーティングすることで肌へのやさしさを追求しました。

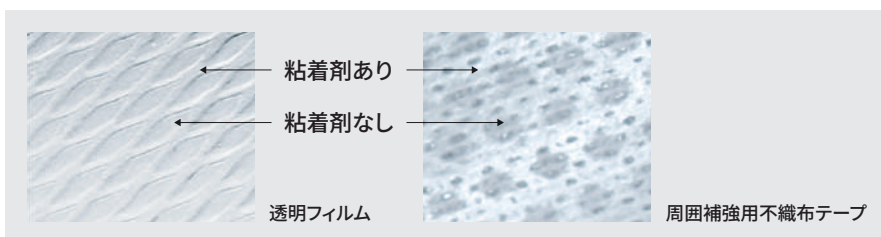

ドレッシング材貼付後の皮膚の緊張感を軽減

## 周囲補強用不織布テープ

周囲補強用不織布テープの外縁に細かいスリットがあるため、貼付後に皮膚の動きに追従し、緊張感を低減します。

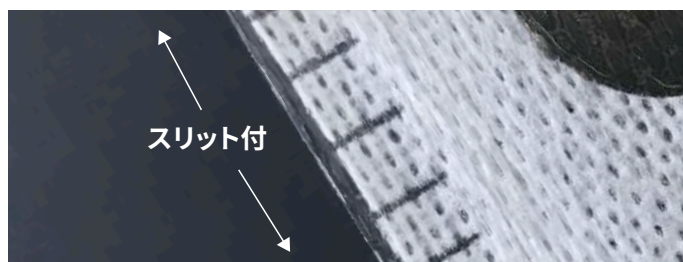

# 貼りやすさ、剥がしやすさ

手袋が粘着面に触れにくい設計のため、貼付が容易

## フレームデリバリー



片手でカテーテルを保持しながら接続部分が切り込みから出るように、また刺入部に透明フィルム部分を合わせる



フィルムの中央から外側に空気を押し出ししながら貼付する



周囲をしっかりと密着させ、フィルムドレッシング周囲を押さえながらゆっくりとフレーム部分を剥がす

貼り方・剥がし方の詳しい手順については本カタログ裏面記載のカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

ドレッシング材の上に貼ったテープを剥がしやすい(テープのみを剥がせる)



ドレッシング材の表面処理によって、ドレッシング材に貼付した固定用テープ等の過度な粘着力の上昇を防ぎます。

ドレッシング材の交換時、カテーテルやコネクタ部を巻き込まずに固定用テープ等が剥がしやすくなり、医療従事者や患者の負担軽減につながります。

3M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

放射線滅菌


一般医療機器／カテーテル被覆・保護材 届出番号:13B1X10422000232 販売名:テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング

製品番号	形状／サイズ (cm)	主な用途	付属品	枚／箱
1680	 3.8×4.5	各種カテーテル固定	固定用テープ 2本 記録用ラベル 1枚 <div>滅菌済み</div>	100
1681	 7×8		固定用テープ 2本 記録用ラベル 1枚 <div>滅菌済み</div>	100
1682	 5×5.7		固定用テープ 2本 記録用ラベル 1枚 <div>滅菌済み</div>	100
1683	 6.5×7		固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚 <div>滅菌済み</div>	100
1685	 8.5×11.5		固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚 <div>滅菌済み</div>	50
1689	 10×15.5		固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚 <div>滅菌済み</div>	25

3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング

放射線滅菌

一般医療機器／救急絆創膏（カテーテル被覆・保護材） 届出番号:13B1X10422000233 販売名:テガダーム コンフォート フィルム ドレッシング

製品番号	形状／サイズ (cm)	主な用途	付属品	枚／箱
1688	 10×12	傷の保護 各種カテーテル固定	固定用テープ 1本 記録用ラベル 1枚 <div>滅菌済み</div>	50


電子添文をよく読んでからご使用ください。

Solventum およびそのロゴ、その製品名等に使用される商標は Solventum 及びその関連会社の商標です。3M およびそのロゴは 3M およびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社  
メディカルサージカル事業部  
<https://www.solventum.com/ja-jp/home/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© Solventum 2025. All Rights Reserved.  
HPM-536-M(0725)

カスタマーコールセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-000-470**  
9:00～17:00／月～金（土日祝年末年始は除く）

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社はソルベンタム合同会社に社名変更しました。