


ソルベンタム™ V.A.C.® Peel and Place ドレッシングキット

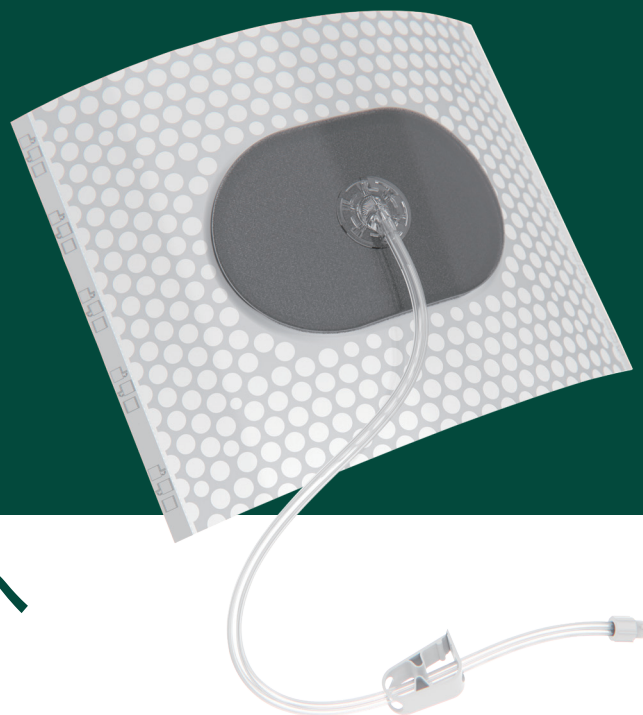

NPWTを、実践しやすい治療へ ～シンプルな手技で、治療の第一歩を～

V.A.C.® Peel and Place ドレッシングキットは、フォームとドレープの一体型設計です。

最長7日間の装着が可能で、貼付手技の簡素化と交換時の医療従事者・患者双方の負担軽減が期待できます。

更に手技の標準化により貼付のばらつきを抑え、安定したNPWTの実践を支援する3M™ V.A.C.® 治療専用のドレッシングキットです。



最長7日間
貼付可能



貼付時間を
短縮可能¹



手技の標準化で
安定したケアを支援

3M™ SensaT.R.A.C.™ パッドチューブ

創傷部位の圧力をモニタリングし、
陰圧度を適切な状態に保ちます。

3M™ V.A.C.® グラニューフォーム

立体網目状構造の薄型フォームが収縮する
ことで、ドレッシングが創床に密着し、均一な
陰圧伝達と排液除去を実現します。

スリット入り 非固着性レイヤー

陰圧伝達および排液除去を妨げず、
フォームへの組織の陥入を軽減するよう
設計されています。これにより、最長7日間の貼付が可能です。
また、創周囲の健常皮膚にも適用可能です。

3M™ SensaT.R.A.C.™ パッド接続孔

SensaT.R.A.C.™ パッドを
簡単に貼付できるよう、
あらかじめ開口部を設けた
設計です。

3M™ V.A.C.® Dermatac™ ドレープ

シリコーン・アクリル系粘着剤
技術を用いたドレープは、
貼付直後の位置調整が可能です。
皮膚にしっかり密着しつつ、
剥離時の不快感や痛みを
軽減する、肌に配慮した設計です。

作用機序は動画でもご確認いただけます
(再生時間:約3分30秒)

<https://go.solventum.com/pnp-moavideo>




使用方法




1. 評価

- ・フォームが創周囲皮膚を含めて創部全体を被覆できるサイズのドレッシングを選択します。
- ・創傷がフォーム部からはみ出す場合は、1つ上のサイズを選択してください。(右記図1参照)
- ・創傷の深さに対応したサイズを選択します。(下記適用時の留意点参照)

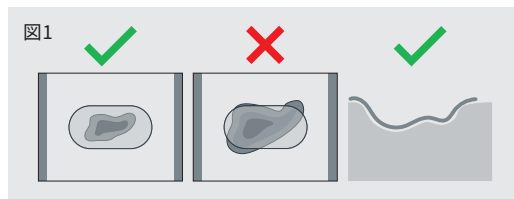

2. 貼付

- ・SensaT.R.A.C.™ パッドの接続孔が上向きになるようにドレッシングを貼付します。
- ・密封性を確保するため、ドレープの縁は少なくとも5cm確保します。

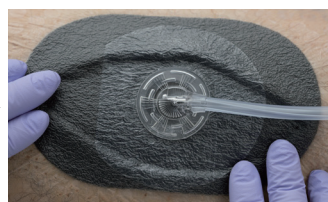

3. 調整

- ・貼付配置を確認し、必要に応じて位置を調整します。
- ・貼付後はしわを伸ばし、ドレープ両端のタブを取り外して密着させます。



4. 接続

- ・SensaT.R.A.C.™ パッドを接続孔に貼付します。
- ・チューブを陰圧維持管理装置に接続し、治療を開始します。


5. 除去

- ・ドレッシングの除去または交換時は、滅菌水または生理食塩水等を用いて、創部を損傷しないように愛護的に除去します。
- ・ドレッシングが創部に固着している場合は、生理食塩水等を用いて除去します。

適用時の留意点

- ・ドレッシングのフォーム部が、創部全体を被覆し、創縁を越えて創周囲皮膚まで覆うように適用してください。
- ・本品は、2cmを超えるポケット、トンネル、もしくは深さ6cm*を超える創傷には適していません。該当する場合は、別のV.A.C.® 治療用ドレッシングを使用してください。(*適応可能な創傷の深さは、ドレッシングサイズにより異なります)

以下の創傷には使用しないでください。

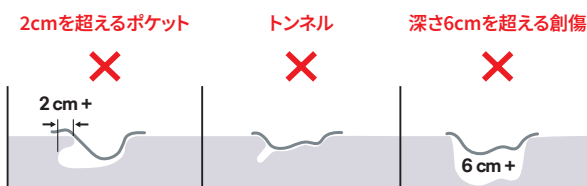

使用方法の動画をご覧ください
(再生時間:約3分)

<https://go.solventum.com/pnp-howtvideo>



製品名	製品番号	キット内容	最大創傷サイズ (目安)	創傷の最大深さ	販売単位
ソルベンタム™ V.A.C.® Peel and Place ドレッシングキット スモール	EZ5SML/1.S	・ドレッシングキット(サイズ:16.9cm x 20.6cm) ・SensaT.R.A.C.™ パッドチューブ ・定規	6.1cm x 8.6cm	2cm	1キット/箱
ソルベンタム™ V.A.C.® Peel and Place ドレッシングキット ミディアム	EZ5MED/1.S	・ドレッシングキット(サイズ:23.7cm x 29.2cm) ・SensaT.R.A.C.™ パッドチューブ ・定規	11.1cm x 16.6cm	4cm	
ソルベンタム™ V.A.C.® Peel and Place ドレッシングキット ラージ	EZ5LRG/1.S	・ドレッシングキット(サイズ:26.0cm x 35.6cm) ・SensaT.R.A.C.™ パッドチューブ ・定規	13.6cm x 24.2cm	6cm	

References:

1. 貼付時間:平均で2分未満(社内試験結果)

高度管理医療機器(クラスⅢ) 一般名称:陰圧創傷治療システム 販売名:V.A.C.Ultal治療システム 医療機器承認番号:22900BZX00204000

注意:当社製品およびそれに関連する治療には特定の適応疾患、禁忌・禁止、警告、使用上の注意事項および安全性情報が適用されます。使用前には、電子添文、取扱説明書を御参照ください。この資料は医療従事者向けです。保険算定に関しては、厚生労働省の各種資料をご確認ください。

Solventum およびそのロゴ、その製品名等に使用される商標は Solventum 及びその関連会社の商標です。3M およびそのロゴは 3M およびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。

製造販売元

ケーシーアイ株式会社

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2026. All Rights Reserved.
KCI-199-A(0826)

弊社製品に関するお問い合わせ

 0120-897-706

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社はソルベンタム合同会社に社名変更しました。