



3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm

Klinisk dokumentert hudbeskyttelse rundt IV-tilganger





Den ideelle måten å beskytte huden rundt vaskulære tilgangsteder

Kateterassosiert hudskade (CASI) er lokalisert hudskade rundt det vaskulære tilgangsstedet¹ og omfatter mer enn hudskade knyttet til medisinsk klebestoff (MARSI), inkludert faktorer som drenering og erytem under en bandasje. Forberedelse av huden og valg av riktige klebeprodukter er viktige skritt for å bidra til å minimere risikoen for hudskade.²

CASI er ikke en ny tilstand, men den er lagt til The Infusion Nurses Society (INS) 2021 *Infusion Therapy Standards of Practice* for å gjenspeile det økende fokuset på pasientsentrert infusjonsbehandling. Blant 2021-standardene er retningslinjer som bidrar til å beskytte sensibel hud mot irritasjon og mulig skade.



INS-anbefalt fremgangsmåte for å redusere CASI¹



Vurder pasienten. (Std. 55, s. S168)

- ▶ Kontroller innstikksteder for tegn på skade (nivå V)
- ▶ Kontroller farge, tekstur, ensartet utseende og hudens integritet
- ▶ Identifiser og umiddelbart unngå mistenkte irriteranter/allergener



Beskytt huden. (Std. 42, s. S120 nivå II)

- ▶ Bruk et sterilt alkoholfritt hudbarriereprodukt som er kompatibelt med huddesinfeksjonsmiddelet, til å beskytte sensibel hud ved bruk av en limbasert sikringsmetode

Kateterassosiert hudskade (CASI)-algoritme

For en detaljert og grundig veiledning for vurdering av pasienter for CASI, samt fremgangsmåten du kan bruke for å beskytte huden og gi lindring, se de fullstendige standardene for Kateterassosiert hudskade (CASI)-algoritmen. (Vedlegg C, s. S201)

Først på markedet. Eneste i sitt slag.

3M™ Cavilon™ No Sting-barrierefilm
er den originale og eneste
terpolymerbaserte alkoholfrie
barrierefilm* som hindrer
hudskade før den oppstår.



Unik formulering. Kraftig virkning.



Effektiv

- ▶ Vanntett barriere
- ▶ Pustende
- ▶ Hurtigtørkende³



Skånsom

- ▶ Alkoholfri⁴
- ▶ Svir ikke⁴



Standardkompatibel¹

- ▶ Kjemisk kompatibel med klorheksidin-glukonat (CHG)⁵
- ▶ Sterile applikatorer og kluter



Klinisk bevist

- ▶ Eneste barrierefilm som støttes av spesifikke data⁶⁻⁸ for venekatatre
- ▶ Mer enn 80 kliniske studier beviser evnen til å beskytte huden mot lim og kroppsvæsker



Unik «peel-open»-emballasje

Tilgjengelig i emballasje som er lett å
åpne for aseptisk påføring.


*Av ledende konkurrenter på markedet, basert på fremlagt ingrediensinformasjon.

Slik fungerer 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm


Cavilon No Sting barrierefilm danner et pustende, gjennomsiktig og beskyttende lag mellom huden og klebemidlet på bandasjen, enheten eller teipen. Når klebestoffet fjernes fra huden, fjernes Cavilon No Sting barrierefilm en i stedet for hudceller.⁹ Den beskytter også huden mot fuktighet, friksjon og skjærekrefter.

Beskyttelse mot klebestoffer

Uten 3M™ Cavilon™ Cavilon No Sting barrierefilm

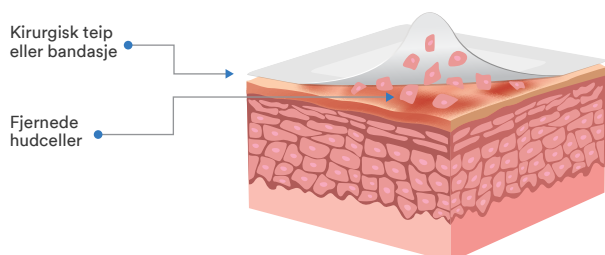


Med 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm

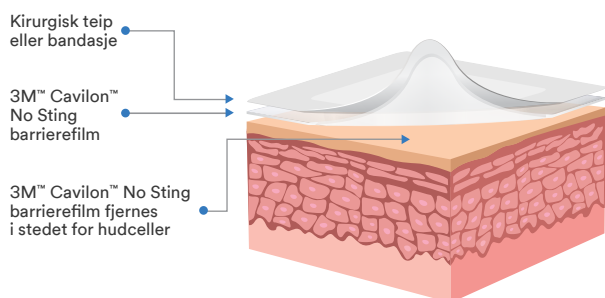


Beskyttelse mot fuktighet, friksjon og skjærekrefter

Uten 3M™ Cavilon™ Cavilon No Sting barrierefilm

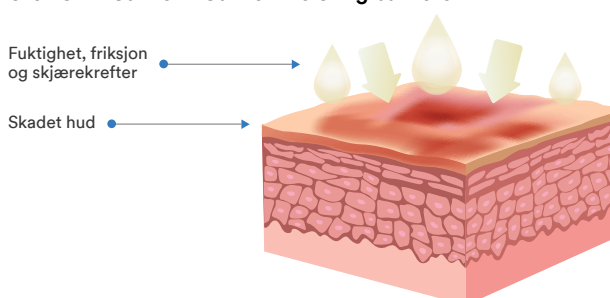


Med 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm

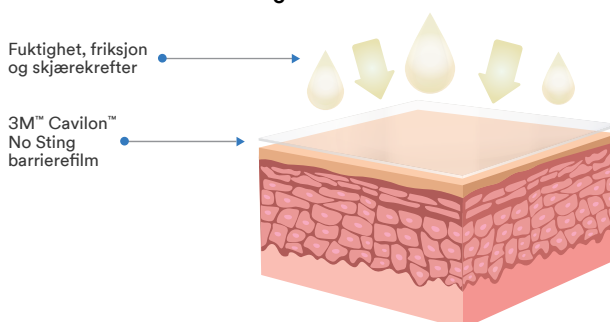

Påføre 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm


- ▶ Desinfiser området og la overflaten tørke helt
- ▶ Sett inn kateteret
- ▶ Påfør et jevnt lag med Cavilon No Sting barrierefilm på området som vil dekkes av den klebende bandasjen/enheten. Hvis 3M™ Tegaderm™ CHG klorheksidinglukonat I.V.-bandasje brukes, må ikke barrierefilmen påføres det området der CHG-gelen er plassert
- ▶ La Cavilon No Sting barrierefilm tørke helt (ca. 30 sekunder)
- ▶ Påfør bandasje

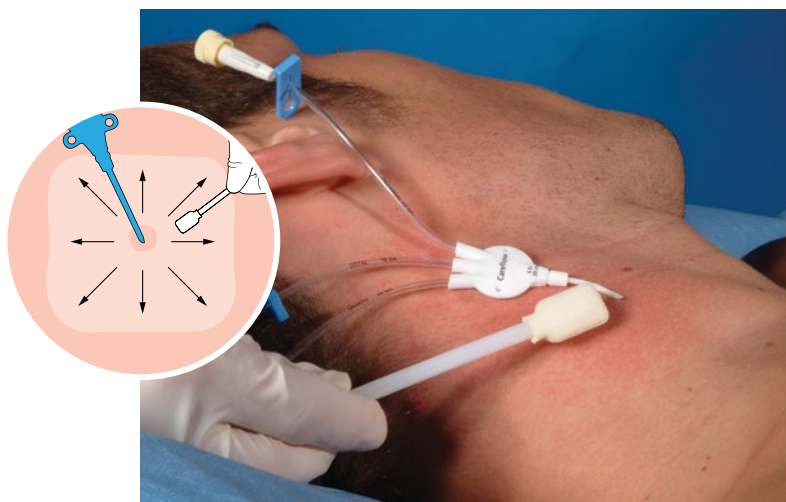


Den kliniske ytelsen til 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm

Cavilon No Sting barrierefilm støttes av mer enn 80 kliniske studier, inkludert studier med fokus på VAD-spesifikke data.

I en studie med pasienter med perifert innsatte sentralkatetre (PICC):⁶

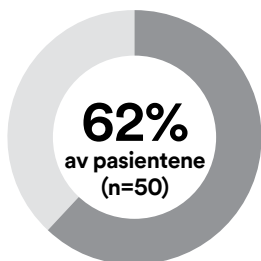

opplevde hudkomplikasjoner med gas eller teip

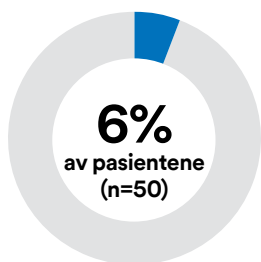


opplevde hudkomplikasjoner med Cavilon No Sting barrierefilm før bandasjeringsprosedyre


Konklusjon

Hudbarrierer kan bidra til å redusere hudrelaterte komplikasjoner hos pasienter med langvarige PICC-slanger. 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm viste seg å gi vesentlig hudbeskyttelse ved bruk før vanlig bandasjeringsprosedyre.

I en studie med intensivpasienter med sentrale venekatetre:⁷

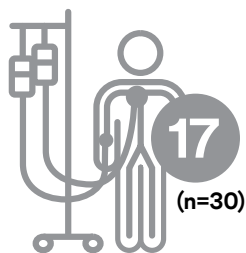

opplevde pasientene fullstendig forstyrrelse av bandasjer ved bruk av enkel filmbandasje uten beskyttelsesfilm

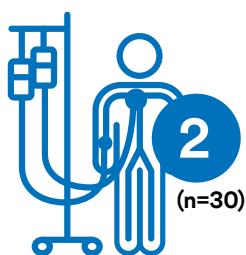


pasienter opplevde fullstendig forstyrrelse av bandasjer når Cavilon No Sting barrierefilm ble påført ved bruk av CHG-bandasje


Konklusjon

Den hudbeskyttende polymeren til 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm viste seg å bidra til færre bandasjeforstyrrelser og hudintegritetsproblemer uten å påvirke den kliniske effekten av en CHG-bandasje.

I en studie med sentrale venekatetre der man benyttet gas- og teipbandasjer:⁸

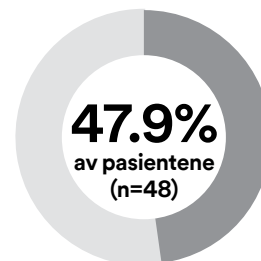

i kontrollgruppen opplevde en hudrift

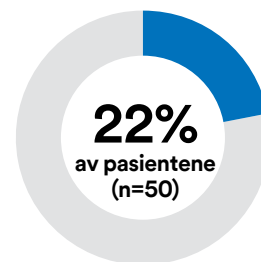

opplevde en hudrift med Cavilon No Sting barrierefilm

Konklusjon

En hudbarriere kan bidra til å opprettholde hudens integritet og redusere forekomsten av hudrifter. Forfatterne bemerket at hudbeskyttelsen fra 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm kunne bidra til bedre komfort og pleiekvalitet for pasienter med CVK.



Les mer om studiene som støtter bruk av Cavilon No Sting barrierefilm som del av prosedyren for stell av venekatetre. Besøk **3M.no** for å finne ut mer.



Gjør 3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm til en del av pleien av venekatetre. Besøk 3M.no for å finne ut mer.

Bestillingsinformasjon

3M™ Cavilon™ No Sting barrierefilm

Art.nr.	Størrelse	Produkt for sårbehandling	Antall/eske	Esker/kartong
3343N	1 ml	Skumapplikator (steril åpning)	25	4
3345N	3 ml	Skumapplikator	25	4



Se hvordan 3M™ Cavilon™ hudpleieløsninger kan hjelpe deg med å forbedre pasientens hudintegritet på 3M.no

- Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, et al. Infusion therapy standards of practice. *J Infus Nurs.* 2021; 44 (suppl 1): S1-S224.
- Broadhurst D, Moureau N, Ullman AJ, The World Congress of Vascular Access (WoCOVA) Skin Impairment Management Panel. Management of Central Venous Access Device-Associated Skin Impairment. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* 2017 May/Jun; 44(3):211-220.
- Arkiverte 3M-data. EM-05-001563, EM-05-289804 (dry time)
- Campbell K, Woodbury MG, Whittle H, Labate T, Hoskin A. A clinical evaluation of 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film. *Ostomy Wound Management.* 2000;46(1):24-30.
- Arkiverte 3M-data. EM-05-005732 and EM-05-002049.
- George M, Ujwala P, Guduri, V, Smith G. Use of a barrier film (3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film) to reduce local skin complications around peripherally inserted central catheter lines: A randomised prospective controlled study. *WCET Journal.* 2016; 36(4):8-13.
- Pivkina AI, Gusarov VG, Blot SI, Zhivotneva IV, Pasko NV, Zamyatin MN. Effect of an acrylic terpolymer barrier film beneath transparent catheter dressings on skin integrity, risk of dressing disruption, catheter colonisation and infection. *Intensive Crit Care Nurs.* 2018; 46: 17-23.
- Chen Y-H, Hsieh H-L, Shih W-M. Applying skin barrier film for skin tear management in patients with central venous catheterization. *Adv Skin Wound Care.* 2020; 33(11): 582-586.
- 3M-arkivdata 2013; EM-05-202211.



3M Norge AS
Tærudgata 16
Lillestrøm
2004

+47 06384

MERK: Det finnes spesifikke indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon for disse produktene og behandlingene. Rådfør deg med helsepersonell og produktets bruksanvisning før bruk.

© 2021 3M. Med enerett. 3M og andre varemerker i dette dokumentet er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er forbudt. 3M-merker brukt under lisens i Canada. Alle andre merker tilhører de respektive eierne. 70-2011-5544-0