



Cavilon™

Hudpleieløsninger

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Beskytt risikoutsatt eller skadet hud ved bruk av bandasjer til kritiske vaskulære tilganger

Pålitelig beskyttelse under bandasjen

Uten å buke den korrekte beskyttelsen rundt vaskulære tilganger, kan faktorer utover limrelaterte huskader (MARSI), slik som væsning eller erytem, medføre fare for kateterrelatert hudskade (CASI).



Cavilon Advanced hudbeskyttelse:



Fester seg til våt, væskende og/eller skadet hud og skaper et helbredende miljø.¹



Går ikke ut over klebestoffenes hefteevne.



Puster slik at eventuell fuktighet fordamper.



Kan brukes sammen med klorheksidinglukonat (CHG)-hudpreparater.*



Brukes som en forebyggende beskyttelse av huden rundt et innstikksted.

Forholdsregler: Produktet kan øke festeevnen til enkelte klebestoffer (f.eks. iv-bandasjer), spesielt de første dagene det blir brukt. Utvis forsiktighet ved fjerning av klebende produkter. Bruk et limfjerningsmiddel som inneholder HMDS til å fjerne klebende produkter (som blant annet 3M akrylatfilmer til vakuumbehandling) som har blitt plassert over filmen. Dette er spesielt viktig for pasienter med skjør hud.

*Hvis det blir brukt en fikseringsbandasje som inneholder klorheksidinglukonat (CHG), må det ikke påføres film på den delen av huden som skal være i kontakt med CHG-geleputen.

Unike løsninger for hudbeskyttelse



Brukes til rutinebeskyttelse rundt IV-områder.



Gjør det mulig for klebestoffet å feste seg



Produktet oppbevares i en steril emballasje.



Anbefalt for bruk på risikoutsatt og skadet, våt/væskende, avskallet hud.



Brukes som rutinemessig hudbeskyttelse mot klebestoffer.



Merk: Steriliteten for Cavilon Advanced hudbeskyttelse er på nivå med andre cyanoakrylat-baserte hudpreparater. *Gjelder bare våtservietter og applikatorer.

Cavilon Advanced hudbeskyttelse leveres i to ulike størrelser som passer til en rekke bruksområder.

Cavilon Advanced hudbeskyttelse 5050G

2,7 ml

Omtrentlig dekning: 645 cm²



Cavilon Advanced hudbeskyttelse 5051G,

0,7 ml

Omtrentlig dekning: 161 cm²



Bestillingsinformasjon

3M Artikkelnummer	Navn	Beskrivelse	Størrelse	Antall i hver eske/pakke	Sykehuskode	Pharma kode
5050G	Cavilon Advanced hudbeskyttelse	Skumapplikator (steril)	2,7 ml	20		
5050G4P	Cavilon Advanced hudbeskyttelse	Skumapplikator (steril)	2,7 ml	4		
5051G	Cavilon Advanced hudbeskyttelse	Skumapplikator (steril)	0,7 ml	20		
5051G4P	Cavilon Advanced hudbeskyttelse	Skumapplikator (steril)	0,7 ml	4		

Du finner mer informasjon om Cavilon Advanced hudbeskyttelse på 3Mnorge.no/endMASD, eller ved å kontakte en 3M-representant.



Solventum
Medical Surgical
Karvesvingen 5
0579 Oslo

Nettsted: 3Mnorge.no/endMASD

Merk: Det finnes spesifikke indikasjoner, begrensninger, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon for disse produktene. Rådfør deg med helsepersonell og produktets bruksanvisning før bruk.

1. Brennan, Mary R.; Milne, Catherine T.; Agrell-Kann, Marie; Ekholm, Bruce P. Clinical Evaluation of a Skin Protectant for the Management of Incontinence Associated Dermatitis: An Open-Label, Nonrandomized, Prospective Study. *J of Wound, Ostomy & Continence Nursing*. 2017. 44(2):172–180.

© 3M 2023. Med enerett. 3M og andre varemerker i dette dokumentet er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk forbudt. OMG789366.