


Applikering hofte/bekken

Materialer og posisjon

- Hvis den øverste kanten av benbandasjen krøller seg eller hvis bandasjen begynner å skli, er en enkel og komfortabel måte å stabilisere bandasjen på å legge på en hofte/bekken-bandasjering
- Velg 15 cm komfortskumlag og 15 cm kompresjonslag for applikering av øverste del av lår med hofte/bekken


Applikering av komfortskumlag for hofte/bekken: Lag 1

- Legg dette laget med skumsiden mot huden med akkurat nok drag til å forme seg
- Dekk huden med et så tynt lag som mulig uten mellomrom

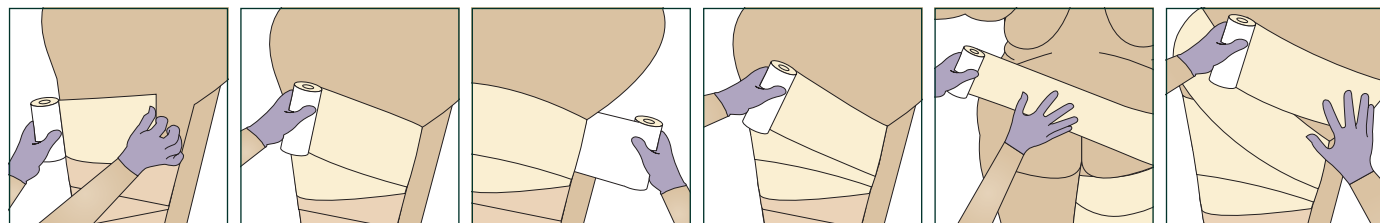

Trinn 1: Bruk det 15 cm brede komfortskumlaget, fortsett med sirkulære viklinger for å dekke låret så langt opp som mulig på innsiden av benet, til låret er dekket.

Trinn 2: Fortsett ved å ta en sirkulær sving rundt midjen for å plassere materialet slik at den motsatte hoften er dekket. Når du kommer tilbake over magen, former du bandasjen etter anatomien. Bruk om nødvendig ekstra viklinger for støtte.

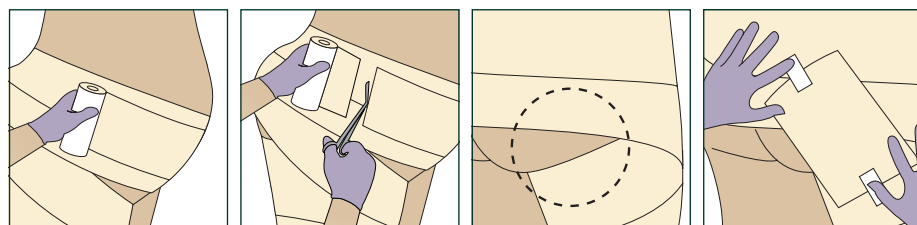


Trinn 3: Avslutt komfortskumlaget med en sirkulær vikling rundt magen. Klipp og form til underliggende lag.

Trinn 4: For å fullføre applikeringen over den eksponerte huden på baksiden av låret (se stiplede linje), legg et stykke komfortskumlag som er stort nok til å dekke området. Klipp og form bandasjen etter anatomien og fest med teip.

Applikering av kompresjonslag for hofte/bekken: Lag 2

- Legg jevn kompresjon med **50 % overlapping**. Jevn kompresjon oppnås best når materialet legges med **100 % strekk**
- Det anbefales at du holder rullen nær lår/hofte under hele applikeringen for kontrollert, jevn kompresjon
- Hvis det merkes «buler» etter applikeringen, legg ekstra kompresjonslag til øverste del av låret og hoften ser glatt ut

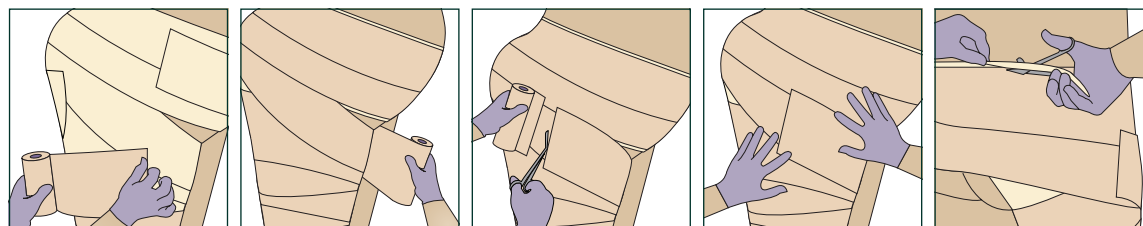


Trinn 1: Legg det 15 cm brede kompresjonslaget med **100 % strekk**, følg de samme viklingene som komfortskumlaget. Legg minst to sirkulære viklinger rundt midjen. Når du kommer tilbake over magen, former du bandasjen etter anatomien. Bruk om nødvendig ekstra viklinger for støtte. Avslutt med en sirkulær vikling rundt øverste del av låret.

Trinn 2: Form hele bandasjeringen etter anatomien.

Trinn 3: Trim bandasjeringen etter behov for komfort.

Applikering av komfortskumlager for hofte/bekken med mageforkle: Lag 1

- Legg dette laget med skumstiden mot huden med en liten strekk for å forme etter anatomien
- Dekk huden med et så tynt lag som mulig uten mellomrom

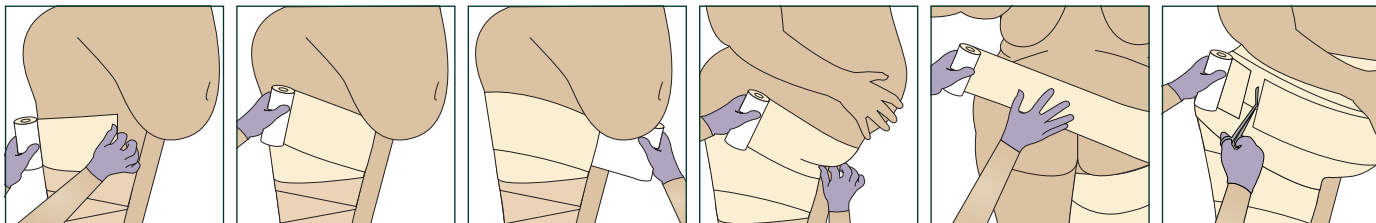


Trinn 1: Bruk det 15 cm brede komfortskumlaget, fortsett med sirkulære viklinger for å dekke låret så langt opp som mulig på innsiden av benet, til låret er dekket.

Trinn 2: Fortsett ved å ta en sirkulær sving rundt midjen for å plassere materialet slik at den motsatte hoften er dekket. Når du kommer tilbake over magen, former du bandasjen etter anatomien. Bruk om nødvendig ekstra viklinger for støtte.

Applikering av kompresjonslag for hofte/bekken med mageforkle: Lag 2

- Legg jevn kompresjon med **50 % overlapping**. Jevn kompresjon oppnås best når materialet legges med **100 % strekk**
- Det anbefales at du holder rullen nær lår og hofter under hele applikeringen for kontrollert, jevn kompresjon
- Hvis det merkes «buler» etter bandasjeringen, legg ekstra kompresjonslag til bandasjeringen ser glatt ut

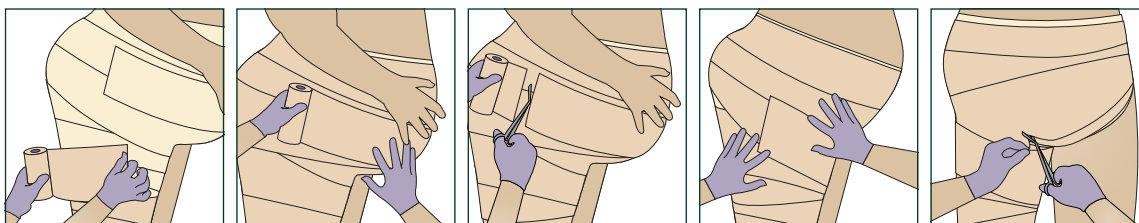


Trinn 1: Legg det 15 cm brede kompresjonslaget med **100 % strekk**. Følg de samme viklingene som komfortskumlaget. Legg minst to sirkulære viklinger rundt midjen. Når du kommer tilbake over magen, former du bandasjen etter anatomien. Bruk om nødvendig ekstra viklinger for støtte. Avslutt med en sirkulær vikling rundt øverste del av låret.

Trinn 2: Form hele bandasjen etter anatomien.

Trinn 3: Trim bandasjen etter behov for komfort.

Bandasjefjerning

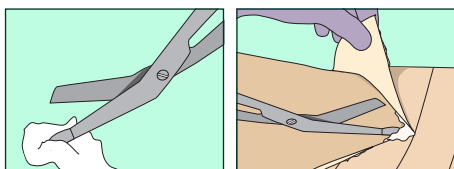

Bandasjefjerning
Bandasjefjerningen blir lettere og behageligere hvis du dypper de butte saksespissene i fuktighetskrem.

Merk

Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon knyttet til bruken av 3M™ Coban™ 2 Tolags kompresjonssystemer.

For hofte/bekken-bandasjering

Bilde	Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse	Kompresjon	Ant./eske	Ruller per prosedyre
	20096	15 cm sett: Komfortlag 1 og kompresjonslag 2	15cm x 3.5m og 15cm x 4.5m	Full	2 ruller	1 pr hofte/forkle
Alternativer						
	20016/ 20026	15 cm Individuelle ruller: Komfortlag 1/ kompresjonslag 2	15cm x 3.5m/ 15cm x 4.5m	Full	10/15 ruller	1 pr hofte/forkle

Merk: Det finnes spesifikke indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon for disse produktene og behandlingene. Rådfør deg med helsepersonell og produktets bruksanvisning før bruk. Dette materialet er ment for helsepersonell.



Se alle applikasjonsvideoer og guider for Coban 2 kompresjonssystemer her.