


Applikering på skrotum og penis

Materialer og posisjonering

- Velg 7,5 cm eller 10 cm Lite komfortskumlag og Lite kompresjonslag for applikering på skrotum, avhengig av størrelsen på pasienten

Applikering av komfortskumlag for skrotum: Lag 1

- Legg dette laget med skumside mot huden med lett strekk for å forme
- Dekk huden med et så tynt lag som mulig uten mellomrom

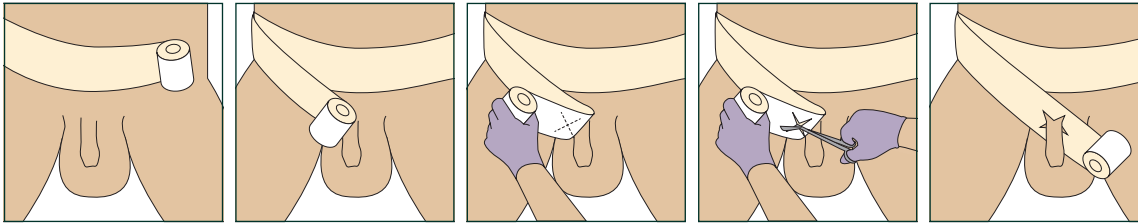


Trinn 1: Begynn applikeringen med en sirkulær vikling rundt hoftene sentrert over mons pubis.

Trinn 2: Før viklingen distalt mot roten av penis.


Trinn 3: For å lage penisåpningen, brett komfortskumlaget tilbake ved bunnen av penis. Lag to kutt i et X-mønster ved den klemte folden.
Merk: Ved penektomi eller kort penis bør fold- og kuttspaltene gjøres ved området av den ytre urinveisåpningen.

Trinn 4: Før penis gjennom hullet i komfortskumlaget. Om nødvendig, forleng de kuttede spaltene for komfort.

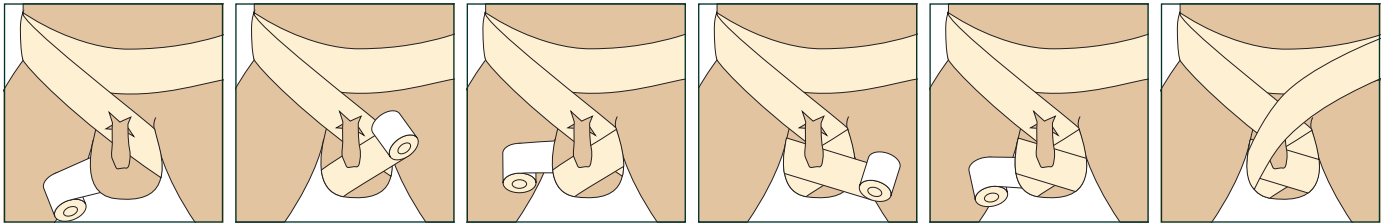

Trinn 5: Fortsett med bandasje distalt og bring viklingen under skrotum. Kom over toppen i oppoverretning. Fortsett viklingene for å dekke alle utsatte områder i et så tynt lag som mulig.

Trinn 6: Når skrotum er dekket, før bandasjen sideveis mot motsatt hofte. På yttersiden, trykk, form og klipp bandasjen.

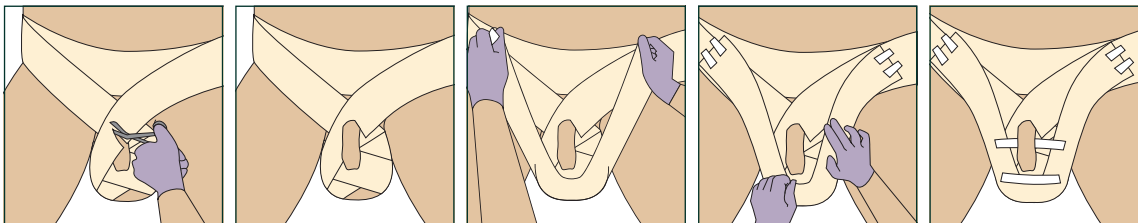


Trinn 7: Trim komfortskumlaget så godt som mulig slik at penis er fri.


Trinn 8: Om nødvendig, legg en strimmel komfortskumlag for å gi ekstra løft og støtte til skrotum. Press, form og klipp på yttersidene. Fest ender med teip. Form og tilpass komfortlaget forsiktig. Teip kan brukes for å opprettholde bandasjens konturer.

Applikering av kompresjonslag for skrotum: Lag 2



- Legg kompresjonsmateriale med **50 % overlapping** og med nok strekk til å gi støtte og løft av ødem
- Det anbefales at du holder rullen nær kroppen under hele applikeringen for kontrollert, jevn kompresjon

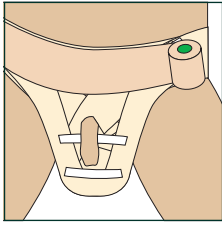



Trinn 1: Begynn applikeringen ved å følge den samme sirkulære viklingen rundt hoftene sentrert over mons pubis.

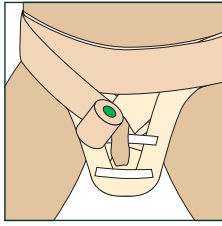


Trinn 2: Før viklingen distalt rett under penis. Fortsett under skrotum og kom over toppen i oppoverretning. Fortsett viklingene for å dekke hele komfortskumlaget med minst to lag lagt med akkurat nok strekk til å forme. Press og form etter anatomen.

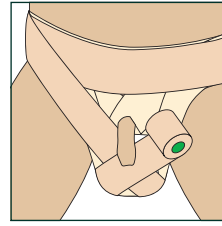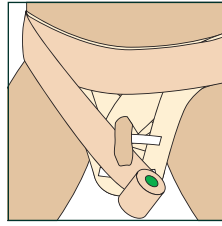



Trinn 3: Når skrotum er dekket, ta bandasjen under penis sideveis mot motsatt hofte. På yttersiden, trykk, form og klipp bandasjen.

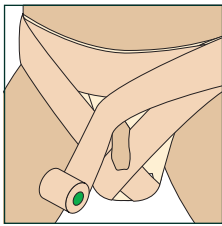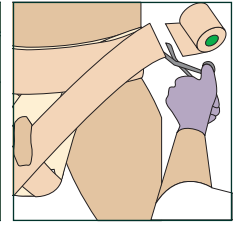


Trinn 4: For en fullstendig dekning av midtre del av skrotum, legg en strimmel med kompresjonslag fra yttersiden som kommer over mons pubis og sørg for at bandasjen ligger over roten av penis.

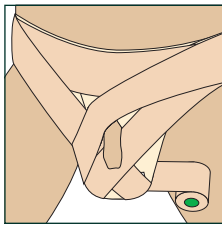


Trinn 5: Fortsett med bandasjen distalt og bring viklingen under skrotum. Løft penis og fortsett viklinger for å dekke skrotum med minst to kompresjonslag med nok strekk for komfort.

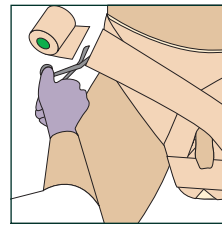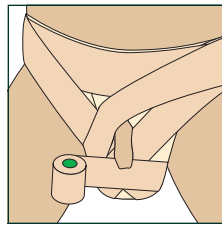



Trinn 6: Når skrotum er dekket, før bandasjen sideveis over roten av penis, mot motsatt hofte. Trykk, form og klipp bandasjen på yttersiden.

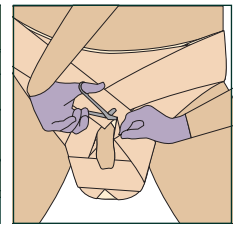


Trinn 7: Trim kompresjonslaget etter behov for å få plass til penis.

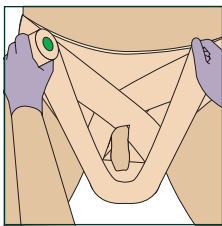

Trinn 8: Legg en strimmel med kompresjonslag for å gi ekstra løft og støtte til skrotum. Press og klipp på yttersidene. Form bandasjene til skrotalkonturene.

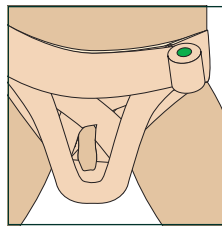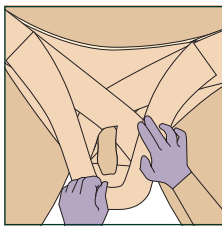

Trinn 9: En sirkulær vikling av kompresjonslag kan legges for å feste de avklippede kantene.

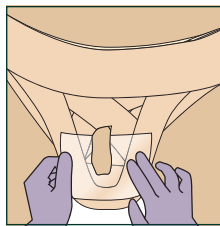


Trinn 10: Ved å legge et stykke filmbandasje på toppen av skrotum vil bandasjen holdes ren etter vannlatning.

Materialer og posisjonering

- Velg 2,5 cm 3M™ Coban™ 2 Lite kompresjonslag

Metode A: Applikering av kompresjonslag for penis

- Legg kompresjonsmateriale med **50 % overlapping** og før rullen forsiktig for tilpasning til anatomien
- Det anbefales at du holder rullen nær kroppen under hele applikeringen for kontrollert, jevn kompresjon

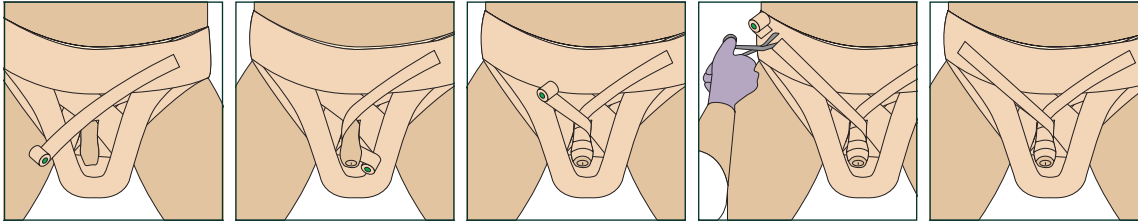

Trinn 1: Uten strekk, forankre bandasjen ved å begynne applikeringen med materialet plassert på siden av magebandasjen. Rett rullen over roten av penis og under mot den nederste delen av penis.


Trinn 2: Fortsett innover med sirkulære viklinger og 50 % overlapping mot bunnen av penis. Fest bandasjen ved å bringe materialet til motsatt side. Klipp, press og form for å tilpasse.

Materialer og posisjonering

- For ekstremt ødem eller når ekstra komfort er nødvendig, velg 5 cm Lite komfortskumlag og 2,5 cm Lite kompresjonslag

Metode B: Applikering av komfortskumlag for penis: Lag 1

- Legg dette laget med skumsiden mot huden og før rullen forsiktig for å forme etter anatomien
- Dekk huden med et så tynt lag som mulig uten mellomrom

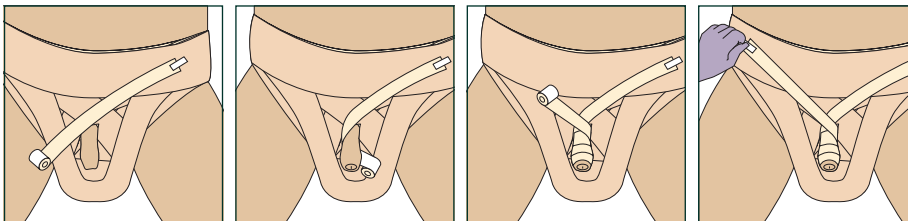


Trinn 1: Begynn med applikeringen av 5 cm komfortskumlag med materialet plassert på siden av magebandasjen. Rett rullen over roten av penis og under mot den nederste delen av penis.

Trinn 2: Fortsett innover med sirkulære viklinger og minimal overlapping mot roten av penis. Avslutt bandasjeringsen ved å føre materialet til motsatt side av magebandasjen.

Trinn 3: Press, klipp og form for å tilpasse. Fest endene med teip.


Metode B: Applikering av kompresjonslag for penis: Lag 2

- Legg 2,5 cm kompresjonsmateriale med **50 % overlapping** og før rullen forsiktig for å forme etter anatomien
- Det anbefales at du holder rullen nær kroppen under hele applikeringen for kontrollert, jevn kompresjon

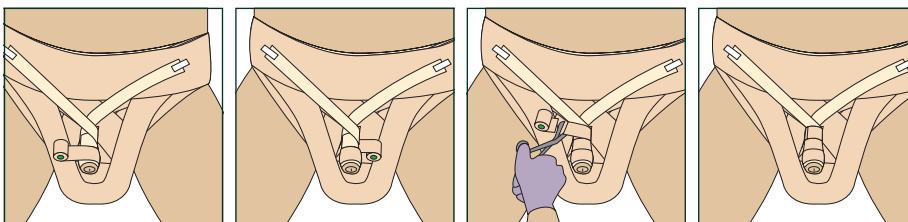

Trinn 1: Begynn applikeringne ved den nederste delen av enden av penis og fortsett innover med sirkulære viklinger med minimal strekk og **50 % overlapping** mot bunnen av penis. Avslutt bandasjeringsen ved bunnen av penis. Press, klipp og form.

Bandasjefjerning

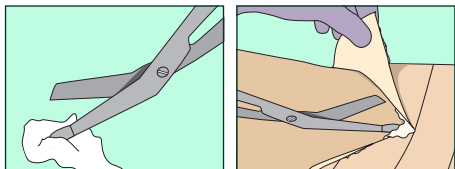

Bandasjefjerning
Bandasjefjerningen blir lettere og behageligere hvis du dypper de butte saksespissene i fuktighetskrem.

Merk

Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon knyttet til bruken av 3M™ Coban™ 2 Lite Tolags kompresjonssystemer.

For skrotum

Bilde	Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse	Kompresjon	Ant./eske	Ruller per prosedyre
	20713/ 20723	7,5 cm Lite Individuelle ruller: Komfortlag 1/ kompresjonslag 2	7.5cm x 2.7m/ 7.5cm x 3.5m	Lite	18/32 ruller	1 per lag

	2794E	10 cm Lite sett: Komfortlag 1 og kompresjonslag 2	10cm x 2.7m og 10cm x 3.2m	Lite	2 ruller	1 per lag
--	-------	---	-------------------------------	------	----------	-----------

For penis: Metode A og B*

	20714/ 20724	10 cm Lite Individuelle ruller: Komfortlag 1/ kompresjonslag 2	10cm x 2.7m/ 10cm x 3.5m	Lite	18/32 ruller	1 per lag
--	--------------	--	-----------------------------	------	--------------	-----------

For penis: Metode A og B*

Bilde	Artikkelnr.	Beskrivelse	Størrelse	Kompresjon	Ant./eske	Ruller per prosedyre
	20721	2,5 cm Lite individuelle ruller: kompresjonslag 2	2.5cm x 3.5m	Lite	36	1 per lag

*5 cm komfortlag, artikkelnr. 20012

Merk: Det finnes spesifikke indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og sikkerhetsinformasjon for disse produktene og behandlingene. Rådfrø deg med helsepersonell og produktets bruksanvisning før bruk. Dette materialet er ment for helsepersonell.



Se alle applikasjonsvideoer og guider for Coban 2 kompresjonssystem her.