


Aplicação na perna altamente contornada – siga o rolo

Materiais e posicionamento

- Muitos pacientes têm contornos extremos nas pernas. Devido às propriedades exclusivas dos sistemas de compressão Coban 2, a técnica de aplicação pode ser facilmente adaptada para proporcionar uma compressão conformável, eficaz e sustentada;
- Para pacientes menos tolerantes à compressão ou que tenham úlceras mistas com ITB $\geq 0,5$, recomenda-se 3M™ Coban™ 2 Lite Sistema de Compressão Leve de 2 Camadas.

Aplicação da camada de conforto abaixo do joelho: camada 1

- Aplique a camada com o lado da espuma voltado para a pele, usando uma leve elasticidade para se adaptar ao formato da perna com o mínimo de sobreposição;
- Cubra a pele com uma camada tão fina quanto possível, sem lacunas;
- Quando houver dobras na pele, use pedaços da camada de espuma de conforto dobradas com o lado da espuma para fora para separá-las.

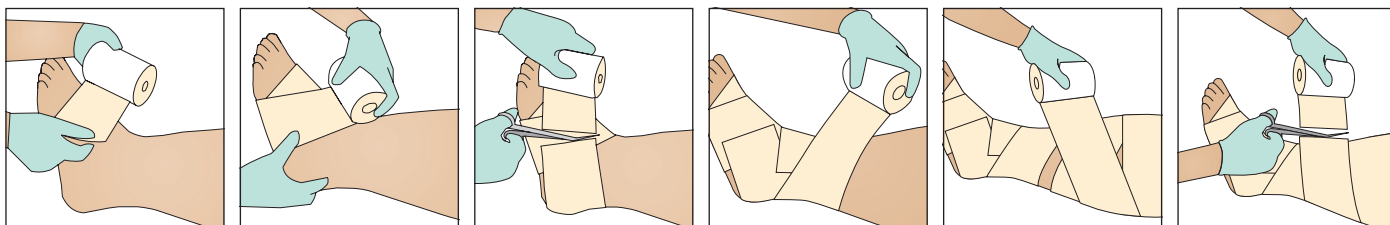

Etapa 1: Com o pé em posição dorsiflexionada a 90°, inicie a aplicação com um enfaixamento circular na base dos dedos, começando na ponta do quinto metatarso. Começar no quinto dedo do pé proporciona um alinhamento neutro e confortável do pé.

Etapa 2: A segunda volta na bandagem circular deve compreender a parte superior do pé para que o ponto médio na largura da atadura cubra aproximadamente a região da articulação do tornozelo.

Etapa 3: Passe a bandagem pela parte de trás do calcanhar e a coloque sobre a parte superior do pé, onde ela se sobrepõe ao material subjacente. Corte a bandagem e a pressione com cuidado no lugar. A superfície plantar posterior do pé não é totalmente coberta.


Etapa 4: Com o mínimo de sobreposição e com uma leve elasticidade para se adaptar suavemente aos contornos, enrole a bandagem ao redor do tornozelo e suba pela perna aplicando a camada na direção do rolo.

Etapa 5: A parte superior da bandagem deve terminar logo abaixo da cabeça da fíbula, ou dois dedos abaixo da dobra na parte posterior do joelho. Leve a bandagem para baixo da perna para cobrir todas as áreas da pele. Para garantir uma camada tão fina quanto possível, tente minimizar as áreas de material sobreposto.

Etapa 6: Ao terminar a aplicação, aplique uma leve pressão e corte o excesso de material. Molde as camadas juntas a fim de assegurar que ela permaneça no local correto durante a aplicação da camada de compressão.

Aplicação da camada de compressão abaixo do joelho: camada 2

- Aplique o material com 100% de estiramento e 50% de sobreposição;
- Mantenha o rolo próximo ao membro durante toda a aplicação para obter uma compressão controlada e uniforme;
- Se forem observadas “protuberâncias” após a aplicação, aplique uma camada de compressão adicional até que o membro pareça liso.

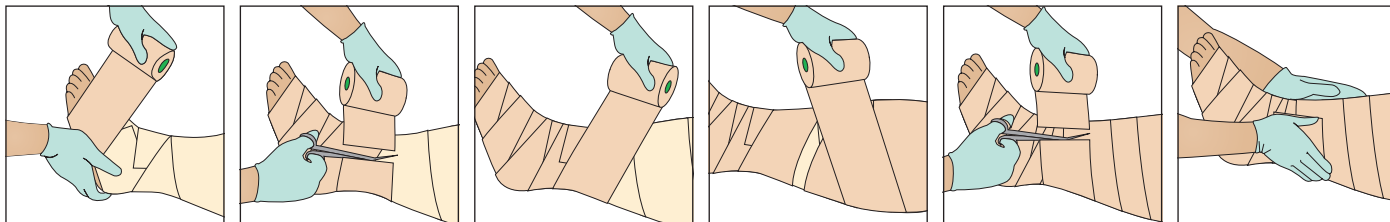

Etapa 1: Com o pé em uma posição dorsiflexionada de 90°, inicie a aplicação com um enfaixamento circular na base dos dedos, começando na ponta do quinto metatarso.

Etapa 2: Usando a técnica da figura em forma de oito, traga o rolo de volta para a parte superior do pé, passando pela parte inferior do pé e subindo novamente para contornar a parte de trás do calcanhar. Complete duas ou três figuras em forma de oito ao redor do tornozelo, garantindo que todo o calcanhar seja coberto com pelo menos duas camadas.


Etapa 3: Aplique o próximo enfaixamento iniciando o rolo na borda do corte anterior com uma sobreposição de 50% do material subjacente. Coloque a bandagem ao redor do tornozelo e suba pela perna na direção em que o rolo o levar, com a parte superior da aplicação terminando logo abaixo da cabeça da fíbula.

Etapa 4: Traga a bandagem de volta para baixo da perna para cobrir toda a camada de conforto com pelo menos duas camadas de material de compressão. Se, a qualquer momento, quiser mudar a direção do rolo, você pode cortar a bandagem e redirecionar a aplicação.

Etapa 5: Ao terminar a aplicação, aplique uma leve pressão e corte o excesso de material.

Etapa 6: Molde as camadas em conjunto, a fim de garantir uma conformação ideal e assegurar a aderência da bandagem a si mesma e na camada de conforto.

Remoção da bandagem

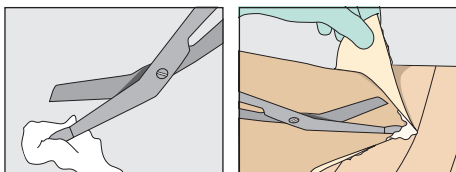

Remoção da bandagem
Mergulhar as pontas da tesoura em um creme hidratante permite a remoção confortável e fácil da bandagem. Corte ao longo da perna na direção do crescimento dos pelos.

Observação

Consulte as Instruções de uso para obter informações completas relacionadas ao uso dos sistemas de compressão de duas camadas 3M™ Coban™ 2.

3M™ Coban™ 2 Sistema de compressão de 2 camadas

Para úlceras venosas com ITB $\geq 0,8$

Imagem	Código 3M	Código farmacêutico	Código hospitalar	Descrição	Tamanho	Compressão	Quantidade por caixa	Rolos por procedimento
	2094			Kit: Camada de conforto 1 e Camada de compressão 2	10 cm x 2,7 m e 10 cm x 3,5 m	Completo	2 rolos	1 por perna

3M™ Coban™ 2 Lite Sistema de compressão leve de 2 camadas

Compressão reduzida para úlceras mistas com ITB $\geq 0,5$

Imagem	Código 3M	Código farmacêutico	Código hospitalar	Descrição	Tamanho	Compressão	Quantidade por caixa	Rolos por procedimento
	2794E			Kit: Camada de conforto 1 e Camada de compressão 2	10 cm x 2,7 m e 10 cm x 3,2 m	Lite	2 rolos	1 por perna

Veja todos os vídeos e guias de aplicação do Sistema de Compressão Coban 2 aqui.



Solventum Medical Surgical
Rodovia Anhanguera, Km 110
Sumaré - SP, Brasil.
Fale com a Solventum: 0800 762 0042
falecom.br@solventum.com
www.solventum.com/pt-br/home/medical

Observações:

Há indicações, contraindicações, precauções, informações de segurança e avisos específicos para esses produtos e terapias. Consulte um médico e as instruções de uso do produto antes da aplicação. Este material é destinado a profissionais de saúde.

© Solventum 2024. Solventum, o logotipo S e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M, o logotipo 3M e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 3M. Outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.