


# Aplicação no escroto

## Materiais e posicionamento

- Selecione 3M™ Coban™ 2 Lite Sistema de Compressão Leve de 2 camadas para a aplicação no escroto.

## Aplicação da camada de conforto para o escroto: camada 1

- Aplique a camada de conforto com a espuma voltada para a pele, com um leve estiramento para conformar;
- Cubra a pele com uma camada tão fina quanto possível, sem lacunas.

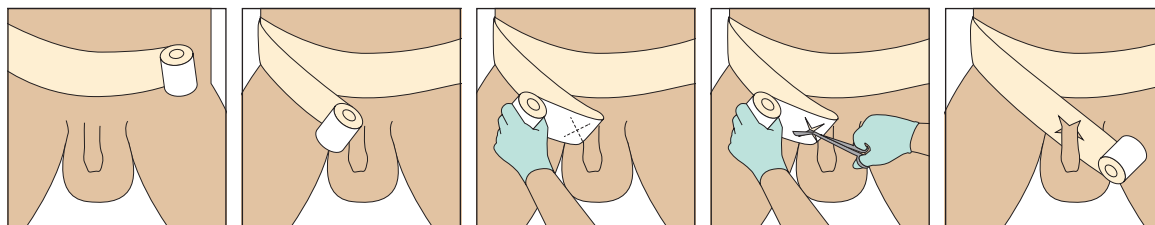


**Etapa 1:** Comece a aplicação com um enfaixamento circular ao redor dos quadris, centralizando sobre o púbis.

**Etapa 2:** Traga o rolo distalmente em direção à base do pênis.


**Etapa 3:** Para fazer a abertura peniana, dobre a camada de espuma de conforto para trás na base do pênis. Faça dois cortes em um padrão de X na dobra comprimida. **Observação: Em caso de penectomia ou pênis curto, a dobra e os cortes devem ser feitos na área do meato externo.**

**Etapa 4:** Guie o pênis pelo orifício na camada de espuma de conforto. Se necessário, estenda as fendas cortadas para maior conforto.

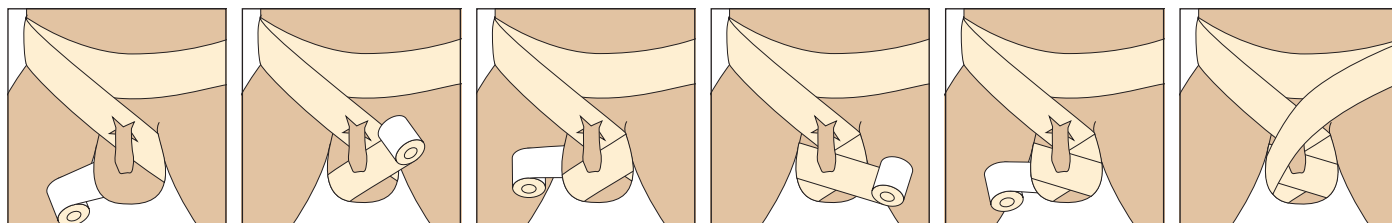

**Etapa 5:** Prossiga com a bandagem distalmente, levando a bandagem para baixo do escroto. Atravesse a parte superior em uma direção ascendente. Continue enrolando para cobrir todas as áreas expostas em uma camada tão fina quanto possível.

**Etapa 6:** Quando a bolsa escrotal estiver coberta, leve a bandagem lateralmente em direção ao quadril oposto. No lado lateral, pressione, molde e corte a bandagem.

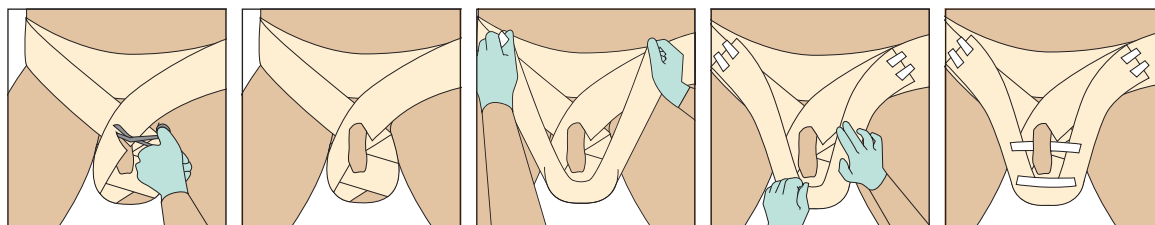


**Etapa 7:** Corte a camada de espuma de conforto conforme necessário para acomodar o pênis.


**Etapa 8:** Se necessário, aplique uma tira da camada de espuma de conforto para proporcionar elevação e suporte adicionais ao escroto. Pressione, molde e corte nas laterais. Prenda as extremidades com fita adesiva. Molde e conforte suavemente a camada de conforto. A fita adesiva pode ser usada para manter os contornos da bandagem.

## Aplicação da camada de compressão para o escroto: camada 2



- Aplique o material de compressão com 50% de sobreposição e com tensão suficiente para fornecer suporte e levantar o edema
- Recomenda-se que você mantenha o rolo próximo ao corpo durante toda a aplicação para obter uma compressão controlada e uniforme

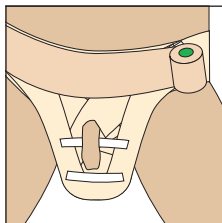



**Etapa 1:** Comece a aplicação seguindo o mesmo enfaixamento circular ao redor dos quadris, centralizando sobre o púbis.

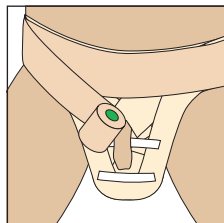


**Etapa 2:** Traga o enfaixamento distalmente, logo abaixo do pênis. Prossiga sob a bolsa escrotal e atravesse a parte superior em uma direção ascendente. Continue o enfaixamento até cobrir toda a camada de conforto com pelo menos duas camadas aplicadas com tensão suficiente para se ajustar. Pressione e molde a anatomia.

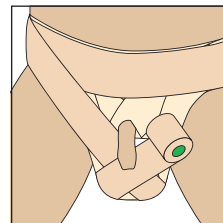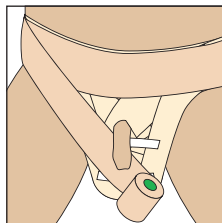




**Etapa 3:** Quando o escroto estiver coberto, traga a bandagem sob o pênis lateralmente em direção ao quadril oposto. Na lateral, pressione, molde e corte a bandagem.

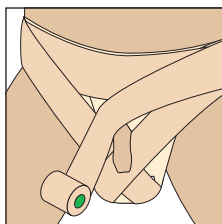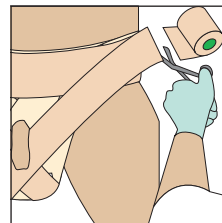


**Etapa 4:** Para uma cobertura completa do escroto proximal, começando pelo lado lateral, aplique uma tira de camada de compressão sobre o púbis, garantindo que a bandagem fique acima da base do pênis.

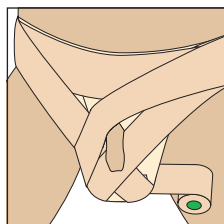


**Etapa 5:** Prossiga com a bandagem distalmente, levando a bandagem para baixo do escroto. Levante o pênis e continue a enrolar para cobrir a bolsa escrotal com pelo menos duas camadas de compressão com tensão suficiente para o conforto.

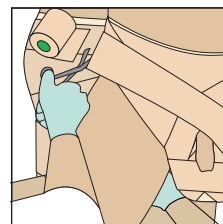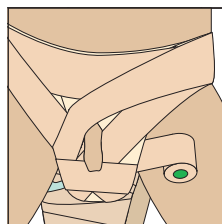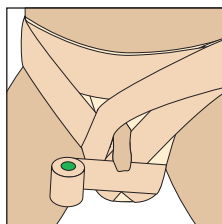



**Etapa 6:** Quando a bolsa escrotal estiver coberta, traga a bandagem lateralmente acima da base do pênis, em direção ao quadril oposto. No lado lateral, pressione, molde e corte a bandagem.

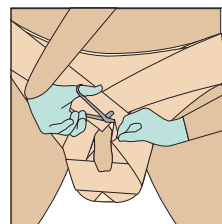


**Etapa 7:** Corte a camada de compressão conforme necessário para acomodar o pênis.

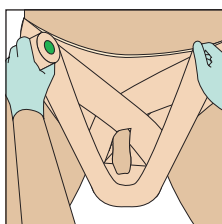

**Etapa 8:** Aplique uma tira de camada de compressão para proporcionar elevação e suporte adicionais ao escroto. Pressione e corte os lados laterais. Molde o material para que se adapte aos contornos do escroto.

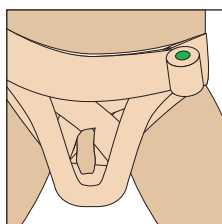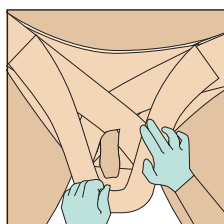


**Etapa 9:** O enfaixamento circular da camada de compressão pode ser aplicado para fixar as bordas cortadas.

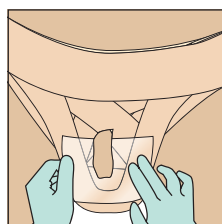

**Etapa 10:** A aplicação de um pedaço de curativo de filme na parte superior do escroto mantém a bandagem limpa após a micção.

## Remoção da bandagem

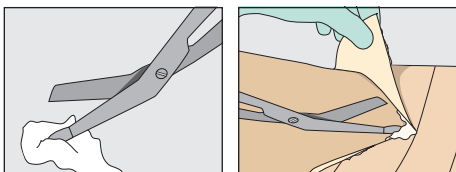


**Remoção da bandagem**  
Mergulhar as pontas da tesoura em um creme hidratante permite a remoção confortável e fácil da bandagem.

## Observação

Consulte as instruções de uso para obter informações completas relacionadas ao uso dos Sistemas de Compressão de Duas Camadas 3M™ Coban™ 2 Lite.

## Para o escroto

Imagem	Código 3M	Código farmacêutico	Código hospitalar	Descrição	Tamanho	Compressão	Quantidade por caixa	Rolos por procedimento
	2794E			Kit: Camada de conforto 1 e Camada de compressão 2	10 cm x 2,7 m e 10 cm x 3,2 m	Lite	2 rolos	1 por aplicação



**Solventum Medical Surgical**

Rodovia Anhanguera, Km 110  
Sumaré - SP, Brasil.

Fale com a Solventum: 0800 762 0042

falecom.br@solventum.com

[www.solventum.com/pt-br/home/medical](http://www.solventum.com/pt-br/home/medical)

Veja todos os vídeos  
e guias de aplicação do Sistema  
de Compressão Coban 2 aqui.



**Observações:**

Há indicações, contraindicações, precauções, informações de segurança e avisos específicos para esses produtos e terapias. Consulte um médico e as instruções de uso do produto antes da aplicação. Este material é destinado a profissionais de saúde.

© Solventum 2024. Solventum, o logotipo S e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M, o logotipo 3M e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 3M. Outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.