

# Aplicação de imobilização do ombro

## Materiais e posicionamento

- A aplicação de imobilização do ombro é útil quando a borda superior da bandagem rolar com frequência, para evitar deslizamento quando houver edema extremo na raiz do membro ou para controlar o edema no quadrante ipsilateral posterior;
- Selecione 3M™ Coban™ 2 Lite Sistema de Compressão Leve de 2 camadas.

## Aplicação da camada de conforto na imobilização do ombro: camada 1


- Aplique a camada de conforto com a espuma voltada para a pele e guie suavemente o rolo para que se adapte à anatomia;
- Cubra a pele com uma camada tão fina quanto possível, sem lacunas.



**Etapa 1:** Comece a aplicação com uma sobreposição mínima da bandagem no braço. Faça alguns enfaixamentos circulares e coloque a bandagem sobre o ombro, centralizando a articulação acromioclavicular no meio da bandagem.

**Etapa 2:** Passe a bandagem pelas costas e por baixo do braço oposto. Peça à paciente para respirar fundo e continue ao redor da parte frontal do tronco. Coloque o material sob os seios enquanto molda a aplicação à anatomia.


**Etapa 3:** Depois de fazer um círculo completo ao redor do tronco, peça à paciente para respirar fundo. Corte o material e molde-o à camada subjacente.

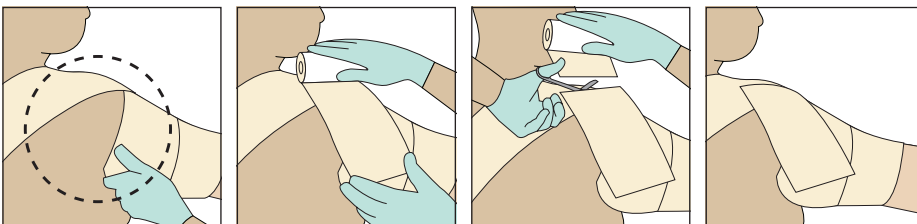

**Etapa 4:** Para concluir a aplicação sobre a pele exposta na parte de trás do ombro (veja a linha tracejada), aplique pedaços da camada de conforto conforme necessário para cobrir a área. Corte e molde a aplicação de acordo com a anatomia.


## Aplicação da camada de compressão na imobilização do ombro: camada 2

- Aplique uma compressão uniforme, com **100% de estiramento** e **50% de sobreposição**.
- Recomenda-se que você mantenha o rolo próximo ao corpo durante toda a aplicação para obter uma compressão controlada e uniforme
- Se forem observadas “protuberâncias” após a aplicação, aplique material de compressão adicional até que a aplicação pareça suave

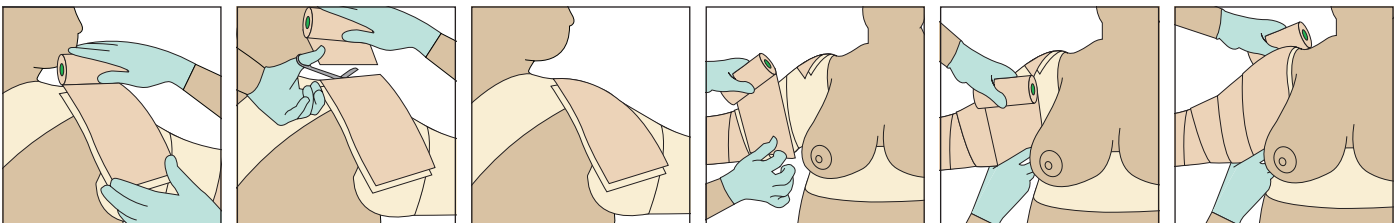

**Etapa 1:** Aplique pedaços grandes o suficiente para cobrir o ombro (consulte a Etapa 4). Corte e molde a aplicação de acordo com a anatomia.


**Etapa 2:** Aplique a camada de compressão com uma sobreposição de **50% na bandagem** da parte superior do braço. Cubra a parte superior do braço com alguns enfaixamentos circulares e coloque a bandagem sobre o ombro.

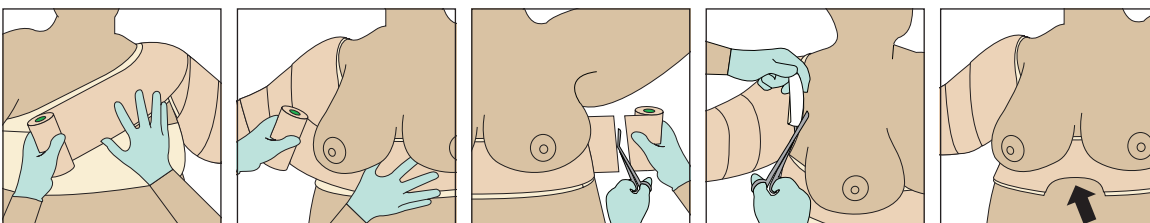

**Etapa 3 (opcional - para suporte bilateral de mama):** Em vez de cortar a bandagem, passe-a pelo tórax para apoiar e cobrir a mama contralateral. Corte e molde de acordo com a anatomia. Continue para a Etapa 4.

**Etapa 4:** Corte todas as áreas que possam impedir o movimento do pescoço, dos braços ou das axilas para permitir a máxima amplitude de movimento. Para maior conforto, a bandagem pode ser cortada no processo xifoide (veja a seta).

## Remoção da bandagem

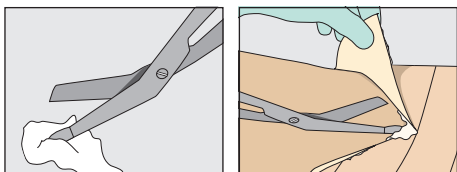


**Remoção da bandagem**  
Mergulhar as pontas da tesoura em um creme hidratante permite a remoção confortável e fácil da bandagem.

## Observação

Consulte as instruções de uso para obter informações completas relacionadas ao uso dos Sistemas de Compressão de Duas Camadas 3M™ Coban™ 2 Lite.

## Para imobilização do ombro

Imagem	Código 3M	Código farmacêutico	Código hospitalar	Descrição	Tamanho	Compressão	Quantidade por caixa	Rolos por procedimento
	2794E			Kit: Camada de conforto 1 e Camada de compressão 2	10 cm x 2,7 m e 10 cm x 3,2 m	Lite	2 rolos	1 por ombro

Veja todos os vídeos e guias de aplicação do Sistema de Compressão Coban 2 aqui.



**Solventum Medical Surgical**  
Rodovia Anhanguera, Km 110  
Sumaré - SP, Brasil.  
Fale com a Solventum: 0800 762 0042  
falecom.br@solventum.com  
www.solventum.com/pt-br/home/medical

### Observações:

Há indicações, contraindicações, precauções, informações de segurança e avisos específicos para esses produtos e terapias. Consulte um médico e as instruções de uso do produto antes da aplicação. Este material é destinado a profissionais de saúde.

© Solventum 2024. Solventum, o logotipo S e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M, o logotipo 3M e outras marcas comerciais são marcas comerciais da 3M. Outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.