

3M

Cavilon™

Hudvårdslösningar



3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm

Skyddar huden runt infarter





Det perfekta sättet att skydda huden runt infarter.

Kateterrelaterad hudskada (CASI) är en lokal hudskada runt en venkateter¹ och omfattar utöver häftämnesrelaterade hudskador (MARSI) även faktorer som dränage och erytem under förbandet. Förberedelse av huden och val av rätt förbandsprodukter är avgörande faktorer för att minimera risken för hudskador.²

CASI är inte ett nytt tillstånd, men det har lagts till i The Infusion Nurses Society (INS) 2021 *Infusion Therapy Standards of Practice* för att spegla det växande fokuset på patientcentrerad infusionsvård. 2021 års standarder omfattar riktlinjer som hjälper till att skydda utsatt hud från irritation och möjlig skada.



INS rekommenderar följande steg för att minska risken för CASI.¹



Bedöm patienten. (Std. 55, pg. S168)

- ▶ Kontrollera accesspunkter efter tecken på skador (*nivå V*)
- ▶ Kontrollera hudens färg, struktur, utseende och integritet
- ▶ Identifiera och undvik omedelbart misstänkta irriterande ämnen/allergener



Skydda huden. (Std. 42, pg. S120 Level II)

- ▶ Använd en steril, alkoholfri hudbarriär som är kompatibel med en antiseptisk lösning för att skydda utsatt hud när en häftämnesbaserad fästmetod används

Catheter-Associated Skin Impairment (CASI) Algorithm

En detaljerad och grundlig guide till att bedöma patienter för kateterrelaterade hudskador, samt skydda huden och öka patientens välbefinnande, finns i de fullständiga standarderna i Catheter-Associated Skin Impairment (CASI) Algorithm. (*bilaga C, sida S201*)

Först på marknaden. Den enda i sitt slag.

3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm är den första och den enda terpolymerbaserade, alkoholfria barriärfilmen* som förebygger hudskador.



Unik formulering. Kraftfull effekt.



Effektiv

- ▶ Vattentät barriär
- ▶ Låter huden andas
- ▶ Snabbtorkande³



Skonsam

- ▶ Alkoholfri⁴
- ▶ Svider inte⁴



Uppfyller standarden¹

- ▶ Kemiskt kompatibel med klorhexidylglukonat (CHG)⁵
- ▶ Sterila applikatorpinnar



Kliniska bevis

- ▶ Den enda barriärfilmen som stöds av data specifika för venkatetrar⁶⁻⁸
- ▶ 80+ exempel på kliniska bevis för förmågan att skydda huden mot lim och kroppsvätskor



Unik, peel open-förpackning

Förpackningen är enkel att öppna för aseptisk administrering.

*Av ledande konkurrenter på marknaden, baserat på offentliggjord information om ingredienser.

Så här fungerar 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm.


Cavilon No Sting barriärfilm bildar en andningsbar transparent skyddande film mellan huden och häftämnet på förbandet, enheten eller tejen. När den självhäftande produkten byts avlägsnas Cavilon No Sting barriärfilm istället för hudcellerna.⁹ Den skyddar även huden mot fukt, friktion och skjuvning.

Skyddar mot självhäftande produkter

Utan 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm

Kirurgisk tejp
eller sårförband

Hudceller
följer med

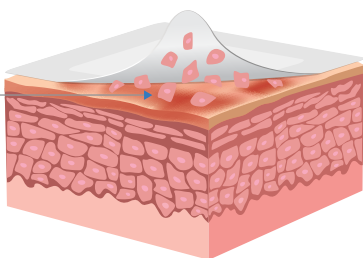


Med 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm

Kirurgisk tejp
eller sårförband

3M™ Cavilon™
No Sting
barriärfilm

3M™ Cavilon™ No Sting
barriärfilm kan avlägsnas
utan att hudceller följer med

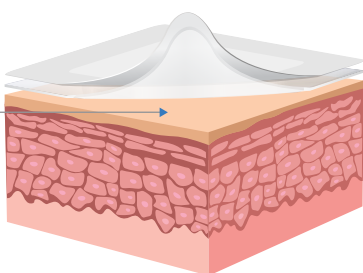


Skydd mot fukt, friktion och skjuvning

Utan 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm

Fukt, friktion
och skjuvning


Skadad hud

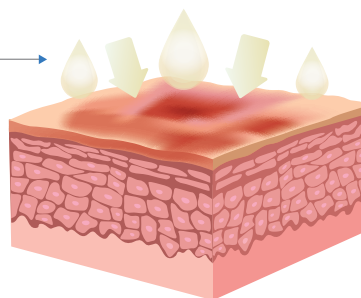

Med 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm


Fukt, friktion
och skjuvning

3M™ Cavilon™
No Sting
barriärfilm

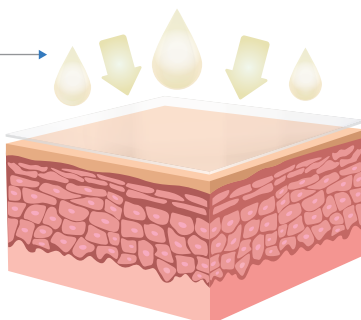

Applicera 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm.


- ▶ Applicera antiseptiskt medel och låt torka helt
- ▶ För in katetern
- ▶ Applicera ett jämt lager av Cavilon No Sting barriärfilm på området som kommer att täckas av det självhäftande förbandet/enheten. Om du använder 3M™ Tegaderm™ CHG IV förband med klorhexidylglukonatdyna, applicera inte filmen på huden där CHG-geldynan sitter
- ▶ Låt Cavilon No Sting barriärfilm torka helt (cirka 30 sekunder)
- ▶ Applicera förbandet

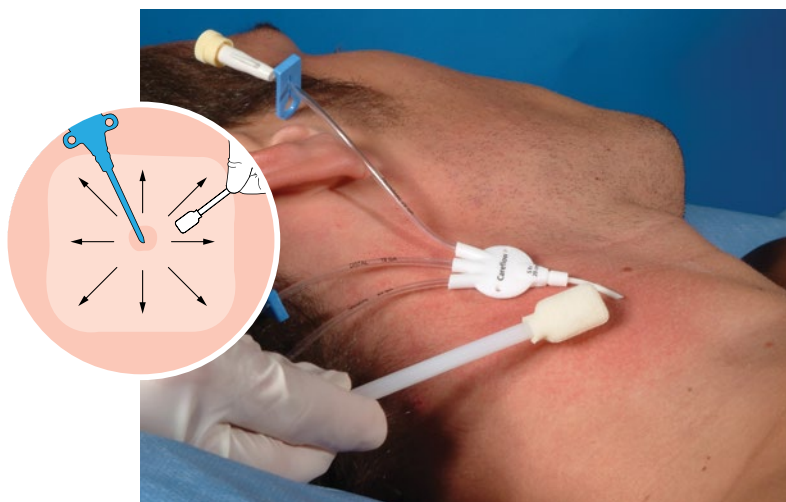


Klinisk prestanda för 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm

Det finns 80+ exempel på kliniska bevis för Cavilon No Sting barriärfilm, inklusive studier som fokuserar på data specifika för venkatetrar.

I en studie med patienter med perifert införda centrala venkatetrar (PICC):⁶

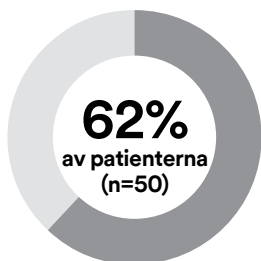

upplevde hudkomplikationer med förband av tejp och gasbinda

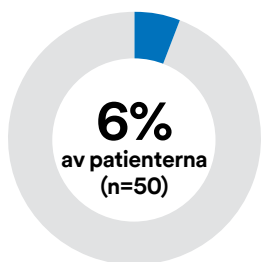


upplevde hudkomplikationer när Cavilon No Sting barriär användes innan förband av tejp och gasbinda applicerades


Sammanfattning

Hudbarriärer kan hjälpa till att minska hudrelaterade komplikationer hos patienter med långvariga PICC-katetrar. 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm visade sig ge betydande hudskydd när den används före förband av tejp och gasbinda.

I en studie med intensivvårds-patienter med centrala venkatetrar:⁷

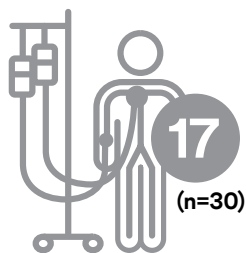

patienter upplevde att deras förband rubbades helt när ett vanligt filmförband och ingen barriärfilm användes

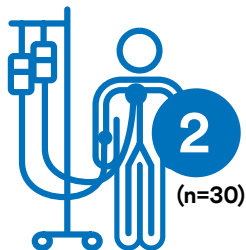


patienter upplevde att deras förband rubbades helt när Cavilon No Sting barriärfilm användes med CHG-förband


Sammanfattning

Den hudskyddande polymeren i 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm visade sig bidra till färre rubbningar av förband och färre hudintegritetsproblem utan att påverka den kliniska effektiviteten hos ett CHG-förband.

I en studie med intensivvårds-patienter med centrala venkatetrar som fick förband med gasbinda och tejp:⁸

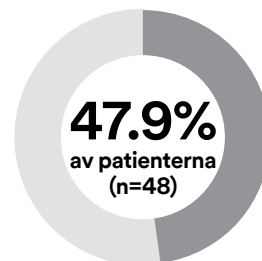

i kontrollgruppen upplevde en hudspricka

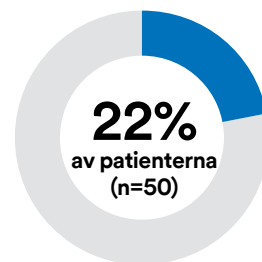

upplevde en hudspricka när Cavilon No Sting barriärfilm användes

Sammanfattning

En hudbarriär kan bidra till att bevara hudens integritet och minska förekomsten av hudsprickor. I studien noterades att hudskyddet som 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm ger kan öka bekvämligheten och kvaliteten på vården för patienter med centrala venkatetrar.



Läs mer om de bevis som stöder användningen av Cavilon No Sting barriärfilm som en del av vården av venkatetrar. Besök [3M.se](https://www.3m.se) om du vill veta mer.



Använd 3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm som en del av vården av venkatetrar. Besök **3M.se** om du vill veta mer.

Beställningsinformation

3M™ Cavilon™ No Sting barriärfilm

Katalognr	Storlek	Utförande	Antal/ förpackning	Förpackningar/ kartong
3343N	1 ml	Applikator (steril öppning)	25	4
3345N	3 ml	Applikator	25	4



Läs mer om hur 3M™ Cavilon™-hudvårdslösningar kan förbättra patienters hudintegritet på **3M.se**

1. Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, et al. Infusion therapy standards of practice. *J Infus Nurs.* 2021;44(suppl 1): S1-S224.
2. Broadhurst D, Moureau N, Ullman AJ, The World Congress of Vascular Access (WoCOVA) Skin Impairment Management Panel. Management of Central Venous Access Device-Associated Skin Impairment. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* 2017 May/Jun; 44(3):211-220.
3. 3M-data på fil. EM-05-001563, EM-05-289804 (torktid)
4. Campbell K, Woodbury MG, Whittle H, Labate T, Hoskin A. A clinical evaluation of 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film. *Ostomy Wound Management.* 2000;46(1):24-30.
5. 3M-data på fil. EM-05-005732 och EM-05-002049.
6. George M, Ujwala P, Guduri, V, Smith G. Use of a barrier film (3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film) to reduce local skin complications around peripherally inserted central catheter lines: A randomised prospective controlled study. *WCET Journal.* 2016; 36(4):8-13.
7. Pivkina AI, Gusarov VG, Blot SI, Zhivotneva IV, Pasko NV, Zamyatin MN. Effect of an acrylic terpolymer barrier film beneath transparent catheter dressings on skin integrity, risk of dressing disruption, catheter colonisation and infection. *Intensive Crit Care Nurs.* 2018; 46: 17-23.
8. Chen Y-H, Hsieh H-L, Shih W-M. Applying skin barrier film for skin tear management in patients with central venous catheterization. *Adv Skin Wound Care.* 2020; 33(11): 582-586.
9. 3M-data på fil 2013; EM-05-202211.



3M Svenska AB
Medical Solutions Division
Herrjärva torg 4
170 67 Solna

Tel: 08-92 21 00
www.3M.se

OBS! Specifika anvisningar, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsdatablad finns för dessa produkter och behandlingar. Konsultera läkare och läs produktens bruksanvisning före användning.

© 2021 3M. Med ensamrätt. 3M och andra varumärken som visas är varumärken och/eller registrerade varumärken. Obehörig användning är otillåten. 3M-varumärken används på licens i Kanada. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 70-2011-5544-0